



Tjekliste til personligt indhold

De følgende Grid sider skal ses som en inspiration til at personliggøre/ individualisere, når en ny borger skal bruge Voco Chat. Dette gøres optimalt i samarbejde med brugeren.

- **Jeg vil gerne fortælle noget → om mig**
Personlige informationer, fx navn, fødselsdagsdato og ting brugeren kan lide. På side 2 er der tomme celler med plads til andet brugeren gerne vil kunne fortælle om sig selv
- **Jeg vil gerne fortælle noget → ting jeg kan lide**
Ting brugeren kan lide, tv-programmer sport og/eller andre interesser, så brugeren har mulighed for at fortælle og blive en interessant samtalepartner
- **Jeg vil gerne fortælle noget → ting jeg ikke kan lide**
Ting brugeren ikke kan lide fx høje lyde, tv-programmer, nye situationer eller andet
- **Jeg vil gerne → mine ting**
Ting brugeren kan tænkes at spørge efter eller bruger ofte
- **Mennesker**
Her kan tilføjes til siderne "Min familie", "Mine venner", "Personer", "Mine Hjælpere", "Fagfolk", og hvad der ellers kan være relevant af personlige forhold
- **Mit værktøj → mit helbred**
Brugerens helbredsoplysninger, fx allergier og medicin eller andet relevant information
- **Mit værktøj → min ASK**
Brugerens måder at kommunikere på, samt relevante partnerstrategier i samspillet
- **Mit værktøj → falder til ro**
Konkrete strategier brugeren anvender til at falde til ro.
- **Mit værktøj → taler med mig selv**
Ting brugeren ofte siger til sig selv. Slet de udtryk der ikke er relevante eller ikke foretrækkes af brugeren.

- [Mine sætninger](#)
Sætninger der bruges ofte, særlige udtryk brugt sammen med kammerater eller andre
- [Jeg vil gerne → se noget → tv – film – tegnefilm](#)
Foretrukne tegnefilm, samt andet relevant ordforråd til disse
- [Flere ord → mere → musik → min musik](#)
Favorit sange, artister mm.
- [Flere ord → mere → tv og film](#)
Relevante ordforråd på den første side og når behovet for at udvide ordforrådet opstår kan der trykkes på "Mere"
- [Jeg vil gerne → lave noget → mere](#)
Her er der celler som på forhånd er linket til at gå til en tom skabelon side, hvor der kan laves nye aktiviteter
- [Jeg vil gerne → spille noget](#)
Tilføj relevant ordforråd til konkrete spil på cellerne "Spil 1-5". Disse fører til tomme skabelon sider
- [Jeg vil gerne fortælle noget → en joke → mere](#)
Tilføj jokes som brugeren synes er sjove. Det kan være vigtigt at skifte jokes ud løbende, så brugeren og andre bliver ved med at syntes, at det er sjovt. Vigtigt: den første del af joken skal på én celle, og svaret skal på en anden, så pointen ikke afsløres for samtalepartneren med det samme. De tomme felter er farvet 2 og 2 således at de passer sammen
- [Jeg vil gerne fortælle noget → nyt om mig](#)
Det som er sket for brugeren for nyligt. Husk at gamle nyheder ikke altid er spændende
- [Der er noget galt → mere](#)
Ting der kan tænkes at være i vejen eller noget andet brugeren har brug for hjælp til
- [Jeg vil gerne → have personlig pleje → mere](#)
Andre specifikke personlige ønsker / behov vedrørende personlig pleje/hygijne
- [Flere ord → krop → mere](#)
Tilføj andre relevante kropsdele eller ordforråd som er specifik relevant for brugeren, det kan være at brugeren er særlig sensitiv omkring visse kropsdele

- **Flere ord → drikke → mere**
Tilføj brugerens yndlings drikke
- **Flere ord → mad → mere**
Tilføj yndlingsmad eller menu-forslag og evt. ordforråd der gør det muligt for brugeren at fortælle hvordan det skal tilberedes. Dette kan også skrives ind under "Min kost" hvis det foretrækkes
- **Flere ord → sensorisk → mere**
Tilføj foretrukket sensoriske stimuli eller sensorisk stimuli brugeren ikke er vild med
- **Flere ord → mere → mere**
Her er der plads til at lave nye kategorier. Cellerne er på forhånd linket til undersider, hvor ordforråd i den nye kategori kan tilføjes
- **Snakke → flere hilsemåder**
Her er plads til andre ord brugeren foretrækker at bruge som hilsen
- **Snakke → tale mere**
Her er plads til at tilføje andre udtryk brugeren foretrækker
- **Snakke → flere farvelmåder**
Her er plads til at tilføje andre udtryk brugeren foretrækker til at sige farvel
- **Steder → bygninger → skole → mine timer**
Her er der plads til at tilføje de fag der er og bliver aktuelle for brugeren. *OBS denne sti er kun relevant for dig der bruger VOCO Chat udgaven tilpasset børn.*
- **Steder → tur → min rejse**
Her er plads til at tilføje ordforråd der gør det muligt for brugeren enten at fortælle om en specifik tur eller også kan der indsættes ord som er relevant for den specifikke tur
- **Steder → indenfor → mere**
Tilføj flere indendørs steder / rum der er relevante for brugeren
- **Steder → butik → indkøbsliste**
Tilføj de ting der er relevante at handle ind. Husk at skifte symboler og eller tekst ud fra gang til gang, så der ikke bliver handlet noget forkert
- **Flere ord → tid ord → mere → særlige dage**
Religiøse mærkedage hvis dette er vigtigt for brugeren og andre vigtige begivenheder i brugerens liv