

MEMOplanner Large 2

Håndbog

Art nr 462880

Programversion 3.7 eller nyere

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion	4
1.1 Erklæret formål	4
1.2 Terminologi	4
1.3 myAbilia	5
1.4 Support	5
1.5 Vigtig information	6
2. Brugerkonto og licens	7
2.1 Brugerkonto til myAbilia	7
2.2 MEMOplanner-licens	7
2.3 Opret en myAbilia-brugerkonto (via MEMOplanner)	7
2.4 Opret en myAbilia-brugerkonto (via myAbilia)	7
2.5 Fjern en brugerkonto (myAbilia)	8
3. Produktoversigt	9
4. Opstart af MEMOplanner	10
4.1 Hvad er der i kassen?	10
4.2 Tilslut strømadapteren	10
4.3 Start enheden	10
4.4 Opsætning af enheden	10
4.5 Log ind / Opret brugerkonto	11
4.6 Tilføj startersættet	11
5. Kom i gang med MEMOplanner	12
5.1 Beslut hvor MEMOplanner skal placeres	12
5.2 Afgør, om du har brug for ekstra højttalere	12
5.3 Forberedelse af fjernhjælp (myAbilia)	12
5.4 Tilpas startersættet (myAbilia)	13
5.5 Foretag indstillinger for MEMOplanner	13
5.6 Bestem, om indstillingsmenuen skal være tilgængelig	13
5.7 Påmindelser på din telefon	13
6. Håndtering af enheden	14
6.1 Tænd og sluk for enheden	14
6.2 Strømforsyning	14
6.3 Lyd	14
6.4 Skærm-timeout	15
6.5 Pauseskærm	16
6.6 Skærmens lysstyrke	16
6.7 Internetforbindelse	16
6.8 Bluetooth	16
6.9 Dato og tid	16
6.10 Tastatur	16
6.11 Automatisk nedbrudsrapport	17
6.12 Skype	17
6.13 Tilføj billeder til MEMOplanner	17
7. Hurtigindstillinger	18
8. Kamera	18

9. Opdater	19
9.1 Opdater MEMOplanner	19
10. Gendannelse af MEMOplanner Large	20
10.1 Sempel gendannelse	20
10.2 Fuldstændig gendannelse	20
11. Installation af MEMOplanner Go på telefonen	21
12 Rengøring.....	21
13. Opbevaring og bortskaffelse.....	21
13.1 Opbevaring.....	21
13.2 Bortskaffelse.....	21
14. Produktspecifikationer	22
14.1 Dele leveret sammen med MEMOplanner Large	22
14.2 Tekniske data KA248	22
Kontaktoplysninger	23

1. Introduktion

MEMOplanner er en digital kalender, der giver kognitiv support i det daglige liv.

MEMOplanner er udviklet til mennesker, der har brug for specifik støtte med tid, planlægning og grafisk overskuelighed.

MEMOplanner giver dig:

- Let forståelig oversigt over dag, uge og måned
- Hjælp med at holde styr på dagens tider
- Tid præsenteret på en enkel måde
- Tydelige og personlige påmindelser

MEMOplanner kan i vid udstrækning tilpasses brugerens behov og evner. Du kan bruge dine egne billeder eller billederne, der er inkluderet i MEMOplanner. Du kan vælge, hvilke funktioner brugeren har adgang til.

Via *myAbilia*-webtjenesten kan støttepersoner yde hjælp til MEMOplanner.

For at få øget støtte kan du installere MEMOplanner på en Android-baseret smartphone og på den måde modtage påmindelser, selv når du ikke har MEMOplanner i nærheden. Se instruktionerne i kapitel 11. *Installation af MEMOplanner Go* på telefonen.

Denne håndbog beskriver, hvordan du kommer i gang med at bruge **MEMOplanner Large**, og hvordan du styrer enheden.

MEMOplanner-manualen beskriver detaljeret, hvordan applikationen fungerer. Yderligere dokumentation kan downloades fra <https://www.abilia.com/intl/manuals>.

1.1 Erklæret formål

MEMOplanner Large er en digital kalender til mennesker, der har brug for udvidet kognitiv support med hensyn til tid, struktur, planlægning og grafisk klarhed.

MEMOplanner Large er beregnet til brug i indendørs miljøer som hjemme, i skolen eller på arbejdspladsen.

1.2 Terminologi

Denne håndbog bruger følgende terminologi.

Enhed	Den hardware, som MEMOplanner er installeret på.
Hjem-knap	En softkey (knap), ofte med et symbol af et hus  , der bruges til at komme til startskærmen.
Startskærm	Enhedens startmenu. Du kommer altid til startskærmen, når du trykker på Hjem-knappen. MEMOplanner-applikationen er altid startskærmen på MEMOplanner Large.
Installationsfiler	De filer, der udgør MEMOplanner-installationen.
myAbilia	Webtjenesten til MEMOplanner og andre produkter fra Abilia. Der er forskellige typer konti: til brugere, støttepersoner og kontoadministratorer.
Indstillingsmenu	En liste over de indstillinger, der kan foretages via <i>Indstillinger</i> -ikonet i Menu-funktionen. Indstillingsmenuen kan skjules. Betjeningsvejledning til indstillingsfunktionerne er beskrevet i f.eks. Indstillinger Kalender Generelt .
Startersæt	Billedarkiv, basale aktiviteter, basale timere og checklister, der kan tilføjes ved dit første login.
Bruger	Den person, der har modtaget MEMOplanner som hjælpemiddel.

1.3 myAbilia

MyAbilia er en webtjeneste til MEMOplanner og andre produkter fra Abilia.

Ved at bruge myAbilia kan du:

- Administrere kalender, tjeklister og billedarkiv fra computeren og/eller tablet, etc.
- Vælg støttepersoner, som vil være i stand til at tilføje eller redigere for eksempel påmindelser via internettet.

Du skal have en brugerkonto på myAbilia for at kunne bruge MEMOplanner. Det er dog ikke påkrævet, at du skal bruge den faktiske webtjeneste eller have din enhed tilsluttet internettet (undtagen under login).

1.3.1 Roller i myAbilia

Du kan have forskellige typer konti i myAbilia afhængigt af formålet. **Brugeren**, den person, der bruger hjælpemidlet, er altid i centrum. Brugeren kan have behov for hjælp fra en støtteperson til at bruge sin kalender etc. Afhængigt af handlingen kan det være nødvendigt med en **kontoadministrator**. Dette er en person, der administrerer kontoen og licenser uden at have adgang til brugerens personlige oplysninger.

Afhængig af din rolle, vil du modtage forskellige login-oplysninger til myAbilia, og du vil være i stand til at udføre forskellige opgaver på webtjenesten.

Rolle	Beskrivelse	Funktioner
Bruger	Personen, der bruger hjælpemidlet. Behøver ikke at være aktiv på webtjenesten, men skal have en konto, der er tilsluttet hjælpemidlet.	Kalender, Basale aktiviteter, Basale timere, Billedarkiv, Tjekliste, Profil, Licenser, Støttepersoner, Kontoadministratorer
Støtteperson	En eller flere personer, der hjælper brugeren med hjælpemidlet.	Samme som ovenfor
Administrator	Den person, der opretter og/eller administrerer brugerkontoen og licenser. Kan også være en støtteperson.	Brugerkonti: Profil, Støttepersoner, Kontoadministratorer

1.3.2 Tilpas myAbilia

Under **Min profil|Moduler** i myAbilia er du i stand til at vælge hvilke moduler, der skal vises i myAbilia. Hvis du bruger den samme myAbilia-konto til forskellige enheder (f.eks. både MEMOplanner og Handi), kan du vælge, hvilken kalender der skal vises.

1.3.3 Del myAbilia-kalender

Ved at oprette et abonnentlink (ICS) til myAbilia-kalenderen, kan den vises i andre kalenderprogrammer, såsom Outlook og Google. Instruktioner hertil er tilgængelige på myAbilia.

1.4 Support

Aabentoft kan yde support til MEMOplanner-applikationen og til indstillingerne i MEMOplanner Large og myAbilia.

1.5 Vigtig information

1.5.1 Sikkerhedsdefinitioner



ADVARSEL: Risiko for personskade eller dødsfald, hvis instruktionerne ikke følges.



FORSIGTIGHED: Risiko for beskadigelse af produktet, hvis instruktionerne ikke følges.

BEMÆRK: Oplysninger, der er nødvendige i en given situation.

TIP: Yderligere oplysninger, der kan forbedre brugen af produktet.

1.5.2 Sikkerhedsinstruktioner til brug



ADVARSEL: Læs nedenstående advarsel, før du bruger produktet.

- Før du bruger produktet, skal du læse og forstå indholdet af denne brugervejledning
- Brug ikke produktet som den eneste støtte til medicin, medicinsk behandling eller andre vigtige aktiviteter
- Brug kun den originale batterioplader, til at oplade batteriet.
- Brug ikke skarpe genstande på produktet.

1.5.3 Alvorlige hændelser

Hvis der indtræffer en alvorlig hændelse i forbindelse med produktet, skal dette rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i dit land. En hændelse anses for alvorlig, hvis den direkte eller indirekte har medført eller kunne have medført en patients, brugers eller en anden persons død, midlertidig eller permanent alvorlig forværring af en patients, brugers eller en anden persons helbredstilstand eller en alvorlig trussel mod folkesundheden.

1.5.4 Overensstemmelse med krav til medicinsk udstyr

MEMOplanner Large markedsføres som et teknisk hjælpemiddel til personer med handicap og er i overensstemmelse med alle nødvendige krav, bestemmelser og direktiver vedrørende medicinsk udstyr.

1.5.5 Produktansvar

Produktet er udviklet og risikovurderet i henhold til ISO 14971. Manualen og de tekniske specifikationer er lavet i henhold til sikkerhedsvurderingerne i risikoanalysen. Tag altid højde for sikkerheden ved anvendelse af produktet. Abilia AB er ikke ansvarlig for konsekvenser som følge af forkert brug eller installation af produktet. Enhver form for skade eller manipulation med produktet bortfalder garantien og fraskriver sig producentens ansvar. Produktets estimerede levetid gælder, når det anvendes i overensstemmelse med dets tilsigtede brugs- og vedligeholdelsesinstruktioner.

2. Brugerkonto og licens

Du skal have en brugerkonto på myAbilia og en gyldig licens for at kunne bruge MEMOplanner.

2.1 Brugerkonto til myAbilia

Hvis du vil oprette din egen brugerkonto, der er knyttet til en personlig e-mailadresse, kan den gøres direkte på myAbilia.com.

Brugerkontoen har følgende funktion:

- MyAbilia gemmer alle brugerdata (aktiviteter, basale aktiviteter, basale timere, billedarkiv, tjeklister)
- Log af enheden -> alle data forsvinder fra denne enhed
- Log ind på en ekstra enhed (f.eks. din egen smartphone) -> alle data synkroniseres til denne enhed

2.2 MEMOplanner-licens

Der er præinstalleret en licens på MEMOplanner Large. Licensen og dens udløbsdato er også angivet på kuponen, der leveres sammen med produktet.

Når du logger på MEMOplanner Large, bliver licensen knyttet til brugerkontoen.

Licensen giver 3 års gratis opdateringer og gratis adgang til myAbilia. Når licensen er udløbet, vil MEMOplanner være "offline", dvs. den synkroniseres ikke med myAbilia.

En advarsel om, at licensen er ved at udløbe, vises i MEMOplanner i god tid i forvejen (3 måneder, 3 uger og 3 dage). Støttepersoner og administratorer vil modtage en e-mail-påmindelse om, at licensen er ved at udløbe og skal forlænges.

Forlængelse af licensen kan bestilles fra Abilia. Ved bestilling skal du indtaste licensnøglen og e-mailadressen, som en ny voucher skal sendes til. Når licensen udvides af Abilia, og enheden har en internetforbindelse, opdateres licensperioden i MEMOplanner.

Se slutdatoen på licensen i **Indstillinger|System|Om MEMOplanner**.

2.3 Opret en myAbilia-brugerkonto (via MEMOplanner)

Følg disse trin for at oprette en myAbilia-brugerkonto:

1. Gå til login-siden, enten ved at starte en MEMOplanner, der ikke er i brug, eller ved at logge ud af en eksisterende MEMOplanner-brugere. Læs flere oplysninger i Brugermanualen.
2. Klik på *Opret konto*.
3. Indtast *Brugernavn* eller *e-mail-adresse* og *Adgangskode*. Bekræft adgangskoden.
BEMÆRK: Adgangskoden skal bestå af mindst 8 tegn.
4. Marker, at du har læst og accepterer Abilias Brugervilkår og Persondatapolitik.
5. Klik på *Opret konto*.

Kontoen kan bruges med det samme.

2.4 Opret en myAbilia-brugerkonto (via myAbilia)

2.4.1 Fritstående konto med e-mail-adresse

Dette er proceduren for oprettelse af en brugerkonto, der ikke er tilknyttet en kontoadministrator:

1. Gå til www.myabilia.com og klik på *Opret konto*.
2. Indtast navn, en aktiv e-mail-adresse og vælg "Bruger". Klik på *Opret konto*.

Så sender myAbilia en velkomstmil til den angivne e-mail-adresse. Vælg en adgangskode ved at klikke på linket i velkomstmilten.

2.4.2 Konto tilknyttet en kontoadministrator med et brugernavn

Dette er proceduren, hvis du er kontoadministrator og ønsker at oprette en brugerkonto:


1. Log ind som kontoadministrator på www.myabilia.com.
2. Gå til *Mine brugere* i menuen og vælg *Tilføj bruger*.
3. Indtast navn og vælg "Konto med brugernavn". Indtast brugernavn og adgangskode. Kryds feltet af, inklusiv hvis du skal være en støttepersion og opnå adgang til alle brugerens data.
4. Klik på *Opret*. Færdig!

2.5 Fjern en brugerkonto (myAbilia)

For at fjerne en brugerkonto, skal du kontakte Abilias support.

3. Produktoversigt

Forside

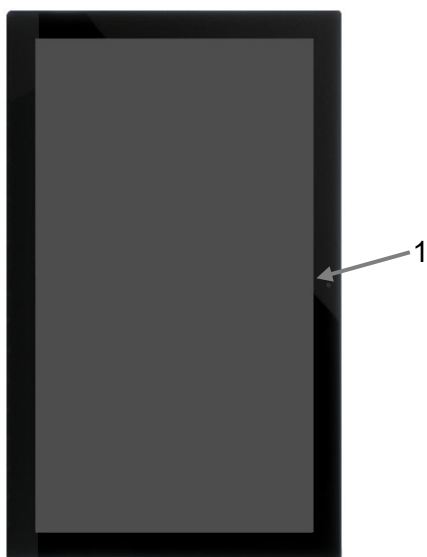


1 Kamera

Top



- 2. USB-port
- 3. Port til ethernet
- 4. Højttaler

Bund

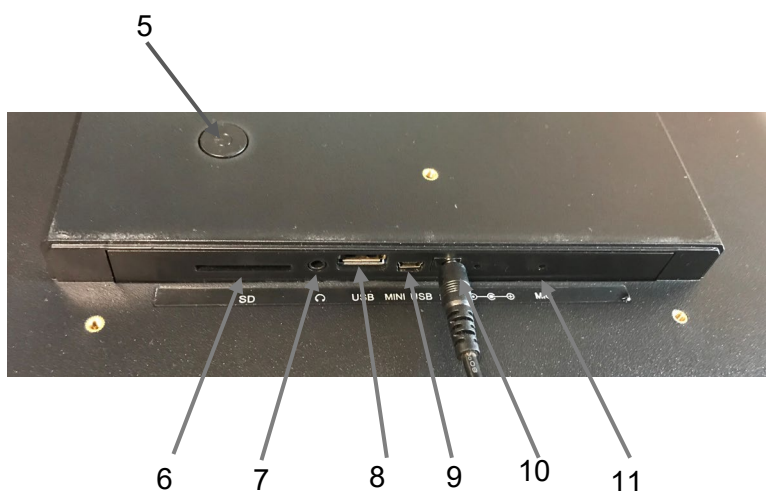

- 5. Tænd-/slukknop
- 6. Plads til SD-kort
- 7. Højttaler-/hovedtelefonstik
- 8. USB-port
- 9. Mini USB-port
- 10. Strømadapterstik
- 11. Mikrofon

Henvisningerne i denne vejledning har formatet "(X)", hvor X henviser til et punkt på listen ovenfor.

4. Opstart af MEMOplanner

4.1 Hvad er der i kassen?

MEMOplanner leveres med følgende dele:

1. MEMOplanner Large
2. Strømadapter
3. Vægbeslag
4. Abilia-klud
5. Håndbog til MEMOplanner Large (dette dokument)
6. Manual til MEMOplanner
7. Hurtigguide til MEMOplanner
8. Licensbevis med licensnøgle
9. Introduktion til MEMOplanner

4.2 Tilslut strømadapteren

MEMOplanner Large skal altid være tilsluttet strømadapteren for at fungere. MEMOplanner Large vil ikke give alarmer til aktiviteter, hvis den ikke er tilsluttet strøm.

1. Tilslut strømadapteren til strømadapterstikket (10) på MEMOplanner.
2. Sæt strømkablet i strømadapteren, og sæt den i en stikkontakt.

4.3 Start enheden

1. Start **MEMOplanner Large** ved at trykke på *tænd-/slukknappen* (5), indtil skærmen blinker.
2. Vent et øjeblik, mens **MEMOplanner Large** starter. Efter et stykke tid vises en "Velkomst"-skærm sammen med den første side i en opsætningsguide.

MEMOplanner er præinstalleret på enheden ved levering, men du skal logge ind med din myAbilia-konto, og indstillingerne skal tilpasses.

4.4 Opsætning af enheden

Der starter en opsætningsguide, hvor du kan tilpasse enhedens indstillinger.

4.4.1 Vælg sprog

I det første opsætningstrin vælger du, hvilket sprog du vil bruge i MEMOplanner. Du kan vælge mellem engelsk, dansk, svensk og norsk (efter en opdatering er tilføjet hollandsk). Vælg sprog, og klik derefter på *Næste* for at fortsætte.

4.4.2 Opret forbindelse til Internettet

Internetforbindelse er påkrævet for at logge ind. Derefter kræver enheden ikke internetforbindelse, forudsat at fjernhjælp ikke er nødvendigt.

Vælg hvilket trådløst netværk (Wi-Fi), som enheden skal sluttes til. (Hvis der ikke er noget Wi-Fi, kan du lave et midlertidigt hotspot ved hjælp af din mobiltelefon.)

MEMOplanner Large kan også tilsluttes til internettet ved at koble et netværkskabel til Ethernet-porten (3).

4.4.3 Opdateringer (obligatorisk)

Det næste trin er at kontrollere, om MEMOplanner skal opdateres. Hvis du allerede har den rigtige version, skal du klikke på *Næste* for at fortsætte. Hvis MEMOplanner skal opdateres, skal du følge instruktionerne på skærmen.

4.4.4 Indstil dato og tid

Dato og tid indstilles normalt automatisk via netværket, men om nødvendigt kan de indstilles manuelt her. Dato og tid kan også ændres på et senere tidspunkt, se 6.9 *Dato og tid*.

4.4.5 Vælg den stemme, der skal installeres talesyntesen

Vælg, om der skal installeres en eller flere stemmer til talesyntesen. Stemmene kan downloades på et senere tidspunkt, se 6.3.3 *Talestøtte*.

4.5 Log ind / Opret brugerkonto

Indtast brugernavnet og adgangskoden til brugerens myAbilia-konto, og klik på *Log ind*.

Hvis der opstår en fejl med kontoen, licensen eller internetforbindelsen, vises en fejlmeddelelse.

Du kan også oprette en ny brugerkonto her.

4.6 Tilføj startersættet

Når brugerkontoen er helt ny, har man muligheden for at tilføje et startersæt, der indeholder et billedarkiv, basale aktiviteter, basale timere og tjeklister.

4.6.1 Billedarkiv

Følgende billeder er inkluderet i startersættet:

- **Handi-billeder.** Ca. 160 billeder, der oprindeligt blev produceret af ressourceenheden AIR ved Psykiatrisk Afdeling på Sahlgrenska University Hospital i Göteborg. Billedbasen blev i 2014 suppleret af illustratøren Andreas Högberg.
- **Rolltalk-billeder.** Ca. 60 billeder fra billedbasen, der hører til Rolltalk-kommunikationshjælpen.
- **Smiley'er.** 20 smiley-billeder, der er udviklet specielt til Handi.
- **Basale billeder.** 84 Piktogrammer og PCS-billeder.

Via *myAbilia* kan du tilpasse billedarkivet.

4.6.2 Basale aktiviteter

"Basal aktivitet" henviser til en foruddefineret aktivitet, der bruges, når du tilføjer nye aktiviteter. I den basale aktivitet kan du tilføje et navn, billede, tjekliste, påmindelse osv. Brug af basale aktiviteter gør det lettere at tilføje nye aktiviteter.

Startersættet indeholder en mindre mængde basale aktiviteter som eksempler. De basale aktiviteter kan ændres via *myAbilia* på et senere tidspunkt.

4.6.3 Basale timere

"Basal timer" henviser til en foruddefineret timer, der har et billede og/eller navn og et forudindstillet tidspunkt. Basale timere vises på listen med navn og et muligt symbol. Brug af basale timere gør det lettere at starte timere.

Startersættet indeholder en mindre mængde basale timere som eksempler. De basale timere kan ændres i MEMOplanners indstillinger eller via *myAbilia* på et senere tidspunkt.

4.6.4 Tjeklister

Du kan knytte en tjekliste til en aktivitet. Dette kan være en god ide, hvis du har behov for at opdele en aktivitet i flere perioder eller opgaver, f.eks. morgenrutiner eller huskelister. Tjeklisten kan oprettes direkte i aktiviteten, men du kan også vælge fra udfyldte tjeklister. Udfyldte tjeklister kan ændres via *myAbilia*.

Startersættet indeholder en mindre mængde tjeklister som eksempler. Tjeklisterne kan ændres via *myAbilia* på et senere tidspunkt.

5. Kom i gang med MEMOplanner

Herunder er nogle eksempler på, hvad brugeren skal holde for øje for at komme i gang med MEMOplanner:

5.1 Beslut hvor MEMOplanner skal placeres

Placeringen af enheden kan være en afgørende faktor for, at brugeren kan opnå størst fordel af MEMOplanner.

- **MEMOplanner skal have en fast placering og bør sjældent flyttes.** Brug det medfølgende vægbeslag. Se *Montering af vægbeslaget*
- **MEMOplanner skal have en fast placering, men skal være let at flytte.** Brug det tilhørende *bordstativ*, og anbring MEMOplanner et passende sted.

5.1.1 Montering af vægbeslaget




ADVARSEL: Monter MEMOplanner korrekt. Forkert montering kan beskadige enheden eller forårsage personskade.


MEMOplanner kan monteres på en væg med det medfølgende vægbeslag. Monter vægbeslaget med en skrue til enhedens bund. Det anbefales, at du monterer og bruger MEMOplanner med stående skærm.

Dette er fremgangsmåden til montering af vægbeslaget.

1. Brug et vaterpas for at sikre, at MEMOplanner hænger lige. Skru vægbeslaget fast.

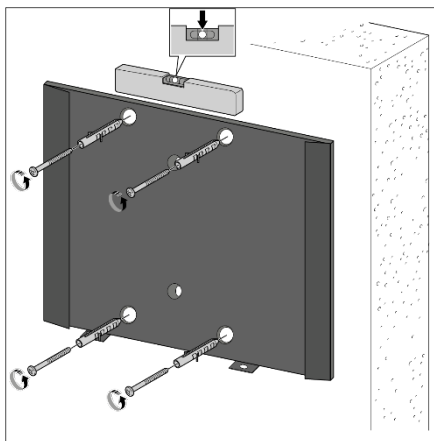

2. Fastgør MEMOplanner til vægbeslaget ovenfra.

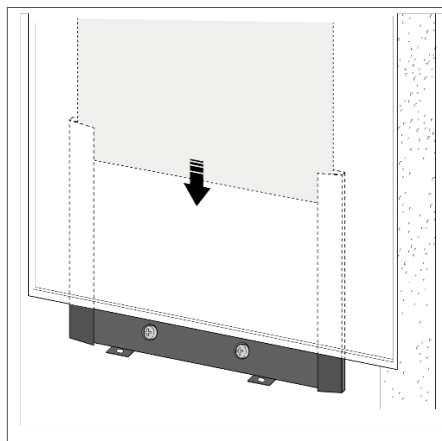

5.2 Afgør, om du har brug for ekstra højttalere

Det er meget vigtigt, at MEMOplanner-alarmen altid kan høres korrekt. Afhængig af placeringen af enheden osv. kan der være behov for eksterne højttalere, se 6.3.5 *Eksterne højttalere*.

5.3 Forberedelse af fjernhjælp (myAbilia)

Fjernhjælp betyder, at en støtteperson kan hjælpe dig med at bruge MEMOplanner eksternt, f.eks. ved tilføje aktiviteter eller tilpasse billedarkivet. Støttepersonerne kan derefter til enhver tid logge på myAbilia fra deres egen smartphone, tablet eller computer og foretage de ønskede ændringer.

For at MEMOplanner skal få adgang til ændringerne, skal enheden være tilsluttet internettet.

Procedure for tilføjelse af *støttepersoner* til brugerkontoen:

1. Åbn en webbrowser på enhver smartphone, tablet eller computer. Log ind på din brugerkonto på www.myabilia.com.
2. Klik på fanen med tandhjul og vælg funktionen *Støttepersoner*.

3. Klik på *Inviter støtteperson*.
4. Indtast støttepersonens e-mail-adresse. Klik på *Inviter*.
5. Så sender myAbilia en velkomstmil til støttepersonen.

Læs mere om myAbilia i kapitel 1.2 myAbilia.

5.4 Tilpas startersættet (myAbilia)

I forbindelse med opstart af MEMOplanner kan du vælge at tilføje startersættet, se 4.6 *Tilføj startersættet*.

Meget af indholdet i startersættet er blot et eksempel og kan være nødvendigt at tilpasse til brugeren. Dette gøres via myAbilia.

Procedure for tilpasning af startersættet:

1. Åbn en webbrowser på enhver smartphone, tablet eller computer. Log ind på din brugerkonto på www.myabilia.com.
2. Klik på ikonet *Billedarkiv* for at tilpasse billedarkivet.
3. Klik på *Kalender*-ikonet for at tilpasse de basale aktiviteter og basale timere. Du kan vælge, hvilken funktion du vil redigere i menuen.
4. Klik på *Tjekliste*-ikonet for at tilpasse de tjeklister, der skal forbindes til aktiviteterne i MEMOplanner.

5.5 Foretag indstillinger for MEMOplanner

MEMOplanner kan i høj grad tilpasses efter brugerens behov og evner. Alle indstillinger foretages via indstillingsmenuen. Du ankommer til indstillingsmenuen ved at vælge *Menu* i knaprækken og derefter vælge ikonet *Indstillinger*.

Nedenfor er nogle eksempler på, hvad brugeren skal overveje, når MEMOplanner skal sættes op:

- Hvilken startside ønsker du (dag, uge, måned, menu, billedkalender)?
- Hvordan skal dagkalenderen se ud (tidslinje, liste)?
- Hvor meget af dagen skal vises i dagskalenderen?
- Skal brugeren være i stand til at slette eller redigere aktiviteter?
- Hvilken alarmlyd skal enheden have?
- Ønsker brugeren ugedagsfarver?
- Hvilke funktioner skal vises i menuen?

Manualen til MEMOplanner beskriver, hvordan du kan foretage de forskellige indstillinger.

5.6 Bestem, om indstillingsmenuen skal være tilgængelig

Nogle gange kan det være passende at hindre brugerens adgang til indstillingsmenuen. Du kan gøre dette på flere måder:

1. **Skjul ikonet *Indstillinger* i menuen.** (Gå til *Indstillinger|Menu* og fjern markeringen ved *Indstillinger*.) Nu kan indstillinger kun åbnes ved at trykke på kategorisymbolerne i dagskalenderen; venstre - højre - venstre. Hvis de mangler, skal du trykke på den tilsvarende overflade.
2. **Beskyt indstillingsmenuen med en kode.** (Gå til *Indstillinger|System|Kodebeskyttelse*, aktiver kodebeskyttelse og vælg en valgfri firecifret kode.)

5.7 Påmindelser på din telefon

Som et supplement til MEMOplanner Large er brugeren også i stand til at modtage påmindelser fra MEMOplanner på deres egen telefon.

Du har brug for iPhone eller en Android-baseret smartphone for at downloade appen *MEMOplanner Go*. Se kapitel 11. *Installation af MEMOplanner Go på telefonen*.

Ved at logge på den samme konto på telefonen kan den synkronisere kalender- og billedarkivet med MEMOplanner Large.

Appen er konfigureret med de samme indstillinger som MEMOplanner.

6. Håndtering af enheden

6.1 Tænd og sluk for enheden



FORSIGTIGHED: Brug ikke skarpe genstande på produktet.

Ved normal brug skal MEMOplanner Large altid være tændt.

MEMOplanner Large tændes og slukkes ved at trykke på *tænd-/slukknappen* (5). Det du gør, når du slukker, er at slukke for skærmen og lade enheden fortsætte i dvaletilstand.

Når enheden er i dvaletilstand, tændes den automatisk, hvis der lyder en alarm.

For at **slukke enheden helt**, skal du holde *tænd-/slukknappen* nede, indtil den alternative menu vises.



Hvis du trykker på *Slukknappen*, slukkes enheden helt. NB! I dette tilfælde afspiller **MEMOplanner** ingen alarmer.

For at genstarte **MEMOplanner** skal du trykke på *tænd-/slukknappen* igen, indtil skærmen blinker. Så genstarter enheden

6.2 Strømforsyning



FORSIGTIGHED: Brug kun den originale batterioplader, til at oplade batteriet.

MEMOplanner Large skal være sluttet til strøm hele tiden for at køre. MEMOplanner Large vil ikke give alarmer til aktiviteter, hvis den ikke er tilsluttet strøm.

1. Tilslut strømadapteren til stikket til strømadapteren (10) på MEMOplanner.
2. Tilslut strømkablet til strømadapteren, og tilslut det til en stikkontakt.




6.3 Lyd

6.3.1 Lydstyrke

Lydstyrken ændres via funktionen *Hurtigindstillinger*, se kapitel 7. *Hurtigindstillinger*.

6.3.2 Alarmindstillinger

Via **indstillinger|Kalender|Alarmindstillinger** kan du vælge en alarmlyd til forskellige typer aktiviteter, samt hvor længe alarmen skal afspille, inden man modtager talemeddelelser.

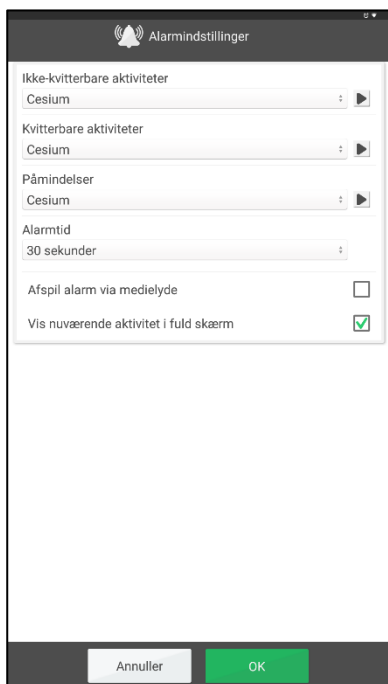

Du kan vælge alarmlyde fra enhedens indbyggede signaler til følgende typer aktiviteter:

- *Ikke-kvitterbare aktiviteter*
- *Kvitterbare aktiviteter*
- *Påmindelser*
- *Alarmtid.* (Signal, 15 sek, 30 sek, 1 min, 2 min, 5 min.) Alarmen afspilles i den valgte tidsperiode, medmindre du aktivt slår den fra.
- *Afspil alarm via medielyde.* Vælg dette alternativ, hvis du bruger eksterne højttalere tilsluttet med kabel. Alarmen afspilles derefter på både enheden og via højttalerne. Vælg ikke dette alternativ, hvis du bruger eksterne trådløse højttalere i nærheden af enheden, da de vil skabe et ekko.
- *Vis nuværende aktivitet i fuld skærm.* Hvis du har flere aktiviteter på samme tid, vises de som miniatybilleder i bunden.



Lyt til den alarmlyd, du har valgt.



Sluk for afspilningen.

6.3.3 Talestøtte

Indstillinger for talestøtte foretages via **Indstillinger|System|Talestøtte**. Her kan du også downloade stemmer til talesyntesen.

6.3.4 Kliklyd

Via *Hurtigindstillinger* kan du vælge, om du vil høre en kliklyd, når du trykker på knapper osv. Se kapitel 7. *Hurtigindstillinger*.

Kliklyde til tastaturet indstilles via Androids indstillinger, se 6.10 *Tastatur*.

6.3.5 Eksterne højttalere

Det er meget vigtigt, at MEMOplanner-alarmen altid kan høres korrekt. Afhængig af placeringen af enheden osv. kan der være behov for eksterne højttalere, se. Der er forskellige typer at vælge imellem:

6.3.5.1 Højttalere tilsluttet med kabel

Højttalere med kabel er tilsluttet via enhedens hovedtelefonstik (7). De kræver deres egen strømforsyning.

For at alarmen skal afspilles via højttalerne, kræves der en særlig indstilling. Gå til **Indstillinger|Kalender|Alarmindstillinger** og vælg "Afspil alarm gennem eksternt medie".

6.3.5.2 Trådløse højttalere (Bluetooth)

For at alarmen skal afspilles via højttalerne, kræves der en særlig indstilling. Gå til **Indstillinger|Kalender|Alarmindstillinger** og vælg "Afspil alarm gennem eksternt medie".

Se kapitel 6.8 *Bluetooth* for at finde ud af, hvordan du kan slutte en Bluetooth-højttaler til enheden.

6.4 Skærm-timeout

MEMOplanner Large er som standard indstillet til at skærmen altid er tændt. Vi anbefaler, at denne indstilling ikke ændres, da det er vanskeligt at få adgang til tænd-/slukknappen på bagsiden for at tænde for skærmen. Om nødvendigt kan denne indstilling ændres i Android-indstillingerne.

6.5 Pauseskærm

Du kan vælge, om du vil have en pauseskærm. Når pauseskærmen er valgt, vises tid og dato på en mørk baggrund efter 1, 5 eller 10 minutter. Tryk på skærmen for at afbryde pauseskærmen og vise den rigtige skærm. Pauseskærm vælges i **Indstillinger|Funktioner|Timeout|Aktiver pauseskærm**.

6.6 Skærmens lysstyrke

Via *Hurtigindstillinger* kan du justere skærmens lysstyrke. Lysstyrken dæmpes automatisk om aftenen.

6.7 Internetforbindelse

Via *Hurtigindstillinger* kan du slå forbindelsen til det tilsluttede trådløse netværk til og fra, se kapitel 7. *Hurtigindstillinger*. Her kan du også oprette forbindelse til nye trådløse netværk.

De tilgængelige trådløse netværk vises på en liste. Du kan derefter vælge dit netværk og (oftest) indtaste adgangskoden. Oplysninger om, at enheden er tilsluttet det valgte netværk, vises hurtigt derefter.

6.8 Bluetooth

For at tilslutte en Bluetooth-højttaler (eller headset) skal du gå til **Indstillinger|System|Android-indstillinger|Trådløst & netværk|Bluetooth** og aktivere **Bluetooth**.

1. Sæt Bluetooth-højttaleren til "parringstilstand" (se højttalerens manual). De tilgængelige enheder vises på en liste.
2. Tryk på navnet for den enhed, du vil oprette forbindelse til, hvorefter højttaleren tilsluttes enheden.

Højttaleren vil nu virke med MEMOplanner, f.eks. når der afspilles en alarm.

Næste gang du tænder for højttaleren og slår Bluetooth til, finder enhederne automatisk hinanden.

Når du bruger Bluetooth-højttalere, skal du muligvis slukke for enhedens egen lyd for at undgå et ekko under afspilning.

Husk, at Bluetooth øger strømforbruget.

6.9 Dato og tid

Du kan indstille dato, tid og tidszone via **Indstillinger|System|Android-indstillinger|System|Dato & tid**.

Det er bedst at beholde indstillingen på *Automatisk dato* og tid, som gør det muligt for oplysningerne om dato, tid og tidszone at blive opdateret automatisk via netværket. Derefter viser uret altid det rigtige tidspunkt, og du kan være sikker på, at skifte korrekt mellem sommertid og vintertid.

Normalt er *Automatiske dato og tid* valgt. Men hvis dette ikke fungerer korrekt, skal du slå denne indstilling fra. Derefter vil du kunne indtaste dato og klokkeslæt manuelt.

Tidszonen for Danmark skal være GMT+2:00 centraleuropæisk tid.

6.10 Tastatur

Du kan vælge mellem standardtastatur og MEMOplanner-tastatur.

Fordelen ved *MEMOplanner-tastaturet* er, at det har store taster og talestøtte.

Standardtastaturet har mindre taster, men giver foreslåede ord

Du vælger tastatur i **Indstillinger|System|Android-indstillinger|Personligt|Sprog & input|Tastatur og inputmetoder|Nuværende tastatur**. Tryk på *Vælg tastatur* for at kunne vælge andre tastaturer. Vælg derefter, hvilket tastatur der skal være det aktuelle tastatur.

Deaktiver kliklyd til standardtastaturet via **Indstillinger|System|Android-indstillinger|Personligt|Sprog & input|Tastatur & inputmetoder|Android-tastaturindstillinger (AOSP)|Præferencer**, vælg aktivering eller deaktivering af lyd på tastetryk.

6.11 Automatisk nedbrudsrapport

MEMOplanner har en indbygget, automatisk nedbrudsrapport. Hvis der opstår en fejl i applikationen, vises en fejlmeddelelse, og oplysninger om fejlen sendes automatisk til Abilias udviklingsafdeling. Der vil ikke blive sendt personlige oplysninger. Dette er en stor hjælp til at udvikle stabil og funktionel software.

Hvis der opstår en nedbrud, vises en fejlmeddelelse om, at "MEMOplanner er stoppet." Tryk **OK** for at genstarte MEMOplanner.

Hvis du oplever flere nedbrud, skal du kontrollere, om der er en nyere version af programmet, se kapitel 9. Opdater.

6.12 Skype

I MEMOplanner kan du forbinde Skype-kontakter til en aktivitet. Dette gør det muligt at ringe til folk direkte fra kalenderen. Det er også muligt at have Skype i menuen.

For at bruge Skype skal Skype-appen være installeret. Procedure:

1. Gå til **Indstillinger|System|Opdater Skype** og installer/opdater Skype-applikationen. Du bliver omdirigeret til Google Play Store.
2. Log ind med din Google-konto.
3. Download og installer Skype.
4. Start Skype (Videopkald), og log ind med brugerens Skype-konto. Hvis brugeren ikke har Skype-konto, kan den oprettes på www.skype.com fra en anden enhed.

Kig i *Manualen til MEMOplanner* for at få flere oplysninger om, hvordan Skype kan bruges.

6.13 Tilføj billeder til MEMOplanner

Der er forskellige metoder, du kan bruge til at anvende andre billeder end dem, der er taget med det indbyggede kamera i MEMOplanner. Tre valg er beskrevet her:

6.13.1 Overfør billeder via myAbilia


Hvis billederne skal bruges til aktiviteter, er den enkleste måde at tilføje dem til billedarkivet i myAbilia. Log ind på myabilia.com som bruger eller støttepersion og tilføj de ønskede billeder.

6.13.2 Overfør billeder via USB-pind eller et SD-kort

1. Tilslut en USB-pind eller et micro SD-kort med billeder til MEMOplanner Large (se 3. *Produktoversigt*).
2. Åbn filhåndteringen i MEMOplanner, gå til **Indstillinger|System|Filhåndtering** og kopier de ønskede billeder til DCIM-mappen.
Gå til USB (eller SD), og kopier ved i lang tid at trykke på hele mappen eller det valgte billede i mappen, og vælg derefter *Kopier*.
Gå til **Hjem|Intern hukommelse|DCIM**. Når du er i mappen DCIM, skal du trykke på *Editor* i den øverste menu.
Vælg *Indsæt* fra den menu, der vises, for at indsætte billede(r) i mappen.
3. Billederne vises nu i "Mine fotos" i MEMOplanner og kan derefter bruges, når du tilføjer nye aktiviteter.

7. Hurtigindstillinger


Fra *Hurtigindstillinger* kan du vælge enkle indstillinger til enheden.

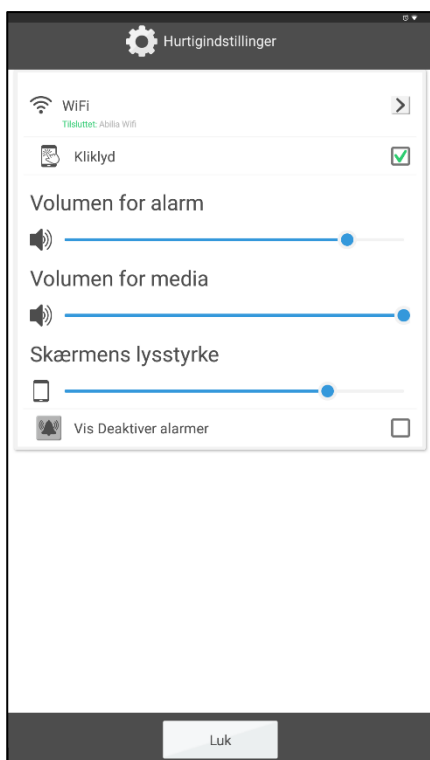

- *WiFi*. Her kan du se, om MEMOplanner er tilsluttet Wi-Fi eller ej. Her kan du også vælge fra andre tilgængelige netværk.
- *Kliklyd*. Til/Fra Der gives en markant lyd, når man trykker på områder på skærmen, der kan klikkes.
- *Lydstyrke for alarmer*. Lydstyrkeniveau for alarmer.
- *Lydstyrke for medier*. Lydstyrkeniveau for talestøtte. Hvis du har valgt at afspille alarmer via medietilstand (eksterne højttalere), afspilles alarmer via medier.
- *Skærmens lysstyrke*.
- *Vis Deaktiver alarmer*. Hvorvidt knappen *Deaktiver alarmer* skal vises eller ej i alle kalendervisninger. Når du trykker på knappen, deaktiveres alle alarmer og aktiveres automatisk igen kl. 23:59.


8. Kamera

Det indbyggede kamera giver dig mulighed for at tage dine egne billeder, som du derefter kan bruge til at symbolisere forskellige aktiviteter, eller tilføje som billeder af mennesker.

Når du tænder for *Kamera*, vises søgervisningen. Den kan holdes vandret eller lodret. Tryk på  for at tage et billede. Zoom ved at trække to fingre fra hinanden på skærmen.

Der gives tre valg, når du har taget billedet:

- *Tilbage*, hvis du ikke er tilfreds med billedet, skal du trykke tilbage for at tage et nyt billede.
- *Gem*, gemmer billedet i "Mine fotos".
- *Luk*, lukker kameraet uden at gemme billedet.

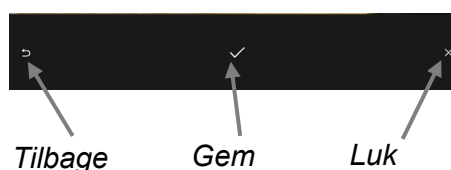

9. Opdater

I **Indstillinger|System|Om MEMOplanner** vises programversion, enheds-ID og enhedsinformation.


Via knappen *Søg efter opdatering* kan du finde ud af, om der er en nyere version af softwaren tilgængelig.

Hvis "Søg efter opdatering" viser, at der er en nyere version tilgængelig, starter den automatiske funktion "Opdater MEMOplanner", se kapitel 9.1 *Opdater MEMOplanner*.

Hvis du markerer feltet "Giv besked om opdateringer", vil MEMOplanner kontrollere, om der er en nyere version tilgængelig under den natlige sikkerhedskopiering.

Meddelelsen "Der er en ny version af MEMOplanner tilgængelig" vises. Du vil derefter være i stand til at opdatere MEMOplanner i overensstemmelse med kapitel 9.1 *Opdater MEMOplanner*.

Hvis der er en ny version af MEMOplanner tilgængelig, vises knappen *Opdatering tilgængelig*.

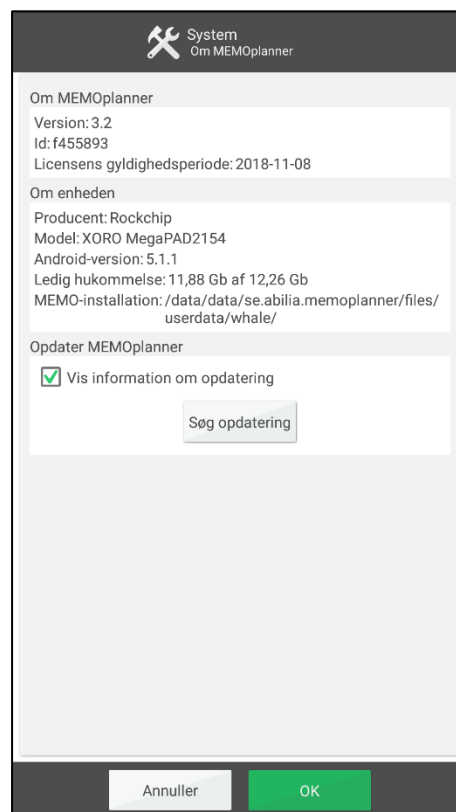

9.1 Opdater MEMOplanner

MEMOplanners software opdateres løbende. Dette involverer både små fejl, såkaldte bugs, og nye eller forbedrede funktioner. Det er derfor en god ide at opdatere softwaren regelmæssigt.

Nedenfor er en beskrivelse af, hvordan du opdaterer din software.

1. Tryk på knappen *Søg efter opdateringer*.
2. Vent og se, om der er en nyere version tilgængelig.
3. Tryk på *Download*.
4. Tryk på *Installer*, når opdateringen er downloaded.
5. Meddelelsen "Erstat app" vises, tryk på *OK*.
6. Tryk på *Installer* i visningen "Vil du installere dette program?"
7. Tryk på *Hjem*-knappen, ved den sidste visning (andre visninger kan komme frem).

10. Gendannelse af MEMOplanner Large

10.1 Simple gendannelse

En simpel gendannelse er nok, når du kun behøver at slette brugerdata fra MEMOplanner-applikationen og gendanne den til en ny bruger.

Eventuelle kamerabilleder, Google-konti og Android-indstillinger forbliver.

Dette er proceduren for en simpel gendannelse:

1. Gå til **Indstillinger|System|Android-indstillinger|Enheder|Apps|MEMOplanner**. Tryk på *Ryd data*.
2. Tryk på *Hjem*-knappen.
3. Der starter nu en opsætningsvejledning til MEMOplanner. Følg instruktionerne i kapitel 4.4 *Opsætning af enheden*. Se også kapitel 4.5 og 4.6 *Tilføj startersættet*.

Licensen til denne MEMOplanner forbindes automatisk til den brugerkonto, der blev givet ved login.

10.2 Fuldstændig gendannelse

En fuldstændig gendannelse betyder, at man går helt tilbage til fabriksindstillingerne og en geninstallerer MEMOplanner.

Dette er nødvendigt, hvis MEMOplanner skal overdrages til en ny bruger, og enheden skal ryddes for kamerabilleder, Google-konti osv.

Licensbeviset med licensnøglen skal være ved hånden.

Systemgendannelse og Opsætning af MEMOplanner er inkluderet i en fuldstændig gendannelse.

Dette er proceduren for en **Systemgendannelse**:

1. Gå til **Indstillinger|System|Android-indstillinger|Personligt|Sikkerhedskopiering og gendannelse** og vælg "Gendan fabriksindstillinger". Tryk på *Nulstil tablet*.
2. Gendannelsen udføres i et par minutter, og derefter genstarter enheden.
3. Start kameraapplikationen ved at følge trinene i guiden på skærmen. Brug *Tilbage*-knappen i kameraet for at afslutte guiden og vende tilbage til gendannelsen.
4. Der vises en skærm, hvor MEMOplanner-licensen skal indtastes. Indtast licensnøglen, der står printet på beviset.
5. Tryk på *Næste*.
6. Der starter en opsætningsvejledning til MEMOplanner.
7. Sådan kodesbeskyttes indstillingerne:
 - a) Gå til **Indstillinger|System|Android-indstillinger|System|Tilgængelighed|Tjenester|MEMOplanner** og aktiver MEMOplanner.
 - b) Gå til **Indstillinger|System|Android-indstillinger|Personligt|Sikkerhed|Enhedsadministration|Enhedsadministratorer|MEMOplanner** og aktiver MEMOplanner.
8. Tryk herefter på *Hjem*-knappen.

Dette er proceduren for en **Opsætning af MEMOplanner**:

9. Der starter en opsætningsvejledning til MEMOplanner. Følg instruktionerne i kapitel 4.4 *Opsætning af enheden*. Se også kapitel 4.5 og 4.6 *Tilføj startersættet*.

11. Installation af MEMOplanner Go på telefonen

Dette kapitel beskriver, hvordan du installerer appen MEMOplanner Go på en iPhone eller Android-baseret smartphone.

1. Download app *MEMOplanner Go* gratis på App Store eller Google play.
2. Log ind med brugerkontoen fra MEMOplanner.

Appen er konfigureret med de samme indstillinger som MEMOplanner.

12 Rengøring

Før rengøring skal du fjerne alle kabler og slukke for MEMOplanner. Rengør med en blød klud, der er fugtet med vand. Brug ikke flydende eller spraybaserede rengøringsmidler, der kan indeholde brandfarlige stoffer.

13. Opbevaring og bortskaffelse

13.1 Opbevaring

Produktet skal opbevares indendørs ved stuetemperatur og må ikke udsættes for fugt.

13.2 Bortskaffelse

Dette produkt indeholder elektriske komponenter, der skal genanvendes ved slutningen af produktets levetid. Tag med til et genbrugscenter for elektrisk affald.



14. Produktspecifikationer

14.1 Dele leveret sammen med MEMOplanner Large

Artikelnumm er			Antal
	MEMOplanner	Android-baseret tablet, KA248	1 stk.
	Strømadapter inkl. strømkabel		1 stk.
462866	Vægbeslag		1 stk.
	Licensbevis	Med licensnøgle	1 stk.
	Abilia-klud		1 stk.
	Manualer	Håndbog til MEMOplanner Large (dette dokument), Manuel til MEMOplanner, hurtigguide til MEMOplanner Introduktion til MEMOplanner	4 stk.

Du kan finde flere oplysninger om MEMOplanner Large og tilbehør her til på <https://www.abilia.com/intl/our-products/cognition/memory-and-calendars/memoplanner-large> eller ved at scanne QR-koden.



14.2 Tekniske data KA248

Hovedtelefon:	3,5 mm
Strømadapter:	Indgang: AC 100-240V; Udgang: DC 12 V/3A
Kamera:	5 Megapixel
Skærm:	23,6 tommer, 1920 x 1080 opløsning
Android-version:	6,0
Størrelse (H x B x D):	595 x 363 x 43 mm
Vægt:	4,66 kg
Anvendelsesområde:	Indendørs, 0 til 40°C
Indgange:	3 USB, 1 mini USB, 1 hovedtelefon, 1 SD-kort, 1 Ethernet, 1 strøm.
Netværk	802.11b/g/n 2.4GHz
Anslåede levetid	5 år

Kontaktoplysninger

Sverige

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige
Telefon +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se

Norge

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norge
Telefon +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no

Det Forenede Kongerige

Abilia UK Ltd, Unit12 Buckingway Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, Det Forenede Kongerige
Telefon +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk

International

www.abilia.com/intl/get-products/distributors

CE

