

Start MEMOplanner for første gang

Tillykke med din nye MEMOplanner – sådan kommer du i gang!




1. Tilslut strømadapteren

Tilslut strømadapteren mellem MEMOplanner og en stikkontakt.

2. Starte MEMOplanner

Tryk og hold på tænd / sluk-knappen for at starte.

3. Følg instruktionerne i konfigurationsguiden


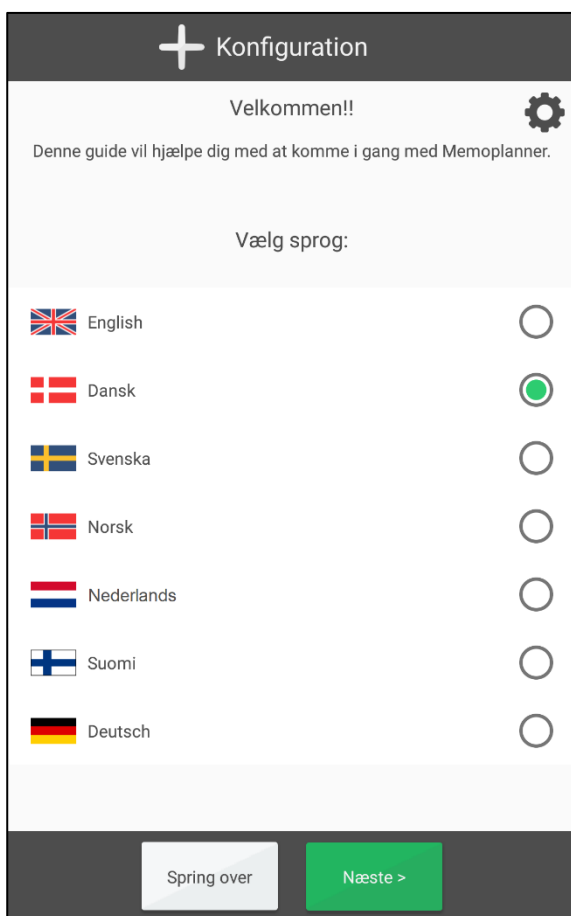


Konfigurationsguiden hjælper dig med at opsætte MEMOplanner ved:

- Vælg sprog
- Opret forbindelse til Internettet
- Opdater til den nyeste version
- Indtast dato og klokkeslæt
- Vælg stemmestøttestemme

4. Log ind med din myAbilia-konto

For at bruge MEMOplanner skal du bruge en myAbilia-konto.

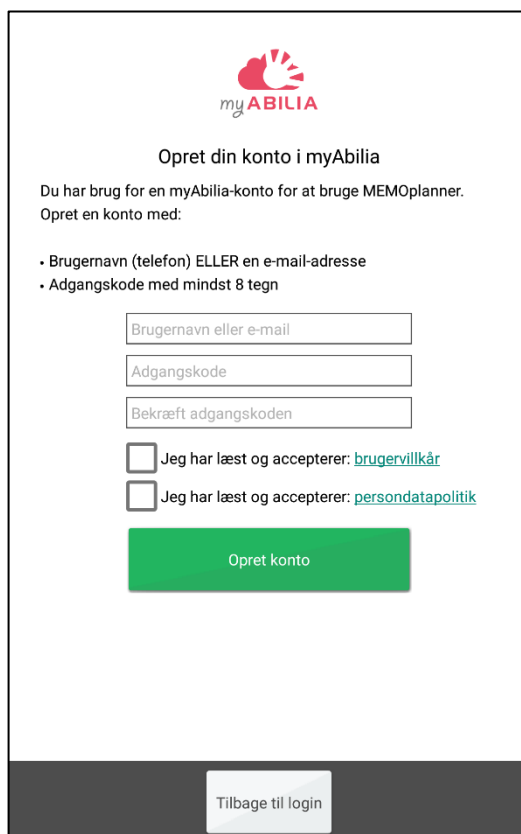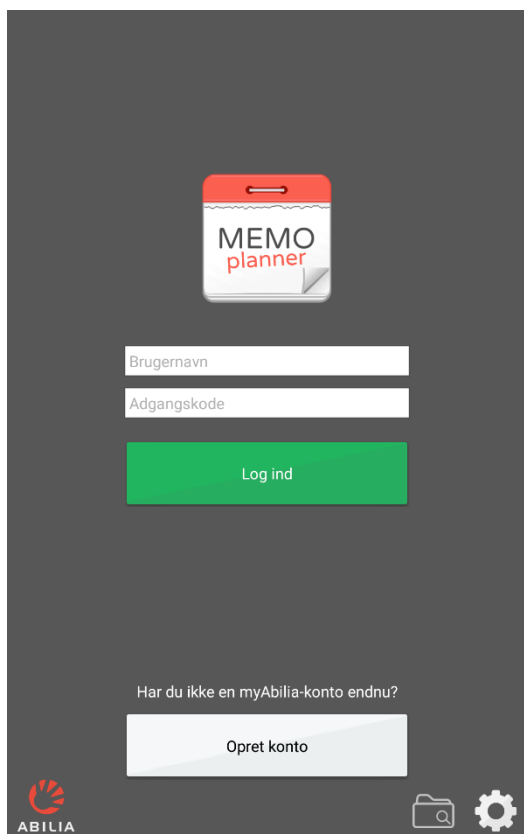

Har du allerede en myAbilia-konto?

Indtast brugernavn og adgangskode, og log ind.

Vil du oprette en myAbilia-konto?

Tryk på knappen **Opret konto**, og følg instruktionerne på skærmen.

- Hvis du indtaster din e-mail-adresse som Brugernavn, kan du nemt ændre din adgangskode, hvis du glemmer den.
- Hvis du indtaster dit telefonnummer som brugernavn, kan vi på Abilia hjælpe med at ændre dit kodeord, hvis du glemmer det.

5. Husk dine kontooplysninger

Skriv dine kontooplysninger ned her for at huske.

Opbevar papiret et sikkert sted.

Kontooplysninger for MEMOplanner og myAbilia-webservicen

Brugernavn: _____

Adgangskode: _____

6. Tilføj startersættet

Hvis myAbilia-kontoen er helt ny, har du nu muligheden for at tilføje et startersæt med et billedarkiv, basale aktiviteter, basale timere og tjeklister.



7. Nu er MEMOplanner klar til brug!



8. Hjælp eksternt med myAbilia-webservicen

Start en webbrowser på en computer, telefon, eller tablet. Gå ind på *myabilia.com* og log ind med dine kontooplysninger. Fra myAbilia kan du nemt hjælpe med aktiviteter, billeder osv. i MEMOplanner.



MEMOplanner og Internettet

Takket være MEMOplanner, der er tilsluttet internettet, kan du gøre følgende:

- Brug myAbilia-webservicen
- Have MEMOplanner som en app på din smartphone
- Opret dine kontooplysninger i skyen som en sikkerhedsforanstaltning
- Opdater MEMOplanner til den nyeste softwareversion

Husk, at hvis MEMOplanner flyttes til et nyt sted, skal den forbindes til internettet på ny.

Hvis der ikke er noget internet, kan MEMOplanner stadig bruges.

Vi hjælper dig!

Scan QR-koden med kameraet på din smartphone for at finde de nyeste manualer.

