

# MEMO Dayboard

## Brugervejledning

Art. nr: 508820 508825

# Indholdsfortegnelse


<b>Introduktion</b> .....	<b>5</b>
Om MEMO Dayboard .....	5
Erklæret formål .....	5
Om dette dokument .....	6
<b>Oversigt over MEMO Dayboard</b> .....	<b>7</b>
Inkluderede dele .....	7
Inkluderede dokumenter .....	7
<b>Kom i gang med MEMO Dayboard</b> .....	<b>8</b>
Monteres MEMO Dayboard på en væg .....	8
Start MEMO Dayboard .....	9
Indstil dato og tid .....	9
Tilpas MEMO Dayboard .....	9
<b>Brug MEMO Dayboard</b> .....	<b>10</b>
Vis dato, ugedag og måned .....	11
Vis hændelser og aktiviteter .....	11
Indstil alarmer .....	13
Indstil låsetilstand .....	17
Ændring af lysstyrkeindstillinger .....	18
Ændring af generelle indstillinger .....	19
Juster dag- og nattetimer .....	20
Skjul dele af tavlen .....	20
Brug som 12-timersversion .....	21
<b>Vedligeholdelse</b> .....	<b>22</b>
Rengøring MEMO Dayboard .....	22
Gendan til fabriksindstillinger .....	22
<b>Fejlfinding</b> .....	<b>23</b>
<b>Opbevaring og bortskaffelse</b> .....	<b>24</b>
Opbevaring .....	24
Bortskaffelse .....	24
<b>Produktspecifikationer</b> .....	<b>24</b>
MEMO Dayboard .....	24
Tilbehør .....	25
<b>Vigtig information</b> .....	<b>26</b>
Sikkerhedsdefinitioner .....	26
Sikkerhedsinstruktioner inden du bruger MEMO Dayboard .....	26

Alvorlige hændelser .....	27
Overensstemmelse med krav til medicinsk udstyr .....	27
Produktansvar .....	27
<b>Kontaktoplysninger .....</b>	<b>29</b>


# Introduktion

## Om MEMO Dayboard

MEMO Dayboard er en planlægningstavle, der understøtter dem, der har brug for et visuelt overblik over dagen. Den har et magnetisk whiteboard og to lyssøjler: en med røde lys for dagen og en med blå lys for natten. De forskellige farver gør det nemt at se, om det er dag eller nat. Ved at visualisere begivenheder og aktiviteter med tekst og billeder får du et overblik over dagen. Det er muligt at indstille en påmindelse på ønskede tidspunkter.

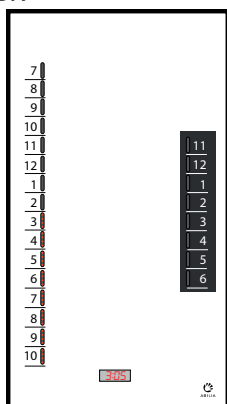

MEMO Dayboard 12 timer

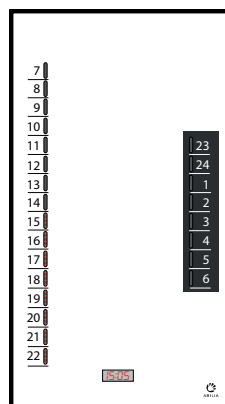

MEMO Dayboard 24 timer

Der findes en række tilbehør til MEMO Dayboard for eksempel *Bordstativ*, *Låsbar låge* og *Tilpasningssæt* med magneter. Se *Tilbehør* på side 25

## Erklæret formål


MEMO Dayboard er en planlægningstavle, der skal understøtte personer, der har brug for et visuelt overblik over dagen i forhold til, hvor lang tid der går. Den er velegnet til børn, voksne og ældre med begrænset evne til at holde styr på tiden. For eksempel personer med ADHD/ADD, autisme, tidlig demens og et mildt eller moderat intellektuelt handicap.

Dette produkt er beregnet til indendørs brug i hjemmet, i skolen eller i arbejdsmiljøet.

## **Om dette dokument**

Denne brugervejledning henvender sig til støttepersoner. I dette dokument lærer du, hvordan du opsætter og ændrer MEMO Dayboard så de passer bedst muligt til brugeren.

# Oversigt over MEMO Dayboard

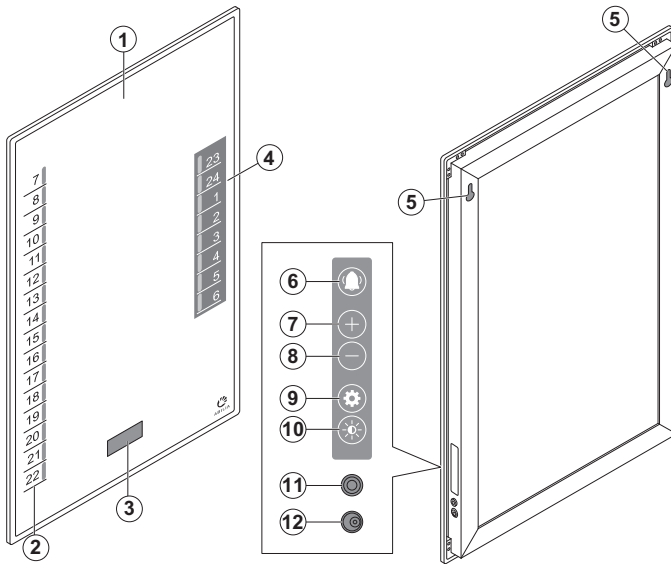

1. Magnetisk whiteboard
2. Lyssøjledag
3. Digitalt ur
4. Lyssøjle Nat
5. Monteringshuller

## *Sidepanel:*

6. Knap til alarmindstillinger
7. + knap
8. – knap
9. Knap til generelle indstillinger
10. Knap til indstilling af lysstyrke
11. Udtag til tilslutning af manøvrekontakt
12. Udtag til tilslutning af netadapter

## Inkluderede dele

- MEMO Dayboard
- Netadapter
- 3 Whiteboard-penne
- Mikrofiberklud
- Borehulsskabelon
- Skruer og rawlplugs


## Inkluderede dokumenter

- Brugervejledning (dette dokument)
- Hurtigguide


# Kom i gang med MEMO Dayboard

## Monteres MEMO Dayboard på en væg


Før du monterer MEMO Dayboard på en væg, skal du sikre dig, at du har følgende værktøj og medfølgende dele ved hånden:

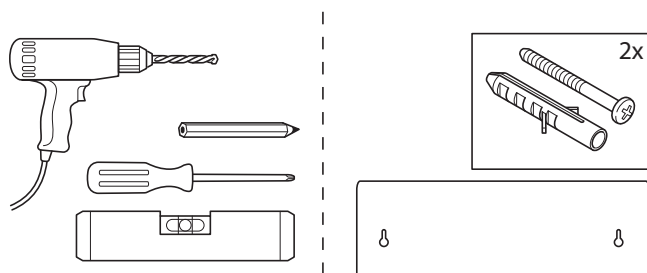


**⚠ ADVARSEL:** Monter MEMO Dayboard korrekt. Forkert montering kan beskadige enheden eller forårsage personskade

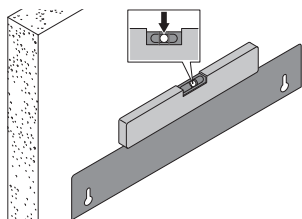


1. Niveller borehulsskabelonen.

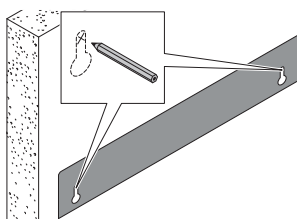


2. Markér borehullerne.

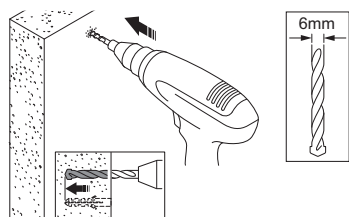

3. Bor hullerne.

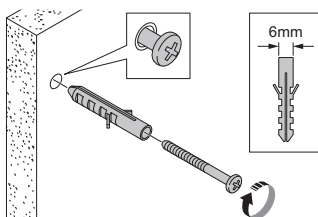

4. Sæt rawlplugs og skruer i.

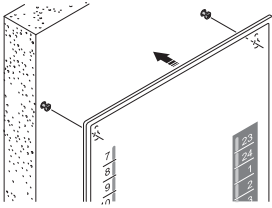


5. Hæng MEMO Dayboard op i monteringshullerne på væggen.


**TIP:** Du kan også bruge *Bordholderen*, hvis du ikke ønsker at hænge MEMO Dayboard på en væg. Se *Tilbehør* på side 25.

## Start MEMO Dayboard

**⚠ ADVARSEL:** Brug kun den originale netadapter, der leveres sammen med MEMO Dayboard.

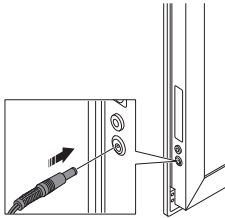

1. Tilslut kontakten til MEMO Dayboard.

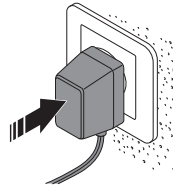

2. Slut strømforsyningsenheden til en stikkontakt.

## Indstil dato og tid

Kontrollér, at dato- og klokkeslætsindstillingerne er korrekte. Se *Ændring af generelle indstillinger* på side 19.

## Tilpas MEMO Dayboard

For at få mest ud af MEMO Dayboard, anbefaler vi, at du tilpasser indstillingerne til brugerens behov. Se *Brug MEMO Dayboard* på side 10.



## Brug MEMO Dayboard

Nogle af de følgende instruktioner gør brug af tilbehør til MEMO Dayboard. For det tilgængelige tilbehør, se *Tilbehør* på side 25.

### ADVARSEL:

- Tilbehøret *Tilpasningssæt* indeholder små dele, der ikke er egnet til børn under 3 år på grund af kvælningsrisiko. Brug om nødvendigt tilbehøret *Låsbar låge* til at holde delene adskilt fra brugeren.
- Brug ikke skarpe genstande på whiteboardet eller på sidepanelets knapper.

Opdater planlægningstavlen hver dag:

- *Vis dato, ugedag og måned* på side 11.
- *Vis hændelser og aktiviteter* på side 11.
- Kontrollér, at alle ønskede alarmer er indstillet korrekt, se *Indstil alarmer* på side 13.
- Indstil om nødvendigt MEMO Dayboard til låst tilstand, se *Indstil låsetilstand* på side 17.

Udfør følgende ændringer efter behov:

- *Ændring af lysstyrkeindstillinger* på side 18.
- Skift af dato, klokkeslæt, alarmlyd, alarmlys og andre generelle indstillinger, se *Ændring af generelle indstillinger* på side 19.
- *Juster dag- og nattetimer* på side 20.
- Skjul de dele af tavlen, der ikke er brug for, se *Skjul dele af tavlen* på side 20.
- *Brug som 12-timersversion* på side 21.

## Vis dato, ugedag og måned

Du kan bruge en række forskellige materialer og tilbehør til at visualisere dato, ugedag og måned:

- Brug ugedag-magneterne fra tilbehøret *Tilpasningssæt*. Dagens farver til højre bruges i Skandinavien som uofficiel standard.
- Brug månedsbilleder fra tilbehøret *Tilpasningssæt*, og monter dem på de selvklæbende magnetholdere.
- Find en månedskalender på internettet, og udskriv den i A6-format. Placer månedskalenderen i en magnetisk fotolomme. Brug for eksempel en whiteboard-pen til at markere den aktuelle dato eller strege dage ud, når du tæller ned til en særlig begivenhed.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

## Vis hændelser og aktiviteter

### Forbedr aktiviteterne visuelt

- Skriv eller tegn en aktivitet med forskellige whiteboard-markører.
- Illustrer en aktivitet med billeder.


Handi-billeder kan udskrives fra [www.handi.se/print](http://www.handi.se/print). Sæt de udskrevne billeder fast på de selvklæbende magnetholdere fra tilbehøret *Tilpasningssæt*.

**TIP:** Laminer billederne for at gøre dem mere holdbare.

- Gør en aktivitet mere konkret med genstande. Brug kølemagneter, eller fastgør faste genstande til de selvklæbende magnetholdere fra tilbehøret *Tilpasningssæt*.


## Brug handlingskæder

En handlingskæde hjælper med at udføre aktiviteter i en fastlagt rækkefølge. Lav en handlingskæde med tilbehøret *Tilpasningssæt* ved at montere flere billeder på den selvklæbende strimmel. Når aktiviteten er afsluttet, kan man placere en cirkelmagnet over billedet eller flytte en pilemagnet til næste trin i handlingskæden.

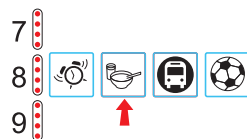


## Sammenkæd aktiviteten med et aktuelt tidspunkt

Brug pilmagnetene fra tilbehøret *Tilpasningssæt* til at angive det nøjagtige starttidspunkt for en aktivitet, eller tegn en prik eller linje med whiteboard-pennene.

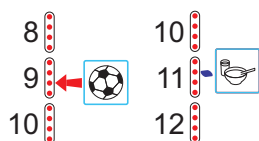

## Gør det tydeligt, hvor længe aktiviteten varer

For at tydeliggøre, hvor længe en aktivitet varer, kan du vise, hvor mange lyspunkter den bruger ved hjælp af cirkelmagnetene fra tilbehøret *Tilpasningssæt*, eller gøre billedet lige så langt som den tilsvarende tid i lysøjlen.

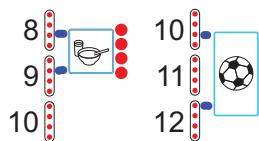

## Gør det tydeligt, at dagen fortsætter

Du kan markere på tavlen, når brugeren forlader huset, og når brugeren kommer hjem.

Du kan for eksempel vise, at brugeren rejser til daghospitalet klokken 10:00 og kommer hjem klokken 15:00.

## Vis at aktiviteten er afsluttet

Du kan fjerne billeder fra kortet for at angive, at en aktivitet er afsluttet, eller at en person er gået hjem. Du kan også indstille en alarm på aktivitetens sluttidspunkt, se *Indstil en ny alarm* på side 13.




## Indstil alarmer

**⚠ ADVARSEL:** Må ikke anvendes MEMO Dayboard som eneste støtte til medicin, medicinsk behandling eller andre vigtige aktiviteter.

### BEMÆRK:

- En alarm er gyldig hver dag, indtil den slettes, se *Slet en alarm* på side 15.
- MEMO Dayboard forlader indstillingstilstanden automatisk efter 20 sekunder. Alle ændrede indstillinger gemmes.





### Vis alle aktuelle alarmer

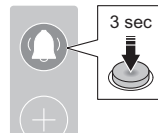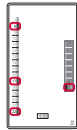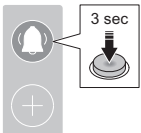

1. Skift til indstillingstilstand.  
Alle tidspunkter med et alarmlys tændt.

2. Afslut indstillingstilstand.


### Indstil en ny alarm

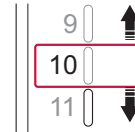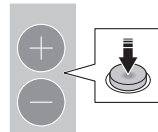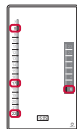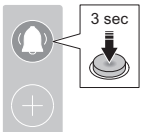


1. Skift til indstillingstilstand.  
Alle tidspunkter med et alarmlys tændt.

2. Brug knapperne + og – til at vælge et tidspunkt.

**TIP:** Hold inde knappen + eller – for at flytte markørprikken hurtigere.

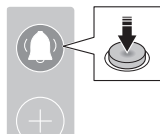


3. Indstil alarmer. Som bekræftelse blinker lyspunktet hurtigt.  
Hvis du vil indstille flere alarmer, skal du gentage trin 2 og 3.

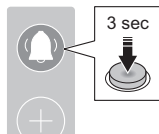

4. Afslut indstillingstilstand.

### Stop en alarm med sidepanelet

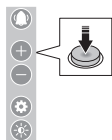


1. Tryk på en vilkårlig knap på sidepanelet.  
Alarmlyden stopper efter et minut.  
Alarmlyset stopper efter 15 minutter.

### Stop en alarm med en manøvrekontakt


**⚠ ADVARSEL:** Brug kun CE-mærkede udvendige manøvrekontakter.

Du kan også bruge en manøvrekontakt til at gøre det nemmere at stoppe en alarm. Der findes mange knapper og kontakter. Kontakt din forhandler for rådgivning, se [www.abilia.com/en/abilias-world/distributors](http://www.abilia.com/en/abilias-world/distributors).

## Slet en alarm

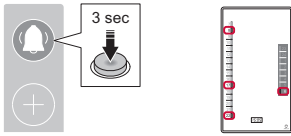


1. Skift til indstillingstilstand.  
Alle tidspunkter med et alarmlys tændt.

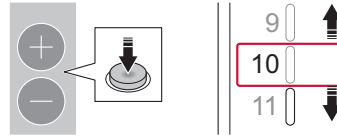


2. Brug knapperne + og – til at vælge et tidspunkt.

**TIP:** Hold inde knappen + eller – for at flytte markørprikken hurtigere.

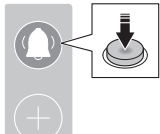


3. Slet alarmen.  
Hvis du vil slette flere alarmer, skal du gentage trin 2 og 3, før du forlader indstillingstilstand.

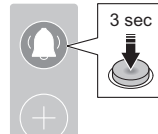


4. Afslut indstillingstilstand.


## Slet alle alarmer

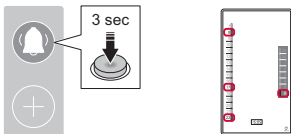

1. Skift til indstillingstilstand.  
Alle tidspunkter med et alarmlys tændt.

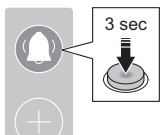

3. Afslut indstillingstilstand.

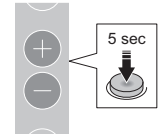

2. Tryk på knapperne + og – samtidig, og hold dem inde i 5 sekunder for at slette alle alarmer.

## Indstil alarmindstillinger

Se *Ændring af generelle indstillinger* på side 19 for at aktivere eller deaktivere alle alarmer og for at indstille alarmernes lys og lyd.

Mulige indstillinger er:

- Sådan skal alarmlampen opføre sig: fra, et blinkende lys eller hele søjlen blinker.
- Hvorvidt alarmer skal slås til eller fra. Hvis alarmer kun er gyldige for hverdage, kan du deaktivere alarmerne i weekenderne.


### **EKSEMPEL:** Sådan flyttes en alarm

- Hold knappen Alarmindstillinger inde i 3 sekunder.
- Brug knapperne + og – til at vælge tidspunktet for den alarm, du vil flytte.
- Tryk på knappen Alarmindstillinger for at slette alarmerne.
- Brug knapperne + og – til at vælge tidspunktet for den nye alarm.
- Tryk på knappen Alarmindstillinger for at indstille alarmerne.
- Hold knappen Alarmindstillinger inde i 3 sekunder for at forlade indstillingstilstanden.

**Resultat:** Den gamle alarm slettes, og den nye alarm indstilles!

## Indstil låsetilstand

Det er muligt at låse knapperne på sidepanelet, så indstillingerne ikke kan ændres.

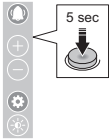

**1.** Låsetilstanden aktiveres eller deaktiveres ved at trykke på knapperne Indstillinger og Alarm og holde dem inde, indtil du hører et bip.



**2.** Når MEMO Dayboard er i låsetilstand, er alle knapper deaktiveret. Det er stadig muligt at stoppe en igangværende alarm.

Når du trykker på en knap mens i låsetilstand viser displayet kort "LOC".





## Ændring af lysstyrkeindstillinger

**BEMÆRK:** MEMO Dayboard forlader indstillingstilstanden automatisk efter 20 sekunder. Alle ændrede indstillinger gemmes.



Skift lysstyrke for:

- A. Lyssøjle Dag
- B. Lyssøjle Nat
- C. Digitalt ur

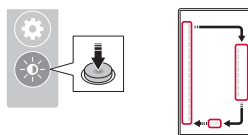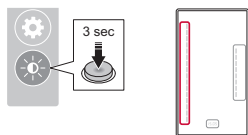

1. Skift til indstillingstilstand.

2. Brug knappen Lysstyrke til at vælge A, B eller C.

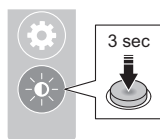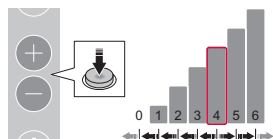


3. Brug knapperne + og – til at ændre lysstyrken.

4. Afslut tilstanden for lysstyrkeindstillinger.

Hvis du vil indstille flere indstillinger på én gang, skal du gentage trin 2 og 3, før du afslutter indstillingstilstanden.

## Ændring af generelle indstillinger

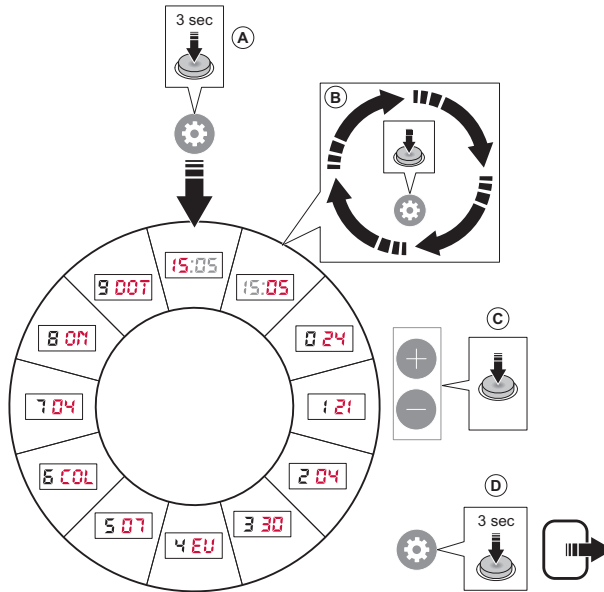

### Trin

- A. Skift til indstillingstilstand.
- B. Trin til den korrekte indstilling.
- C. Skift indstillingsværdien.
- D. Gem og afslut indstillingstilstand.

### Indstillinger

Standardværdien for hver indstilling er vist med rød tekst i billedet.

Timer (00–24)

Minutter (00–59)

0. Timetilstand (12 eller 24)

1. År, sidste to cifre (20XX)

2. Måned (1–12)

3. Dag (1–31)

4. Sommertid

EU: Europæisk sommertid

US: Amerikansk sommertid

OFF: Ingen sommertid

5. Starttidspunkt for lyssøjle  
Hvis ikke 07, skal du ændre tidssøjletallene, se *Juster dag- og natiteter* på side 20.
6. Lyssøjlevisning  
COL: som en søjle  
DOT: som en prik
7. Alarmstyrke  
0: Ingen lyd  
6: Maks. volumen
8. Aktivér eller deaktiver alle alarmer  
ON: Slået til  
OFF: Slået fra
9. Indstilling af alarmlys  
OFF: Ingen lyseffekt  
DOT: Ét lys blinker  
TOG: Hele søjlen blinker

## Juster dag- og nattetimer

MEMO Dayboard har faste tidspunkter for dag (07:00 til 22:59) og nat (23:00 til 06:59). Hvis du vil ændre dette forhold og for eksempel starte dagen klokken 08:00 i stedet, kan du bruge magnetstrimlerne til at gøre det, se *Tilbehør* på side 25

I dette tilfælde skal du også justere starttidspunktet for lyssøjlen, se *Ændring af generelle indstillinger* på side 19 Du behøver ikke justere det digitale ur.

## Skjul dele af tavlen



### Skjul dele af lyssøjlen

Hvis du kun ønsker at vise den del af dagen, hvor aktiviteterne finder sted, kan du bruge magnetstrimlen uden tekst til at dække det ikke-relevante tidspunkt på lyssøjlen, se *Tilbehør* på side 25 Det kan være nyttigt på en skole, hvor dagen slutter kl. 15.00 eller for en fritidsklub, der slutter kl. 17.00.

Der kan bruges bred hvid tape, hvis natsøjlen skal dækkes til.

### Skjul tal på lyssøjlen

For personer, der ikke kender klokken, kan tallene på MEMO Dayboard være forvirrende og fjerne deres fokus fra lyssøjlen og dagens begivenheder. Dæk tallene til med magnetstrimler uden tekst, se *Tilbehør* på side 25 Det holder tavlen fri for rod som muligt.

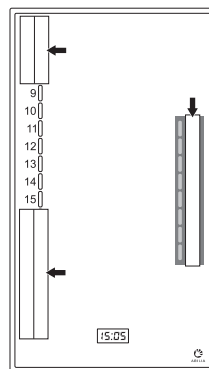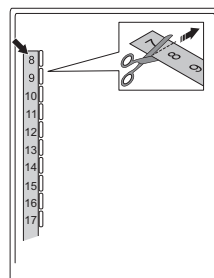


## Brug som 12-timersversion

Det er muligt at konvertere MEMO Dayboard 24-timersversion til 12-timersversion ved hjælp af tilbehøret *Magnetbånd med 12-timersvisning*, se *Tilbehør* på side 25

Det kan også tilrådes at indstille det digitale ur til 12-timerstilstand, *Ændring af generelle indstillinger* på side 19

Tilsvarende kan den 12-timersversion konverteres til den 24-timersversion.

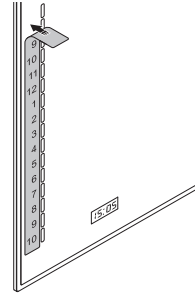

# Vedligeholdelse


## Rengøring MEMO Dayboard

Rengør MEMO Dayboard med den medfølgende mikrofiberklud og lidt vand.


**TIP:** Er tavlen svær at gøre ren? Brug en whiteboard-pen til at overskrive tekst eller mærker, der er vanskelige at fjerne, og vent et minut, før du tørrer af.

## Gendan til fabriksindstillinger

Det kan være nødvendigt at nulstille MEMO Dayboard, når produktet klargøres til en ny bruger, eller når der skal foretages fejlfinding på problemer. Gendannelse til fabriksindstillingerne fjerner alle alarmer og ændringer i indstillingerne, du måtte have foretaget.

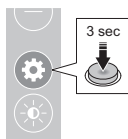

1. Tryk på og hold inde knap til generelle indstillinger for at skifte til indstillingstilstand.

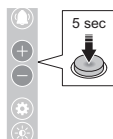

2. Tryk på og hold inde knapperne + og – for at nulstille enheden til fabriksindstillingerne.

# Fejlfinding

Hvis du har spørgsmål vedrørende produktets funktioner eller indstillinger, skal du kontakte din produktleverandør eller -forhandler.

Problem	Årsag	Løsning
Nogle knapper på sidepanelet reagerer ikke	Produktet er i låsetilstand	Se instruktionerne i <i>Indstil låsetilstand</i> på side 17
	Produktet er defekt.	Kontakt support. <sup>1</sup>
En indstillet alarm udløses ikke	Produktet er ikke sluttet til en stikkontakt	Se <sup>2</sup> .
	Alarmer er deaktiveret	Se anvisningerne i <i>Aktivér eller deaktiver alle alarmer i Ændring af generelle indstillinger</i> på side 19.
	Alarmlyd og lyseffekter er slået fra	Se anvisningerne i <i>Alarmstyrke</i> , og <i>Indstilling af alarmlys</i> på side 19
	Produktet er defekt.	Kontakt support <sup>1</sup> .
Det digitale ur er ikke synligt	Produktet er ikke sluttet til en stikkontakt	Se <sup>2</sup> .
	Urets lysstyrke er slået fra	Se <sup>3</sup>
	Produktet er defekt.	Kontakt support <sup>1</sup> .
En eller begge lysøjler er ikke synlige	Produktet er ikke sluttet til en stikkontakt	Se <sup>2</sup> .
	Søjlels lysstyrke er slukket	Se <sup>3</sup> .
	Produktet er defekt.	Kontakt support <sup>1</sup> .
Tavlen bliver ikke ren	Plastfolien skal udskiftes	Kontakt support <sup>1</sup> .
Produktet fungerer ikke korrekt	Produktet er defekt.	Kontakt support <sup>1</sup> . Supportpersonalet kan bede dig om at nulstille produktet til fabriksindstillingerne. Se instruktionerne i <i>Gendan til fabriksindstillinger</i> på side 22

<sup>1</sup>Se *Kontaktoplysninger* på indersiden af bagsiden.

<sup>2</sup>Se instruktionerne i *Start MEMO Dayboard* på side 1.

<sup>3</sup>Se instruktionerne i *Ændring af lysstyrkeindstillinger* på side 1.

# Opbevaring og bortskaffelse

## Opbevaring

Produktet skal opbevares indendørs ved stuetemperatur og må ikke udsættes for fugt.

## Bortskaffelse



Produktet indeholder elektriske komponenter, der skal genanvendes. Bortskaf produktet på et egnet sted.

# Produktspecifikationer

## MEMO Dayboard

Mål, HxBxD	713 x 392 x 32 mm
Vægt	3,8 kg
Netadapter	9 V DC, 1,1 A
Udtag til tilslutning af netadapter	3,5 mm

## Tilbehør

MEMO Dayboard har følgende tilgængelige tilbehør:

- 508785 Tilpasnings sæt
- 508786 Tilbehørssæt
- 508787 Magnetbånd uden tekst
- 508788 Magnetbånd med 24-timersvisning
- 508789 Magnetbånd med 12-timersvisning
- 508790 Magnetbånd med klokkesymboler
- 508794 Bordstativ
- 508795 Penneholder
- 508796 Låsbar låge
- 508821 Netadapter MEMO Dayboard

Du kan finde flere oplysninger om MEMO Dayboard og tilbehør hertil på [www.abilia.com/intl/our-products/memo-dayboard-24h](http://www.abilia.com/intl/our-products/memo-dayboard-24h) eller ved at scanne QR-koden.




Scan mig!




## Vigtig information

Før du bruger produktet, skal du læse og forstå indholdet af denne brugervejledning.

### Sikkerhedsdefinitioner

 **ADVARSEL:** Der er risiko for personskade eller dødsfald, hvis instruktionerne ikke følges.

 **FORSIGTIGHED:** Der er risiko for beskadigelse af produktet, hvis instruktionerne ikke følges.

**BEMÆRK:** Oplysninger, der er nødvendige i en given situation.

**TIP:** Yderligere oplysninger, der kan forbedre brugen af produktet.

## Sikkerhedsinstruktioner inden du bruger MEMO Dayboard

 **ADVARSEL:** Læs nedenstående advarsel, før du bruger produktet.

- Må ikke anvendes MEMO Dayboard som eneste støtte til medicin, medicinsk behandling eller andre vigtige aktiviteter.
- Brug kun CE-mærkede udvendige manøvrekontakter.
- Brug kun den originale netadapter, der leveres sammen med MEMO Dayboard.
- Brug ikke skarpe genstande på whiteboardet eller på sidepanelets knapper.
- Monter MEMO Dayboard korrekt. Forkert montering kan beskadige enheden eller forårsage personskade.
- Tilbehøret *Tilpasningssæt* indeholder små dele, der ikke er egnet til børn under 3 år på grund af kvælningsskade. Brug om nødvendigt tilbehøret *Låsbar låge* til at holde delene adskilt fra brugeren.

## Alvorlige hændelser

Hvis der indtræffer en alvorlig hændelse i forbindelse med produktet, skal dette rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i dit land.

En hændelse anses for alvorlig, hvis den direkte eller indirekte har medført eller kunne have medført en af følgende situationer:

- En patients, brugers eller en anden persons død.
- Midlertidig eller permanent alvorlig forværring af en patients, brugers eller en anden persons helbredstilstand.
- En alvorlig trussel mod folkesundheden.

## Overensstemmelse med krav til medicinsk udstyr

MEMO Dayboard markedsføres som et teknisk hjælpemiddel til personer med handicap og er i overensstemmelse med alle nødvendige krav, bestemmelser og direktiver vedrørende medicinsk udstyr.

## Produktansvar

Produktet er udviklet og risikovurderet i henhold til ISO 14971.

Brugermanualen og de tekniske specifikationer er udarbejdet i henhold til sikkerhedsvurderingerne i risikoanalysen. Overvej altid sikkerheden ved brug af produktet. Hvis produktet anvendes på andre måder end den tilsigtede, kan det indebære risici, som Abilia AB ikke påtager sig noget ansvar for. Den anslåede levetid for produktet gælder, når det anvendes i overensstemmelse med anvisningerne for den tilsigtede brug og vedligeholdelse.

Abilia AB er ikke ansvarlig for tab, skader eller følgeskader, hvis produktet er blevet anvendt eller installeret på nogen anden måde end den, der er angivet i dette dokument. Enhver form for beskadigelse eller pillen ved produktet gør garantien ugyldig, og producentens ansvar gælder ikke længere.

# Kontaktoplysninger

## Sverige

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige  
Telefon +46 (0)8- 594 694 00 | [support@abilia.se](mailto:support@abilia.se) | [www.abilia.se](http://www.abilia.se)

## Norge

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norge  
Telefon +47 23 28 94 00 | [support@abilia.no](mailto:support@abilia.no) | [www.abilia.no](http://www.abilia.no)

## Det Forenede Kongerige

Abilia UK Ltd, Unit 12 Buckingham Business Park, Swavesey,  
Cambridge, CB24 4AE, Det Forenede Kongerige  
Telefon +44 (0) 1954 281 210 | [support@abilia.uk](mailto:support@abilia.uk) | [www.abilia.uk](http://www.abilia.uk)

## International

[www.abilia.com/intl/get-products/distributors](http://www.abilia.com/intl/get-products/distributors)

