


Rengøring MEMO Dayboard


Rengør MEMO Dayboard med den medfølgende mikrofiberklud og lidt vand.

TIP: Er tavlen svær at gøre ren? Brug en whiteboard-pen til at overskrive tekst eller mærker, der er vanskelige at fjerne, og vent et minut, før du tørrer af.

Vis alle aktuelle alarmer

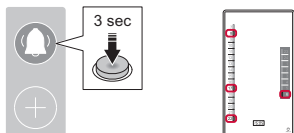


1. Skift til indstillingstilstand.
Alle tidspunkter med et alarmlys tændt.

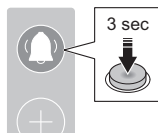


2. Afslut indstillingstilstand.


Indstil en ny alarm

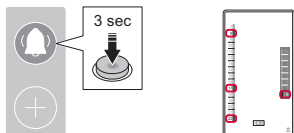


1. Skift til indstillingstilstand.

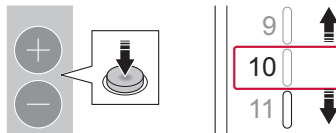

2. Brug knapperne + og – til at vælge et tidspunkt.

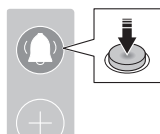


3. Indstil alarmen.

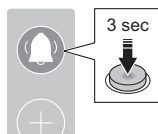


4. Afslut indstillingstilstand.

Stop en alarm med sidepanelet

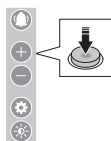


1. Tryk på en vilkårlig knap på sidepanelet.
Alarmlyden stopper efter et minut.
Alarmlyset stopper efter 15 minutter.


Slet en alarm

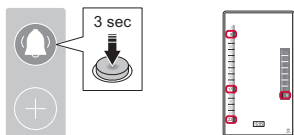


1. Skift til indstillingstilstand.
Alle tidspunkter med et alarmlys tændt.

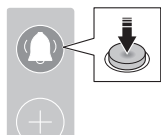

3. Slet alarmen.

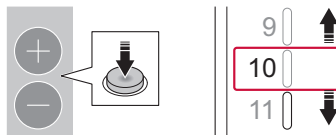


2. Brug knapperne + og – til at vælge et tidspunkt.

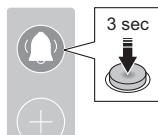


4. Afslut indstillingstilstand.

Indstil låsetilstand

Det er muligt at låse knapperne på sidepanelet, så indstillingerne ikke kan ændres.

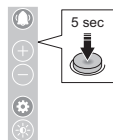

1. Låsetilstanden aktiveres eller deaktiveres ved at trykke på knapperne Indstillinger og Alarm og holde dem inde, indtil du hører et bip.

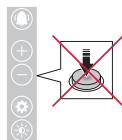

2. Når MEMO Dayboard er i låsetilstand, er alle knapper deaktiveret. Det er stadig muligt at stoppe en igangværende alarm. Når du trykker på en knap mens i låsetilstand viser displayet kort "LOC".

Få flere oplysninger og adgang til hele manualen

Eller gå til www.abilia.com/intl/our-products/memo-dayboard-24h.



Scan mig!