

Grid 12

Second Screen
Kom godt i gang

Smartbox

Specifikation

Model	GP12-SS-A
UDI	5060446901298
Størrelse (inkl. monteringsbeslag)	125 x 70 x 40 mm
Vægt	250g

Document: Grid Pad 12 - Second screen - DK - A
Language: Denmark
Date of issue: October 2021

Copyright © 2021 Smartbox Assistive Technology

Grid Pad 12

Second screen Kom godt i gang

Din sekundære skærm i farve
til visning af tekst, symboler
og Symojis.

Hvad er inkluderet

- Sekundær skærm med monteringsbeslag
- USB-hub
- 2 skruer
- Phillips-skruetrækker
- Topnøgleskruetrækker
- Kom godt i gang-vejledning

Installation


Du får brug for:

Din Grid Pad 12's
kommunikationshjælpemiddel.
Et sikkert og ryddeligt sted.


Læg et blødt håndklæde
under Grid Pad 12's skærm
for at beskytte den mod
beskadigelse.

Sluk for Grid Pad, før du går i
gang.


Trin 1

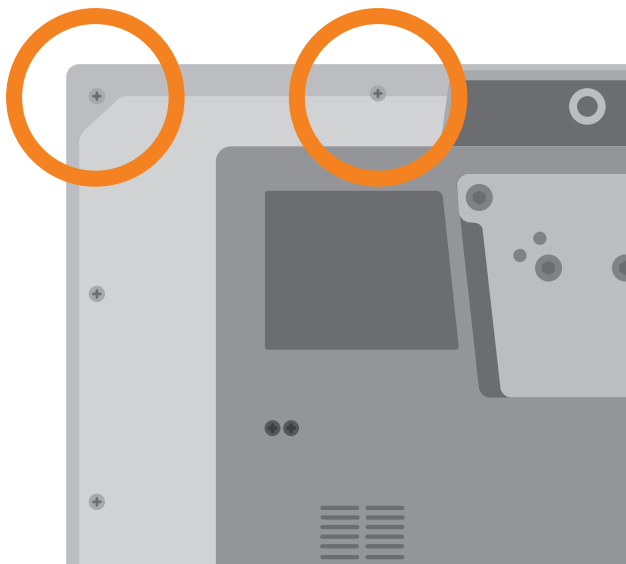

Brug en Phillips-skruetrækker
til at fjerne de to skruer
til venstre for Grid Pad's
håndtag.

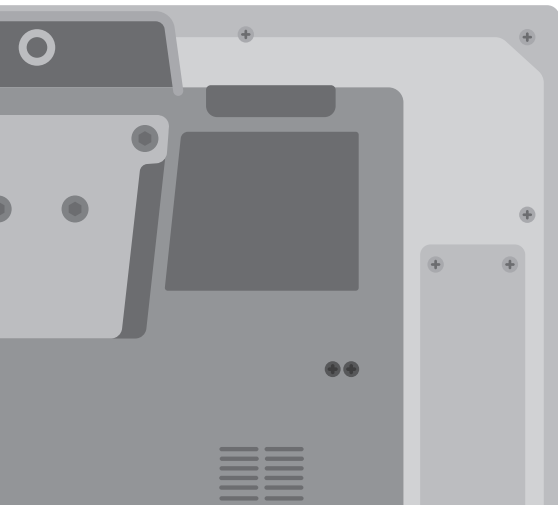

Trin 2

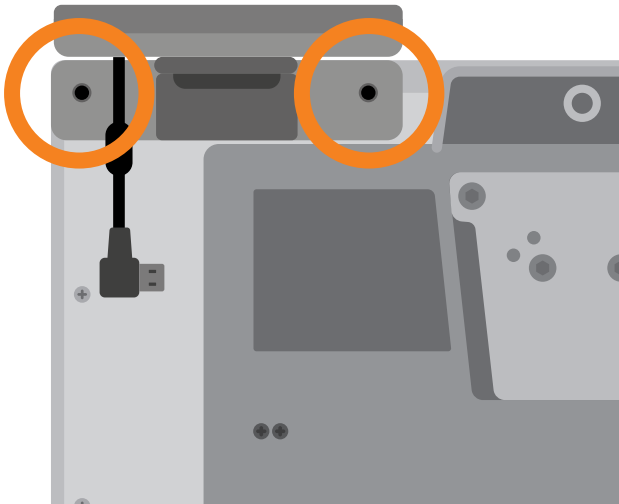


Anbring den sekundære skærm over de to skruehuller, og fastgør den til Din Grid Pad ved hjælp af de medfølgende skruer.



Trin 3

Forbind USB-kablet fra den sekundære skærm til USB-porten på siden af din Grid Pad.

Hvis USB-porten allerede er i brug til andet tilbehør, kan du anvende den medfølgende USB-hub, så du får en ekstra USB-port.

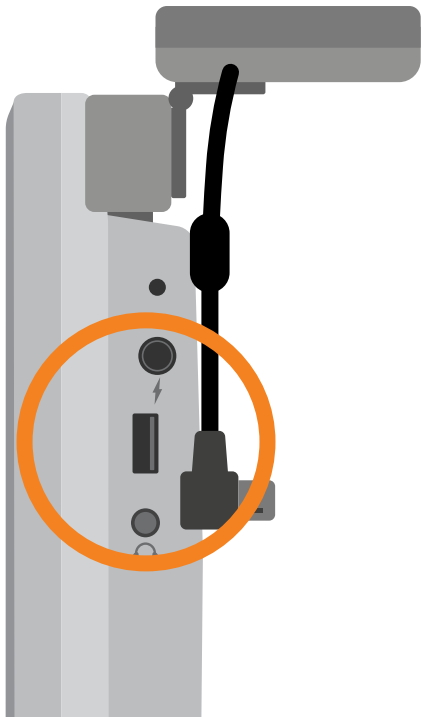


Trin 4

Tænd din Grid Pad, og åbn Grid 3.




Grid Pad registrerer
automatisk din sekundære
skærm.

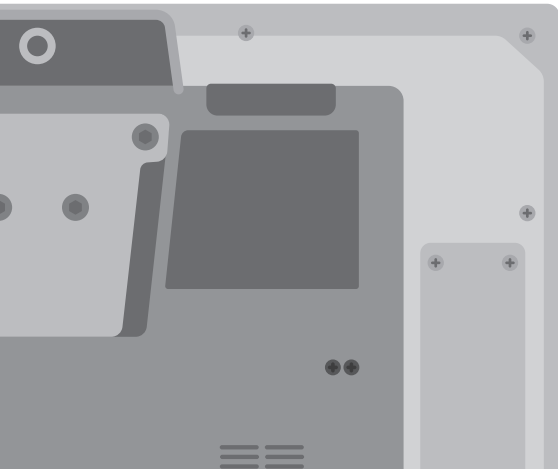

Placering

Den sekundære skærm er monteret på et drejehoengsel.

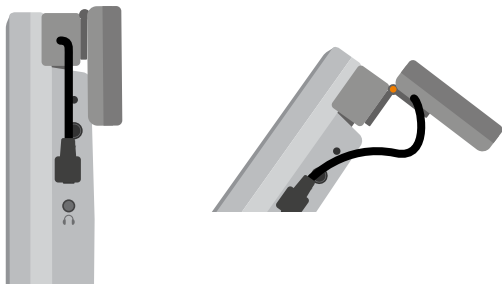

Det betyder, at du kan vippe den, så du får den bedste synsvinkel.



Sådan bruger du skærmen

Den sekundære skærm på Grid Pad **viser dine sætninger, imens du taler** fra Grid 3.

Du kan ændre, hvad skærmen skal gøre for dig, under indstillinger i dine gridlayouts.

Du kan også **tænde og slukke** skærmen fra et gridlayout.

Sådan fungerer skærmen


Den sekundære skærm viser det, du har i dit gridlayouts **samtalevindue.**

The three dots show that you are writing.



Gridkommandoer, som påvirker den sekundære skærm

Tal imens du skriver

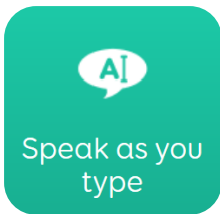

Hvis du indstiller Grid til Tal imens du skriver, vil den

sekundære skærm vise de enkelte ord, efterhånden som du taster dem.

Hvis du deaktiverer **Tal imens du skriver**, vil den sekundære skærm vise tre animerede prikker, så andre kan se, at du er i gang med at taste. Din meddelelse vises, så snart du vælger **Tal**.



Du kan finde andre muligheder med **Tal imens** du skriver under Grids indstillinger. Du finder dem under **Menu - Indstillinger - Tale.**

Speak as you type


<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/>	Sentences
<input checked="" type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/>	Words
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Off	Characters
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Off	Using Computer Control

Her kan du skifte mellem **Sætninger, Ord, Tegn** og vælge, om tale skal være

aktiveret, når du bruger
Computerstyring.

Sekundær skærm

Med cellen for sekundær
skærm kan du **tænde og
slukke** for skærmen.

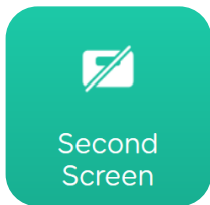

Mute

Den sekundære skærm fortsætter med at vise dine meddelelser, selv om Grid Pad er i lydløs tilstand (mute).

På den måde kan du dele en lydløs meddelelse.




Symoji

Med Symoji kan du hurtigt kommunikere sindstilstande, idéer og følelser ved hjælp af en animeret karakter.



Når du vælger en Symoji, dukker den op i Symoji-visningsvinduet samt på den sekundære skærm, så både du og din samtalepartner kan se animationen.

Du kan finde Symoji som et selvstændigt gridlayout eller i **Super Core, Fast Talker** og **Text Talker**.

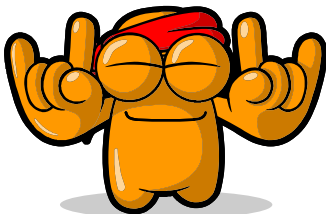

Sikkerhed

Advarsler

Kompatibilitet

Dette tilbehør er kun godkendt til brug med Grid Pad 12. Bruges det sammen med andre enheder, kan det tage skade eller forårsage skade. Bruges det sammen med andre enheder kan det forårsage uønskede elektromagnetiske forstyrrelser og forstyrre andet udstyr.

Risiko for kvælning

Dette tilbehør leveres med små skruer, som kan udgøre risiko for kvælning.

Hvis dette tilbehør beskadiges kan små dele løsne sig fra det. Disse kan udgøre en kvælningssfare.

Holdbarhed

Dette tilbehør er designet til at være hårdført og robust, men bør håndteres forsigtigt, når det flyttes omkring.

Undgå at løfte Grid Pad ved at holde i den sekundære skærm.

Reparationer og vedligeholdelse

Ingen dele kan serviceres af brugeren. Kontakt din lokale Smartbox-forhandler for at få enheden repareret.

Fejlfinding

De fleste problemer kan løses ved at tage USB-kablet ud og forbinde det igen.

Det kan også hjælpe at genstarte Grid 3.

Det kan også hjælpe at genstarte din enhed.

Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte support på: thinksmartbox.com/smart-support

Sørg for at have dit serienummer klar. Dette kan findes under bunden på enhedens stander.

USB-hub

Vigtigt: Når du bruger USB-hubben kan du muligvis ikke anvende adskillige enheder, der har et stort strømforbrug, samtidigt.

Du kan anvende den sekundære skærm samtidig med en mus, en hovedmus, et tastatur, en USB-nøgle osv. Enheder med et stort strømforbrug (hovedsaglig harddiske eller SSD'er) kan få hubben til at gå ned.

Det kan være nødvendigt at genstarte enheden.




Hændelser

Hvis der opstår en alvorlig hændelse i forbindelse med enheden, skal du rapportere det til Smartbox (repair@thinksmartbox.com) og den korrekte myndighed i dit land/stat.

Bortskaffelse

Bortskaf enheden i overensstemmelse med de lokale regler for bortskaffelse af elektronisk udstyr.

Overensstemmelse

Symbol	Betydning
	CE-mærkningssymbol, der angiver overensstemmelse med EU's lovgivning.
	Federal Communications Commission-symbol, der angiver overensstemmelse med USA's lovgivning.
	WEEE-symbol, der angiver at du skal bortskaffe dette udstyr i overensstemmelse med lokale regler.

	Se manualen-symbol
	Se manualen-symbol
	Britisk mærkningssymbol, som angiver overensstemmelse i Storbritannien

Gældende lovgivning

Dette udstyr overholder kravene i følgende EU-harmoniserede love:

- EU-forordning om medicinsk udstyr 2017/745 (herunder EMC-direktivet 2014/30/EU)
- RoHS -direktivet 2011/65/EU
- WEEE-direktiver 2012/19/EU

EU-harmoniserede standarder

EN 60601-1:2006/A1:2013

Medicinsk elektrisk udstyr - Del 1:
Generelle krav til grundlæggende
sikkerhed og essentiel ydeevne

EN 60601-1-2:2015

Medicinsk elektrisk udstyr - Del 1-2:
Generelle krav til grundlæggende
sikkerhed og essentiel ydeevne
- Sideordnet standard:
Elektromagnetiske forstyrrelser - krav
og tests

EN ISO 14971:2012

Medicinsk udstyr - Anvendelse af risikoleddelse i forbindelse med medicinsk udstyr

EN 61000-3-3:2013

Elektromagnetisk overensstemmelse (EMC) - Del 3-3: Grænseværdier - Begrænsning af spændingsændringer, spændingsfluktuationer og flimmer i offentlige lavspændingsforsyningsnet for udstyr med mærkestrøm ≤ 16 A pr. fase og ikke underlagt regler om betinget tilslutning

Den sekundære skærm til Grid Pad 12 er fremstillet af Smartbox Assistive Technology Ltd.

UK

Smartbox Assistive Technology Ltd
Ysobel House,
Enigma Commercial Centre
Sandys Road
Malvern
WR14 1JJ

USA

Smartbox Assistive Technology Inc
2831 Leechburg Road
New Kensington
PA,
15068

Europa

Smartbox Assistive Technology (EU) Ltd
JPA Brenson Lawlor house,
Argyle Square,
Morehampton Road,
Donnybrook,
Dublin 4

Smartbox

Vores supportteam er klar til at hjælpe.

thinksmartbox.com

Du kan kontakte vores britiske team på hverdage **01684 578868**

Du kan kontakte vores britiske team på hverdage på:**(844) 341-7386**

Du kan sende en e-mail til os
support@thinksmartbox.com