

MEMOplanner Large 3

Brugervejledning

Generation 4

Art. No. 462885 462887

Programversion 4.1 eller nyere

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	4
1.1	Om MEMOplanner Large 3.....	4
1.2	Tiltænkt formål.....	4
1.3	Terminologi.....	4
1.4	myAbilia.....	5
1.5	Support.....	5
2	Brugerkonto og licens	6
2.1	Brugerkonto til myAbilia.....	6
2.2	Opret en myAbilia-brugerkonto via MEMOplanner.....	6
2.3	Opret en myAbilia-brugerkonto via myAbilia.....	6
2.4	Slet en brugerkonto (myAbilia).....	6
2.5	MEMOplanner-licens.....	7
3	Produktoversigt	8
4	Start MEMOplanner	9
4.1	Hvad er der i kassen?.....	9
4.2	Strømadapter.....	9
4.3	Start enheden.....	9
4.4	Opsætning af enheden.....	9
4.5	Log ind / Opret en brugerkonto.....	10
4.6	Tilføj startersættet.....	10
5	Kom i gang med MEMOplanner	11
5.1	Bestem MEMOplanners placering.....	11
5.2	Bestem om ekstra højttalere er nødvendige.....	11
5.3	Forberedelse af fjernhjælp (myAbilia).....	12
5.4	Tilpas startersættet (myAbilia).....	12
5.5	Sæt indstillinger for MEMOplanner.....	12
5.6	Bestem, om indstillingsmenuen skal være tilgængelig.....	13
5.7	Få mobilsupport med MEMOplanner Go.....	13
6	Håndtering af enheden	14
6.1	Tænd og sluk for enheden.....	14
6.2	Tilslut strømadapteren.....	14
6.3	Lyd.....	15
6.4	Skærm-timeout.....	16
6.5	Pauseskærm.....	16
6.6	Skærmens lysstyrke.....	16
6.7	Skærmlås.....	16
6.8	Internetforbindelse.....	16
6.9	Bluetooth.....	16
6.10	Dato og tid.....	16
6.11	Sprog.....	17
6.12	Tilføj billeder til MEMOplanner.....	17
7	Hurtigindstillinger	18
8	Kamera	18
9	Få oplysninger om licens og enhed	19
10	Opdatering MEMOplanner Large 3	19

Gendannelse af MEMOplanner Large 3	20
11 Installer MEMOplanner Go	20
12 Rengøring	20
13 Opbevaring og bortskaffelse	20
13.1 Opbevaring.....	20
13.2 Bortskaffelse.....	20
14 Produktspecifikationer	21
14.1 Tilbehør leveret sammen med MEMOplanner Large 3.....	21
14.2 Tekniske data.....	21
15 Vigtig information	22
15.1 Sikkerhedsdefinitioner.....	22
15.2 Sikkerhedsinstruktioner til brug.....	22
15.3 Alvorlige hændelser.....	22
15.4 Overensstemmelse med krav til medicinsk udstyr.....	22
15.5 Produktansvar.....	22
Kontaktoplysninger	23

1 Indledning

1.1 Om MEMOplanner Large 3

MEMOplanner er en digital kalender, der giver kognitiv støtte i det daglige liv.

MEMOplanner er udviklet til personer, der har brug for specifik støtte med hensyn til tid, planlægning og grafisk overskuelighed.

MEMOplanner giver dig:

- En let forståelig oversigt over dag, uge og måned
- Hjælp til at holde styr på døgnets tider
- Tid præsenteret på en enkel måde
- Tydelige og personlige påmindelser



ADVARSEL: Brug ikke produktet som den eneste støtte til medicin, medicinsk behandling eller andre vigtige aktiviteter.

MEMOplanner kan i vid udstrækning tilpasses brugerens behov og evner. Man kan bruge sine egne billeder eller de billeder, der er inkluderet i MEMOplanner. Man kan vælge, hvilke funktioner brugeren har adgang til.

Derudover kan brugeren installere appen MEMOplanner Go på sin smartphone eller tablet for at få supplerende støtte til tid og planlægning, når MEMOplanner ikke er lige ved hånden.

Ved hjælp af webservicen *myAbilia* kan støttepersoner opdatere informationerne i MEMOplanner på afstand.


Denne brugervejledning beskriver, hvordan man bruger MEMOplanner Large 3. Hvis der er behov for mere detaljeret information om en specifik funktion, se *MEMOplanner referencemanual*.

1.2 Tiltænkt formål

MEMOplanner Large 3 er en digital kalender, der er beregnet til personer, der har behov for udvidet kognitiv støtte med hensyn til tid, struktur, planlægning og grafisk overskuelighed. MEMOplanner er beregnet til brug indendørs, hjemme, i skolen eller på arbejde.

1.3 Terminologi

Denne håndbog bruger følgende terminologi.

Enhed	Den hardware, som MEMOplanner er installeret på.
Hjem-knap 	En softkey (knap) bruges til at komme til startside.
Startside	Enhedens startmenu. Du kommer altid til startskærmen, når du trykker på <i>Hjem</i> -knappen. MEMOplanner-applikationen er altid startside på MEMOplanner Large.
myAbilia	Webtjenesten til MEMOplanner og andre produkter fra Abilia. Der er forskellige kontotyper: Brugere, Støttepersoner, Administratorer.
Indstillingsmenu	En liste over de indstillinger, der kan startes via ikonet <i>Indstillinger</i> i Menu-funktionen. Indstillingsmenuen kan skjules. Betjeningsvejledning til indstillingsfunktionerne er beskrevet i <i>Indstillinger</i> . ► Navigationssti: Menu Indstillinger Kalender Generelt
Startersæt	Billedarkiv, skabeloner og tjeklister, der kan tilføjes ved det første log ind.
Bruger	Den person, der har modtaget MEMOplanner som hjælpemiddel.

1.4 myAbilia

myAbilia er en webtjeneste til MEMOplanner og andre produkter fra Abilia.

Ved at bruge myAbilia kan du:

- Administrere kalenderen, tjeklister og billedarkiv fra en webbrowser på en hvilken som helst smartphone, tablet eller computer.
- Invitere støttepersoner, der kan opdatere MEMOplanner via internettet.

Man skal have en brugerkonto på myAbilia for at kunne bruge MEMOplanner. Det er dog ikke påkrævet, at man skal bruge den aktuelle webtjeneste eller have sin enhed tilsluttet internettet (undtagen under log ind).

1.4.1 Roller i myAbilia

Man kan have forskellige kontotyper i myAbilia afhængigt af formålet. **Brugeren**, den person, der bruger hjælpemidlet, er altid i centrum. Brugeren kan have brug for hjælp fra en

støtteperson til at opdatere MEMOplanner med relevant information. Afhængigt af handlingen, kan en **administrator** være påkrævet. Det er den person, der administrerer kontoen og licenser uden at have adgang til brugerens personlige oplysninger.

Afhængig af ens rolle, vil man modtage forskellige log ind-oplysninger til myAbilia, og man vil være i stand til at udføre forskellige opgaver på webtjenesten.

Rolle	Beskrivelse	Funktioner
Bruger	Personen, der bruger hjælpemidlet. Behøver ikke at være aktiv på myAbilias webtjeneste, men skal have en konto, der er tilsluttet hjælpemidlet.	Kalender, Aktivitetsskabeloner, Timerskabeloner, Billedarkiv, Tjekliste, Profil, Licenser, Støttepersoner, Administratorer
Støtteperson	En eller flere personer, der hjælper brugeren med hjælpemidlet.	Samme som ovenfor
Administrator	Den person, der opretter og/eller administrerer brugerkontoen og licenser. Kan også være en støtteperson.	Brugerkonti: Profil, Støttepersoner, Administratorer

1.4.2 Tilpasning af myAbilia

I myAbilia, på siden *Min profil* i *Modulerne*, kan du vælge, hvilke moduler der skal vises

i myAbilia. Hvis du bruger den samme myAbilia-konto til forskellige enheder (f.eks. både MEMOplanner og Handi), kan du vælge, hvilken kalender der skal vises.

► Navigationssti: www.myabilia.com **Min profil Moduler**

1.4.3 Del myAbilia-kalender

Ved at oprette et abonnentlink (ICS) til myAbilia-kalenderen, kan den vises i andre kalenderprogrammer, såsom Outlook og Google. Instruktioner er tilgængelige på myAbilia.

1.5 Support

Abilia yder support på MEMOplanner Large 3, myAbilia webservice og appen MEMOplanner Go. Hvis du har brug for support, se *kontaktoplysninger* på sidste side i dette dokument.

2 Brugerkonto og licens

For at bruge MEMOplanner kræves en myAbilia-brugerkonto og en gyldig licens.

2.1 Brugerkonto til myAbilia

Brugerkontoen har følgende funktioner:

- Den gemmer alle brugerdata (aktiviteter, skabeloner, billedarkiv, tjeklister, indstillinger) i myAbilias opbevaring i skyen.
- Log af enheden → alle data forsvinder fra enheden.
- Log ind på appen MEMOplanner Go → alle data synkroniseres med appen.

2.2 Opret en myAbilia-brugerkonto via MEMOplanner

Følg disse trin for at oprette en myAbilia-brugerkonto:

1. Gå til log ind-siden ved enten at starte en ubrugt MEMOplanner eller ved at logge ud af den eksisterende MEMOplanner-bruger. For yderligere oplysninger, se *Referencemanualen*.
2. Klik på *Opret konto*.
3. Indtast *Brugernavn* eller *e-mailadresse* og *Adgangskode*. Bekræft adgangskoden.
4. Marker, at du har læst og accepterer Abilias Brugervilkår og Persondatapolitik.
5. Klik på *Opret konto*.

Kontoen kan bruges med det samme.

2.3 Opret en myAbilia-brugerkonto via myAbilia

2.3.1 Fritstående konto med e-mailadresse

Dette er proceduren for oprettelse af en brugerkonto, der ikke er tilknyttet en kontoadministrator:

1. Gå til www.myabilia.com og klik på *opret konto*.
2. Vælg *Bruger*.
3. Skriv navn og aktiv e-mailadresse.
4. Marker, at du har læst og accepterer Abilias Brugervilkår og Persondatapolitik.
5. Klik på *Opret konto*.

En velkomst-e-mail vil blive sendt fra myAbilia til den angivne e-mailadresse.

Vælg en adgangskode ved at klikke på linket i velkomstmailen.

2.3.2 Konto tilknyttet en administrator, med et brugernavn

Dette er proceduren, hvis du er en administrator og ønsker at oprette en brugerkonto:

1. Log ind som administrator på www.myabilia.com.
2. Gå til *Mine brugere* i menuen og vælg *Tilføj bruger*.
3. Indtast navn og vælg *Konto med brugernavn*.
4. Indtast brugernavn og adgangskode. Sæt kryds i boksen, også hvis du skal være støtteperson og beder om adgang til alle brugerens data.
5. Klik på *Opret*. Færdig!

2.4 Slet en brugerkonto (myAbilia)

For at slette en brugerkonto, skal du kontakte Abilias support. Hvis du har brug for support, se *kontaktoplysninger* på sidste side i dette dokument.

2.5 MEMOplanner-licens

MEMOplanner Large 3 har en licens, der giver adgang til myAbilia-webservice og MEMOplanner Go-appen.


Når du logger på MEMOplanner Large 3, bliver licensen knyttet til brugerkontoen. Når licensen er udløbet, vil MEMOplanner Large 3 være "offline", dvs. den vil ikke synkronisere med myAbilia, og det vil ikke være muligt at gendanne brugerdata.

En advarsel om, at licensen er ved at udløbe, vises i MEMOplanner i god tid i forvejen (3 måneder, 3 uger og 3 dage). Støttepersoner og administratorer vil modtage en e-mail-påmindelse om, at licensen er ved at udløbe og skal forlænges.

Forlængelse af licensen kan bestilles hos Abilia. Det eneste, du skal gøre, er at oplyse licensnøglen. Licensnøglen kan findes i e-mail-påmindelsen eller i MEMOplanner, se kapitel 9 *Få oplysninger om licens og enhed*.

Når licensen forlænges af Abilia, og enheden har en internetforbindelse, opdateres licensperioden i MEMOplanner.

3 Produktoversigt

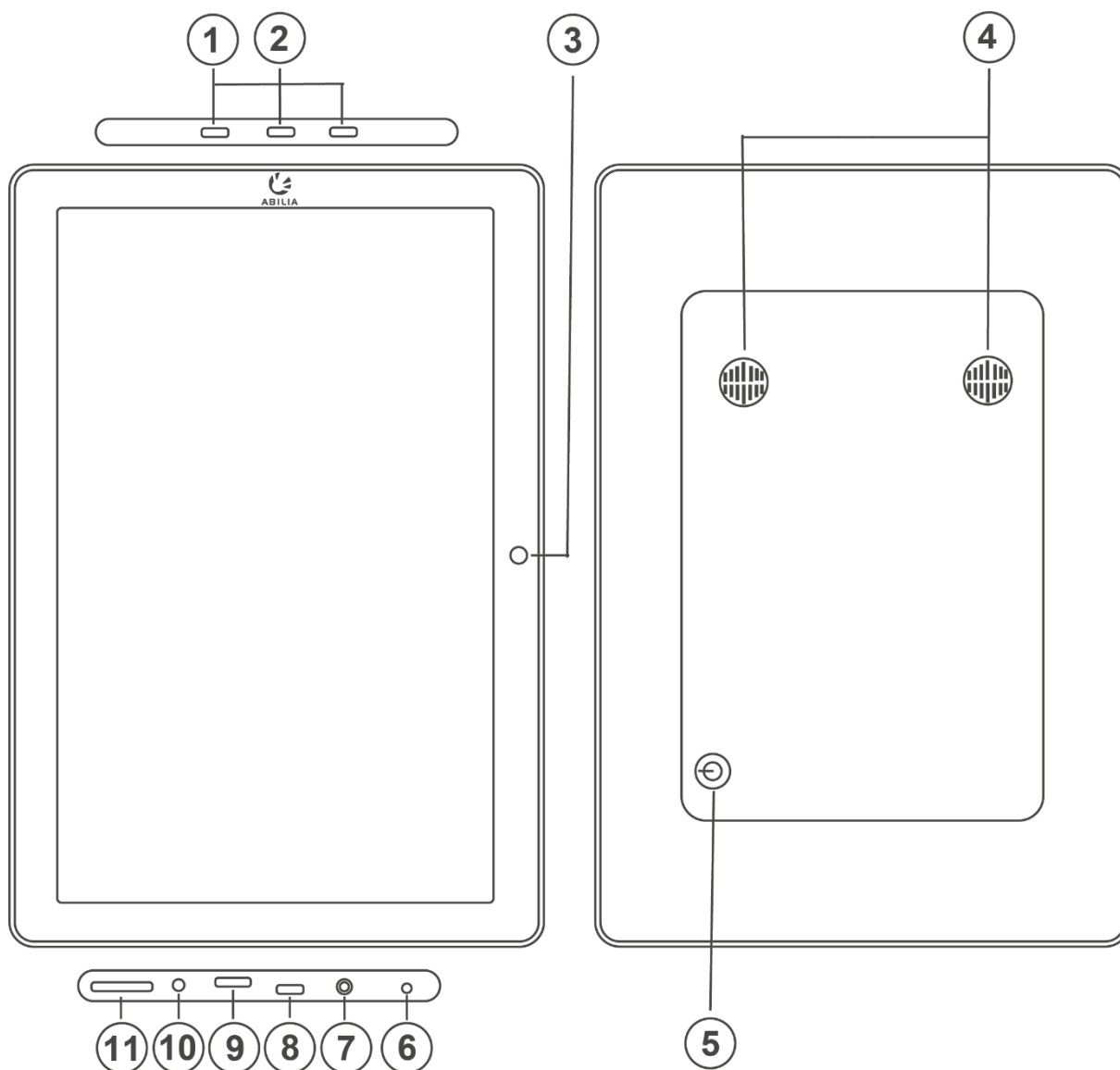

1. USB-port
2. Ethernet-port
3. Kamera (forside)
4. Højttaler
5. Tænd-/sluk knap
6. Mikrofon
7. Strømadapterstik
8. Mini USB-port
9. USB-port
10. Højttaler-/hovedtelefonstik
11. SD-kort-port

Henvisningerne i denne vejledning har formatet "(X)", hvor X henviser til et punkt på listen ovenfor.

4 Start MEMOplanner

4.1 Hvad er der i kassen?

MEMOplanner leveres med følgende dele:

- MEMOplanner Large 3
- Brugervejledning til MEMOplanner Large 3 (dette dokument)
- Strømadapter
- Introduktion Start op MEMOplanner
- Vægbeslag
- Referencemanual MEMOplanner
- Mikrofiberklud
- Hurtigguide MEMOplanner

4.2 Strømadapter

MEMOplanner Large 3 skal altid være tilsluttet strømadapteren for at fungere. MEMOplanner Large 3 vil ikke afgive alarmer for aktiviteter, hvis der ikke er tilsluttet strøm, se afsnit 6.2 *Tilslut strømadapteren*.



FORSIGTIG: Brug kun den originale strømadapter, der følger med MEMOplanner.

MEMOplanner Large 3 skal være tilsluttet strøm hele tiden for at køre. MEMOplanner Large 3 vil ikke afgive alarmer for aktiviteter, hvis den ikke er tilsluttet strøm.

1. Tilslut strømadapteren til strømadapterstikket (7) på MEMOplanner.
2. Tilslut strømkablet til strømadapteren, og tilslut det til en stikkontakt.



4.3 Start enheden

1. Start enheden ved at trykke på *tænd-/sluk knappen* (5), indtil skærmen blinker.
2. Vent et øjeblik indtil enheden starter. Derefter vil "Velkomst"-visningen blive vist.

4.4 Opsætning af enheden

Så snart enheden startes, åbnes en opsætningsvejledning, hvor man kan foretage indstillinger for enheden.

4.4.1 Opret forbindelse til Internettet

Internetforbindelse er påkrævet for at logge ind. Derefter kræver enheden ikke internetforbindelse, forudsat at fjernhjælp ikke er nødvendigt.

Vælg hvilket trådløst netværk (Wi-Fi), som enheden skal sluttes til. (Hvis Wi-Fi ikke er tilgængeligt, kan du lave et midlertidigt hotspot ved hjælp af din mobiltelefon.)

MEMOplanner Large 3 kan også tilsluttes til internettet ved at koble et netværkskabel til Ethernet-porten (2).

4.4.2 Vælg de talesyntese-stemmer, der skal installeres

Vælg om en eller flere talesyntese-stemmer skal installeres. Stemmerne kan downloades på et senere tidspunkt, se 6.3.3 *Talestøtte*. Hvis du vælger at downloade stemmerne på dette trin, behøver du ikke vente på stemmeoverførslen, det er helt i orden at fortsætte opstartsprocessen.

4.5 Log ind / Opret en brugerkonto

Indtast brugernavnet og adgangskoden til brugerens myAbilia-konto, og klik på *Log ind*.

Du kan også oprette en ny brugerkonto, se 2.2 *Opret en myAbilia-brugerkonto via MEMOplanner*.

4.6 Tilføj startersættet

Når brugerkontoen er helt ny, har man mulighed for at tilføje et startersæt, der indeholder et billedarkiv, aktivitetsskabeloner, timerskabeloner og tjeklister.

4.6.1 Billedarkiv

Der er inkluderet ca. 300 billeder i startersættet. Du kan tilpasse billedarkivet via myAbilia. Man kan f.eks. tilføje egne billeder eller tilføje flere billeder fra myAbilias billedarkiv.

4.6.2 Aktivitetsskabeloner

Aktivitetsskabeloner er forhåndsdefinerede aktiviteter, der kan bruges til at gøre det lettere og hurtigere at tilføje nye aktiviteter. I aktivitetsskabelonen kan man indsætte navn, billede, tjekliste, påmindelser etc.

Startersættet indeholder et mindre antal aktivitetsskabeloner som eksempler. Disse aktivitetsskabeloner kan ændres via myAbilia på et senere tidspunkt.

4.6.3 Timerskabeloner

Timerskabeloner er forhåndsdefinerede timere, der kan bruges til at gøre det lettere og hurtigere at starte en timer. En timerskabelon har en varighed, navn og billede (valgfrit).

Startersættet indeholder et mindre antal timerskabeloner som eksempler. Timerskabelonerne kan ændres i MEMOplanners indstillinger eller via myAbilia på et senere tidspunkt.

4.6.4 Tjeklister

Du kan knytte en tjekliste til en aktivitet. Tjeklisterne kan være nyttige, hvis du har behov for at opdele en aktivitet i flere perioder eller opgaver, f.eks. morgenrutiner eller huskelister. Tjeklisten kan oprettes direkte i aktiviteten, men du kan også vælge en fra dit tjekliste-bibliotek.

Startersættet indeholder et mindre antal tjeklister som eksempler. Tjeklisterne kan ændres via myAbilia på et senere tidspunkt.

5 Kom i gang med MEMOplanner

Nedenfor er nogle tips til, hvordan man nemt kommer i gang med MEMOplanner.

5.1 Bestem MEMOplanners placering

Placer MEMOplanner på en sådan måde, at brugeren får mest udbytte af det.

- **MEMOplanner skal have en fast placering og bør sjældent flyttes.**
Brug det medfølgende vægbeslag og monter enheden på et passende sted, se 5.1.1 *Monter væg beslaget*.
- **MEMOplanner skal have en fast placering, men skal være let at flytte.**
Brug det tilhørende *bordstativ*, og anbring MEMOplanner et passende sted.

5.1.1 Monter væg beslaget




ADVARSEL: Monter MEMOplanner korrekt. Forkert montering kan beskadige enheden eller forårsage personskade.


MEMOplanner kan monteres på en væg med det medfølgende vægbeslag. Monter vægbeslaget med en skrue, der passer til enhedens underlag. MEMOplanner skal monteres og bruges i stående skærmtilstand.

► Sådan monteres vægbeslaget:

1. Brug et vaterpas for at sikre, at MEMOplanner sidder helt lige.
Skrue vægbeslaget fast.

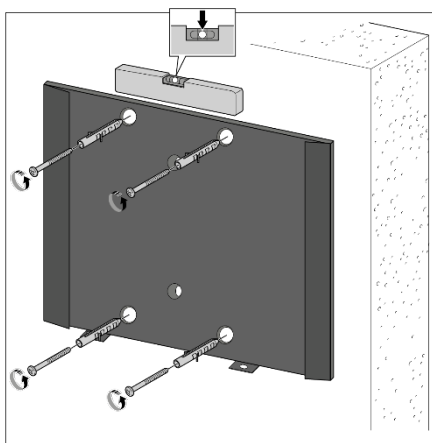

2. Fastgør MEMOplanner til vægbeslaget ovenfra.

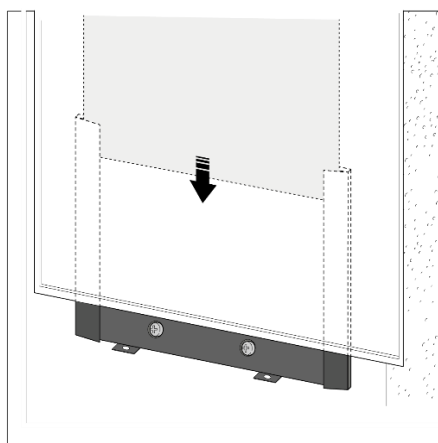

5.2 Bestem om ekstra højttalere er nødvendige

Det er vigtigt, at MEMOplanner-alarmen altid kan høres tydeligt. Afhængig af placeringen af enheden osv. kan der være behov for eksterne højttalere, se 6.3.5 *Eksterne højttalere*.

5.3 Forberedelse af fjernhjælp (myAbilia)

Fjernhjælp betyder, at en støtteperson kan opdatere MEMOplanner med relevant information eksternt, f.eks. ved at tilføje aktiviteter eller tilpasse billedarkivet. En støtteperson kan til enhver tid logge ind på myAbilias webtjeneste fra sin smartphone, tablet eller computer og foretage de ønskede ændringer.

For at MEMOplanner skal have adgang til ændringerne, skal enheden være tilsluttet internettet.

► Sådan tilføjes *støttepersoner* til brugerkontoen:

1. Åbn en webbrowser på en hvilken som helst smartphone, tablet eller computer. Log ind på din brugerkonto på www.myabilia.com.
2. Klik på fanen med tandhjul og vælg funktionen *Støttepersoner*.
3. Klik på *Inviter støtteperson*.
4. Indtast støttepersonens e-mailadresse. Klik på *Inviter*.
5. Så sender myAbilia en velkomstmil til støttepersonen.

Læs mere om myAbilia i kapitel 1.4 *myAbilia*.

5.4 Tilpas startersættet (myAbilia)

I forbindelse med opstart af MEMOplanner kan man vælge at tilføje startersættet, se 4.6 *Tilføj startersættet*.

Meget af indholdet i startersættet er blot eksempler, og det kan derfor være nødvendigt at tilpasse det til brugeren. Dette gøres via myAbilia.

Procedure for tilpasning af startersættet:

1. Åbn en webbrowser på en hvilken som helst smartphone, tablet eller computer. Log ind på din brugerkonto på www.myabilia.com.
2. Klik på ikonet *Billedarkiv* for at tilpasse billedarkivet.
3. Klik på ikonet *Standardaktiviteter* for at tilpasse de basale aktiviteter og aktivitetsskabelonerne.
4. Klik på ikonet *Standardtimere* for at tilpasse timerskabelonerne.
5. Klik på ikonet *Tjekliste* for at tilpasse de tjeklister, der skal forbindes til aktiviteterne i MEMOplanner.

5.5 Sæt indstillinger for MEMOplanner

MEMOplanner kan i høj grad tilpasses efter brugerens behov og evner. Alle indstillinger foretages via indstillingsmenuen.

► Navigationssti: **Menu|Indstillinger**

Her er nogle eksempler på, hvad brugeren skal overveje, når MEMOplanner sættes op:

- Hvilken startside skal bruges, dag, uge, måned, menu, fotokalender?
- Hvordan skal dagkalenderen vises, tidslinje eller liste?
- Hvor meget af dagen skal vises i dagkalenderen?
- Skal brugeren selv kunne slette eller ændre aktiviteter?
- Hvilken alarmlyd skal anvendes som standardindstilling?
- Skal dagfarver vises i kalenderen?
- Hvilke funktioner skal vises i menuen?

MEMOplanner Referencemanual beskriver, hvordan man sætter de forskellige indstillinger op.

5.6 Bestem, om indstillingsmenuen skal være tilgængelig

Nogle gange kan det være bedst at hindre brugerens adgang til indstillingsmenuen. Det kan man gøre på flere måder:

1. **Skjul ikonet Indstillinger i menuen.**

Gå til *Menu*-indstillinger og deaktiver *Indstillinger*. Nu kan indstillinger kun åbnes ved at trykke venstre - højre - venstre under kategorisymbolerne i dagkalenderen. Hvis du har valgt at skjule kategorierne, tryk venligst på den tilsvarende overflade.

► Navigationssti: **Menu|Indstillinger|Menu**

2. **Beskyt indstillingsmenuen med en kode.**

Gå til *Kodebeskyttelse* og aktiver kodebeskyttelse, og vælg en firecifret kode efter eget valg.

► Navigationssti: **Menu|Indstillinger|System|Kodebeskyttelse**

5.7 Få mobilsupport med MEMOplanner Go

Som et supplement til MEMOplanner Large 3 kan brugeren få mobilsupport med appen MEMOplanner Go på deres egen smartphone eller tablet.

Se kapitel 11 *Installer MEMOplanner Go*.

6 Håndtering af enheden



FORSIGTIG: Brug ikke skarpe genstande på produktet.

6.1 Tænd og sluk for enheden

Ved normal brug skal MEMOplanner Large 3 altid være tændt.

MEMOplanner Large 3 tændes og slukkes ved at trykke på *tænd-/sluk knappen* (5). Ved at trykke på tænd/sluk-knappen slukkes skærmen, og enheden kan fortsætte med at arbejde i dvaletilstand.

Når enheden er i dvaletilstand, tændes den automatisk, hvis en alarm aktiveres.

For at **slukke enheden helt**, skal man holde *tænd-/sluk knappen* nede, indtil den alternative menu vises. Hvis man trykker på *Sluk knappen*, slukkes enheden helt.

BEMÆRK: Hvis MEMOplanner er slået helt fra, kommer der ingen alarmlyde.

For at genstarte MEMOplanner skal du trykke på *tænd-/sluk knappen* igen, indtil skærmen blinker. Så genstarter enheden.

6.2 Tilslut strømadapteren



FORSIGTIG: Brug kun den originale strømadapter, der følger med MEMOplanner.

MEMOplanner Large 3 skal være tilsluttet strøm hele tiden for at køre. MEMOplanner Large 3 vil ikke afgive alarmer for aktiviteter, hvis den ikke er tilsluttet strøm.

1. Tilslut strømadapteren til strømadapterstikket (7) på MEMOplanner.
2. Tilslut strømkablet til strømadapteren, og tilslut det til en stikkontakt.



6.3 Lyd


6.3.1 Lydstyrke

Lydstyrken ændres via funktionen *Hurtigindstillinger*, se kapitel 7 *Hurtigindstillinger*.

6.3.2 Alarmindstillinger

Alarmlyden for forskellige typer aktiviteter, påmindelser og timere kan indstilles via *Alarmindstillinger*. Det er også muligt at indstille, hvor længe alarmen skal vare, før eventuelle talte beskeder afspilles.

► Navigationssti: **Menu|Indstillinger|Kalender|Alarmindstillinger**

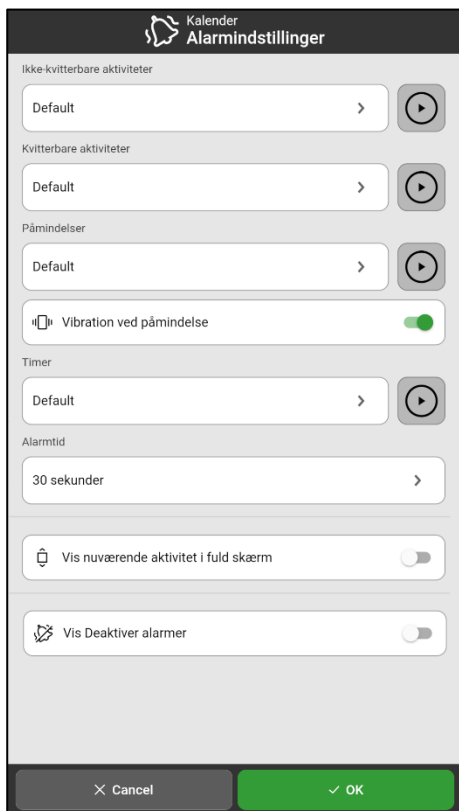

Følgende alarmindstillinger kan indstilles:

<i>Ikke-kvitterbare aktiviteter</i>	Tryk for at vælge en ønsket standardalarmlyd for aktiviteter, der ikke kræver bekræftelse.
<i>Kvitterbare aktiviteter</i>	Tryk for at vælge en ønsket standardalarmlyd for aktiviteter, der kræver bekræftelse.
<i>Påmindelser</i>	Tryk for at vælge en ønsket standardalarmlyd for påmindelser.
<i>Vibration ved påmindelse</i>	Aktiver, hvis enheden skal vibrere. (Enheden skal have vibration)
<i>Timer</i>	Tryk for at vælge den ønskede standardalarmlyd for timeren.
<i>Alarmtid</i>	Tryk for at vælge, hvor længe en alarm skal vare, hvis den ikke aktivt er slået fra.
<i>Vis igangværende aktivitet i fuld skærm</i>	Bestem ved aktivering om alarmvisningen skal lukke automatisk, når tiden er udløbet. Hvis du har flere aktiviteter på samme tid, vises de som thumbnails i bunden.
<i>Vis deaktiver alarmer</i>	Aktiver, hvis funktionen <i>Deaktiver alarmer</i> skal vises på alle hovedskærme. Når den er aktiveret, vil alle alarmer på enheden være deaktiveret indtil kl. 23:59 samme dag.

6.3.3 Talestøtte

Indstillinger for talestøtte foretages via *systemindstillingerne*. Her kan du også downloade stemmer til talesyntesen.

► Navigationssti: **Menu|Indstillinger|System|Talestøtte**

6.3.4 Kliklyd

Via *Hurtigindstillinger* kan du vælge, om du vil høre en kliklyd, når du for eksempel trykker på knapper, se kapitel 7 *Hurtigindstillinger*.

► Navigationssti: **Menu|Hurtigindstillinger**

6.3.5 Eksterne højttalere

Det er vigtigt, at MEMOplanner-alarmerne altid kan høres ordentligt. Afhængig af f.eks. enhedens placering kan der være behov for eksterne højttalere. Vælg en af følgende:

- Højttalere med kabel, tilsluttet via enhedens hovedtelefonstik (10). De skal have deres egen strømforsyning.
- Trådløse højttalere (Bluetooth), se kapitel 6.9 *Bluetooth* for at finde ud af, hvordan du kan tilslutte en Bluetooth-højttaler til enheden.

6.4 Skærm-timeout

MEMOplanner Large 3 er som standard indstillet til altid at have skærmen tændt. Det anbefales ikke at ændre denne indstilling, da det er svært at få adgang til tænd/sluk-knappen på bagsiden for at tænde skærmen igen. Om nødvendigt kan denne indstilling ændres i Android-indstillingerne.

6.5 Pauseskærm

Du kan vælge, om du vil have en pauseskærm. Når pauseskærmen er valgt, vises tid og dato på en mørk baggrund efter 1, 5 eller 10 minutter. Pauseskærmen fjernes (midlertidigt), hver gang du trykker på skærmen. Det er muligt at indstille pauseskærmen, så den kun er aktiveret om natten.

► Navigationssti: **Menu|Indstillinger|Funktioner|Timeout|Aktivér pauseskærm**

6.6 Skærmens lysstyrke

Via *Hurtigindstillinger* kan du justere skærmens lysstyrke. Lysstyrken dæmpes automatisk om aftenen.

► Navigationssti: **Menu|Hurtigindstillinger**

6.7 Skærmlås

Vi anbefaler kraftigt ikke at bruge skærmlås, da det kan gøre det svært at få adgang til og bruge MEMOplanner.

BEMÆRK: Hvis du vælger at aktivere skærmlås og glemmer adgangskoden, kan Abilia Support ikke løse problemet, og enheden skal nulstilles til fabriksindstillinger.

6.8 Internetforbindelse

Via *hurtigindstillinger* kan du oprette forbindelse til trådløse netværk og se forbindelsesstatus.

► Navigationssti: **Menu|Hurtigindstillinger**

6.9 Bluetooth

For at tilslutte en Bluetooth-højttaler (eller et headset) skal du aktivere *Bluetooth*.

► Navigationssti: **Menu|Indstillinger|System|Android-indstillinger|Forbundne enheder|Forbindelsepræferencer|Bluetooth**

1. Sæt Bluetooth-højttaleren til "parringstilstand" (se højttalerens brugervejledning). De tilgængelige enheder vises på en liste.
2. Tryk på navnet for den enhed, du vil oprette forbindelse til, hvorefter højttaleren tilsluttes enheden.

Højttaleren vil nu virke med MEMOplanner, f.eks. når der afspilles en alarm. Næste gang du tænder for højttaleren og aktiverer Bluetooth, finder enhederne automatisk hinanden.

Når du bruger Bluetooth-højttalere, skal du muligvis slukke for enhedens egen lyd for at undgå et ekko under afspilning.

6.10 Dato og tid

Dato, tid og tidszone kan indstilles i Android-indstillingerne.

► Navigationssti: **Menu|Indstillinger|System|Android-indstillinger|System|Dato og klokkeslæt**

Det anbefales at beholde indstillingen på *Automatisk dato og tid*, som gør det muligt, at oplysningerne om dato, tid og tidszone bliver opdateret automatisk via netværket. Så vil uret altid vise det korrekte tid, og sommertid vil altid fungere.

Normalt er *Automatisk dato og tid* valgt. Men hvis det ikke fungerer korrekt, skal man indstille dato og tid manuelt.

BEMÆRK: Tidszonen for Danmark skal være GMT+01:00 centraleuropæisk tid.

6.11 Sprog

Det er muligt at ændre sproget på enheden.

► Navigationssti: **Menu|Indstillinger|System|Android-indstillinger|System|Sprog og indtastning**

Sådan vælger du et sprog:

1. Under *Sprog* skal man vælge *Tilføj et sprog* og vælge det ønskede sprog.
2. Træk og slip det nye sprog, så det ender øverst på listen.

MEMOplanner understøtter følgende sprog: Svensk, norsk, dansk, finsk, engelsk, tysk og hollandsk.

■ **BEMÆRK:** Hvis man vælger et sprog, der ikke er understøttet, vil MEMOplanner være på engelsk.

6.12 Tilføj billeder til MEMOplanner

Der er forskellige måde at tilføje billeder til MEMOplanner.

6.12.1 Tag billeder med det indbyggede kamera


Se 8 Kamera.

6.12.2 Tilføj billeder via myAbilia

Log ind på www.myabilia.com og tilføj de ønskede billeder til billedarkivet.

6.12.3 Tilføj billeder via MEMOplanner Go

Upload dine egne billeder til billedarkivet via MEMOplanner Go-appen ved at gøre følgende:


1. Tryk på *Mine fotos* fra menu funktionen.
2. Tryk på knappen Tilføj .
3. Tryk på Enhedens *lokale billeder*, og vælg det billede, du vil uploade.
Billedet vil blive tilføjet *Mine fotos*.

Se *referencemanualen* for mere information om billedvælgerens indstillinger.

7 Hurtigindstillinger

Fra *Hurtigindstillinger* kan du vælge standardindstillinger for enheden.

► Navigationssti: **Menu|Hurtigindstillinger**

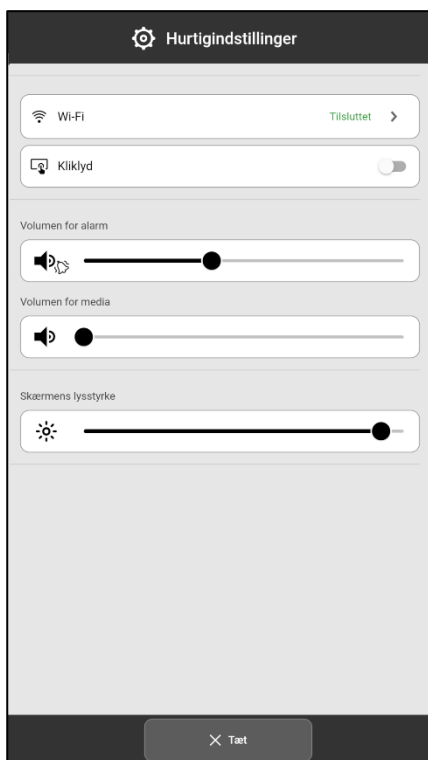

- *Wi-Fi.*
Her kan du se, om MEMOplanner er tilsluttet Wi-Fi. Her kan du også vælge fra andre tilgængelige netværk.
- *Kliklyd.*
Til/Fra. Der afgives en markant lyd, når man trykker på områder på skærmen, der kan klikkes.
- *Lydstyrken for alarm.*
Lydstyrkeniveau for alarmer.
- *Lydstyrken for medier.*
Lydstyrkeniveau for talestøtte.
- *Skærmens lysstyrke.*
Træk skyderen for at indstille, hvor lys skærmen skal være.

8 Kamera

Det indbyggede kamera giver dig mulighed for at tage dine egne billeder, som du derefter kan bruge til at symbolisere forskellige aktiviteter, eller tilføje som billeder af personer.

► Navigationssti: **Menu|Kamera**


Når du tænder for *Kamera*, vises søgevisningen. Det kan holdes vandret eller lodret.

 Tryk på knappen *Optag* for at tage et billede.

Zoom ved at trække to fingre væk fra hinanden på skærmen.

Der gives tre valg, når du har taget billedet:

- *Tilbage* → Tryk for at tage et nyt billede.
- *Gem* → Tryk for at gemme billedet.
- *Luk* → Tryk for at lukke kameraet uden at gemme billedet.

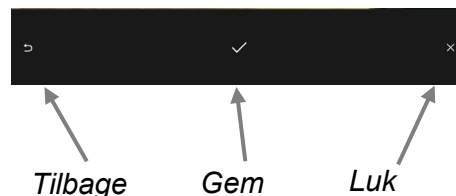


BEMÆRK: Afhængigt af hvilken funktion kameraet bruges til, vil billedet blive gemt i forskellige mapper i billedarkivet.

- Tilføj aktivitet eller timer → Billedet gemmes i *Mobilbilleder*.
- Kamerafunktion → Billedet gemmes i *Mine fotos*.

9 Få oplysninger om licens og enhed




På menu siden, nederst til højre lige over værktøjslinjen, finder du et info-ikon.

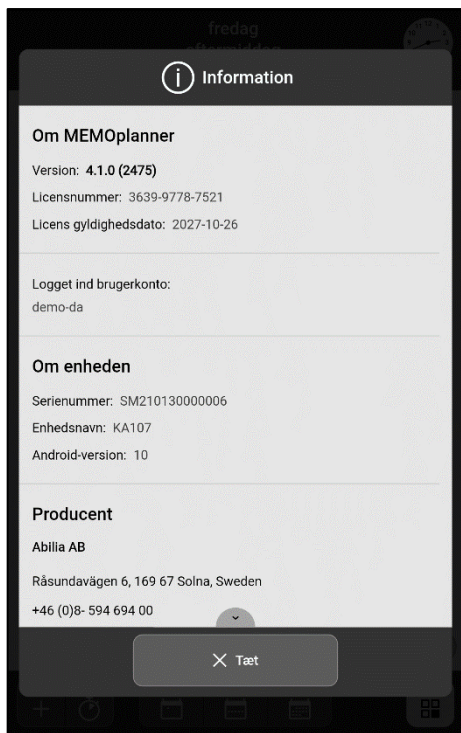

Tryk på info-ikonet, og følgende information om MEMOplanner vises:

- MEMOplanner version
- Licensnummer
- Licensens udløbsdato
- Den brugerkonto, der er logget på
- Enhedens serienummer
- Enhedens navn
- Producentoplysninger

10 Opdatering MEMOplanner Large 3

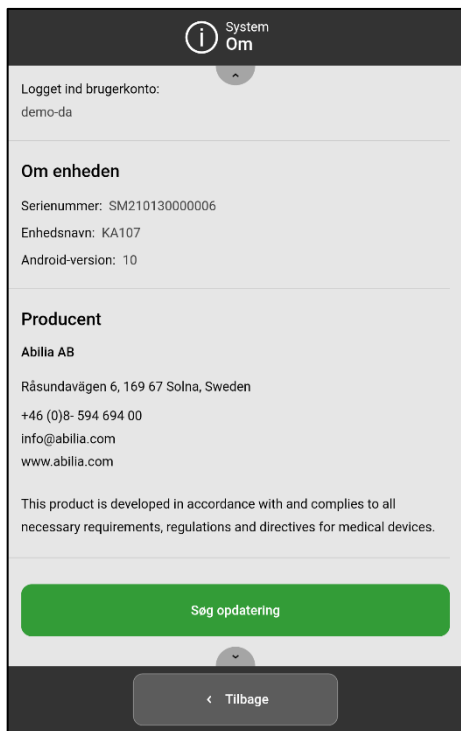

Når MEMOplanner Large 3 er forbundet til internettet, opdateres den automatisk, hver gang der er en ny softwareversion tilgængelig.

Hvis den ved normal brug ikke er forbundet til internettet, anbefales det at opdatere softwaren manuelt med jævne mellemrum.


► Navigationssti: **Menu|Indstillinger|System|Information**

Sådan søger du efter opdateringer:

1. Tryk på den grønne *Søg efter opdatering*-knap.
2. Du vil blive omdirigeret til Google Play.
3. Tryk på *Opdater* på Google Play-siden for at starte opdateringen.
4. Vent, indtil MEMOplanner er opdateret.
5. Tryk på *Åbn* for at vende tilbage til MEMOplanner.

Gendannelse af MEMOplanner Large 3

Gør følgende for at fjerne alle personlige oplysninger og indstillinger fra MEMOplanner Large 3:

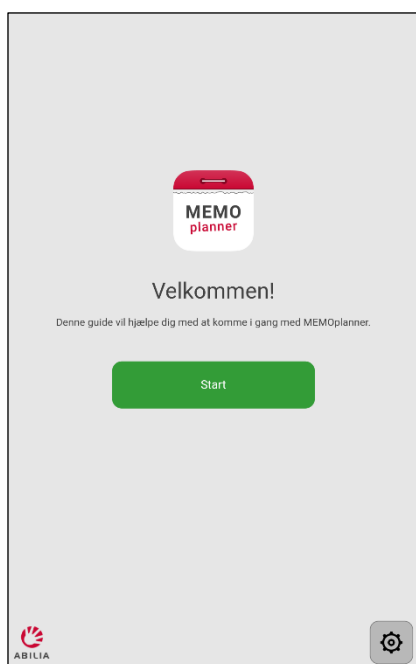

1. Fjern eventuelle adgangskodebeskyttede indstillinger.
2. Log ud af brugerkontoen *.
3. Tryk og hold ABILIA-logoet i nederste venstre hjørne af log ind-visningen nede, indtil et pop op-vindue vises. Nu vises en meddelelse om, at du er ved at nulstille MEMOplanner.
4. Tryk på *JA* for at bekræfte, at du vil nulstille enheden.

MEMOplanner er nu gendannet, og opsætningsguiden vises.

* Se *referencemanualen* for mere information.

11 Installer MEMOplanner Go

Som et supplement kan du bruge *MEMOplanner Go-appen* på en iOS- eller Android-baseret enhed såsom en smartphone eller tablet.

Sådan installeres MEMOplanner Go:

1. Download appen *MEMOplanner Go* gratis på App Store eller Google play.
2. Log ind med brugerkontoen fra MEMOplanner.

Appen er indstillet med samme indstillinger som den bruger, der er logget ind i MEMOplanner Large 3.

12 Rengøring

Før rengøring skal du afbryde alle ledninger og slukke for MEMOplanner. Rengør med en blød klud fugtet med vand. Brug ikke flydende eller spraybaserede rengøringsmidler, der kan indeholde brandfarlige stoffer.

13 Opbevaring og bortskaffelse

13.1 Opbevaring

Opbevar produktet indendørs ved stuetemperatur og hold det væk fra fugt.

13.2 Bortskaffelse

Dette produkt indeholder elektriske komponenter, der skal genanvendes ved slutningen af produktets levetid. Indlever det på et genbrugscenter for elektrisk affald.



14 Produktspecifikationer

14.1 Tilbehør leveret sammen med MEMOplanner Large 3

Navn	Beskrivelse	Antal
MEMOplanner Large 3	Android-baseret tablet, KA248-B	1 stk.
Strømadapter inkl. strømkabel		1 stk.
Vægbeslag	VESA standard	1 stk.
Mikrofiberklud		1 stk.
Manualer	Brugervejledning MEMOplanner Large 3 (dette dokument), Introduktion Start op MEMOplanner Referencemanual MEMOplanner Hurtigguide MEMOplanner	4 stk.

For mere information om MEMOplanner Large og tilbehøret, gå til [MEMOplanner Large 3 - www.abilia.com](http://www.abilia.com) eller scan QR-koden.



14.2 Tekniske data

Hovedtelefon:	3,5 mm
Strømadapter:	Indgang: AC 100-240V; Udgang: DC 12 V/3A
Kamera:	5 Megapixel
Skærm:	23,6 tommer, 1920 x 1080 opløsning
Android-version:	9,0
Størrelse (H x B x D):	595 x 363 x 43 mm
Vægt:	4,66 kg
Anvendelsesområde:	Indendørs, 0 til 40 °C
Indgange:	3 USB, 1 mini USB, 1 hovedtelefon, 1 SD-kort, 1 Ethernet, 1 strøm.
Netværk	802.11b/g/n 2.4GHz
Anslået levetid	5 år

15 Vigtig information

Før du bruger produktet, skal du læse og forstå indholdet af denne brugervejledning.

15.1 Sikkerhedsdefinitioner



ADVARSEL: Risiko for personskade eller dødsfald, hvis instruktionerne ikke følges.



FORSIGTIG: Risiko for beskadigelse af produktet, hvis instruktionerne ikke følges.

BEMÆRK: Oplysninger, der er nødvendige i en given situation.

TIP: Yderligere oplysninger, der kan forbedre brugen af produktet.

15.2 Sikkerhedsinstruktioner til brug

Læs nedenstående advarsel, før du bruger produktet.



ADVARSEL: Brug ikke produktet som den eneste støtte til medicin, medicinsk behandling eller andre vigtige aktiviteter.



ADVARSEL: Monter MEMOplanner korrekt. Forkert montering kan beskadige enheden eller forårsage personskade.



FORSIGTIG: Brug ikke skarpe genstande på produktet.



FORSIGTIG: Brug kun den originale strømadapter, der følger med MEMOplanner.

15.3 Alvorlige hændelser

Hvis der indtræffer en alvorlig hændelse i forbindelse med produktet, skal dette rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i dit land. En hændelse anses for alvorlig, hvis den direkte eller indirekte har medført eller kunne have medført en patients, brugers eller en anden persons død, midlertidig eller permanent alvorlig forværring af en patients, brugers eller en anden persons helbredstilstand eller en alvorlig trussel mod folkesundheden.

15.4 Overensstemmelse med krav til medicinsk udstyr

MEMOplanner Large markedsføres som et teknisk hjælpemiddel til personer med handicap. Den overholder alle nødvendige krav, forordninger og direktiver for medicinsk udstyr.

15.5 Produktansvar

Produktet er udviklet og risikovurderet i henhold til ISO 14971. Vejledningen og de tekniske specifikationer er lavet i henhold til sikkerhedsvurderingerne i risikoanalysen. Tag altid højde for sikkerheden ved anvendelse af produktet. Abilia AB er ikke ansvarlig for konsekvenser som følge af forkert brug eller installation af produktet. Enhver form for beskadigelse eller manipulation af produktet gør garantien ugyldig og producentens ansvar fraskrives. Produktets estimerede levetid gælder, når det anvendes i overensstemmelse med dets tilsigtede brugs- og vedligeholdelsesinstruktioner.

Kontaktoplysninger

Sverige

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige
Telefon +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se

Norge

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norge
Telefon +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no

Storbritannien

Abilia UK Ltd, Unit12 Buckingway Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, Storbritannien
Telefon +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk

International

www.abilia.com/intl/abilias-world/distributors

CE

462885_Brugervejledning_MEMOplanner Large 3 Gen4_DK Jan 2023



Abilia AB, Råsundavägen 6, Solna, Sweden
Telefon +46 (0)8-594 694 00 | info@abilia.se | www.abilia.se



ABILIA