

MEMOmini

Varenr : 402580



Indhold

Introduktion	2
Beskrivelse	3
MEMOmini leveres med	3
Hørepropper	3
Halssnor	3
Knapper på MEMOmini	3
Lysdiode	3
Ind- og udgange	4
Lav batterispænding	4
Opladning af MEMOmini	4
Til/fra	4
Funktioner	4
Oplæsning af tid	4
Påmindelse	5
Volumenindstilling	5
At stille uret	5
Rengøring	6
Tekniske data	6
Sikkerhed og ansvar	7
Miljø	7

Introduktion

MEMOmini er et talende ur med påmindelse-funktion.



MEMOmini er udviklet i samarbejde med brugere og fagpersoner inden for områderne demens, udviklingshæmning, erhvervet hjerneskade og psykiatri i Norge og Sverige. MEMOmini er også udviklet med støtte fra Norges Forskningsråd.

MEMOmini kan bidrage til at gøre hverdagen lettere for personer med nedsat kognitiv funktion.

Beskrivelse

MEMOmini leveres med

- Bæltetaske
- Hørepropper
- Snor til at bære MEMOmini om halsen
- Strømforsyning
- Brugervejledning


Hørepropper

Hørepropperne bruges, når man ønsker diskret oplæsning af tid. Når hørepropperne er koblet til, vil oplæsningen kun kunne høres i dem – ikke i højttaleren. At tage hørepropperne på kan også være en måde at "slukke" MEMOmini på. MEMOmini kan også slukkes ved at holde begge volumenknapperne nede samtidig i to sekunder – det er beskrevet mere udførligt andetsteds i vejledningen.

Halssnor

Halssnoren sættes fast i toppen af MEMOmini, hvis man ønsker at have den om halsen, i stedet for i tasken.

Knapper på MEMOmini

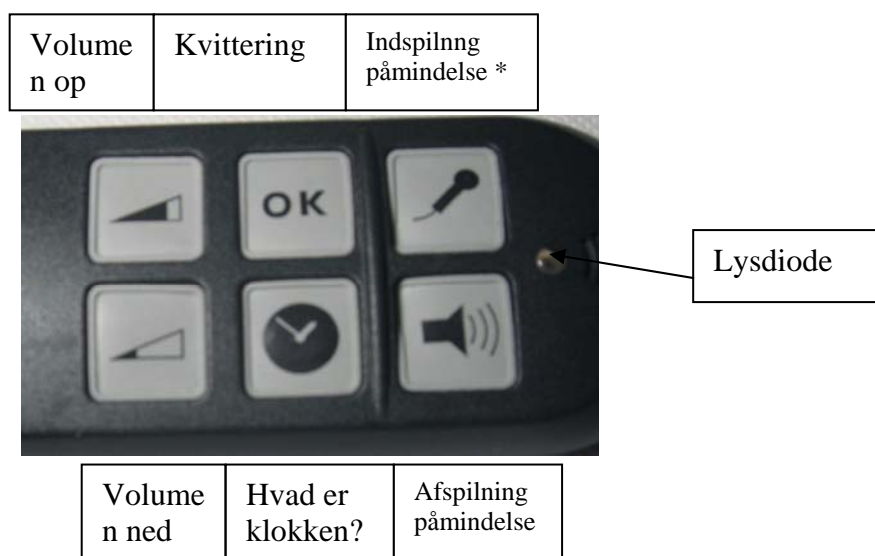


* Påmindelse indspilles direkte på MEMOmini (samme funktion som en diktafon).

Lysdiode

Indikation	Funktion
Fast gul	Opladning
Fast grøn	100 pct. opladet
Blinkende gul	Indspilning af påmindelse
Blinkende gul	Sletning af påmindelse

Ind- og udgange

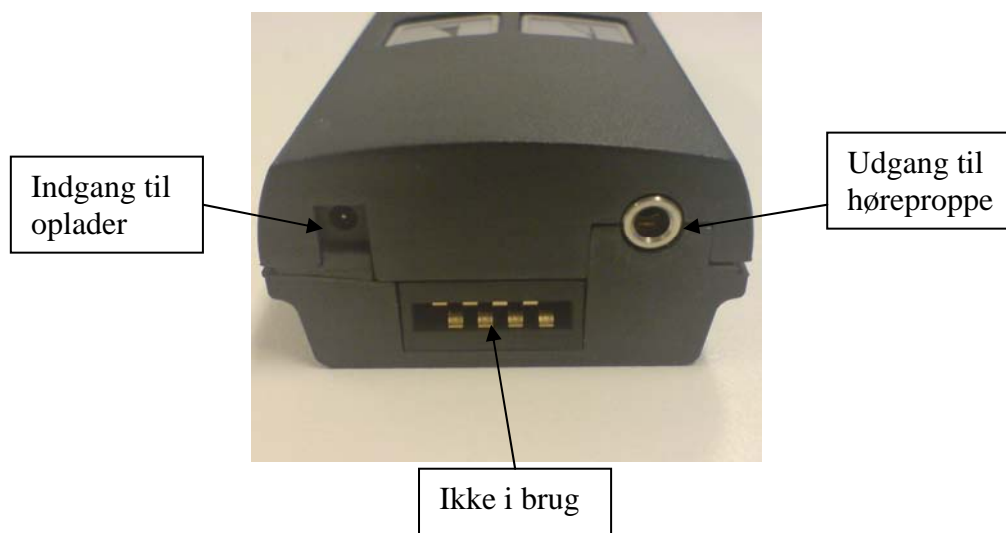

Lav batterispænding

Når der er 10 % eller mindre restkapacitet i batterierne, kommer meddelelsen ”*Memo skal lades op*” hver time.

Opladning af MEMOmini

MEMOmini har et opladeligt batteri og oplades med strømforsyningen, som følger med. Opladningstid fra tomt til fuldt opladet batteri er 4 timer.

Til/fra

MEMOmini slukkes ved at trykke på tasterne *Volumen op* og *Volumen ned* samtidig i 2 sekunder. Den tændes igen ved at trykke på en hvilken som helst tast.

Funktioner

Oplæsning af tid

Når *Urtasten* trykkes ned, læses tiden op i følgende format:

”*Klokken er to over halv tre, det er torsdag nat den fjerde juni to tusind og otte*”

Hvis man trykker *OK* under oplæsning af tid, standser oplæsningen straks.

- **Indspilning**

Ny påmindelse indspilles ved at holde *mikrofontasten* nede i 2 sekunder. Efter 2 sekunder begynder den gule lysdiode at blinke (medmindre al hukommelsen er brugt), og indspilningen starter. Lysdioden blinker under indspilningen, så længe tasten holdes nede, eller til al hukommelsen er brugt. Når hukommelsen er opbrugt, siger MEMOmini ”Hukommelsen er fuld”.

- **Afspilning af indlæste påmindelser**

Trykkes *højttaletasten* ned, afspilles indlæste påmindelser. Rækkefølgen er altid den nyeste påmindelse først og den ældste sidst. Man bladrer i påmindelserne ved at trykke *højttaletasten* ned senest 5 sekunder efter, at påmindelsen er læst færdig. Hvis tasten trykkes ned, før en påmindelse er læst færdig, afbrydes oplæsningen, og næste påmindelse læses op (hurtig spoling).

Kun indlæste påmindelser bliver afspillet (ikke tid eller nummer på påmindelsen). Når der ikke er flere påmindelser, og tasten trykkes ned, siger MEMOmini ”*Pling*”.

Trykker man *OK* under afspilningen, standser talen straks.

Påmindelse

MEMOmini har 10 påmindelser. Påmindelserne er ikke knyttet til et bestemt tidspunkt. Vælger man ti påmindelser, vil den 11. påmindelse overskrive den første.

- **Indspilning**

Ny påmindelse indspilles ved at holde *mikrofontasten* nede i 2 sekunder. Efter 2 sekunder begynder den gule lysdiode at blinke, og indspilningen starter. Lysdioden blinker under indspilningen, så længe tasten holdes nede. Det er 26 minutters taletid til rådighed.

- **Afspilning**

Når *højtalertasten* trykkes ned, afspilles den sidst indlæste påmindelse. Trykkes *højtalertasten* ned påny inden 5 sekunder, afspilles den næstsidste påmindelse. Er der ikke lagret nogen påmindelse, siger produktet ”*Pling*”. Trykker man *OK* under afspilningen, standser afspilningen af påmindelsen.

- **Sletning**

Sletning af en påmindelse sker ved at trykke *OK* i 2 sekunder inden 5 sekunder efter afspilning af en påmindelse. Sletningen vises ved, at den gule lysdiode blinker, og der kommer en talemædelelse ”*Meddelelsen er slettet*”. Det er ingen fortryd-funktion.
OBS! Ved indspilning af påmindelse nummer 11 vil nummer 1 automatisk blive slettet. Der kommer ingen advarsel om dette.

Volumenindstilling

Volumenindstilling på MEMOmini sker altid ved at trykke på tasterne *Volumen op* eller *Volumen ned*. Volumenkontrollen har fem trin, og indstillingerne gemmes. Det er ikke muligt at sætte volumen til nul. Volumenindstillingen er fælles for højtaleren i MEMOmini og høreprop.

Et tryk på volumetasterne udløser et ”*Pling*” med det lydniveau, man har valgt.

At stille uret

Tryk på og hold *Urtasten* nede i 10 sekunder. Efter 10 sekunder begynder indstillingen af uret ved, at årstallet først stilles. MEMOmini siger først årstallet for at indikere, at det kan ændres.

Følgende taster benyttes til at stille uret:

OK: Starter næste indstilling og siger værdien på denne indstilling. Starter med årstal, derefter måned, dato, timer og minutter. Når tasten trykkes ned under indstilling af minutter, afsluttes programmeringen og uret opdateres.

Volumen op og ned: Øger og mindsker indstillingsværdien og siger værdien.

Urtasten: Afslutter programmeringen uden at opdatere uret.

Eksempel på tale ved indstilling af datoen 02.03.2009 og af tidspunktet 15:45:

Indstillings- sekvenser:	Talemeddelelse:
Årstal	<i>To tusind og ni</i>
Måned	<i>Marts</i>
Dato	<i>Anden marts</i>
Timer	<i>Klokken femten</i>
Minutter	<i>Klokken femten femogfyrre</i>

Rengøring

MEMOmini kan gøres ren med en klud, der er *let fugtet* i sæbevand, men den må ikke nedsænkes i væske. Slå strømtilførslen fra under rengøring.

Tekniske data

- Vægt: 115g
 - Mål: 123x50x26 mm
 - Taletid: 26 minutter
 - Batteri: 3.6V LiIo 600 mAt (batteriskifte skal ske hos leverandøren)
 - Opladningstid fra tomt batteri til fuldt ladet: 4 timer
 - Forbrug standby; 380 μ A. Det betyder en teoretisk standbytid på 2 måneder
 - Aktiv, middel lydniveau: Typisk 290 mA. Det betyder en teoretisk taletid på ca. 2 timer
 - Aktiv, højt lydniveau: Typisk 360 mA. Det betyder en teoretisk taletid i overkanten af 1.5 timer
- Strømforsyning: 12V 0.8A

Sikkerhed og ansvar

Falck Igel AS har udarbejdet en risikoanalyse for produktet i henhold til NS-EN 1441 for Medicinsk utstyr. Produktets brugervejledning og tekniske specifikationer er udarbejdet med henblik på sikkerhedsvurderingerne i dette dokument.

Ved ibrugtagning og daglig brug af produktet er det altid vigtigt at tænke på sikkerheden. Det er i en brugervejledning ikke muligt at beskrive alle de måder, man ikke må bruge produktet på. Hvis du er i tvivl, om du har taget produktet i brug på den rigtige måde eller indstillet det korrekt, anbefaler vi, at du kontakter din leverandør.

Vær specielt opmærksom på, at selv om MEMOmini giver besked om at udføre handlinger (påmindelser), er det ikke nogen garanti for, at handlingerne bliver udført. MEMOmini må derfor ikke bruges som den eneste måde at give beskeder på i de tilfælde, hvor der kan opstå skade, hvis handlingen ikke udføres eller udføres flere gange. Vær specielt forsigtig med meddelelser, som indebærer brug af medicin. Falck Igel AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader, følgeskader eller tab som følge af brug, forkert brug, manglende opfølgning, forkert indstilling, tilkobling eller lignende. Falck Igel AS' økonomiske ansvar er i alle tilfælde begrænset til værdien af selve produktet.

Miljø

Yderemballagen skal recirkuleres som papiraffald.

Inderemballagen skal recirkuleres som plastaffald.

Produktet skal recirkuleres som elektronikaffald, når det skal kasseres. Det kan leveres til alle udsalgssteder, som sælger elektronikprodukter, til din leverandør, eller på kommunale opsamlingspladser.



