


Menufunktionerne



MEMOactive

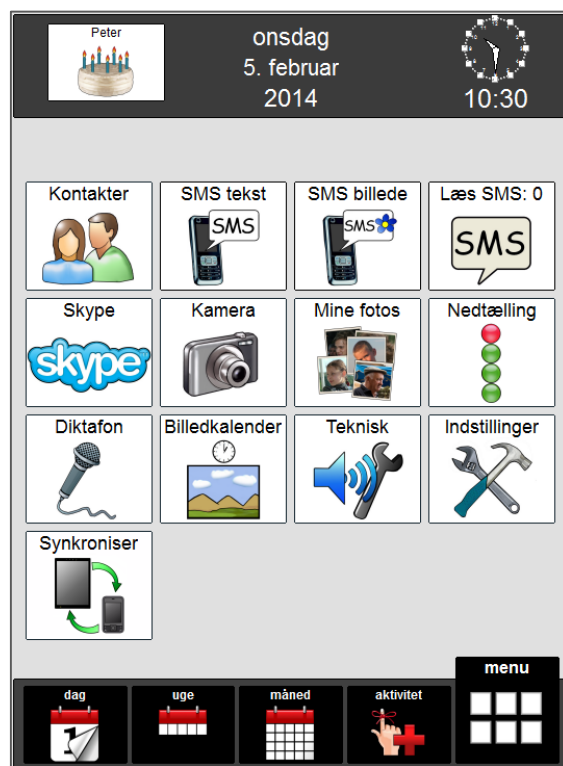

MEMOplanner

Programversion 2.1

Indhold

1	Indledning	5
2	Menuerne og funktionerne	6
3	Diktafon	7
4	Mine fotos	8
4.1	Slet	9
5	Nedtælling	9
5.1	Ny nedtælling	10
5.2	Pågående nedtælling	10
6	Kontakter	11
6.1	Ny kontakt/Ændre kontakt	11
6.1.1	Ny/ændre billede	12
6.1.2	Fornavn og efternavn	16
6.1.3	Telefon	16
6.1.4	Skype	17
6.1.5	Slet nummer	17
6.1.6	Slet adresse	17
6.1.7	Slet	17
6.2	Søg	18
7	Kamera	19
7.1	Tag billede	19
7.2	Vis Mine fotos	20
7.3	Slet billede	20
8	Sms	21
8.1	Sms-billede	21
8.1.1	Nummer:	23
8.1.2	Liste:	24
8.2	Sms-tekst	25
8.3	Fejlmeldinger ved afsendelse af sms	26
8.3.1	Memoactive	26
8.3.2	Memoplanner	26
8.4	Sms ulæst	27
8.4.1	Indkomne sms'er	27
9	Telefon	32
9.1	Komplet telefon	32
9.1.1	Ringe til en kontakt.	32
9.1.2	Søg	33
9.1.3	Nummer	34
9.2	Enkel telefon	34
9.3	Indkommende opkald	35
9.3.1	Indkommende opkald fra en Kontakt.	35

9.3.2	Indkommende opkald fra "ukendt" nummer	36
9.4	Ubesvarede opkald	36
10	Billedkalender	38
11	Skype	39
11.1	Ringe til en Skype-kontakt	39
11.2	Indkommende Skype-samtale.	40
11.2.1	Videosamtale med Skype	40
12	Synkroniser	41
13	Teknisk	42
13.1	Lyd ved valg	42
13.2	Talesyntese	42
13.3	Vibration eller Lyd	43
13.4	Lydstyrke	43
13.5	Flymodus	43
14	Indstillinger	44
14.1	Kontakter	45
14.2	Telefonvalg i hovedmenuen	45
14.2.1	Komplet eller Enkel telefon	46
14.3	Telefonvalg i hovedmenuen	46
14.3.1	Opsætning	47
14.4	Ændre sms-beskeder	47
14.4.1	Skift billede	48
14.4.2	Skift tekst	48
14.5	Opsætning af nedtælling	49
14.5.1	Tidslinje eller stopur	49
14.5.2	Ændre billede og tid	50
14.5.3	Ændre alarmlyd	52
15	Systemopsætning	53
15.1	Slet aktiviteter/afslut	54
15.1.1	Memoactive:	54
15.1.2	Memoplanner:	55
15.1.3	Synkronisering	56
15.2	Adgangskode og adgang	56
15.2.1	Ændre adgangskode	57
15.2.2	Brug adgangskode til billedkalender	57
15.2.3	Tillad fjernbetjening	58
15.3	Vælg telefonringetone	58
15.4	Vælg notifikationslyd til sms	59
15.5	Om produktet	59
15.6	Vælg stemme	60
15.7	Vælg kamera	60

1 Indledning

MEMOactive og MEMOplanner er digitale kalendere med påmindelsesfunktion.

Memoactive er bærbar, mens Memoplanner er stationær.

Memoactive og Memoplanner hjælper dig med at huske aftaler, strukturere dine dage, døgn, uger, måneder og/eller år. Påmindelse kan modtages som lyd og/eller talemeddelelse.

En tidslinje i form af en lyssøjle eller lysprik viser, hvad tid på dagen det er, med rød farve for dag og blå farve for nat.

Memoactive og Memoplanner er udviklet i samarbejde med fagfolk inden for områderne demens, udviklingshæmmede, erhvervet hjerneskade, neuro-psykiatri og psykiatri i Norge, Sverige og Danmark.

Memoactive og Memoplanner er udviklet med støtte fra Norges forskningsråd IT Funk.


























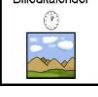









Memoactive og Memoplanner kan bidrage til at gøre hverdagen nemmere for personer med kognitive svigt.

Personer med udfordringer i at planlægge – og strukturere deres hverdag eller som har hukommelsesproblemer, kan få meget hjælp fra Memoactive og Memoplanner.

2 Menuerne og funktionerne

OBS! Har man ikke valgt alarm ved aktivitetsstart får man ingen besked når en aktivitet begynder, hvis man befinder sig inde i en af Menyfunktionerne.

I tillæg til kalenderfunktionerne har MEMOactive og MEMOplaner en række andre funktioner.

Memoactive		Memoplaner		Memoplaner 8 tommer	
	Diktafon		Diktafon		Diktafon
	Mine fotos		Mine fotos		Mine fotos
	Nedtælling		Nedtælling		Nedtælling
	Kontakter		Kontakter		Kontakter
	Kamera		Kamera		Kamera
	Sms-tekst		Sms-tekst		Billedkalender
	Sms-billede		Sms-billede		Skype
	Ulæste sms'er		Ulæste sms'er		Teknisk
	Telefon		Billedkalender		Indstillinger
	Enkel telefon		Skype		
	Opkaldslog		Synkroniser		
	Teknisk		Teknisk		
	Indstillinger		Indstillinger		

Den enkelte funktion og indstillingerne beskrives i kapitlerne nedenfor

3 Diktafon

Diktafon er en funktion, hvor man kan indlæse op til fire "huskesedler".




Når  trykkes på menuen, vises denne side:

Trykkes for at afspille indlæst besked nr. 1.

Trykkes for at afspille indlæst besked nr. 2.

Trykkes for at afspille indlæst besked nr. 3.

Trykkes for at afspille indlæst besked nr. 4.

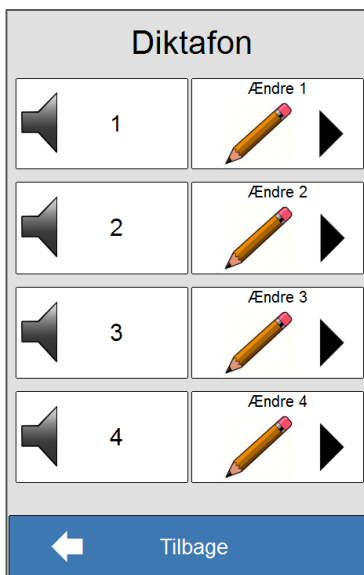

Trykkes for at redigere indlæst besked nr. 1.

Trykkes for at redigere indlæst besked nr. 2.

Trykkes for at redigere indlæst besked nr. 3.

Trykkes for at redigere indlæst besked nr. 4.



Trykkes der på *Tilbage*, kommer man tilbage til *Menu*.

Højttalerknappen kan have to udseender, afhængig af, om en besked er indlæst eller ej.

En besked er indlæst



Der er ikke indlæst nogen besked

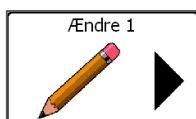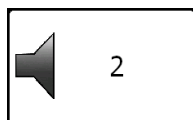

Når der trykkes på en af , vises denne side:




Trykkes og holdes for at indspille en besked.

Trykkes for at afspille beskeden.

Trykkes for at slette den indlæste besked.

Trykkes *OK*, kommer man tilbage til Diktafonensiden.

Når der trykkes og holdes inde på indspilningsknappen, vil den få en rød ring, som indikerer, at en besked kan indlæses. Beskeden kan være på op til 30 sekunder. Når indspilningsknappen slippes, afspilles beskeden automatisk.

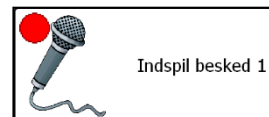

Højtalerssymbolet vil nu ændres til at vise, at der er en indlæst besked på den knap.

4 Mine fotos

Mine fotos er en funktion, hvor man kan vise billeder, som er lagt ind på Memoactive eller Memoplanner.



Når der trykkes på , vises denne side:




Viser, hvilket billednummer der er markeret og totalt antal billeder.

Her kan man blade op og ned mellem billederne.

Her kan man slette billeder.


Trykkes der på *Tilbage*, kommer man tilbage til *Menu*.

Trykkes på et af billederne, vises det i fuld skærm.

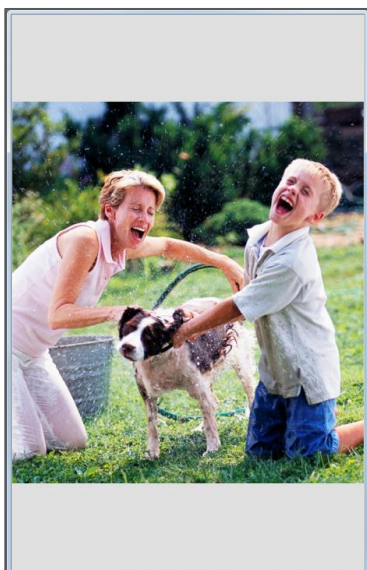


Billedet lukkes ned igen ved at trykke på det, hvorefter man kommer tilbage til *Mine fotos*.

4.1 Slet

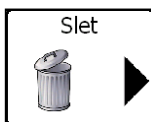

Trykkes på , vises denne side.

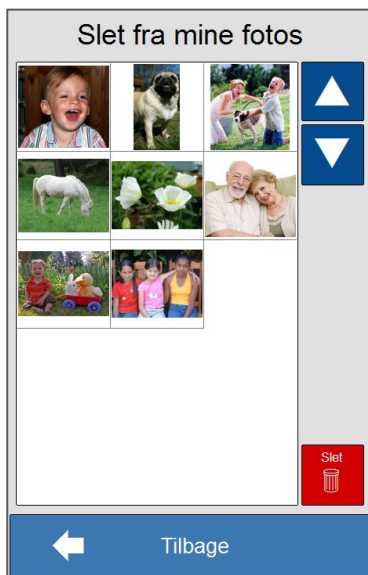

For at slette et billede trykker man på det; det markeres da med rød farve. Tryk så på slet; billedet slettes da fra *Mine fotos*. Ønsker man at slette flere, gentages ovenstående trin.

Trykkes der på *Tilbage*, kommer man tilbage til *Menu*.

5 Nedtælling


Nedtælling er en funktion, hvor man kan starte en nedtælling fra 1 sekund til 59 minutter og 59 sekunder. Nedtællingssiden kan vises med et stopur eller en tidslinje.



Når der trykkes på , kommer man til en af disse sider:

Der sker ingen nedtælling


En nedtælling er startet

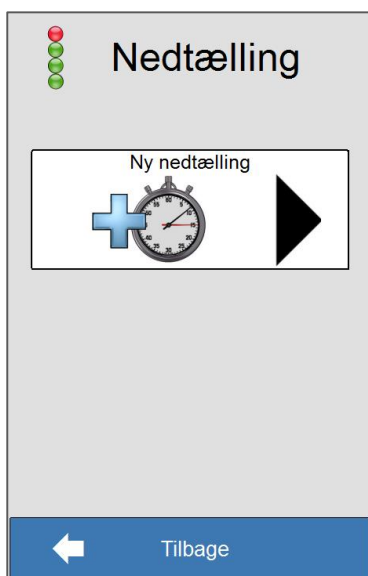

5.1 Ny nedtælling



Når der trykkes på , vises denne side:

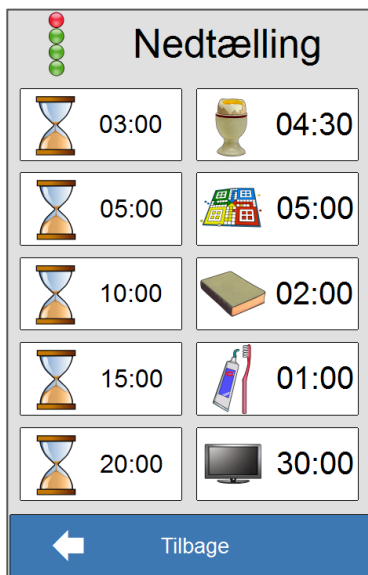


Her vises en oversigt over de tilgængelige nedtællingstider.

Nedtællingstiderne på venstre side er fast definerede tider, mens man i nedtællingstiderne på venstre side kan ændre både tid og billede under indstillinger. Se kapitel 0.

Trykkes der på *Tilbage*, kommer man et skridt tilbage.

Når der trykkes på en af nedtællingstiderne, vises siden til venstre:

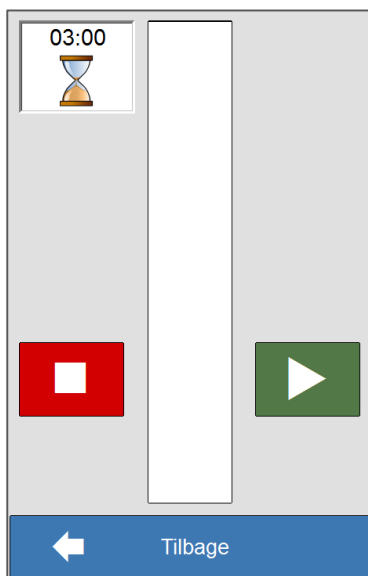


Her vises nedtællingstiden



Trykkes der på , starter nedtællingen, og siden til højre vises.

Trykkes der på , når en nedtælling er startet, stopper nedtællingen, nedtællingstiden stilles tilbage til fuld tid, og siden til højre vises.

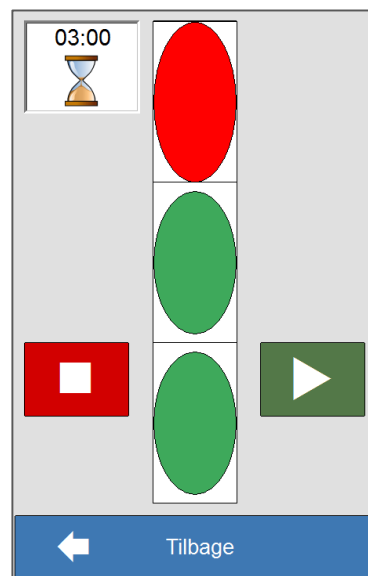

Trykkes der på *Tilbage*, kommer man tilbage til *Menu*. Eventuelt startet *Nedtælling* fortsætter med at køre, selv om man går ud af nedtællingssiden.

Når nedtællingstiden er kommet til 0, afspilles der en alarm, og hvis man er gået ud af nedtællingssiden, vil den komme op for at vise, at alarmen gælder for nedtællingen.

5.2 Pågående nedtælling




Når der trykkes på , vises den pågående nedtælling. Se billedet til højre ovenfor.

6 Kontakter


Kontakter er en funktion, hvor man kan indlægge billede og telefonnummer, samt Skype-adresse til en person. Skype-adressen kan kun lægges ind på Memoplanner.



Når der trykkes på , vises en oversigt over kontakterne i kontaktlisten.

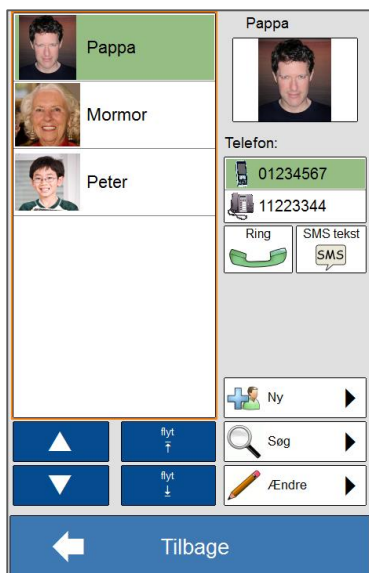

Er der flere kontakter i listen, end der kan vises, kan man bladre med pilene.

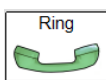

Trykkes for at ringe til kontakten. (Er kun tilgængelig på Memoactive.)



Trykkes for at sende sms til kontakten. SMS funktionen vises hvis SMS er aktiveret i telefonmenuen. **NB!** Ikke tilgængelig på Memoplanner 8 tommer.

Tryk på *Ny* for at oprette en ny kontakt.

Tryk på *Søg* at søge efter en kontakt.


Tryk på *Ændre* for at ændre en eksisterende kontakt.

For at ændre den indbyrdes rækkefølge mellem kontakterne, markeres den, man ønsker

at flytte og så trykkes  (flyt op) eller  (flyt ned).


Trykkes der på *Tilbage*, kommer man tilbage til *Menu*.

6.1 Ny kontakt/Ændre kontakt

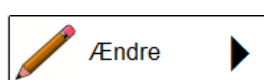

Når der trykkes på  eller , vises siden nedenfor.

Har man trykket *Ny*, er felterne tomme, har man trykket *Ændre*, er nogle eller alle felter udfyldt.

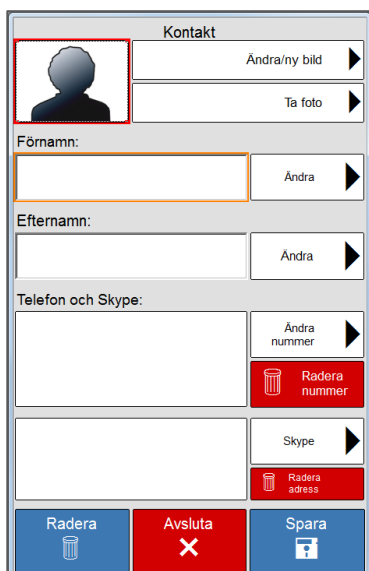

Her vælges et billede for kontakten. Det kan vælges fra *billedbasen*, *Kontaktfotos*, *Mine fotos*, eller man kan tage et foto med kameraet (Kamera er kun tilgængeligt på Memoactive).

Trykkes for at indtaste fornavnet.

Trykkes for at indtaste efternavnet.

Trykkes for at indtaste telefonnummer.

Trykkes for at slette et markeret nummer i telefonlisten.

Trykkes for at indtaste et Skype-navn. (Kun tilgængelig i Memoplanner.)




Tryk på **Gem** for at lagre kontakten og gå tilbage til kontaktoversigten. Den nye kontakt lægges nederst i listen.

NB! *Fornavn* eller *Efternavn* skal være udfyldt, for at kontakten skal gemmes.



Tryk på **Afbryd** for at gå tilbage til kontaktoversigten uden at gemme ændringerne.

6.1.1 Ny/ændre billede

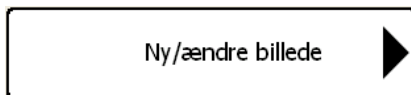

Hvis der trykkes på **Ny/ændre billede** vises denne nye side:



Vælg billede fra billedsiderne.

Søg efter billede i billedmappen.

Vælg billede fra fotoalbum.

Vælg billede fra kontaktfoto.

Tag billede med kameraet.

Vælg billede fra Dropbox, SkyDrive og Google Drive.

Billeder:



Hvis der trykkes på **Billeder**, vises billedsiderne:

Side 1


Side 2

Side 3



Hvis man trykker på OK, kommer man tilbage til *Kontakt*, og det nye navn bliver lagt ind i *Fornavn*/*Efternavn*. Trykkes *Tilbage*, kommer man tilbage til *sms-billeder*.


Find billede:

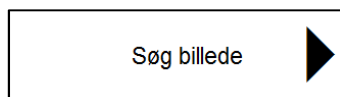


Når der trykkes på , vises denne side:




Skriv søgeordet ind i tekstfeltet, f.eks. "dreng". Tryk på


symbolet  for at fjerne al teksten i tekstfeltet. For at

fjerne et bogstav ad gangen trykkes  til højre for 123-knappen nederst i tastaturet.

Hvis man vil søge med tal, trykkes der på 123-knappen, så vises et numerisk tastatur.


Tryk på  når ønsket søgeord og resultatsiden nedenfor vises.

Hvis man trykker *Tilbage*, kommer man tilbage til siden *Vælg billede*.

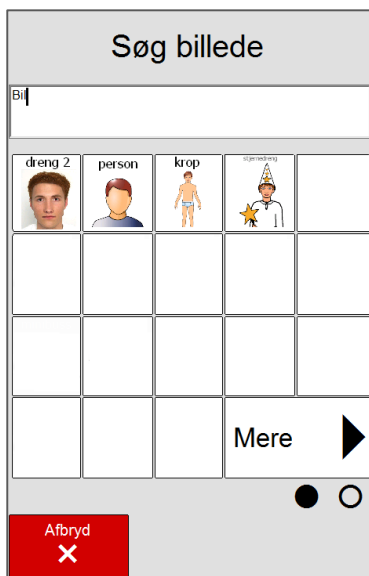

Her vises alle billederne i billedmappen, som har ordet dreng i billednavnet.


Hvis søgningen giver flere resultater, end der kan vises på

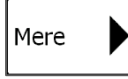denne side, trykker man på  for at komme til side to af søgeresultatet.


Når der trykkes på det ønskede billede, vender man tilbage til *Kontakt*, og det billede bliver lagt ind i billedfeltet.

Hvis man trykker på *Afbryd*, kommer man tilbage til søgesiden.

Mine fotos:

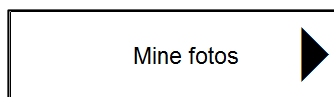

Hvis der trykkes på  vises denne side:

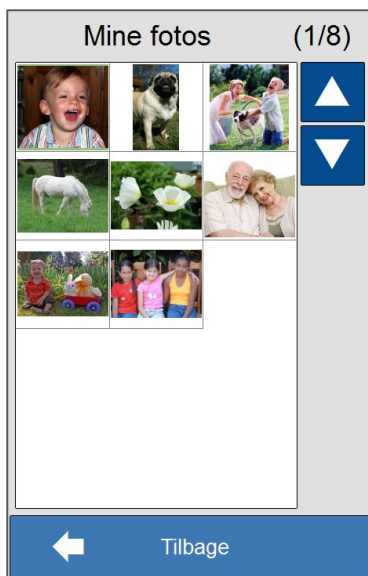

Her vises alle billederne i *Mine fotos*.

Hvis albummet indeholder flere billeder end der kan vises, kan man bladre op og ned med pilene til højre for billedoversigten.


Når der trykkes på det ønskede billede, vender man tilbage til *Kontakt*, og det billede bliver lagt ind i billedfeltet.

Hvis man trykker *Tilbage*, kommer man tilbage til siden *Vælg billede*.

Kontaktfoto:



Hvis der trykkes på  vises Kontaktfotoalbummet:

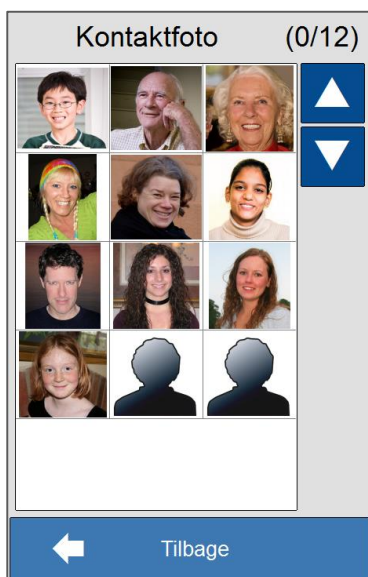

Her vises alle billederne i Kontaktfotoalbummet.

Hvis albummet indeholder flere billeder end der kan vises, kan man bladre op og ned med pilene til højre for billedoversigten.

Når der trykkes på det ønskede billede, vender man tilbage til *Kontakt*, og det billede bliver lagt ind i billedfeltet.

Hvis man trykker *Tilbage*, kommer man tilbage til siden *Vælg billede*.


Tag billede:



Hvis man trykker på **Tage foto**, tænder kameraet automatisk. Hold enheden så det, du vil fotografere, vises på skærmen:




Ret det indbyggede kamera mod det du vil tage et billede af

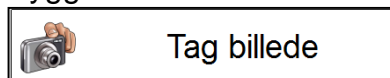


og tryk på **Tag billede**. Når billedet er taget vises et nyt vindue. Tryk på *Brug billede* for at vælge billedet. Tryk på *Tilbage* for at tage et nyt billede.

Dropbox, SkyDrive og Google Drive

OBS! Dette kræver at du har Dropbox, SkyDrive eller Google Drive.

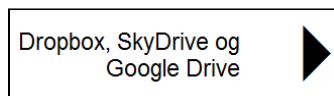

Når man trykker på **Dropbox, SkyDrive og Google Drive** vises siden *Vælg billede*. Her kan man vælge mellem de billeder, man har gemt på Dropbox, SkyDrive eller Google Drive.

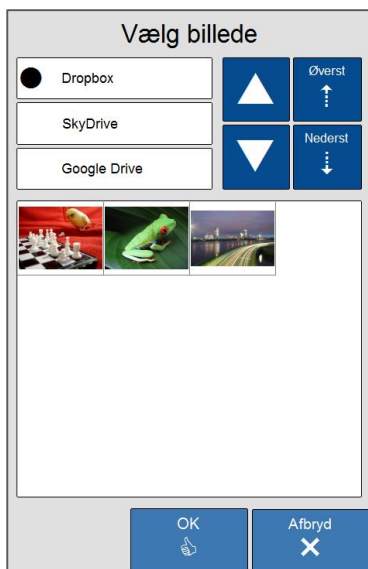


Her vises alle billeder fra den valgte placering.


Hvis mappen indeholder flere billeder end der kan vises, kan man bladre med pilene.

Når man trykker på det billede, man ønsker, vises dette i større format. Tryk igen på billedet for at komme tilbage, nu er det markeret.


Når man trykker på *OK*, kommer man tilbage til Kontakt, og det valgte billede lægges ind i billedfeltet.

6.1.2 Fornavn og efternavn

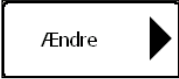Trykkes på  ved *Fornavn* eller *Efternavn*, vises denne side.

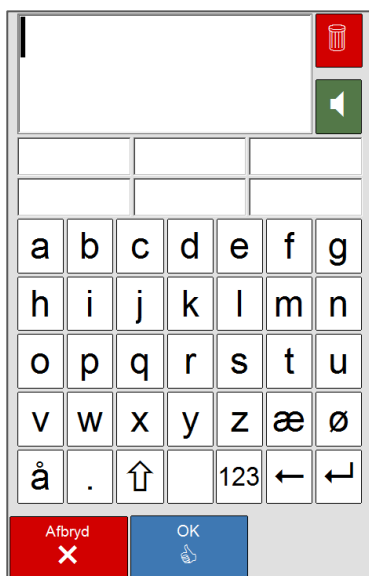

For at fjerne al tekst, som er indlagt, trykkes på . For at

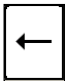fjerne ét bogstav ad gangen trykkes på  til højre for 123-knappen nederst i tastaturet.

For at få læst teksten i skrivefeltet op af talesyntesen,


trykkes på .

For at skrive med tal, trykkes på 123-knappen, og et taltastatur vises.

Hvis man trykker på *OK*, kommer man tilbage til *Kontakt*, og det nye navn bliver lagt ind i *Fornavn/Efternavn*. Hvis man trykker på *Afbryd*, kommer man tilbage til *Kontakt*, uden at navnet er ændret.


6.1.3 Telefon


Når der trykkes på , vises denne side.

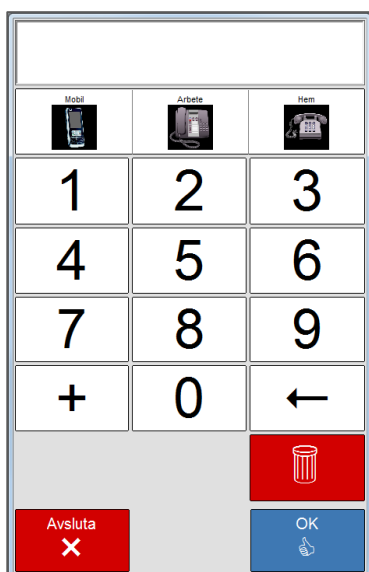

Her vises nummeret, efterhånden som det skrives ind.

Her markeres det, om nummeret er et mobilnummer, arbejdsnummer eller hjemmenummer.

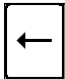For at fjerne et bogstav ad gangen trykkes på  til højre for 123-knappen nederst i tastaturet.

For at fjerne al tekst, som er indtastet, trykkes på .

Trykkes på *OK*, gemmes nummeret, og man kommer tilbage til *Kontakt*. Hvis man trykker på *Afbryd*, kommer man tilbage til *Kontakt*, uden at ændringerne lagres.


6.1.4 Skype


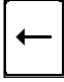
NB! Muligheden for at indtaste Skype-navn er kun tilgængelig på Memoplanner.

Trykkes på , vises denne side.



Her vises Skype-navnet, efterhånden som det skrives ind.

For at skrive med tal og specialtegn, trykkes på , og et taltastatur vises.

For at fjerne al tekst, som er indtastet, trykkes på . For at fjerne et bogstav ad gangen trykkes på  til højre for 123-knappen nederst i tastaturet.

Trykkes på *OK*, gemmes Skype-navnet, og man kommer tilbage til *Kontakt*. Hvis man trykker på *Afbryd*, kommer man tilbage til *Kontakt*, uden at ændringerne gemmes.

6.1.5 Slet nummer

Når et nummer i listen markeres, og der trykkes på , bliver nummeret slettet.


6.1.6 Slet adresse


Når en skype-adresse markeres, og der trykkes på , bliver adressen slettet.

6.1.7 Slet

Når der trykkes på , vises denne side:




Trykkes på , kommer man tilbage til *Ændre kontakt*.

Trykkes på , slettes kontakten permanent, og man kommer tilbage til *Kontakter*.

6.2 Søg




Når der trykkes på , vises denne side:

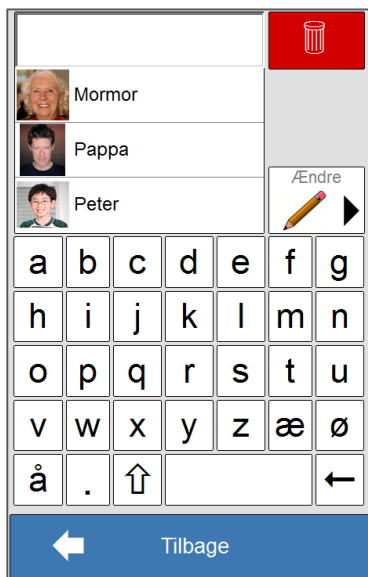

Her kan man foretage en søgning blandt kontakterne ved hjælp af tastaturet. Skrives der et bogstav, vises alle de kontakter, som begynder med det bogstav.

For at fjerne al tekst, som ligger i tekstfeltet, trykkes på .

For at fjerne et bogstav ad gangen trykkes på  til højre for mellemrumsknappen nederst på tastaturet.

Når en kontakt markeres i listen, og der trykkes på , kommer man til *Ændre kontakt*. Se kapitel 6.1.

Trykkes der på *Tilbage*, kommer man tilbage til *Kontakter*.

7 Kamera

Kamera er en funktion, hvor man kan tage billeder, se på billeder i albummet *Mine fotos* samt slette billeder fra albummerne *Mine fotos* og *Kontaktfotos*.

Hvis man tager for mange billeder og fylder albummerne *Mine fotos* og *Kontaktfotos* op, kan dette føre til, at Memoactive vil blive langsom og ikke fungere tilfredsstillende. Man bør da enten overføre billederne til en PC eller slette dem fra albummerne.



Når der trykkes , vises denne side:




Trykkes for at tage et nyt foto.


Trykkes for at vise albummet *Mine fotos*

Trykkes for at slette billeder i *Mine fotos* og *Kontaktfotos*.

Trykkes der på *Tilbage*, kommer man tilbage til *Menu*.


7.1 Tag billede

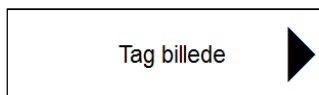

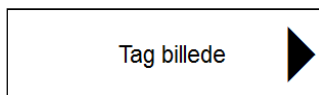Hvis man trykker på , tænder kameraet automatisk. Hold Memoactive således, at det, du vil tage billede af, vises på skærmen:





Ret det indbyggede kamera mod det du vil fotografere og

tryk på  **Tag billede**. Når billedet er taget vises en ny side. Tryk på *Anvend foto* for at vælge billedet. Tryk på *Tilbage* for at tage et nyt billede.


NB! Hvis Memoplanner bruges på en tablett drejes skærbilledet horisontalt i landskabsmodus når billedet skal tages, således at kamera orienteringen bliver rigtig. Billedet kan tages liggende eller stående.


7.2 Vis Mine fotos

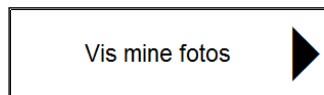


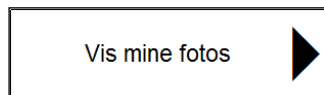Når der trykkes på , vises albummet *Mine fotos*. Se kapitel 4.

7.3 Slet billede

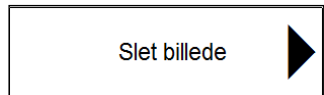

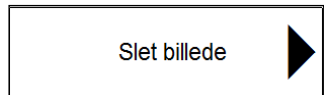Når der trykkes på , vises denne side:

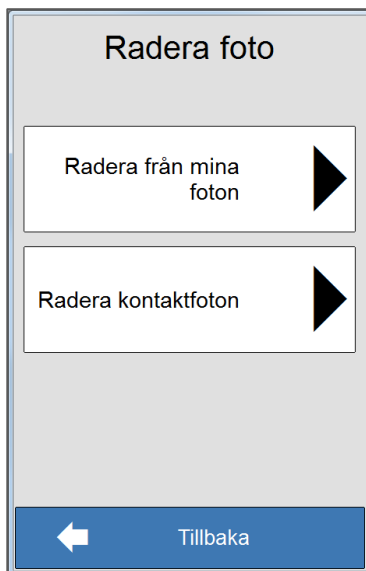

Trykkes på denne, kan man slette billeder fra albummet *Mine fotos*.

Trykkes på denne, kan man slette billeder fra albummet *Kontaktfotos*.

Hvordan billederne slettes, beskrives i kapitel 4.1.

Trykkes der på *Tillbaka*, kommer man tilbage til *Kamera*.

NB! *Kontakter* eller *Aktiviteter*, som har hentet billeder fra albummerne *Mine fotos* eller *Kontaktfotos*, vil ikke miste deres billeder, selv om billederne slettes fra albummerne.

8 Sms

Sms er en funktion, hvor man kan sende og læse Sms'er. Afsendelse af en sms kan foregå via to funktioner, *sms-billede*, som er en forenklet sms-funktion med færdige sætninger og *sms-tekst*, som er en normal sms-funktion.

For at sms skal kunne bruges, skal der indsættes et SIM-kort i Memoactive, se kapitel 6 i *Håndbogen for Memoactive*. For Memoplanner skal der indsættes et SIM-kort i GSM-enheden, og den skal kobles til Memoplanner. Se kapitel 8 i *Håndbogen for Memoplanner*.

NB! SMS funktionen er ikke tilgængelig på 8 tommers tablett.

8.1 Sms-billede



Når der trykkes på , vises denne side:




Når der trykkes på et af billederne, vises den tekst, som hører til billederne.

For at fjerne al tekst, som ligger i tekstfeltet, trykkes på .

For at få teksten læst op af talesyntesen, trykkes på .

Her vises 6 af de 12 færdige sms-beskeder.


Trykkes der på *Tilbage*, kommer man tilbage til *Menu*.

Når der trykkes på , vises denne side.




Her vises de 6 sidste af de 12 færdige sms-beskeder.


Man kan ændre billede og indhold i de færdigskrevne sms'er under *Opsætning*, se kapitel 14.4.

Når der trykkes på , vises siden nedenfor.

Her kan man tilføje mere tekst til en af de færdigskrevne sms'er eller skrive en helt ny sms.



For at fjerne al tekst, som er indlagt, trykkes på .

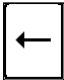For at fjerne et bogstav ad gangen trykkes på  til højre for 123-knappen nederst i tastaturet.


For at få læst teksten i skrivefeltet op af talesyntesen,

trykkes på .

For at skrive med tal, trykkes 123-knappen, og et taltastatur vises.


Trykkes der på *Tilbage*, kommer man tilbage til sms-billedet, og den indskrevne tekst bliver lagt ind i tekstfeltet.


Når sms'en er færdigskrevet, trykkes på , og denne side vises:

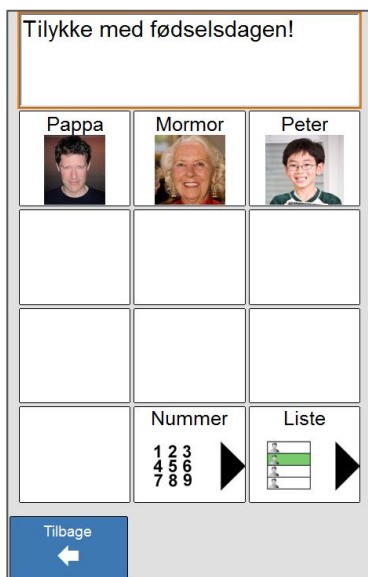

Her vises teksten til sms'en.


Her vises de første 10 kontakter, som har et mobilnummer indlagt. Hvis man har flere end 10 kontakter med


mobilnummer lagt ind, trykkes på  for at få adgang til de andre kontakter. Hvis man ønsker at sende en sms til et

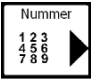
nummer, som ikke ligger under *Kontakter*, trykkes på .

Trykkes der på *Tilbage*, kommer man tilbage til *sms-billede*.

Når der trykkes på en af kontakterne i rudenettet, vises denne side:

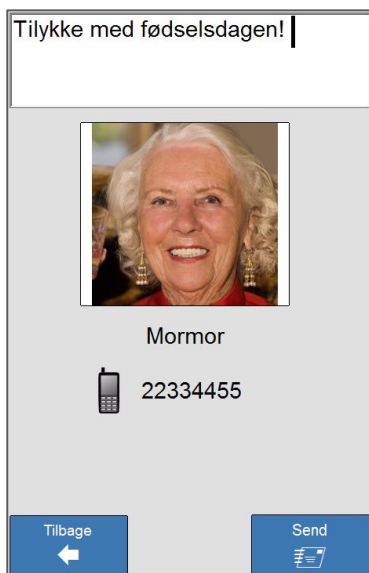

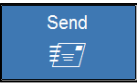Her vises den valgte kontakt, og hvis det er den kontakt, man ønsker at sende til, trykkes på , og sms-en sendes.

Hvis det ikke er denne kontakt, man vil sende til, trykkes på  og man kommer tilbage til kontaktsiden.

Hvis afsendelsen af sms-en gik godt, vises denne side:

Memoactive





Memoplanner




Fejlmeldinger og mulige årsager beskrives i kapitel 8.3.

8.1.1 Nummer:

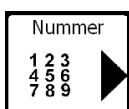

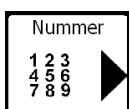
Når der trykkes på , vises denne side:

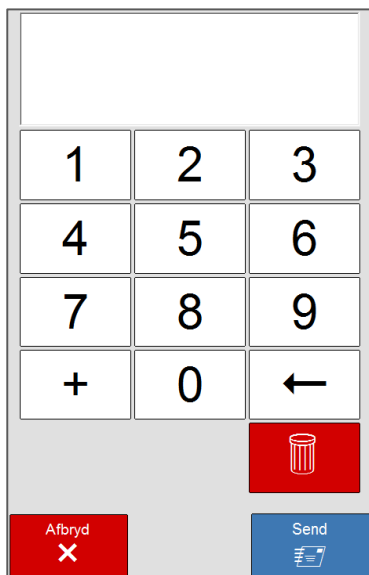

Her skrives et mobilnummer ind, og derefter trykkes på





Hvis afsendelsen er vellykket vises en af de grønne smileys ovenover afhængigt af, om det er en Memoactive eller en Memoplanner.


For at fjerne al tekst, som er indtastet, trykkes på .

Trykkes på , kommer man tilbage til kontaktoversigten.

8.1.2 Liste:

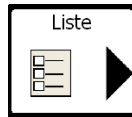

Når der trykkes på , vises denne side:

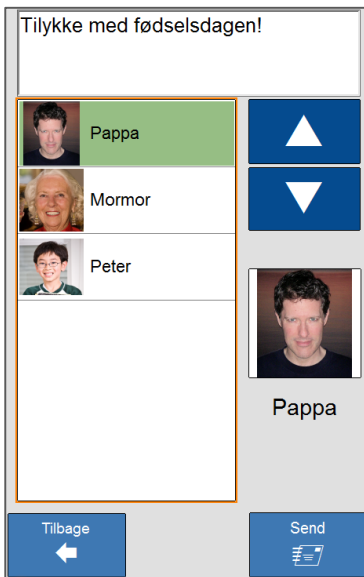

Her vises teksten til sms'en.

Er der flere kontakter, end der kan vises i listen, kan man blade op og ned med pilene.

Når en kontakt markeres, vises billede og navn i dette felt.




trykkes for at sende sms'en. Hvis afsendelsen er vellykket vises en af de grønne smileys ovenover afhængigt af, om det er en Memoactive eller en Memoplanner.

Trykkes *Tilbage*, kommer man tilbage til kontaktoversigten.


8.2 Sms-tekst




Når der trykkes , vises denne side:

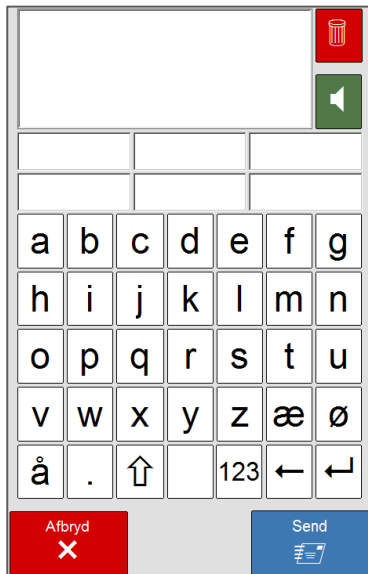

Tekstfeltet viser den tekst, som skrives ind.

For at fjerne al tekst, som er indtastet, trykkes . For at

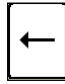
fjerne et bogstav ad gangen trykkes  til højre for 123-knappen nederst i tastaturet. Taltastatur og specialtegn

ligger under .

Trykkes , kommer man tilbage til *Menu*.



Når sms'en er færdigskrevet, trykkes , og denne side vises:

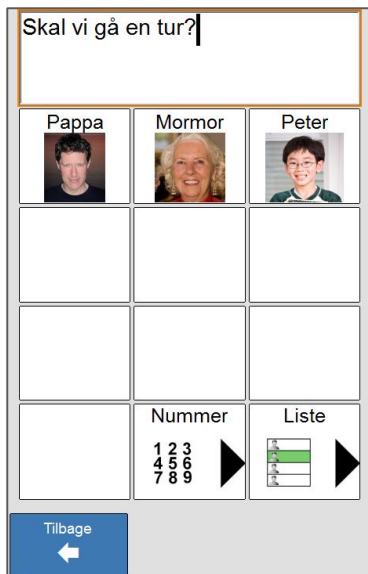

Funktionerne på denne side beskrives i kapitel 8.1 ovenfor.

8.3 Fejlmeldinger ved afsendelse af sms

Hvis afsendelsen ikke er vellykket vises en eller flere af disse sider afhængigt af, hvad der gik galt, og om det er en Memoactive eller en Memoplanner, man sender fra.

8.3.1 Memoactive



Denne side vises, hvis der ikke er dækning, eller teleoperatøren har problemer med sit net.

NB! Hvis der sendes en tom sms, så vil denne side vises, selvom sms'en bliver sendt.



Denne side vises, hvis Flymodus er slået til.

Vises begge disse sider lige efter hinanden, er der ikke indsat et SIM-kort i Memoactive eller PIN-koden er slået til. Se kapitel 6 i *Håndbogen for Memoactive*.


8.3.2 Memoplanner



Denne side vises, hvis der ikke er dækning, eller teleoperatøren har problemer med sit net. Den kan også vises hvis der ikke er sat et SIM-kort ind i GSM-enheden, eller hvis PIN-koden er slået til.

Se kapitel 8 i *Håndbogen for Memoplanner*.

NB! Hvis der sendes en tom sms, så vil denne side vises, selvom sms'en bliver sendt.

Hvis man kommer umiddelbart til *Menu*, når der trykkes på , skyldes dette, at GSM-enheden ikke er koblet til, eller at Memoplanner ikke får kontakt med den. Se kapitel 8 i *Håndbogen for Memoplanner*.


8.4 Sms ulæst


Sms ulæst er indboksen til sms-funktionen, i tillæg er der en oversigt over sendte og gemte sms'er.



Er der ulæste sms'er, vises dette med et tal på ikonet for sms ulæst på *Menu*.



Når der trykkes på , vises denne side:

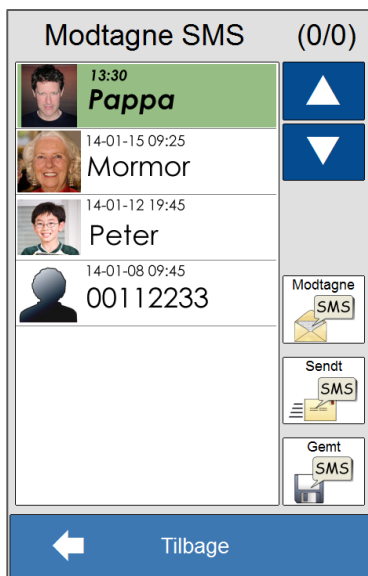

Er der flere sms'er, end der kan vises i listen, kan man blade op og ned med pilene.


Trykkes for at vise modtagne sms'er.

Trykkes for at vise sendte sms'er.

Trykkes for at vise gemte sms'er.

Trykkes der på *Tilbage*, kommer man tilbage til *Menu*.

8.4.1 Indkomne sms'er

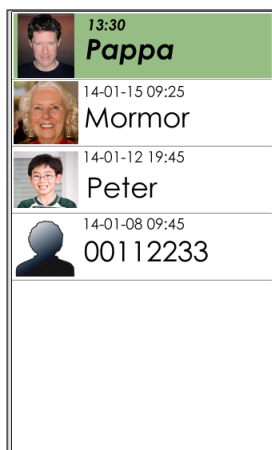


Sms'en fra "Pappa" er markeret som ulæst med **Fed skrift**.

Hvis afsenderen af sms'en ligger under *Kontakter*, vises navn og eventuelt billede, hvis afsender ikke ligger under *Kontakter*, vises afsendernummeret.


Sms'er, som er kommet i dag, vises kun med klokkeslæt. Sms'er, som er kommet på tidligere dage, vises med dato og klokkeslæt.

Når en sms trykkes, vises denne side:

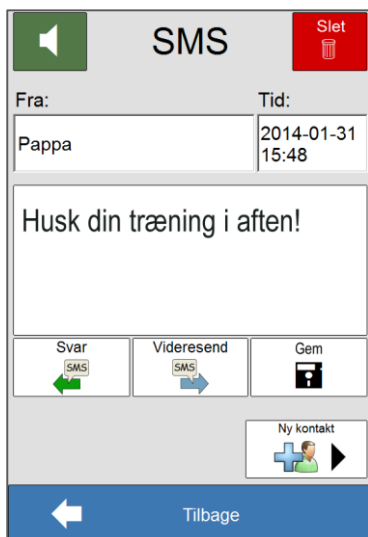

Trykkes for at slette sms'en, den bliver da slettet permanent.

Her vises afsender og klokkeslæt for modtagelse af sms'en


Her vises indholdet i sms'en. Trykkes der på , læses sms'en op af talesyntesen.

Knapper for at svare, videresende eller gemme sms'en


Knap for at gemme afsender under *Kontakter*.

Trykkes der på *Tilbage*, kommer man tilbage til *Indboksen*.


8.4.1.1 Svar

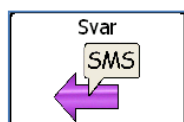


Trykkes der på , vises denne side:

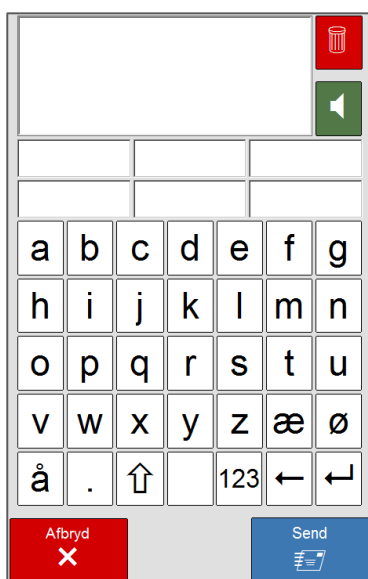

For en detaljeret beskrivelse af tastatursiden, se kapitel 8.2.

Her skrives svaret ind, og når der trykkes på , vises siden nedenfor.

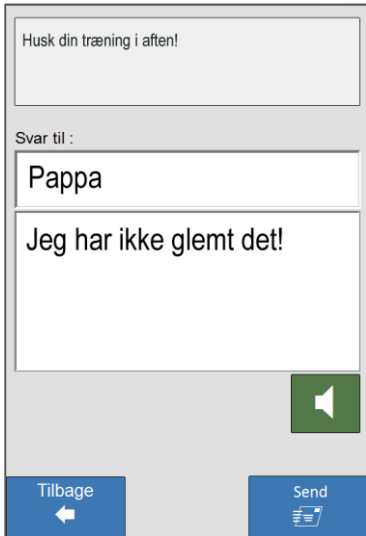

Her vises teksten i den sms, man svarer på.

Her vises modtager.

Her vises teksten i den sms, som sendes. Trykkes der på



, læses teksten i svaret op.

Trykkes for at sende sms'en. Er afsendelsen vellykket vises den grønne smiley, se kapitel 8.1.

8.4.1.2 Videre send





Når der trykkes på , vises denne side:




Her vises teksten i sms'en, som skal videresendes. Ønskes at tilføje mere tekst, kan det gøres her.

For en detaljeret beskrivelse af tastatursiden, se kapitel 8.2.

Trykkes der på , kommer man tilbage til den oprindelige sms.

Når sms'en er klar til at sendes, trykkes der på , og siden nedenfor vises.

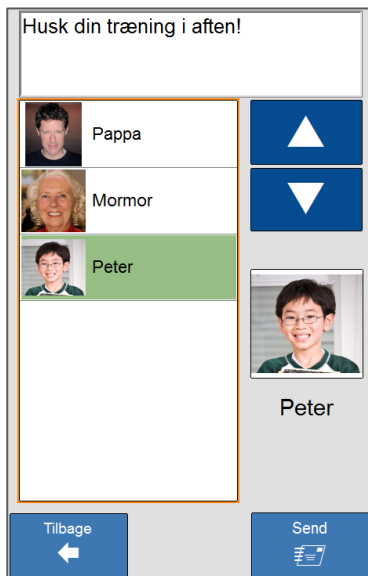


V Her vælges modtager, og sms'en sendes ved at trykke på



For en detaljeret beskrivelse af siden, se kapitel 8.1.



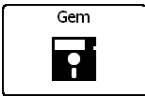


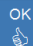
8.4.1.3 At gemme

Når der trykkes på , flyttes sms'en til *Gemte sms'er*.

8.4.1.4 Ny kontakt



Når der trykkes på , vises denne side:


12345678		
Mobil 	Arbejde 	Hjem 
1	2	3
4	5	6
7	8	9
+	0	←
		
Afbryd 	OK 	

Nummeret er færdigudfyldt i nummerfeltet.





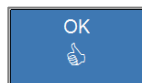


Her vælges, om nummeret skal gemmes som et mobil-, arbejds- eller hjemmenummer.



Trykkes der på , kommer man tilbage til den oprindelige sms.



Trykkes der på , vises siden nedenfor.

Kontakt		
	Ny/ændre billede ▶	
	Tage foto ▶	
Fornavn:	Ændre ▶	
Efternavn:	Ændre ▶	
Telefonnummer:	Telefon ▶	
 12345678	Slet nummer 	
	Skype ▶	
	Slet adresse 	
Slet 	Afbryd 	Gem 

Her indlægges billede og information om kontakten.

For en detaljeret beskrivelse af siden, se kapitel 6.1.

9 Telefon


Telefon er en funktion, hvor man kan ringe op og modtage telefonsamtaler. Telefon består af to funktioner. Enkel telefon, hvor det er begrænset, hvor mange kontakter som kan ringes op og Komplet telefon, som er uden begrænsninger for, hvem der kan ringes til.

NB! Telefonfunktionen er kun tilgængelig i Memoactive.

9.1 Komplet telefon



Når trykkes, vises denne side:

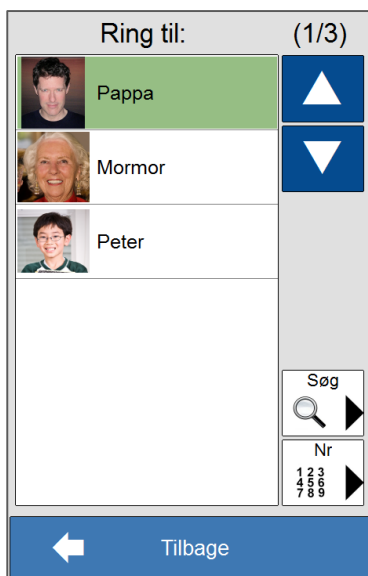

Er der flere kontakter, end der kan vises i listen, kan man blade op og ned med pilene.


Trykkes for at søge efter en kontakt.

Trykkes for at ringe til et telefonnummer, som ikke ligger under *Kontakter*.

Trykkes der på *Tilbage*, kommer man tilbage til *Menu*.

9.1.1 Ringe til en kontakt.

Når der trykkes på en af kontakterne i listen, vises denne side.

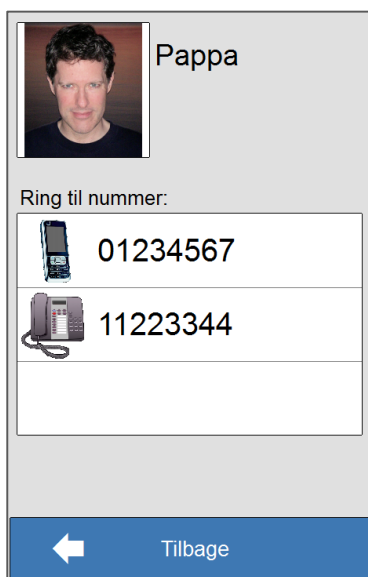


Her vises kontaktens navn og eventuelle billede.

Her vises de numre, som er lagt ind på kontakten.

For at ringe til kontakten trykkes det nummer, man ønsker at ringe til.

Trykkes der på *Tilbage*, kommer man tilbage til *Ring til*.

Når der trykkes på et af numrene til kontakten, vises denne side.

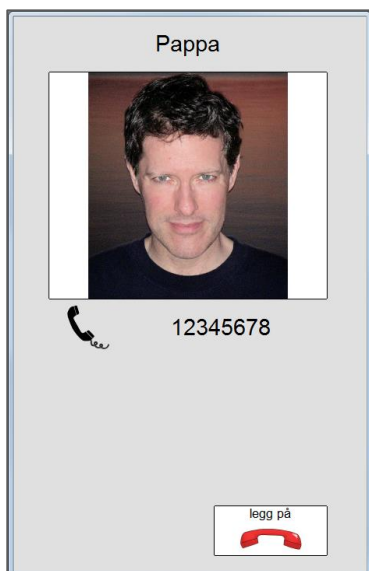


For at lægge på trykkes

9.1.2 Søg



Når der trykkes på , vises denne side:

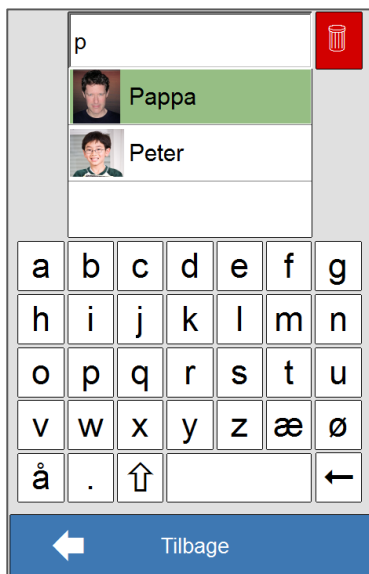

Her kan man foretage en søgning blandt kontakterne ved hjælp af tastaturet. Skrives der et bogstav, vises alle de kontakter, som begynder med det bogstav.


For at fjerne al tekst, som ligger i tekstfeltet, trykkes på 


For at fjerne et bogstav ad gangen trykkes på  til højre for mellemrumsknappen nederst på tastaturet.

Når der trykkes på en af kontakterne i listen, kommer man til samme side som i kapitel 9.1.1 ovenfor.


Trykkes der på *Tilbage*, kommer man tilbage til *Kontakter*.

9.1.3 Nummer


Når der trykkes på , vises denne side.

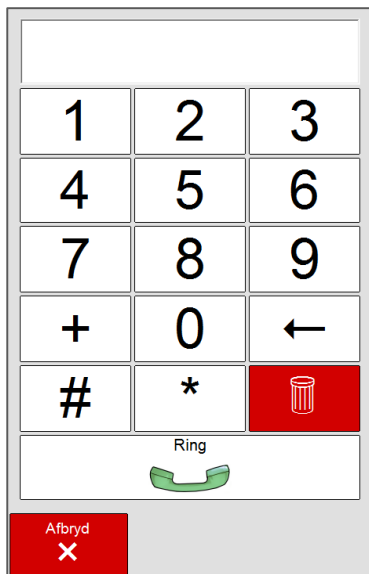

Her vises nummeret, som skrives ind via taltastaturet.

For at fjerne al tekst, som ligger i nummerfeltet, trykkes der på .

For at fjerne et tal ad gangen, trykkes der på .

For at ringe, trykkes der på .


Trykkes der på *Afbryd*, kommer man tilbage til *Ring til*.

9.2 Enkel telefon


Enkel telefon er en vældig forenklet telefonfunktion. Den har kun tilgang til de 10 øverste kontakter under *Kontakter*, og der bør kun ligge et telefonnummer pr. kontakt. Ligger der flere telefonnumre på en kontakt, vil der kun blive ringet til det øverste nummer på listen.

Hvis man ønsker at have adgang til to numre på en person, må man oprette to kontakter på denne person. F. eks. "Far mobil" og "Far arbejde". I *Opsætning* kan der vælges, om nummertastaturet skal være tilgængeligt.

Når der trykkes på , vises denne side.

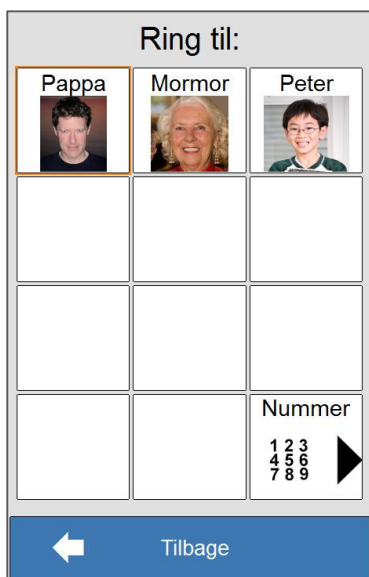


Her vises de 10 øverste kontakter under *Kontakter*. I tillæg

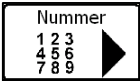
kan  vises. I *Telefonvalg i hovedmenuen* under *Opsætning* kan man vælge, om denne knap skal vises eller ej, se kapitel 14.2.1.

Trykkes for at ringe til et telefonnummer, som ikke ligger under *Kontakter*.

Trykkes der på *Tilbage*, kommer man tilbage til *Menu*.

Når der trykkes på et af numrene til kontakten, vises denne side.

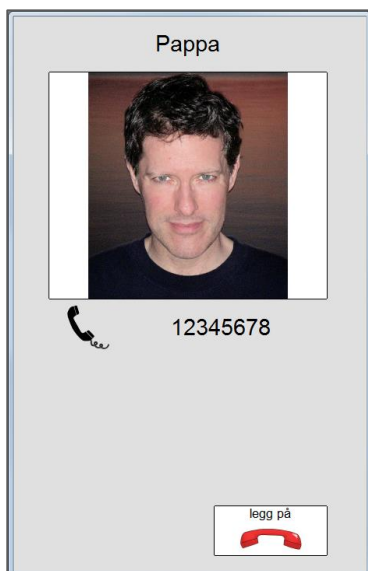


For at lægge på trykkes der på .

9.3 Indkommende opkald


Indkommende opkald vises lidt forskelligt. Det afhænger af, om opkaldet kommer fra et nummer, som ligger under *Kontakter*, eller et nummer som ikke ligger under *Kontakter*.


9.3.1 Indkommende opkald fra en Kontakt.

Når det kommer et indkommende opkald fra et nummer, som ligger under *Kontakter*, vises denne side.

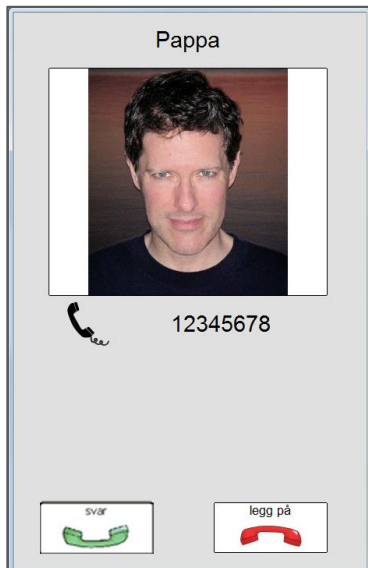


Her vises kontaktens navn og eventuelle billede.

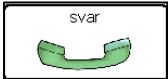Det indkommende opkald besvares med .

Det indkommende opkald afvises med .


9.3.2 Indkommende opkald fra "ukendt" nummer

Når der kommer et indkommende opkald fra et nummer, som ikke ligger under Kontakter, vises denne side.

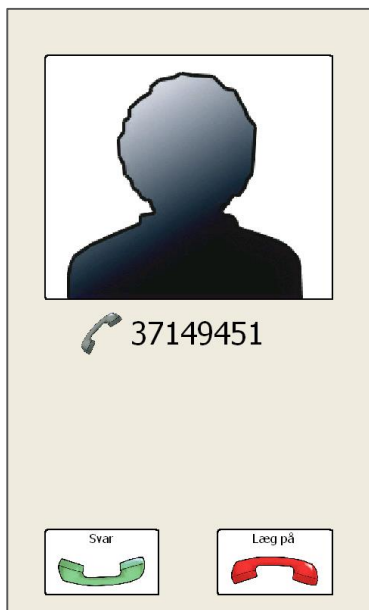

Her vises det nummer, opkaldet kommer fra.

Det indkommende opkald besvares med

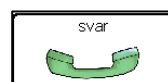

Det indkommende opkald afvises med




9.4 Ubesvarede opkald

Når man har fået indkommende opkald, som ikke er besvaret, vises det med et tal i ikonet for *Ubesvarede opkald* på *Menu*. Når der klikkes på ikonet, nulstilles tælleren for *Ubesvarede opkald*.



Når der trykkes på , vises denne side.

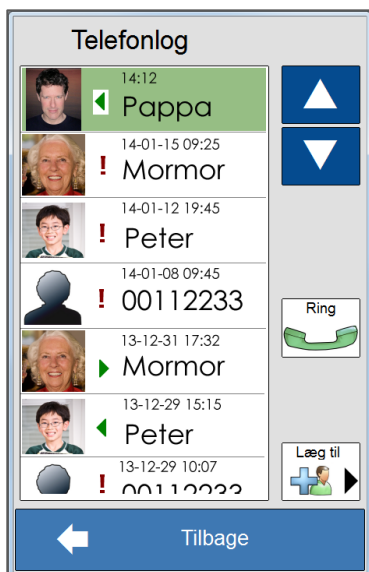


Her vises en kronologisk opkaldslog over alle ubesvarede, indkommende og udgående opkald.

Trykkes der på pilene, kan man blade op og ned i opkaldsloggen.


For at ringe til et af numrene i opkaldsloggen, skal

nummeret markeres, og der trykkes på

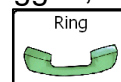

For at lægge et "ukendt" nummer under *Kontakter*, skal


nummeret markeres, og der trykkes på

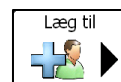


Trykkes der på *Tilbage*, kommer man tilbage til *Menu*.

Ubesvarede opkald vises med dette symbol  i opkaldsloggen.





Indkommende opkald vises med dette symbol  i opkaldsloggen.



Udgående opkald vises med dette symbol  i opkaldsloggen.

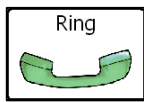

Når et nummer i opkaldsloggen markeres, og der trykkes på , kommer man til Ringe-siden. Se kapitel 9.1.1.

Når et "ukendt" nummer i opkaldsloggen markeres, og der trykkes på , kommer man til *Kontakt*-siden. Se kapitel 8.4.1.4.

10 Billedkalender

NB! Billedkalender er kun tilgængelig i Memoplanner.

Billedkalender er en funktion, som kan bruges som en pauseside. I Billedkalender vises dato og klokkeslæt, samt en billedramme, hvor billederne ændres vilkårligt hvert 5. minut.

NB! Har man ikke valgt nogen form for varsel eller alarm ved aktivitetsstart, vil man ikke få nogen besked, når en aktivitet starter.

Det kan indlægges egne billeder for visning i ur. Dette beskrives i *Håndbogen for Memoplanner*.



Når der trykkes på , vises denne side.



Her vises dag, del af dag, dato og klokkeslæt.

Billederne i billedrammen ændres vilkårligt hvert 5. minut.



Trykkes der på , kommer man tilbage til *Menu*.

11 Skype


NB! Skype er kun tilgængelig i Memoplanner.

Skype er en funktion, hvor man fører samtaler med andre over internet. Samtalerne kan foregå bare med lyd eller med video og lyd. For at bruge videosamtale med Skype kræves det, at det er koblet til et webkamera til Memoplanner. Webkamera sælges som separat tilbehør. Hvordan Skype sættes op for Memoplanner, beskrives i *Håndbog for Memoplanner*.

11.1 Ringe til en Skype-kontakt



For at ringe til en Skype-kontakt, skal der trykkes på , hvorefter denne side vises.

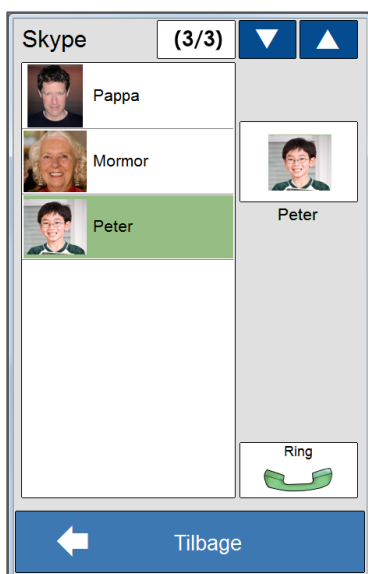

Her vises alle Skype-kontakterne, som er logget på.

Hvis der er flere påloggede Skype-kontakter end dem, som vises i listen, kan man blade op og ned med pilene.

Når en Skype-kontakt markeres, vises billedet i dette felt. For at starte en Skype-samtale med denne Skype-kontakt




trykkes på .


Trykkes der på *Tilbage*, kommer man tilbage til *Menu*.



Når der trykkes på , vises denne side.

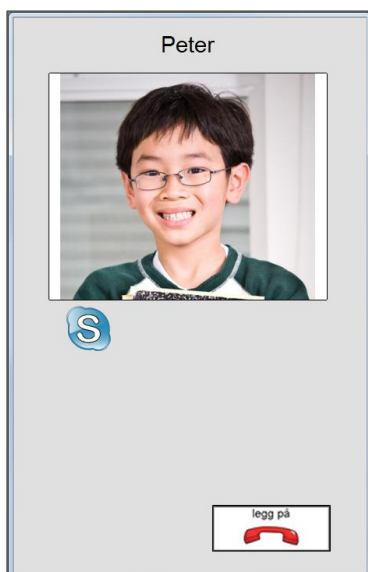


Ringsignalet afspilles, indtil der svares.

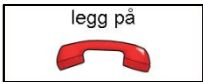Får man ikke svar, lægges det på med .




11.2 Indkommende Skype-samtale.


Hvis en af Skype-kontakterne ringer op, vises denne side.

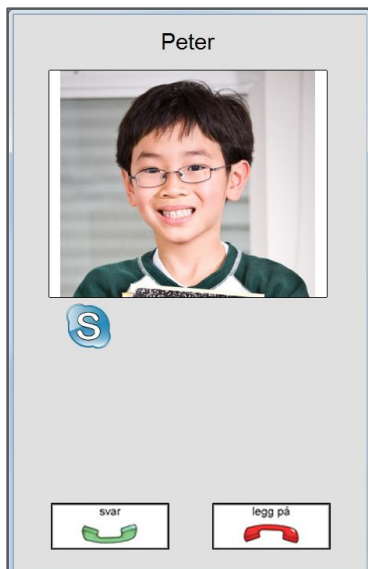

Her vises navn og eventuelt billede af Skype-kontakten, som ringer.

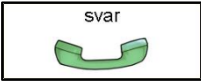Hvis man vil svare, trykkes på , og samtalen er startet.

Vil man sige, at man er optaget, trykkes

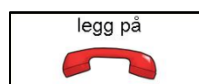

Hvis ingen af knapperne trykkes, lukkes siden, når den, som ringer op, lægger på.

11.2.1 Videosamtale med Skype



I det store billede vises den, man snakker med. På det lille billede kan du se dig selv.

NB! Hvis det lille billede ligger halvt skjult under den røde håndsat kan flyttes. Tryk og hold det lille billede og træk det til toppen af skærmen.

For at lægge på, trykkes på



12 Synkroniser

Synkroniser er en funktion som synkroniserer *Aktiviteter* og *Kontakter* mellem Memoplanner og Memoactive. Synkronisering foregår via USB-kablet, som følger med Memoactive.

NB! Hvis man ikke synkroniserer, er det vigtigt at *Synkroniser* ikke vises i *Menu* på *Memoplanner*. Når *Synkroniser* vises på *Menu*, gemmes alle slettede aktiviteter, til næste synkronisering køres. Hvis *Synkroniser* vises, og man ikke synkroniserer, vil aktivitetsbasen blive vældig stor, og *Memoplanner* bliver langsom eller kan i værste faldophøre med at fungere.

Hvis synkronisering er aktiveret, og man foretager en ændring på samme aktivitet/kontakt på Memoactive og Memoplanner, er det den ændring, som senest blev foretaget, som vinder.


For at synkronisere må Memoactive og Memoplanner kobles sammen med USB-kablet.

Kobl først den lille kontakt på USB-kablet til Memoactive, så den store kontakt til Memoplanner. Når der afspilles en lyd fra Memoactive, er det klart til synkronisering.

NB! Synkronisering er ikke tilgængelig på 8 tommers tablett.



Når trykkes, vises denne side.

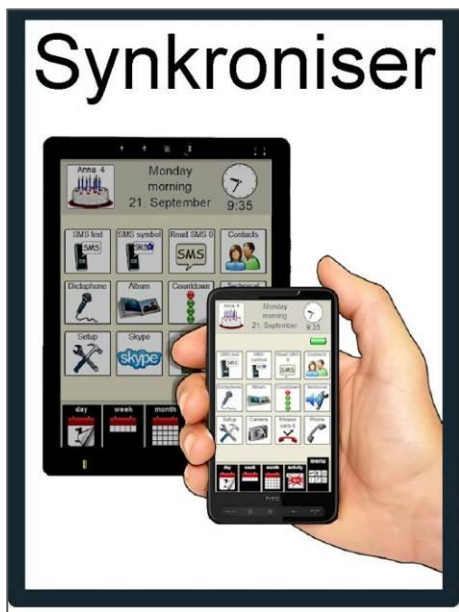

Når denne side vises, er synkroniseringen aktiveret.

Det er vigtigt, at man ikke foretager noget med Memoplanner eller Memoactive, så længe synkronisering er aktiveret.

En synkronisering tager fra 10 sekunder og opefter afhængigt af, hvor mange data der skal synkroniseres.

Når siden lukkes, og *Menu* vises igen, er synkroniseringen færdig. Det kan tage lidt tid, før ændringerne vises på Memoactive og Memoplanner.

Hvis denne side bare vises et kort øjeblik, før man kommer tilbage til *Menu* igen, er der ikke kontakt mellem Memoactive og Memoplanner. Prøv at koble kablet mellem Memoactive og Memoplanner fra og så til igen og kørsynkroniseringen en gang til.

Hjælper dette ikke, så kobl Memoactive fra Memoplanner, afslut både Memoactive og Memoplanner og slå dem helt fra og så på igen. Kobl Memoactive til Memoplanner igen og prøvsynkronisering igen. Hjælper dette ikke, så kontakt leverandøren.


13 Teknisk

Teknisk er en funktion, hvor man kan slå *Lyd ved valg* og *Talesyntese* fra og til og justere *Lydstyrken*. På *Memoactive* kan man endvidere vælge mellem *Lyd* og *Vibration*, samt slå *Flymodus* fra og til.



Når der trykkes på , vises denne side.

Memoactive

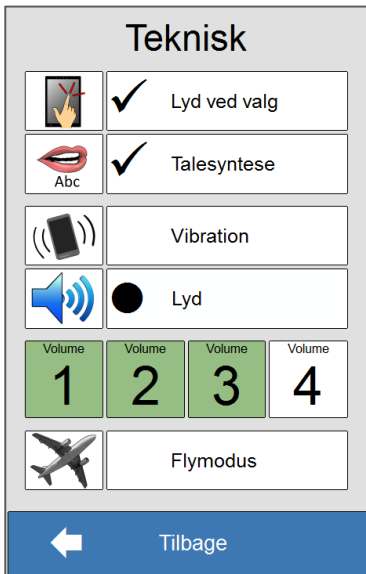

Her slås *Lyd ved valg* fra og til.

Her slås *Talesyntese* fra og til.


Her vælges mellem *Vibration* eller *Lyd*.

Her vælges *Lydstyrken* på ét af fire niveauer.


Her slås *Flymodus* fra og til.

Trykkes der på *Tilbage*, kommer man tilbage til *Menu*.

Memoplanner

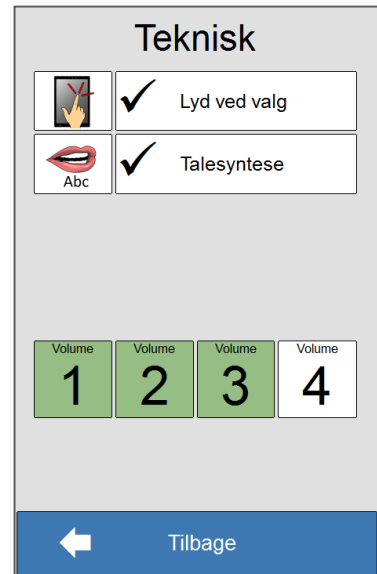

13.1 Lyd ved valg

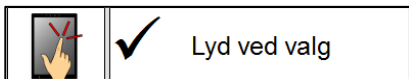


Her slås *Lyd ved valg* fra og til. Når denne er markeret, giver *Memoactive* et klik som en auditiv tilbagemelding hver gang, den registrerer et tryk på skærmen.

13.2 Talesyntese



Her slås *Talesyntese* fra og til. Når denne er markeret, kan en del af indholdet i *Memoactive*/*Memoplanner* læses op:


- Tiden læses op ved at trykke på uret i øverste felt.

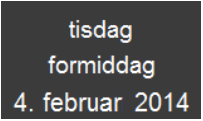- Dag, del af dag og dato læses op ved at trykke på det enkelte felt. 
- Alle tekstfelter med et højttalersymbol ved siden af sig læses op, når der trykkes

på højttalersymbolet. 

13.3 Vibration eller Lyd


NB! Valg af *Vibration* eller *Lyd* er kun tilgængeligt i Memoactive.

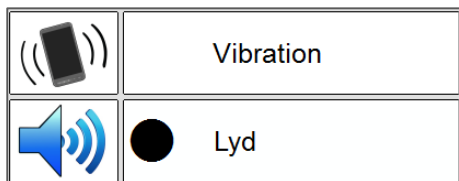

Her vælges, om Memoactive skal vibrere eller afspille lyd ved alle varslingslyde, som alarmer ved aktiviteter, sms-lyd og telefon-lyd. Dette gælder AL afspilning af varslingslyde, også *Vælg alarmlyd* under indstillinger for *Aktivitet*.

Klikket, som afspilles, når *Lyd ved valg* er markeret, erstattes også af vibration, det er derfor mest hensigtsmæssigt at slå *Lyd ved valg fra*, før *Vibration* vælges.

13.4 Lydstyrke

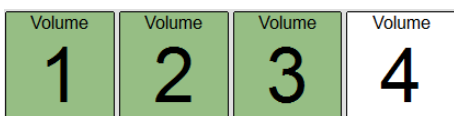

Her vælges lydniveauet. Der kan vælges mellem 4 niveauer. På billedet herover er niveau 3 valgt.


NB! Hvis der er ingen eller svag lyd, selv om volumen 4 er valgt, skal du trykke på og holde knappen Lydstyrke op. Se kapitel 2.2 i *Håndbogen for Memoplanner*.

13.5 Flymodus

NB! *Flymodus* er kun tilgængelig for Memoactive.



Her slås Flymodus fra og til. Når denne er markeret, kan man ikke bruge *Telefon-* eller *sms-funktionerne*.


Når *Flymodus* slås til, vises det med ikonet  øverst i *Menu*.




14 Indstillinger


Indstillinger er indstillingsfunktionen for Memoactive og Memoplanner.




Når der trykkes på , vises denne side hvis Indstillingerne er adgangskodebeskyttet. Hvis adgangskodebeskyttelsen er slået fra kommer man direkte ind i Indstillinger.

Adgangskode						
<input type="text"/>						
Indstillinger	Menu	Ny aktivitet				
a	b	c	d	e	f	g
h	i	j	k	l	m	n
o	p	q	r	s	t	u
v	w	x	y	z	æ	ø
å	.	↑		123	←	
← Tilbage						

Ved levering er adgangskodebeskyttelsen slået fra.
Standard adgangskoden sat til "abc".

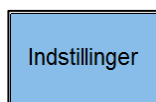

Når adgangskoden skrives, og der trykkes på , vises siden nedenfor.

Inställningar	
	Kalender och aktiviteter ▶
	Kontakter ▶
	Menyval telefon ▶
	Menyval annat ▶
	Ändra SMS meddelande ▶
	Inställningar nedräkning ▶
	Grundinställningar ▶
👍 OK	

Indstillinger for Kalenderfunktionerne: disse beskrives i egen brugsvejledning.

Her kan *Kontakter* administreres, hvis de ikke skal være tilgængelige fra *Menu*.

Her vælges, hvilke sms- og telefonfunktioner, der skal være tilgængelige.

Her vælges, hvilke øvrige funktioner, der skal være tilgængelige i *Menu*.

Her ændres sms-beskederne i *sms*-billedet.

Her vælges, hvordan *Nedtælling* skal se ud, og de 5 valgbare nedtællingstider kan ændres.

Her kan programmet afsluttes, alle aktiviteter slettes, adgangskode, adgang og telefonlyd indsættes.


Trykkes der på *Tilbage*, kommer man tilbage til *Menu*.

14.1 Kontakter

Hvis man ikke ønsker, at *Kontakter* skal være tilgængelige fra *Menu*, kan de administreres her.



Når der trykkes på , vises denne side.

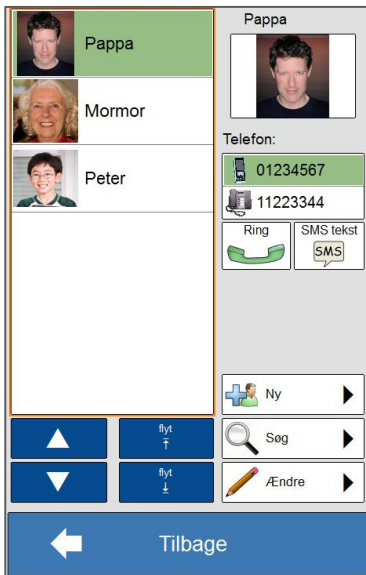



Denne side er identisk med *Kontakter* og beskrives i kapitel 6.

14.2 Telefonvalg i hovedmenuen

Her vælges, hvilke sms- og telefonfunktioner der skal være tilgængelige i *Menu*.

NB! Memoactive har telefon- og SMS-funktion. Memoplanner har kun SMS-funktion. Memoplanner på 8 tommer tablet har hverken telefon- eller SMS-funktion.

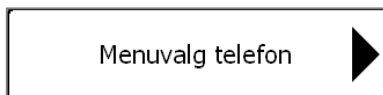

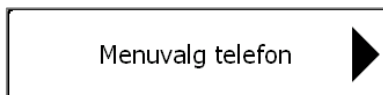Når der trykkes på , vises denne side.



Trykkes på forhåndsvisningsvinduet, vises de ændringer, som er foretaget. Forhåndsvisningsvinduet lukkes igen ved at trykke på det.

Her vælges, om *Komplet telefon* eller *Enkel telefon*, *Vis Ubesvarede opkald*, *Kontakter*, *sms-billede*, *sms-tekst* og *Ulæst sms* skal vises på *Menu*. Man kan også vælge, om det skal være muligt at ringe til andre numre end dem, der ligger i *Kontakter*, når *Enkel telefon* er valgt.

14.2.1 Komplet eller Enkel telefon

<input type="checkbox"/>	Komplet telefon
<input checked="" type="checkbox"/>	Enkel telefon
<input checked="" type="checkbox"/>	Indtast nummer

Her vælges, om *Komplet telefon* eller *Enkel telefon* skal vises i *Menu*. Hvis *Enkel telefon* vælges, kan der vælges, om *Nummer* skal være tilgængeligt eller ej. *Nummer* giver brugeren anledning til at ringe til andre numre end dem, som ligger i kontakter.

<input checked="" type="checkbox"/>	Indtast nummer	<input type="checkbox"/>	Indtast nummer
-------------------------------------	----------------	--------------------------	----------------

Ring til:		
		Nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9
← Tilbage		

Ring til:		
← Tilbage		

14.3 Telefonvalg i hovedmenuen

Her vælges, hvilke af de øvrige funktioner, der skal være tilgængelige i *Menu*.

Valg i hovedmenuen

Når der trykkes på , vises denne side.

Memoactive

Valg i hovedmenuen	
<input checked="" type="checkbox"/> Nedtælling	
<input checked="" type="checkbox"/> Mine fotos	
<input checked="" type="checkbox"/> Diktafon	
<input checked="" type="checkbox"/> Indstillinger	<input checked="" type="checkbox"/> Teknisk
<input checked="" type="checkbox"/> Kamera	
👍 OK	

Memoactive:

Her vælges, om *Nedtælling*, *Mine fotos*, *Diktafon*, *Kamera*, *Teknisk* og *Indstillinger* skal vises i *Menu*.

Memoplanner:

Her vælges, om *Nedtælling*, *Mine fotos*, *Diktafon*, *Teknisk*, *Indstillinger*, *Kamera*, *Billedkalender*, *Synkroniser* og *Skype* skal vises i *Menu*.


Memoplanner

Valg i hovedmenuen	
<input checked="" type="checkbox"/> Nedtælling	
<input checked="" type="checkbox"/> Mine fotos	
<input checked="" type="checkbox"/> Diktafon	
<input checked="" type="checkbox"/> Indstillinger	<input checked="" type="checkbox"/> Teknisk
<input checked="" type="checkbox"/> Kamera	<input checked="" type="checkbox"/> Billedkalender
<input checked="" type="checkbox"/> Synkronisering	Skype
👍 OK	

Trykkes på forhåndsvisningsvinduet, vises de ændringer, som er foretaget.

14.3.1 Opsætning


Hvis *Opsætning* ikke vises i *Menu*, kommer man ind i *Opsætning* på følgende måde:

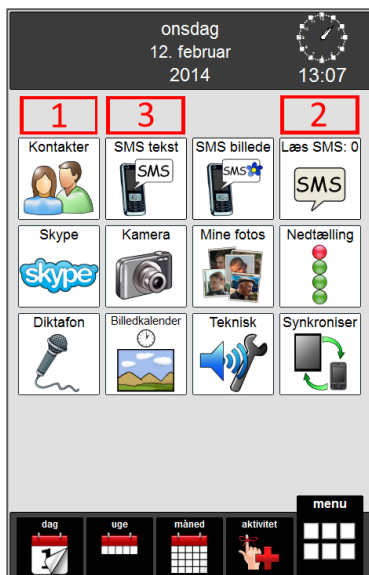

Når der trykkes på de felter, som er markeret med rød ramme, i rækkefølgen 1, 2 og 3, kommer man til adgangskodesiden eller direkte til *Indstillinger* (afhængigt af om der er valgt beskyttelse med adgangskode eller ej).

14.4 Ændre sms-beskeder

Her kan billede og tekst i sms-billedet ændres.

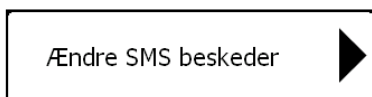



Når der trykkes på , vises denne side.



Når en af beskederne markeres, kan der klikkes på *Skift billede* og *Skift tekst* for at foretage ændringer.

Trykkes der på , vises side 2 af beskederne.

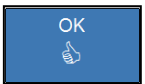Trykkes der på , gemmes de ændringer, som er foretaget, og man kommer tilbage til *Opsætning*.

Trykkes der på , kommer man tilbage til *Opsætning*, uden at eventuelle ændringer gemmes.

14.4.1 Skift billede




Når en besked markeres, og der trykkes på , vises denne side.





Her vælges billede fra *billedsiderne*, *billedbanken*, *Mine fotos*, *Kontaktfotos*, eller et billede kan tages med kameraet, eller fra Dropbox, SkyDrive og Google Drive.

Denne side og undersiderne beskrives detaljeret i kapitel 6.1.1.


14.4.2 Skift tekst

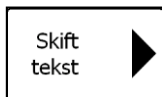

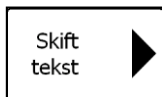Når der trykkes på , vises denne side.

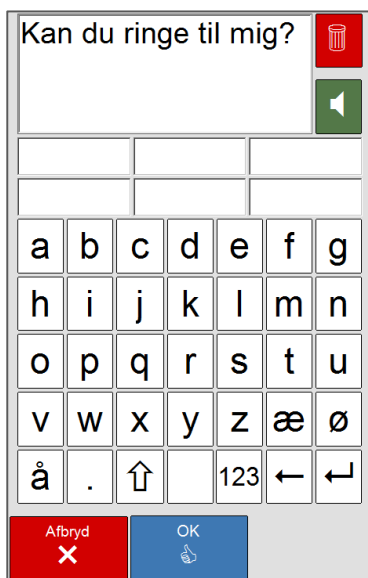


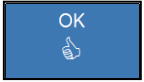
Her vises den tekst, som er lagt ind på beskeden.


For at fjerne al tekst, som er lagt ind, trykkes på .

For at fjerne et bogstav ad gangen trykkes på  til højre for 123-knappen nederst i tastaturet.

Tastatur og specialtegn ligger under .


For at få teksten læst op af talesyntesen trykkes der på .

Trykkes der på , gemmes de ændringer, som er foretaget, og man kommer tilbage til *Ændre sms-besked*.


Trykkes der på , kommer man tilbage til *Ændre sms-besked*, uden at eventuelle ændringer gemmes.

14.5 Opsætning af nedtælling

Her vælges, om *Nedtælling* skal vises med tidslinje eller med stopur. Alarmlyd, billede og nedtællingstid for 5 af nedtællingstiderne kan også ændres her.

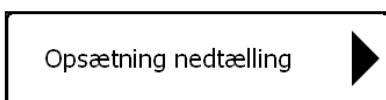

Når der trykkes på , vises denne side.

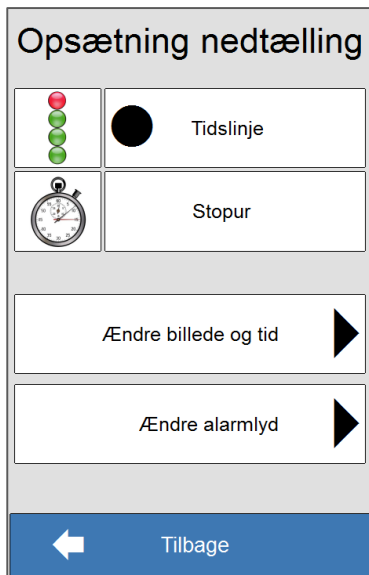


Her vælges, om nedtællingstiden skal vises som tidslinje eller stopur.

Her ændres billede og nedtællingstid.


Her vælges alarmlyden.

Trykkes *Tilbage*, kommer man tilbage til *Indstillinger*


14.5.1 Tidslinje eller stopur

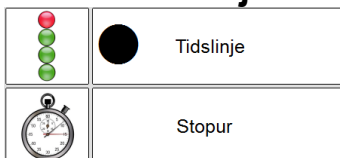




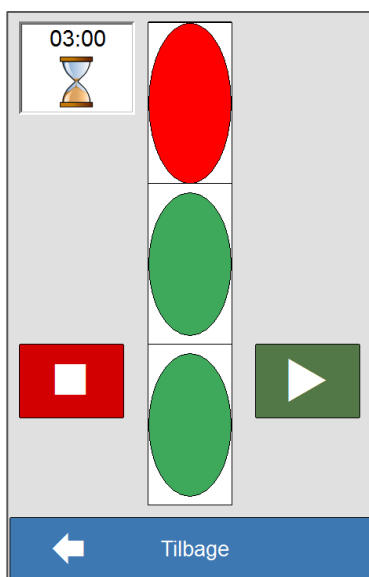



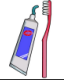


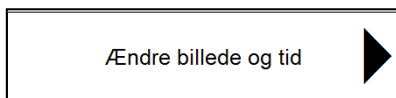

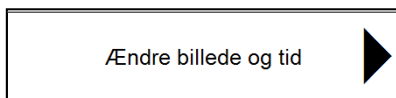Nedtællingssiden kan vises som en tidslinje.



14.5.2 Ændre billede og tid

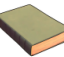



Når der trykkes på , vises denne side.





Ændre billede og tid		
	04:30	Ændre 
	05:00	Ændre 
	02:00	Ændre 
	01:00	Ændre 
	30:00	Ændre 
 Tilbage		

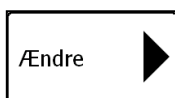Her kan billede og/eller tid ændres for hver enkelt af de 5 nedtællingstider.

Trykkes *Tilbage*, kommer man tilbage til *Opsætning nedtælling*.



Når der trykkes på  ved siden af en af nedtællingerne, vises denne side.


Billede:	
 koge æg	Ændre billede 
Minutter:	
04:30	Ændre tid 
 OK	

Her ændres billedet til nedtællingen.


Her ændres tiden til nedtællingen.

Trykkes OK, kommer man tilbage til *Ændre billede og tid*.

14.5.2.1 Ændre billede

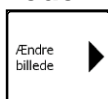

Når der trykkes på , vises denne side.

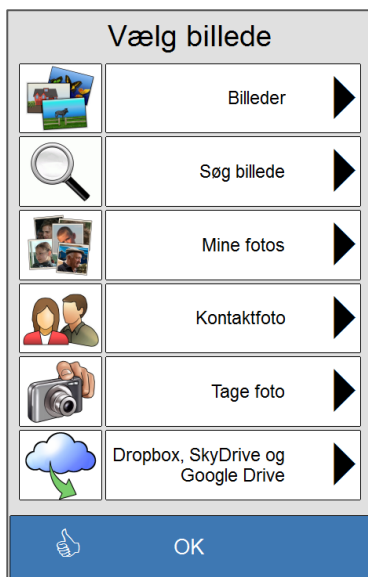


Her vælges billede fra *billedsiderne*, *billedbanken*, *Mine fotos*, *Kontaktfotos*, eller et billede kan tages med kameraet. eller fra Dropbox, SkyDrive og Google Drive.


Denne side og undersiderne beskrives detaljeret i kapitel 6.1.1.

Trykkes *OK*, kommer man tilbage til siden ovenfor.


14.5.2.2 Ændre tid

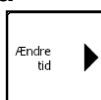

Når der trykkes på , vises denne side.

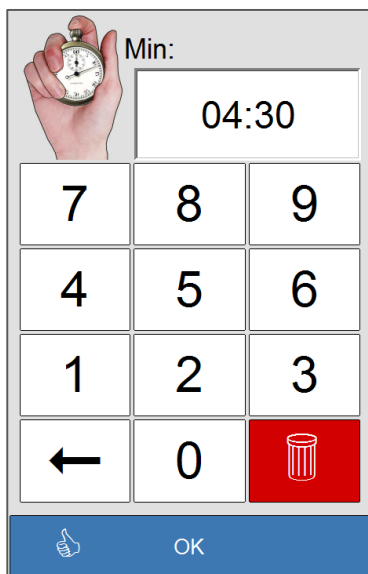


Her vises den nedtællingstid, som er valgt til nedtællingen. Nedtællingstiden kan lægges ind mellem 1 sekund og 59 minutter og 59 sekunder. Hvis tidslinje bruges, bør tiden opgives i hele minutter.

For at nulstille tiden trykkes på .


For at fjerne et tal ad gangen, trykkes på .


Trykkes *OK*, kommer man tilbage til siden ovenfor.

14.5.3 Ændre alarmlyd

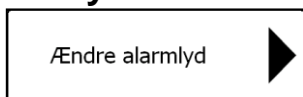

Når der trykkes på , vises denne side.

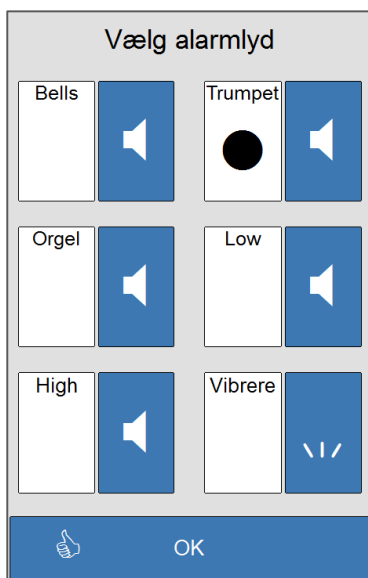

Her vælges den ønskede alarmlyd. Dette er den lyd, som afspilles, når nedtællingstiden er ude. Tryk på  ved hver lyd for at høre den.


Vælges Vibrer, vil der ikke blive afspillet nogen lyd, men Memoactive vibrerer, når nedtællingstiden er slut.

NB! Vibrer gælder kun for Memoactive.

15 Systemopsætning

Under *Systemopsætning* ændres adgangskode og adgange, ringetone til Telefon, sms-nummer for Send sms under Aktivitet og køn på talesyntesen samt info om programversionen.

Funktionerne i *Systemopsætning* er forskellige for Memoactive og Memoplanner.

Når der trykkes på , vises denne side.

Memoactive:



Her kan programmet afsluttes for adgang til indstillingerne for operativsystemet til maskinen.

Her kan adgangskoden ændres.

Her vælges notifikationslyd til sms.

Her vælges ringetone til telefon.

Her vises information om programversionen.

Trykkes *OK*, kommer man tilbage til *Indstillinger*.

Memoplanner:



Her kan programmet afsluttes for adgang til operativsystemet til maskinen.

Her kan adgangskoden ændres.

Her foretages indstillingerne for *Send sms* under *Aktivitet*. Dette beskrives i *Brugsvejledning for kalenderfunktionerne*.

Her vælges kvinde- eller mandestemme på talesyntesen.


Her foretages indstillingerne for Kamera.

Her vises information om programversionen.

Trykkes *OK*, kommer man tilbage til *Indstillinger*.

15.1 Slet aktiviteter/afslut

Slet aktiviteter/ afslut

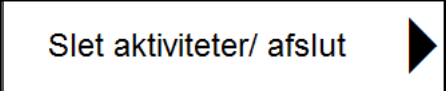Når der trykkes på , vises denne side.




Her kan alle aktiviteterne slettes. Dette beskrives i *Brugervejledning for kalenderfunktionerne*.

Trykkes for at afslutte programmet og komme til operativsystemet for maskinen.

Denne markeres automatisk ved første synkronisering mellem Memoplanner og Memoactive. Hvis man ikke synkroniserer Memoplanner og Memoactive, er det vigtigt, at den ikke er markeret.

Trykkes der på *Tilbage*, kommer man tilbage til *Grundindstillinger*.

Afslut

Når der trykkes på , vises en af siderne nedenfor efter hvert tryk.

15.1.1 Memoactive:



Her kan dato og klokkeslæt indstilles.

Hastigheden på talesyntesen kan ændres.

Memoactive kan sættes tilbage til fabriksindstillinger, og Memoactive kan geninstalleres med eller uden brugerdata.


Hvordan dette gøres, beskrives i *Håndbog for Memoactive*.

Memoactive startes igen på denne måde:

Tryk på Start



Tryk på Memoactive-ikonet.

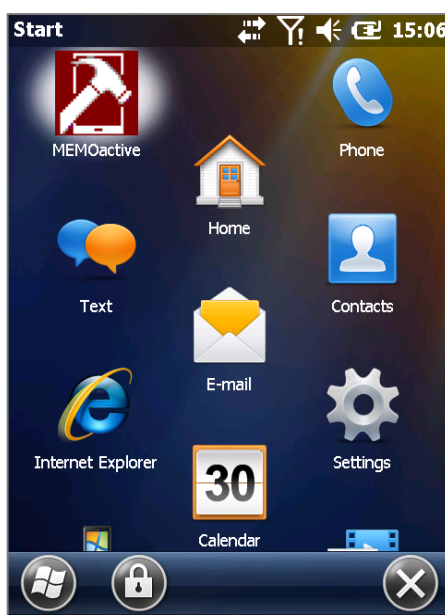

Memoactive startes op, og det tager lidt tid, før den er klar til brug.

15.1.2 Memoplanner:

Sådan ser siden ud i Memoplanner, når du har trykket på "Afslut". Her kan du gå videre med at lave ændringer. Læs mere om mulighederne i *Håndbogen for Memoplanner*.




Her kan dato og klokkeslæt indstilles.

Memoplanner kan sættes tilbage til fabriksindstillinger, og Memoplanner kan geninstalleres med eller uden brugerdata.

Hvordan dette gøres, beskrives i *Håndbog for Memoplanner*.

Memoplanner startes igen ved at dobbeltklikke på Memoplanner-ikonet.

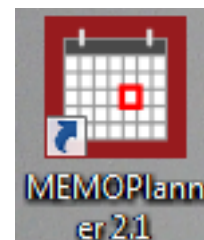

15.1.3 Synkronisering

NB! Synkronisering vises kun på Memoactive.

Synkroniser er en funktion, som synkroniserer *Aktiviteter* og *Kontakter* mellem Memoplanner og Memoactive. Synkronisering foregår via USB-kablet, som følger med Memoactive.




Synkronisering markeres automatisk ved første synkronisering mellem Memoplanner og Memoactive.

NB! Hvis man ikke synkroniserer, er det vigtigt, at *Synkronisering* ikke er markeret. Når *Synkronisering* er markeret, gemmes alle slettede aktiviteter, til næste synkronisering køres. Hvis *Synkronisering* markeres, og man ikke synkroniserer, vil aktivitetsbasen blive vældig stor, og Memoplanner bliver langsom eller kan i værste fald ophøre med at fungere.


Hvis synkronisering er aktiveret, og man foretager en ændring på samme aktivitet/kontakt på Memoactive og Memoplanner, er det den ændring, som senest blev foretaget, som vinder.

15.2 Adgangskode og adgang

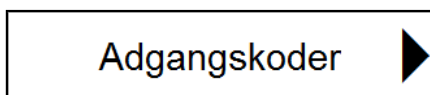


Når der trykkes på , vises en af disse sider.

Memoactive

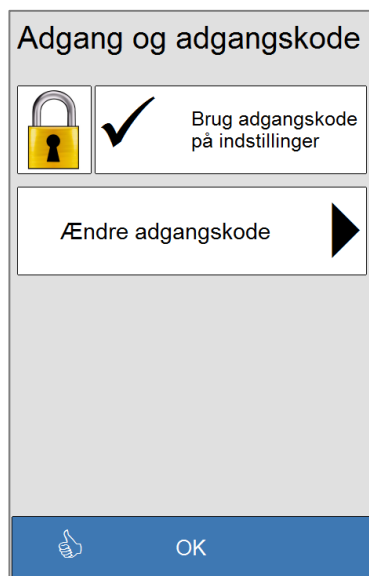


Memoplanner

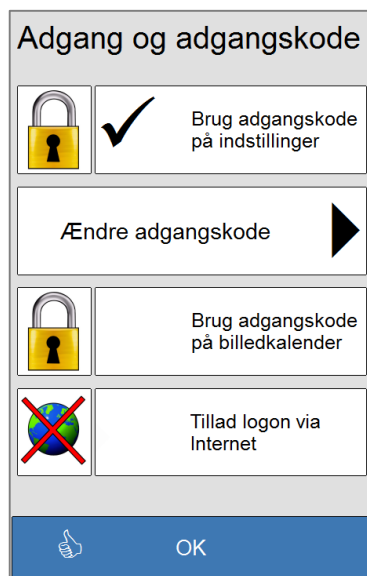

Når "Brug adgangskode på indstillinger" er valgt, så skal man angive et kodeord for at komme til indstillinger. Ved levering er kodeordet "abc".


15.2.1 Ændre adgangskode

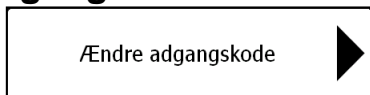



Når der trykkes på , vises denne side.

Ændre adgangskode:

abc|

a	b	c	d	e	f	g
h	i	j	k	l	m	n
o	p	q	r	s	t	u
v	w	x	y	z	æ	ø
å	.	↑		123	←	


 


Gyldig adgangskode vises i tekstfeltet.

For at fjerne al indtastet tekst trykkes på .

For at fjerne et bogstav ad gangen trykkes på  til højre for 123-knappen nederst i tastaturet.



Tastatur og specialtegn ligger under .


Trykkes der på , gemmes adgangskoden, og man kommer tilbage til *adgangskode og adgang*.


Trykkes der på , gemmes adgangskoden ikke, og man kommer tilbage til *adgangskode og adgang*.

15.2.2 Brug adgangskode til billedkalender

Her kan der vælges, om man skal gå via adgangskodesiden for at komme ud af *Billedkalender*.

Når   Brug adgangskode på billedkalender er markeret, skal


adgangskoden skrives ind, efter at man har klikket på  for at komme ud af *Billedkalender*.

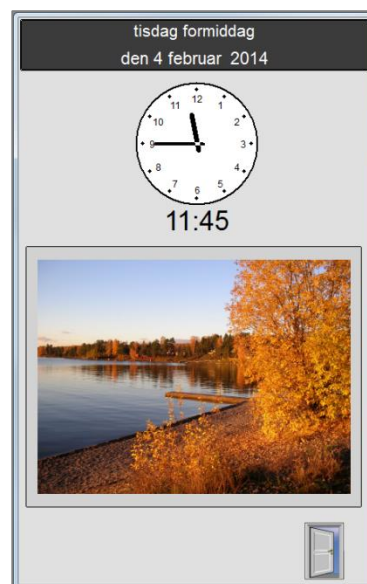

15.2.3 Tillad fjernbetjening

Her kan der vælges, om man skal kunne fjernbetjene Memoplanner fra en PC. Fjernbetjeningen foretages via internet. Fjernbetjeningsfunktionen beskrives i *Håndbog for Memoplanner*.

Fjernbetjening ikke tilladt

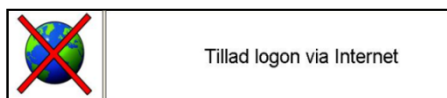


Fjernbetjening tilladt.




Se håndbogen for Memoplanner for beskrivelse af hvordan fjernbetjening aktiveres.

15.3 Vælg telefonringetone

NB! Telefonringetone gælder kun for Memoactive.

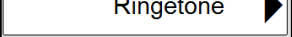Når der trykkes på , vises denne side.

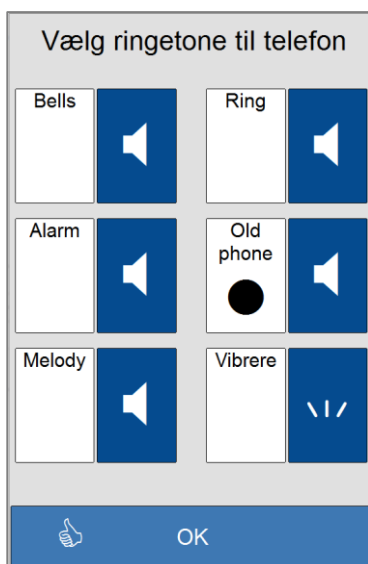


Her vælges den ønskede ringetone.


Tryk på  ved hver lyd for at høre den.

Vælges Vibrer, vil der ikke blive afspillet nogen lyd, men Memoactive vibrerer, når telefonen ringer.


Trykkes der på *OK*, kommer man tilbage til *Grundindstillinger*.

15.4 Vælg notifikationslyd til sms

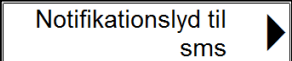Når der trykkes på , vises denne side.

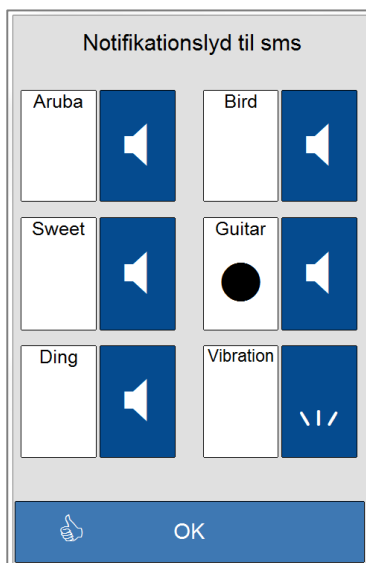

Her vælges den ønskede notifikasjonslyden til sms.


Tryk på  ved hver lyd for at høre den.

Vælges Vibrer, vil der ikke blive afspillet nogen lyd, men Memoactive vibrerer, når sms modtages.

NB! Vibrer gælder kun for Memoactive.

Trykkes der på *OK*, kommer man tilbage til *Grundindstillinger*.

15.5 Om produktet

Når der trykkes på , vises denne side.


Her vises programversionen til Memoactive og Memoplanner.

Trykkes *OK*, kommer man tilbage til *Grundindstilling*.




15.6 Vælg stemme

NB! *Stemme* gælder kun for Memoplanner.

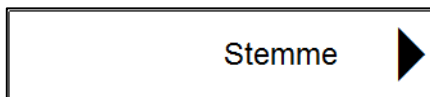

Når der trykkes på , vises denne side.

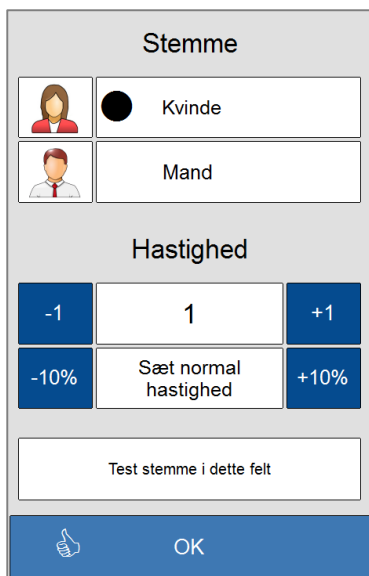



Her vælges der, om talesyntesen skal have kvindestemme eller mandestemme.

Vælg hastighed for talesyntesen her.

Tryk på  eller  for at øge hastigheden.

Tryk på  eller  for at mindske hastigheden.

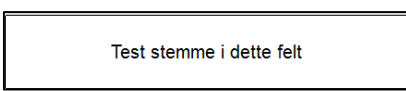
Tryk på  for at teste stemmens hastighed.

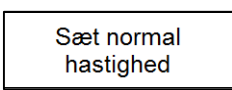Tryk på  for at gå tilbage til normal hastighed.

Trykkes *OK*, kommer man tilbage til *Grundindstillinger*.

15.7 Vælg kamera

NB! Gælder kun for Memoplanner.

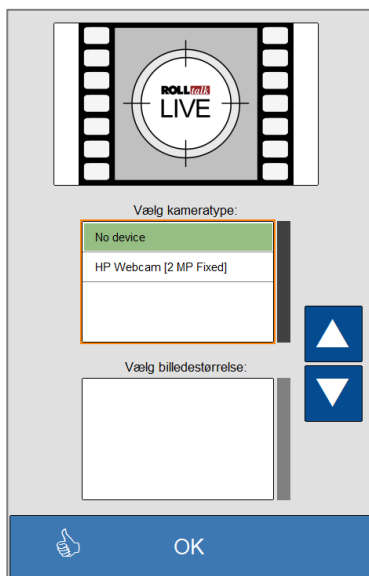

Her vælges hvilket kamera der skal anvendes for at tage billeder.

Vælg først kamera under "Vælg kamera".

Vælg kameraopløsning under "Vælg billedstørrelse".

Trykkes *OK*, kommer man tilbage til *Grundindstillinger*.

OBS! på 8-tommer tablet er kamerabilledet roteret i vinduet ovenfor. Kameraet vender rigtigt når billedet tages fra kontakter, ny aktivitet eller fra kamerafunktionen.

Abilia ApS, Krakasvej 7c, st, 3400 Hillerød, Denmark

Phone +45 70 22 98 08 | Fax +45 48 24 98 08 | info@abilia.dk | www.abilia.dk