

handi5

Håndbog for Handi Xcover 3

Art.nr 706450



Software version 5.3.5 eller nyere



ABILIA

Indhold

1. Indledning	6
1.1 Android-begrebet.....	6
1.2 myAbilia	7
1.3 Support.....	8
1.4 Licens	8
1.5 Forlængelse af licensen	8
1.6 Bevarelse af vand- og støvafvisning	9
2. Apparatoversigt.....	10
3. Ibrugtagning af Handi Xcover 3	11
3.1 Kontroller indholdet i æsken	11
3.2 Fjern batteridækslet.....	11
3.3 Indsæt SIM-kort	11
3.4 Indsæt batteriet.....	12
3.5 Sæt batteridækslet på plads	12
3.6 Oplad batteriet.....	12
3.7 Start Handi Xcover 3	13
3.8 Indstil dato og tid	13
3.9 Indstil låseskærm.....	13
4. Tilpas Handi Xcover 3.....	14
4.1 Indstillingstilstande	14
4.2 Gå til indstillingstilstand	14
4.3 Startmenuens udseende.....	15
4.4 Telefonabonnement.....	16
4.5 WiFi	16
4.6 Google-konto	16
4.7 Apps	16
4.8 Kodebeskyt indstillinger	17
4.9 Talestøtte.....	17
4.10 Billedarkiv	17
4.11 Installér HandiTools	18
4.12 Sikkerhed.....	18
4.13 Importér Handi 4 brugerdata.....	19
4.14 Kopiere kontakter til Handi.....	20
4.15 Besvare og afslutte opkald	20
4.16 Opdatere Android	20
5. Apps i Handi Xcover 3	21
5.1 Kortfattet beskrivelse af Standard-apps.....	21
5.2 Download apps.....	25
5.3 Fjern apps.....	26
6. Håndtering af apparatet	27
6.1 Tænd og sluk.....	27

6.2 Genstart.....	27
6.3 Opladning og batterihåndtering	27
6.4 Lyd.....	28
6.5 Vibration	30
6.6 Skærmlås og sikkerhedslås.....	30
6.7 Tastatur	31
6.8 Mobildata	31
6.9 WiFi	31
6.10 Bluetooth	32
6.11 Flytilstand	33
6.12 Roter skærm.....	33
6.13 Skærmens tidsgrænse.....	33
6.14 Dato og tid	34
6.15 PIN-kode.....	34
6.16 Telefonens hukommelse og hukommelseskort.....	34
6.17 Touch-skærm	35
6.18 Backup.....	36
6.19 Tilslutningsindstillinger.....	36
6.20 Opdatering.....	36
6.21 Automatisk crash-rapportering.....	38
6.22 Skift mellem apps	38
6.23 Opbevaring	39
6.24 Gemme billeder/videoklip fra indkomne mms/mail	39
6.25 Valg af startskærm	39
6.26 Tilslut til pc.....	39
6.27 Xcover-knappen	39
7. Hurtigindstillinger	40
7.1 Mobildata	40
7.2 WiFi	40
7.3 Bluetooth	40
7.4 Volume	41
7.5 Vibration	41
7.6 Kliklyd	41
7.7 Roter skærm.....	41
7.8 Skærmens tidsgrænse	42
7.9 Ringetone	42
7.10 Baggrundsbillede.....	42
7.11 Batteri	42
7.12 Tilpas Hurtigindstillinger.....	43
8. Total genstart.....	44
9. Tekniske data	50
9.1 Genbrug af elektronisk affald.....	50
9.2 Medfølgende artikler	50
9.3 Tekniske data	50

1. Indledning

Handi Xcover 3 er en Android-baseret smartphone, som bygger på Samsung Galaxy Xcover 3 hardware og den tilpassede software Handi 5. Artikelnummeret er 706450.

Med **Handi Xcover 3** får man adgang til alle de applikationer, der tilbydes på markedet, f.eks. e-mail, sociale medier, rejseplanlægning, kort, tv-guide m.m., men samtidigt også den tilpassede støtte fra Handifunktionerne.

Ved hjælp af indstillinger kan man "indkapsle" sin **Handi Xcover 3**, dvs. sætte nogle begrænsninger på, hvordan startmenuen skal se ud. Man kan også beslutte, om brugeren selv skal have adgang til at downloade nye applikationer.

Grundtanken med Handi 5 er at begrænse brugen af den på en kontrolleret måde. På den måde kan man give en struktureret oplæring af dens brug og efterhånden en tilpasset og effektiv funktionalitet.

I Handi 5 indgår flere af de Handifunktioner, der er udviklet gennem mange år og praktisk erfaring i tæt samarbejde med brugere. Handifunktionerne er Afspiller, Album, Diktafon, Hurtigindstillinger, Kalender, Kontakter, Kriseplan, Min Status, Notater, Prisberegneren, Sms, Statussvar, Telefon og Tjekliste.

Dette dokument beskriver, hvordan man kommer i gang med at bruge **Handi Xcover 3**; hvordan man kommer i gang med telefonen, tilpasser den og tilføjer apps.

Dokumentet beskriver også funktioner, som vedrører telefonen selv, hvordan man isætter et SIM-kort, regulerer lydniveauet, tilslutter den til et trådløst netværk osv. Da meget er apparatspecifikt, gælder dette dokument kun for hardwaren Samsung Galaxy Xcover 3.

Brugervejledning Handi 5 indeholder beskrivelser af principper, funktioner og indstillinger for Handi 5. Den bør man også læse for at få viden om Handi og Handifunktionerne.

Til at overføre billeder etc. fra en pc til Handi anvendes pc-programmet HandiTools. Via HandiTools kan man også oprette og håndtere skemaer. Andre vigtige funktioner i HandiTools er, at man kan sikkerhedskopiere indholdet i Handi samt få logfiler, der kan bruges i forbindelse med fejlsøgning. HandiTools leveres sammen med **Handi Xcover 3**.

1.1 Android-begrebet

Nedenfor beskrives nogle begreber i Android, som det er godt at kende.

Begreb	Forklaring
Startskærm, Home Screen Launcher	Det samme som Startmenu. Handi 5 har sin egen Startmenu med to forskellige temaer.
Applikation, forkortet "app"	Et program, som man kan starte fra Startmenuen. I dette dokument nævnes Handi-apps, standardapps og tredjepartsapps.
Play Butik	En app til download af apps, f.eks. spil, rejseplanlægning og lydbogslæser.
Hjem-knap	En funktionsknap, se kapitel 2. <i>Apparatoversigt</i> , som altid fører til Startmenuen.
Tilbage-knap	En funktionsknap, se kapitel 2. <i>Apparatoversigt</i> , som altid fører til forrige billede.

Scrolle	En måde hvorpå man kan navigere i forskellige lister ved at holde fingeren på skærmen og herefter trække opad/nedad eller højre/venstre. Erstatte ofte knapperne Næste/Forrige.
Zoom	Hvor billederne vises i fuld skærm kan du zoome, forstørre billedet, ved at placere to fingre på skærmen og trække dem fra hinanden.
Statusfelt	En liste øverst på skærmen, som viser klokken, batteriniveau, status for modtagelse og information om indkomne meddelelser m.m. (Denne liste vises ikke i Handi-apps'ene).
WiFi	Teknik til trådløst netværk. Gør det muligt at tilslutte trådløst til internettet via f.eks. en router. Gratis WiFi kan forekomme i offentlige miljøer.
Mobildata	Den datatrafik, der sendes til/fra en mobil enhed (gælder ikke samtale/sms).

1.2 myAbilia

MyAbilia er en webtjeneste til Handi og andre produkter fra Abilia.

Med *myAbilia* kan du:

- Administrere kalender, billedarkiv, tjeklister, notater og diktafon fra computeren
- Vælge støttepersoner, som f.ex kan tilføje eller ændre påmindelser via internettet

1.2.1 Roller i myAbilia

MyAbilia er tilpasset til hjælpemiddelhåndtering, hvilket indebærer et system med forskellige roller. Målet er at give mulighed for, at kontrollere de enheder som lånes ud, og samtidig kan brugeren altid få hjælp til sin Handi.

Afhængigt af hvem du "er" i hjælpemiddelhåndteringen gives forskellige logins til myAbilia og der gives mulighed for at kunne gøre forskellige ting i webtjenesten:

Rolle	Beskrivelse	Funktioner
Bruger	Den person der bruger Handi. Kan administrere kalenderen, billedarkiv, tjeklister, notater og diktafon.	Kalender, Billedarkiv, Tjekliste, Notat, Diktafon
Støtteperson	En eller flere personer der hjælper brugeren med Handi.	Samme som ovenfor med læse eller læse/skrive-rettigheder
Den bevilgende	Den person der opretter brugerkontoen og håndterer licensen. Kan desuden være støtteperson.	Brugerkonton Licenshåndtering
Administrator	Den person der håndterer ændringer omkring den bevilgende konto i en organisation.	Bevilgende konto

1.3 Support

Aabentoft kan give support til Handifunktionerne og indstillinger for disse i **Handi Xcover 3**. Aabentoft kan ikke påtage sig service og support til alle de applikationer, som tilbydes på markedet. Der kan Aabentoft kun være rådgivende og vejledende.

1.4 Licens

Handi Xcover 3 leveres med licensnøgle (til Handi5 SW-licens). Dette indebærer at:

- **Mulighed for at flytte Handi til en anden telefon.** Hvis brugeren ønsker at skifte til en anden telefon kan licensen deaktiveres på Handi Xcover 3 og flyttes til anden telefon.
- **3-årig supportlicens.** Programmet kan opdateres i 3 år. Programmet vil selvfølgelig fortsætte med at fungere hele Handi Xcover's livslængde. For at kunne fortsætte med at opdatere softwaren og få support efter 3 år, kan licensen forlænges, se nedenfor.

1.5 Forlængelse af licensen

For at forlænge licensen i yderligere 3 år bestilles artikel *706362 Handi5 SW Forlængelse* fra Aabentoft. Licensnøglen skal angives ved bestilling.

For at aktivere forlængelse af licensen skal man efterfølgende gå til **Indstillinger|System|Licenshåndtering** og trykke på *Søg licensforlængelse*. Sørg for at der er internetadgang.


1.6 Bevarelse af vand- og støvafvisning

Enheden kan blive beskadiget, hvis der trænger vand eller støv ind i enheden. Følg disse tip nøje for at undgå beskadigelse af enheden og for at opretholde enhedens modstandsevne over for vand og støv.

- Undgå at enheden nedsænkes i vand, der er dybere end 1 m, i mere end 30 minutter.
- Kontroller, at bagdækslet er lukket tæt. I modsat fald yder det måske ikke beskyttelse mod vand og støv.
- Undgå at nedsænke enheden i vand i længere tid ad gangen.
- Undgå at udsætte enheden for vand ved højt tryk, såsom vand, der løber fra en vandhane, havbølger eller et vandfald.
- Åbn ikke enhedens dæksel, når enheden er i vand eller på meget fugtige steder, f.eks. svømmebassiner eller baderum.
- Åbn ikke bagdækslet med våde hænder, eller mens enheden er våd.
- Gummipakningen på bagdækslet er en vigtig komponent på enheden. Vær forsigtig, når du åbner og lukker bagdækslet, så du undgår at beskadige gummipakningen. Kontroller desuden, at gummipakningen ikke er snavset, f.eks. af sand eller støv, for at undgå beskadigelse af enheden.
- Hvis enheden bliver udsat for ferskvand, skal den tørres grundigt med en ren, blød klud. Hvis enheden bliver udsat for andre væsker end ferskvand, skal den straks renses med ferskvand og tørres grundigt med en ren, tør klud. Hvis enheden ikke renses med ferskvand og tørres som anvist, risikerer enheden at få problemer med funktionaliteten eller udseendet.
- Bagdækslet kan blive løsnet, hvis enheden tabes på gulvet eller udsættes for stød.
- Kontroller, at hele dækslet er korrekt justeret og tæt lukket.
- Hvis enheden har været nedsænket i vand, eller mikrofonen eller højttaleren er våde, er det muligvis ikke muligt at høre lyden klart under et opkald. Sørg for, at mikrofonen eller højttaleren er rene og tørre, og aftør med en tør klud.
- Enhedens vandtætte design medfører, at den vibrerer en smule under bestemte forhold.
- Vibrationer, der forekommer under sådanne forhold, f.eks. når lydstyrkeniveauet er højt, er normale og har ingen indflydelse på enhedens ydeevne.
- Touchskærmen og andre funktioner fungerer muligvis ikke korrekt, hvis enheden bruges i vand eller andre former for væsker.
- Din enhed er blevet testet i et kontrolleret miljø og er certificeret til at være vand- og støvtæt under visse forhold (opfylder kravene til klassifikation IP67 som beskrevet i den internationale standard IEC 60529 - Kapslingsgraden for elektrisk udstyr [IP-kode]; testforhold: 15-35°C, 86-106 kPa, 1 meter, i 30 minutter). Til trods for denne klassifikation er enheden ikke uimodtagelig for vandskade under alle forhold.

Denne tekst er hentet fra enhedens originale brugsanvisning, som findes på Handi USB-nøglen.

2. Apparatoversigt

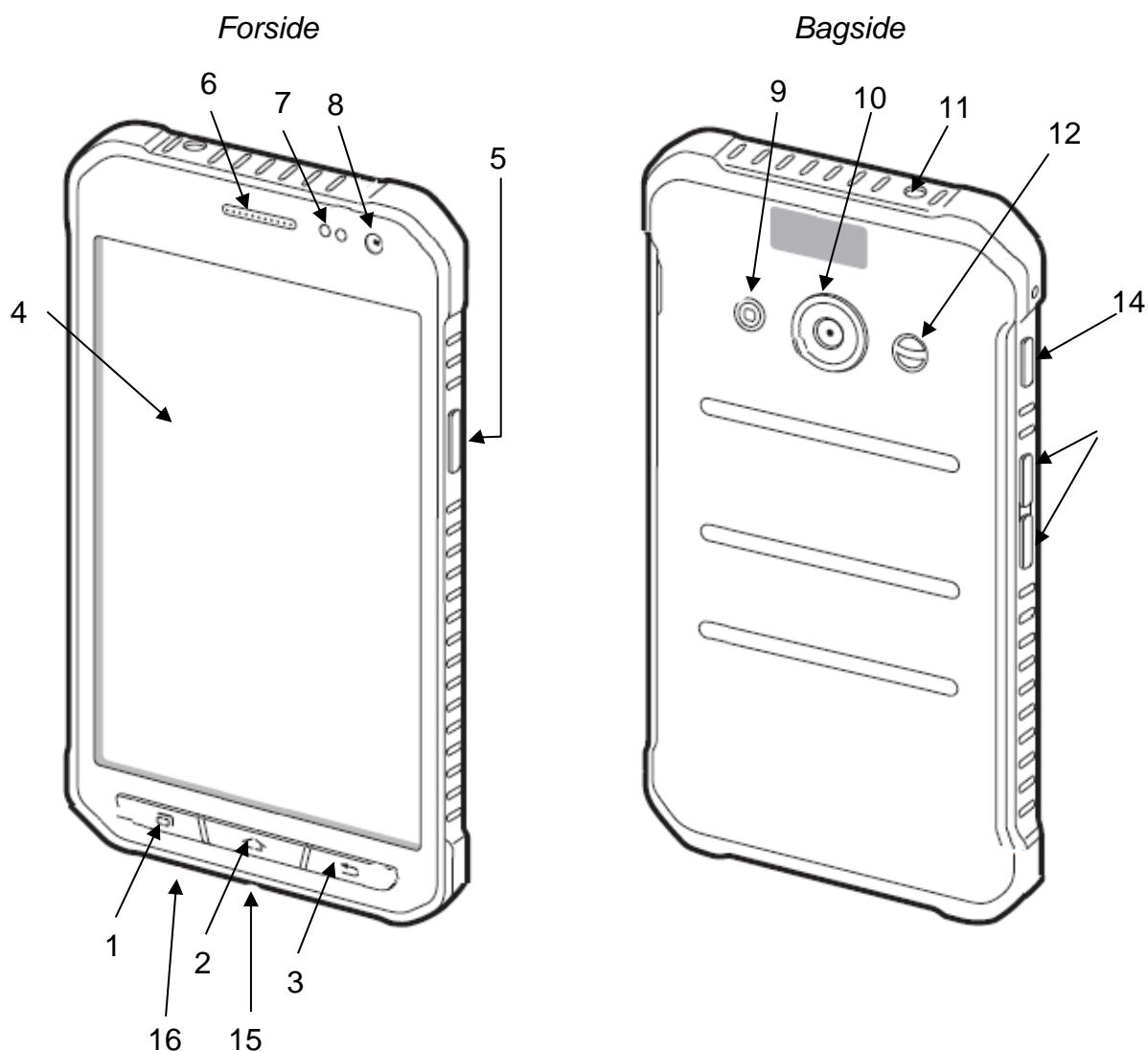

1. Funktionsknap <i>Seneste</i>	10. Kamera (bagside)
2. Funktionsknap <i>Hjem</i>	11. Udgang til headset
3. Funktionsknap <i>Tilbage</i>	12. Højtaler
4. Touchskærm	13. <i>Lydstyrke-knap</i>
5. <i>Power-knap</i>	14. <i>Xcover-knap (udløser), se 6.27 Xcover-knappen</i>
6. Højtaler	15. Mikro-USB udgang til opladning og tilslutning til pc
7. Nærheds sensor	16. Mikrofon
8. Kamera (forside)	
9. Blitz	

Mange henvisninger i denne håndbog har formatet "(X)", hvor X refererer til et punkt i listen ovenfor.

3. Ibrugtagning af Handi Xcover 3


3.1 Kontroller indholdet i æsken

Æsken skal indeholde følgende:

1. Samsung Galaxy Xcover 3
2. Beskyttelsesetui
3. Batteri
4. Netadapter
5. Headset
6. USB-kabel
7. Håndbog Handi Xcover 3 (dette dokument)
8. Brugervejledning Handi 5
9. Brugervejledning Kalender
10. Handi USB-nøgle med HandiTools og dokumentation
11. Handi5 SW USB-nøgle med installationsfiler for Handi5 SW.
12. Værdibevis med licensnøgle
13. Hukommelseskort Micro-SDHC (monteret)
14. Abilia pudseklud

3.2 Fjern batteridækslet

For at kunne indsætte et SIM-kort skal batteridækslets fjernes.

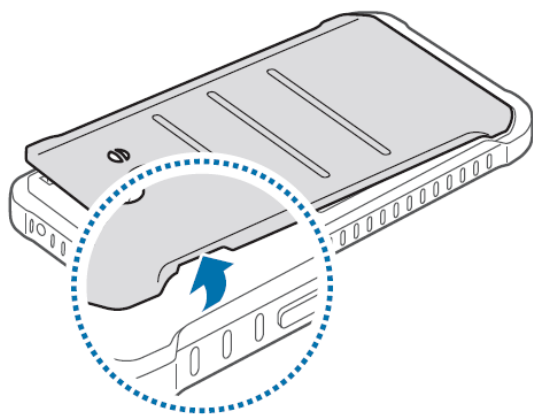


1. Sæt en negl i og løft forsigtigt batteridækslet. Start ved hakket (se billedet), og fortsæt rundt.
2. Løft batteridækslet af.

Bøj og vrid ikke batteridækslet, det kan tage skade.


3.3 Indsæt SIM-kort

For at kunne telefonere og sende sms/mms, skal du indsætte et SIM-kort i **Handi Xcover 3**. (Du kan uden problemer vælge at starte Handi uden SIM-kort og indsætte det på et senere tidspunkt).

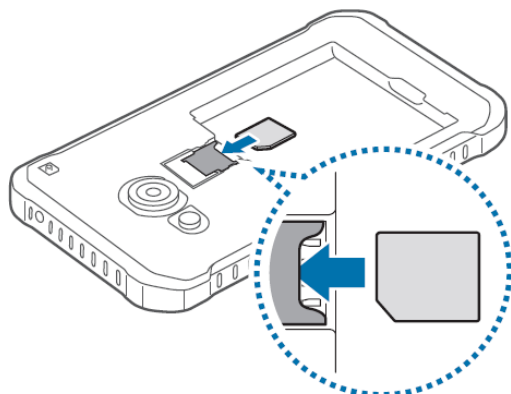


1. Indsæt SIM-kortet med guldkontakterne ned, se billedet.
2. Skub SIM-kortet helt ind i kortholderen.

3.4 Indsæt batteriet

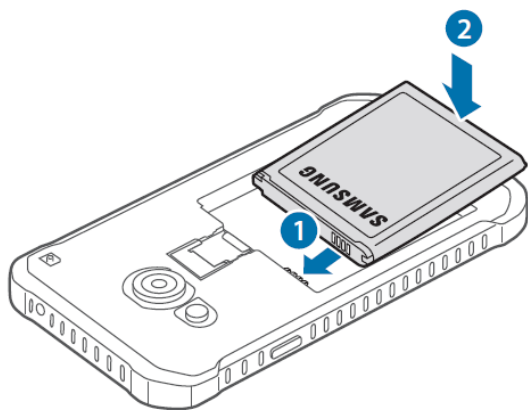


1. Sæt batteriet ind, så kobberkontakterne passer med batterikontakterne inde i rummet til batteriet.
2. Sæt batteriets kontaktside i først og skub derefter forsigtigt batteriet på plads.

3.5 Sæt batteridækslet på plads

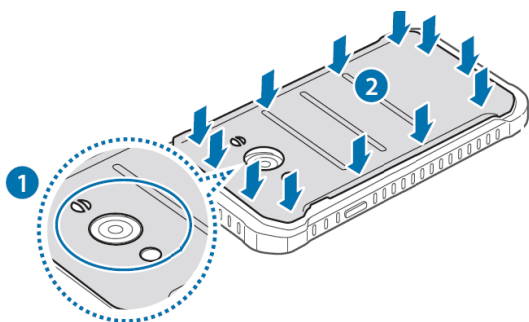

1. Læg batteridækslets på, og vær omhyggelig med kanterne. Tryk let hele vejen rundt i kanten.

3.6 Oplad batteriet

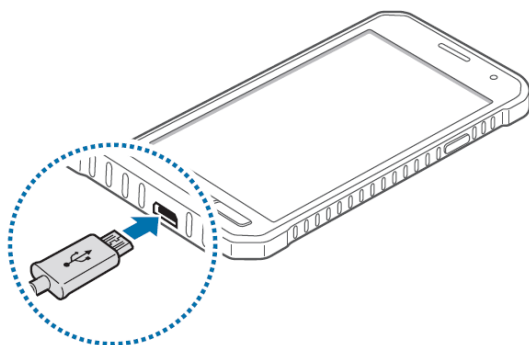


Tilslut opladeren til kontakten til opladning (15) og lad den lade op i 3 timer.

3.7 Start Handi Xcover 3

Tryk på *Power*-knappen (5) til teksten Samsung GALAXY Xcover 3 vises på skærmen (kan tage op til 5 sekunder). **Handi Xcover 3** starter og efter lidt tid vises Startmenuen eller PIN-kodebilledet, se *Alternativ 1* eller *Alternativ 2* nedenfor.

Alternativ 1: Uden PIN-kodekontrol (og uden SIM-kort)

Hvis der er indsat et SIM-kort uden pinkodekontrol kommer du direkte til Startmenuen. Det samme er tilfældet, hvis man starter Handi uden SIM-kort.

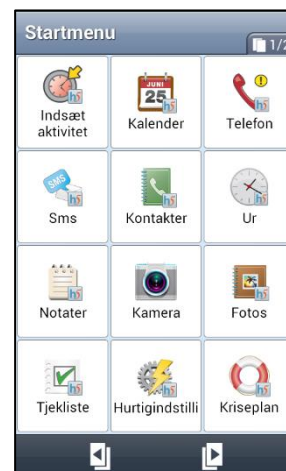


Alternativ 2: Angiv PIN-kode

Hvis der er indsat et SIM-kort, som er indstillet til PIN-kodekontrol, vises siden "Indtast pinkode".

Du skal da indtaste den aktuelle PIN-kode og trykke *OK*.

(Du kan bestemme om PIN-koden skal kontrolleres eller ikke, se kapitel 6.15 *PIN-kode*.)

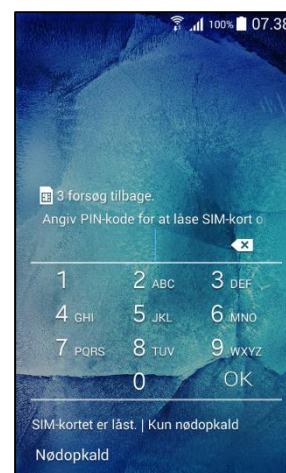

3.8 Indstil dato og tid

Handi Xcover 3 er på forhånd indstillet sådan, at både dato og tid indstilles automatisk via netværket, men hvis du ikke har noget SIM-kort og ikke regelmæssigt er tilsluttet WiFi, skal du indstille dato og tid manuelt i indstillinger, se 6.14 *Dato og tid*. (Hvor du kommer til Indstillinger beskrives i kapitel 4.2 *Gå til indstillingstilstand*.)

Man kan også have behov for at indstille tiden manuelt, hvis ikke teleudbyderen udsender tidsinformation i sit net.

3.9 Indstil låseskærm

Ved levering er **Handi Xcover 3** indstillet til ikke at låse skærmen, dvs. at skærmen ikke automatisk låses når man trykker på *Power*-knappen.

For at forhindre at man uønsket kommer til at aktivere Handi Xcover 3, kan man vælge at slå skærmlåsen til. Der er flere muligheder, se kapitel 6.6 *Skærmlås og sikkerhedslås*.

4. Tilpas Handi Xcover 3

Handi Xcover 3 kan tilpasses på mange forskellige måder for at passe til en bestemt bruger. Nedenfor bliver det beskrevet, hvad man kan have brug for at tænke på, for at brugeren kan komme i gang med sin **Handi Xcover 3**.

4.1 Indstillingstilstande

Handi Xcover 3 har to tilstande:

- *Brugertilstand*. Den tilstand **Handi Xcover 3** er i når du bruger apps.
- *Indstillinger*. Den tilstand, hvor du indstiller, hvordan **Handi Xcover 3** skal fungere, hvilke Handi-apps, der skal være tilgængelige, og hvordan disse skal fungere, samt hvilke andre apps, der skal være tilgængelige.

Hvor du kommer til indstillingstilstand beskrives i næste afsnit. Følgende indstillingsmenu vises:




Her kan man foretage indstillinger for Handi, se *Brugervejledning Handi 5* og funktionsbeskrivelserne for de respektive Handi-apps.

Man kan også komme til Androids indstillingsmenu og til *Play Butik*.

4.2 Gå til indstillingstilstand

Man kan komme til indstillinger på to måder, hvilket beskrives her.

4.2.1 Ikon på Startmenuen


I grundindstillingen findes en ikon for *Handi Indstillinger* i Startmenuen: . Ved at trykke på den kommer man til indstillinger.

Hvis brugeren ikke skal have adgang til *Indstillinger* er det passende at fjerne ikonet fra Startmenu. Dette gøres ved at afkrydse ikonet i **Indstillinger|Startmenu|Organisere apps**.



4.2 Knapkombinationen

Når du står i Startmenuen eller i nogen Handi-app, kan du trykke en specifik *knapkombination* for at komme over i *Indstillinger*.

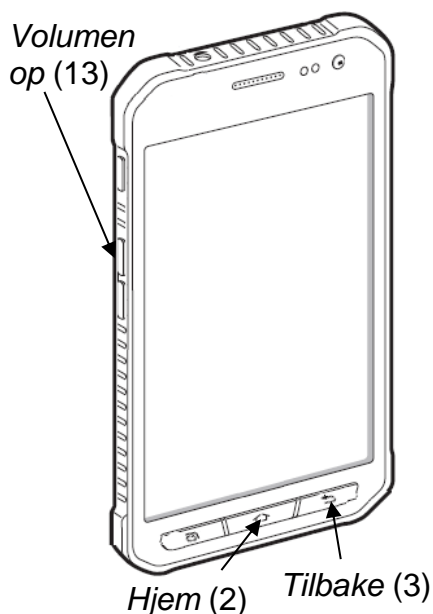

Hold funktionsknappen *Tilbage* (3) inde og tryk derefter to gange på *Volumen op* (13).

For at komme tilbage til Startmenuen trykker du på funktionsknappen *Hjem* (2).

4.3 Startmenuens udseende


Hvordan skal startmenuen se ud? Startmenuen kan have indstillingen *Standard*, *Handi Rudenet* eller *Handi Rækker*. Grundindstillingen er *Handi Rudenet*.

Startmenu med *Handi-layout* har mindre information og et renere udseende, og man kan få talestøtte. Startmenuen kan vises med rækker eller rudenet.

Standard-layout ligner mere en almindelig smartphone, hvad angår layout og har nogle funktionelle forskelle i forhold til *Handi-layout*:

- Statusfeltet (øverst) vises.
- Ingen talestøtte
- Enkeltryk for at start en app.
- Eget baggrundsbillede kan vælges.
- Favoritter. I rækken nederst lægger man de apps, man vil have tilgængelige.

Handi-layout

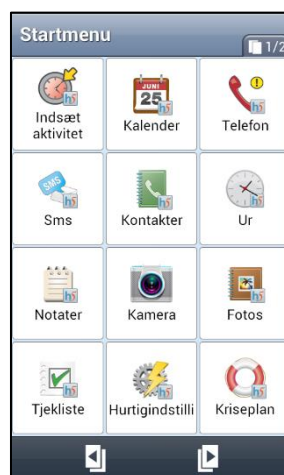

Standard-layout



Du vælger startmenuens layout via **Indstillinger|Startmenu|Vælg startmenu** og baggrundsbillede via **Indstillinger|Startmenu|Vælg baggrundsbillede** eller *Hurtigindstillinger*. For mere information, se *Brugervejledning Handi 5*.

4.4 Telefonabonnement

Hvilket telefonabonnement har brugeren? For at kunne bruge en smartphone uhindret er fri surfing mere eller mindre et krav. Selv om man har kontantkort, kan man hos de fleste operatører købe en pulje med fri surfing.

For at have adgang til internettet (når man ikke har adgang til trådløst netværk, se nedenfor) skal mobildata aktiveres, se 6.8 *Mobildata*.

For at kunne sende og modtage sms og mms skal meddelelsseserveren muligvis konfigureres. Dette sker automatisk hos de store operatører. Tag kontakt med din operatør, hvis du har brug for hjælp til at indstille tjenesten.

4.5 WiFi

Har brugeren adgang til trådløst netværk, WiFi?

Se kapitel 6.9 *WiFi* hvordan man tilslutter sig trådløst netværk.

4.6 Google-konto

Har brugeren en Google-konto, en Gmail-adresse? Dette er et krav for at kunne downloade apps.

Sådan gør du for at tilslutte en Google-konto i Handi Xcover 3:

1. Gå til Indstillinger.
2. Vælg Android Indstillinger.
3. Rulle til "Konti".
4. Vælg "Tilføj konto".
5. Vælg "Google".
6. Her kan du vælge, om du vil oprette en ny konto eller logge ind på en eksisterende. Hvis du har en eksisterende konto, kan du vælge *Eksisterende* og herefter indtaste dine kontooplysninger. Google vil da synkronisere din konto med din Handi (kan tage nogle minutter). Hvis du ikke har en eksisterende konto, skal du vælge *Ny*, hvorefter du skal udfylde en formular med navn og ønsket e-mail. Til sidst skal du vælge en adgangskode til din konto.
7. Færdig.

Tip! Det kan være en god idé at fjerne krydset ved synkronisering af kontakter osv, da det bruger meget strøm. (Tryk på kontoen for at se og ændre det, der skal synkroniseres).

4.7 Apps

Hvilke apps skal brugeren have adgang til? I kapitel 5. *Apps i Handi Xcover 3* får du mere at vide om apps.

Via **Indstillinger|Startmenuen|Ordne apps** afkrydser man hvilke Handi-apps og standardapps, der skal vises i Startmenuen. Man vælger også i hvilken rækkefølge, de skal vises. For mere information, se *Brugervejledning Handi 5*.

Behøver brugeren yderligere apps? I kapitel 5.2 *Download apps* får du mere at vide om hvordan man gør.

4.8 Kodebeskyt indstillinger


Skal brugeren have adgang til indstillingstilstand? Hvis ikke, er der så behov for at kodebeskytte indstillingstilstand?



Via **Indstillinger|System|Kodebeskyt indstillinger** kan du indstille, så der skal indtastes en kode for at få adgang til indstillingsmenuen i Handi og/eller indstillingerne i Android.

Det betyder, at når du trykker på ikonet *Indstillinger* eller trykker *knækombinationen*, så vises siden til højre og du skal nu indtaste en angivet kode for at komme til Indstillinger.

Koden skal forhindre, at brugere ved en fejl går ind i Indstillinger og ændrer indstillingerne eller downloader apps fra Play Butik.

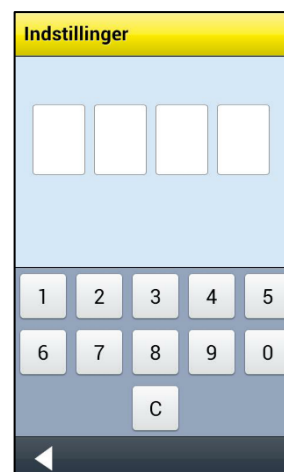

For at vælge kodebeskyttelse vælger du "Kodebeskyt indstillinger" og/eller "Kodebeskyt Android Indstillinger".

Hvis du ønsker en anden kode end den oprindelige 0353, så tryk på knappen med koden og angiv en ny kode.

For at kunne kodebeskytte Androids indstillinger i **Handi Xcover 3** skal du trykke på knappen *Tilgængelighedsindstillinger* og aktivere tjenesten Handi.

4.9 Talestøtte

Handi Xcover 3 har talestøtte, dvs. alt tekst i Handi-apps kan læses op af en talesyntese.

Man kan vælge om man vil have talestøtte slået til, og i hvilke situationer man i så fald vil have talestøtte. Fx om teksten skal læses op mens man skriver eller kun når man trykker på *Oplæsnings*-knappen. Se **Indstillinger|System|Talesyntese|Talesyntese indstillinger**.

Du kan vælge mellem en mands- og en kvindestemme; Mette og Rasmus. Valg af oplæsningsstemme gøres via **Indstillinger|System|Talesyntese|Vælg stemme**.

4.10 Billedarkiv

Med **Handi Xcover 3** leveres følgende billeder:

- **Handi-billeder.** Ca 160 stk. billeder som oprindeligt blev fremtaget af resursenheden AIR på Psykiatri Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Under 2014 kompletterades billedbasen ved hjælp af illustratør Andreas Högberg.
- **Rolltalk-billeder.** Ca 60 stk. billeder fra den billedbase der hører med til kommunikationshjælpemidlet Rolltalk.
- **Smileys** 20 smiley-billeder som er fremstillet specielt til Handi.
- **Standardbilleder** 83 piktogram- og pcs-billeder.
- **Baggrunde.** 8 stk. forskellige baggrunde, som kan bruges i Startmenuen. (Man kan anvende valgfrit billede som baggrund).

Billederne er som udgangspunkt organiseret i kategorierne *Handi, Tøj, Badeværelse, Skole, Standardbilleder, Smileys, Personer* (tom) og *Baggrundsbilleder* (vises ikke i billedarkivet).

Billeder fra fx Sms og mail gemmes i mappen *Modtaget*. Mappen vises kun, hvis der ligger gemte billeder i den.

For at tilpasse billedarkivet anbefales det at bruge pc-programmet HandiTools eller webtjenesten myAbilia. Eller direkte i Handi via **Indstillinger|Billedarkiv**, se *Brugervejledning Handi 5*.



4.11 Installér HandiTools

Med pc-programmet HandiTools kan du overføre billeder og oprette skemaer. Det er også muligt at sikkerhedskopiere indholdet i Handi 5. Med HandiTools kan du også få logfiler fra **Handi Xcover 3**, hvilket er en fordel ved fejlsøgning.

Det er ikke nødvendigt at installere HandiTools for at anvende **Handi Xcover 3**, men det er en stor fordel for at kunne udnytte alle de muligheder, som HandiTools giver.

Installationsprogram og brugsanvisning til HandiTools findes på den USB-nøgle, der leveres med **Handi Xcover 3**.

4.12 Sikkerhed

Handi Xcover 3 bør sikkerhedskopieres med jævne mellemrum. Ved hjælp af PC-programmet HandiTools overfører man Handi 5 brugerdata og fotos til PC'en. Så kan man genskabe det meste, også selv om man skulle miste sin **Handi Xcover 3** eller hvis hukommelseskortet går i stykker.

Et andet sikkerhedsaspekt er at minimere risikoen for virus. Det gør man ved kun at downloade apps, man stoler på.

4.13 Importér Handi 4 brugerdata

Har brugeren en Handi 4 og skal nu til at skifte til **Handi Xcover 3** (Handi 5)?

Denne instruktion beskriver, hvordan man overfører brugerdata fra en enhed med Handi4 til en enhed med Handi5. Overførslen forudsætter en computer med HandiTools installeret.

1. Nedgrader Handi5-enheden, VIGTIGT!

- a) Gå til **Indstillinger|System|Om Handi** for at kontrollere softwareversion. Hvis softwareversionen er >5.3.2.4 skal programmet nedgraderes, følg instruktionen nedenfor.
- b) Afinstaller Handi. *Hvis man ikke laver dette trin vil Handi krasche i trin d).*
- c) Start en webblæser på enheden og indtast www.handitek.se/import.
- d) Hent og installer Handi v5.3.2.4.
- e) Konfigurer som "Ny bruger".

2. Ta backup på Handi4-enheden

- a) Gå til **Indstillinger|System|Backup** og kør backup.

3. Kør HandiTools med Handi4-enheden

- a) Tilslut Handi4-enheden til computeren.
- b) Start HandiTools.
- c) Gå til **Filer**-menuen og vælg **Sikkerhedskopiering**. Følg instruktionene i HandiTools.
- d) Afslut HandiTools.
- e) Kobl Handi4-enheden fra.

4. Kør HandiTools med Handi5-enheden

- a) Tilslut Handi5-enheden til computeren.
- b) Start HandiTools.
- c) Gå til **Filer**-menuen och vælg **Importer Handi4 brugerdata**. Følg instruktionerne i HandiTools.
- d) Kobl Handi5-enheden fra.

5. Importer Handi4-data i Handi5-enheden

- a) Gå til **Indstillinger|System|Importer Handi4-data**.
- b) Tryk på *Start import* og vent mens importering sker. I visningen ser du hvilke data som bliver overført.

6. Opdater til nyeste Handi5-version (hvis nedgradering er lavet)

- a) Sørg for at enheden har adgang til Internet.
- b) Gå til **Indstillinger|System|Om Handi** og tryk på *Søg opdatering*. Hent og installer den nyeste version.

4.14 Kopiere kontakter til Handi

Fordelen ved at anvende Handi-kontakter er man kan gruppere og sortere sine kontakter. Hvis man ikke har behov for det, kan man undlade at anvende Handi-funktionen Kontakter.

Gå til **Indstillinger|Kontakter|Kopier kontakter**. En guide startes:

1. Vælg den konto hvor kontakterne skal kopieres fra (SIM-kort).
2. Marker de kontakter som skal kopieres. Tryk på *Næste* når du er klar.
3. Vælg den konto som kontakterne skal kopieres til (Handi) og tryk på *OK*.

Nu er kontakterne fra SIM-kortet overført til Handi-kontakter og man kan fx sortere dem i grupper, tilføje billede og information, se *brugervejledning Kontakter*.

4.15 Besvare og afslutte opkald


Er det vanskeligt at besvare indgående opkald ved at stryge fingeren på skærmen (se *5.1.1 Telefon*) så kan man indstille **Handi Xcover 3 til at besvare indgående opkald** ved at trykke på funktionsknappen *Hjem* (2). For at afslutte samtalen kan man trykke på *Power*-knappen (5). Man indstiller dette via **Indstillinger|Android Indstillinger|Enhed|Opkald|Besvare/afslutte opkald**.

4.16 Opdatere Android

Softwareen i Samsung Galaxy Xcover 3 udvikles løbende, og en meddelelse om tilgængelig programopdatering kan vises. Følg instruktionerna som vises for at updatere Android. Dette vil ikke påvirke Handi-programmet.

5. Apps i Handi Xcover 3

Apps, der er en forkortelse af "applikationer", er de programmer, der er installeret i telefonen. Man kan skelne mellem følgende apps i Handi 5:

- **Handi-apps.** De apps, der er udviklet specielt til Handi 5: Fx Kalender, Kontakter, Skema, Kriseplan, Hurtigindstillinger etc.. De har alle den samme lille h5-logo nederst til højre på ikonet: 
- **Standard-apps.** De apps, der indgår i Android og er lidt forskellige på de forskellige telefonmodeller. F.eks. Telefon, Meddelelser, Lommeregner, Maps og E-mail.
- **Tredjeparts-apps.** Apps, der er downloadet via *Play Butik*. F.eks. rejseplanlægning, lydbogslæser, nyheder, Spotify og Facebook.

Handi-apps beskrives på en overskuelig måde i *Brugervejledning Handi 5*. For en mere detaljeret beskrivelse, se *Brugervejledning* for de forskellige Handi-apps.

Funktionsbeskrivelserne findes på den USB-nøgle, der blev leveret sammen med **Handi Xcover 3**, men kan også downloades fra Abilias hjemmeside, www.abilia.dk.

Der er en oversigt over standard-apps i dette kapitel.

Der er en generel beskrivelse af download af apps sidst i dette kapitel.

5.1 Kortfattet beskrivelse af Standard-apps

Nedenfor beskrives kort de vigtigste standard-apps, som de ser ud og fungerer i **Handi Xcover 3**.

For mere information se også *original-Håndbogen for Samsung Galaxy Xcover 3*. (Bemærk, at ikke alle funktioner i original-Håndbogen stemmer overens med Handi Xcover 3). Original-Håndbogen findes som pdf på den USB-nøgle, der blev leveret med.


5.1.1 Telefon



Telefon er Androids standard-app til at ringe op og tage imod telefonsamtaler. Der anbefales dog at man i stedet bruger Handi-app'en *Telefon*. Der kan du få talestøtte, nemmere samtaletister og mulighed at gemme nye telefonnumre i Handi-kontakter. Handi-app'en *Telefon* kan også bruges til at ringe. I begge tilfælde bruges Androids telefon app for selve samtalerne.

For at ringe et **telefonnummer** op skal man vælge fanen "Tastatur" øverst. Herefter indtaster man det ønskede telefonnummer ved at trykke på tallene og til sidst trykke på den *grønne telefonrør*.


For at **ringe en kontakt op** skal man vælge fanen "Kontakter" og herefter vælge den ønskede kontakt på listen. Derefter trykker man på det telefonnummer, man vil ringe til (der kan være flere angivet).

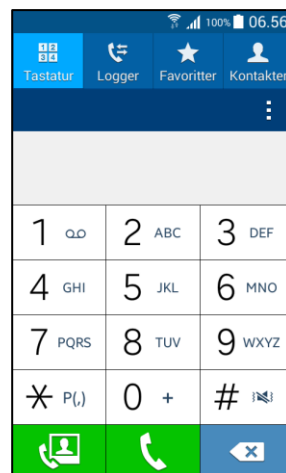



For at **svare** på en indkommende samtale skal man sætte fingeren på den *Grønne telefonrør*-knappen trække den til højre.

For at afvise samtalen trykker man på det *røde telefonrør* og trække den til venstre.

Opkald kan også afvises med en meddelelse (sms), træk fanen op og vælg en afvisningsmeddelelse. Du redigerer afvisningsmeddelelsen ved at trykke på  og så vælge **Indstillinger|Opkald|Opkaldsafvisning|Konfigurer beskeder ved afvist opkald**.


For at **afslutte** samtalen trykker man på den røde knap *Afslut samtale*.

Mistede samtaler vises i fanen "Logger".


Nye mistede samtaler vises i statusfeltet (Standard-layout). Man får også en tydelig meddelelse, når man har mistede samtaler.


Man kan ligeledes besvare et opkald med funktionsknappen *Hjem*, og afslutte samtalen med *Power*-knappen, se 4.15 *Besvare og afslutte opkald*.

5.1.2 Kamera

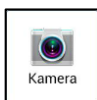

Med det indbyggede kamera kan man tage sine egne billeder. Billederne lagres på hukommelseskortet. Billederne kan herefter overføres til PC'en ved hjælp af programmet HandiTools. Man kan også bruge kameraet til at tage billeder, der skal bruges direkte i forskellige apps, f.eks. kan man fotografere en person, når man lægger ham/hende ind som en kontakt.

Når man starter *Kamera*, vises søgerbilledet. Det kan være stående eller liggende. For at tage et billede, skal man trykke på  eller på *Xcover*-knappen (14). Man zoomer med *Volum*-knappen (13) eller ved at trække to fingre fra hinanden på skærmen.

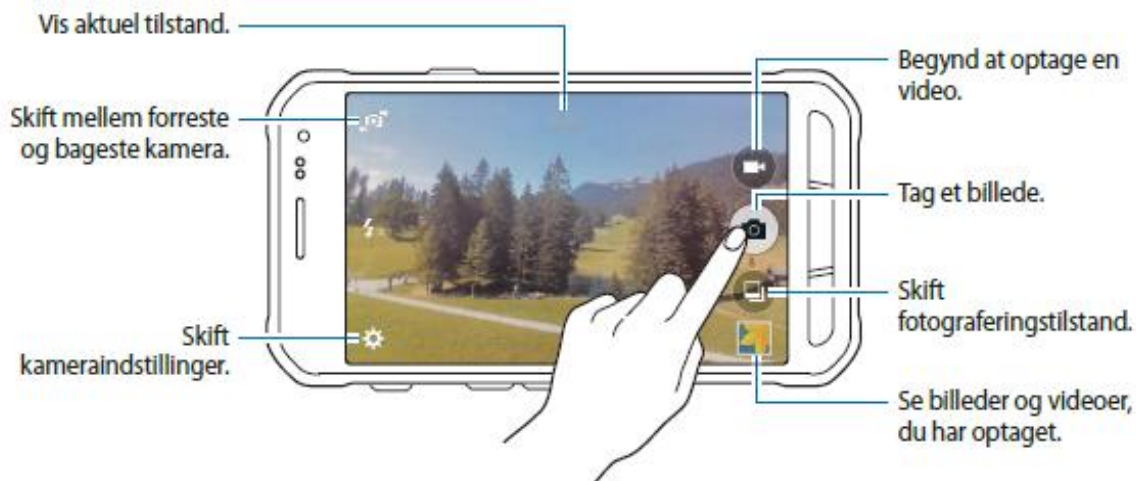


5.1.3 Meddelelser




Meddelelser er den indbyggede app for at kunne sende og modtage sms og mms. For tekstmeddelelser kan man fordel anvende Handi-app *Kontakter* og *Sms*, hvilket giver talestøtte og mulighed for at bruge Standardbeskeder.


Der vises en liste med indkomne og afsendte meddelelser.

For at skrive en ny meddelelse trykker man på *Skriv*-knappen , så vises billedet til højre.

Man angiver modtager i feltet *Angiv modtager* eller trykker på knappen ved siden.


Herefter trykker man på feltet *Skriv meddelelse* og skriver meddelelsen.

For at tilføje et billede (mms) trykker man på *Vedhæfte*-knappen  og vælger et eksisterende billede eller tager et nyt billede med kameraet.

Når meddelelsen er færdig, trykker man på *Send*-knappen  for at sende den.

Hvis man har fået en meddelelse, vises dette i statusfeltet. Når man åbner *Meddelelser*, vises kontakten med den senest modtagne/afsendte meddelelse øverst i listen.

OBS! Primært anvendes Handi-app'en *Sms* for at advisere og vise indkommende sms. Handi-app'en *Sms* kan også modtage mms (billeder). Øvrige mms håndteres via *Meddelelser*.

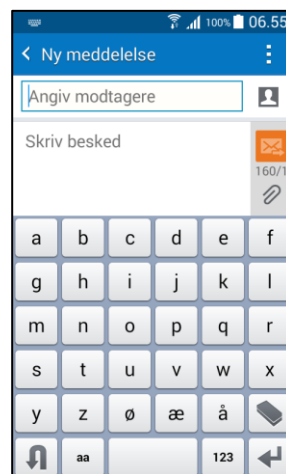


5.1.4 Galleri



Galleri er en app, der viser billeder og film på hukommelseskortet. De billeder, der tages med kameraet vises i kronologisk orden i "Kamera".

5.1.5 Maps

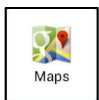


Google Maps er en let anvendelig kortfunktion, som giver information om lokale virksomheder, såsom virksomhedens adresse, kontaktoplysninger og rutebeskrivelse.


Den blå pil viser, hvor telefonen befinder sig: "Min position".

Det er nemt at zoome på kortet. Man skal bare dobbelttrykke. Man kan også zoome med knapperne $-/+$.

Placer fingeren på skærmen og træk ud på det sted, du vil se nærmere på.

Tryk på  For at søge på en adresse.

Tryk på  For at vise aktuel placering.

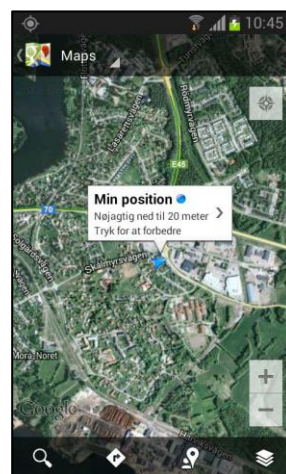

5.1.6 Lommeregner



Lommeregner er en enkel minilommeregner med de fire regningsarter.

5.1.7 Internet




Med *Internet* kan man surfe på nettet med telefonen.

Man trykker på indtastningsfeltet, hvor man kan indtaste sine søgeord eller en webadresse. Der vises et tastatur til indtastning.

På websteder kan man zoome ind/ud ved hjælp af dobbelttryk. Man kan også zoome ved at klemme fingrene sammen eller trække dem fra hinanden.

Når man trykker på funktionsknappen *Menu* (1) vises en menu, hvor man har forskellige valgmuligheder.

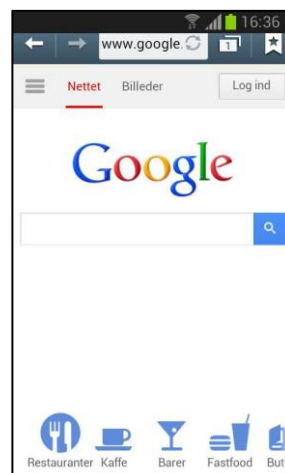

5.1.8 Play Butik



Man kan have *Play Butik* som en genvej på Startmenuen. Hvis man ikke ønsker, at brugeren selv skal kunne downloade apps, kan man i stedet starte en *Play Butik* via Indstillinger.


Når man har valgt *Play Butik*, vises billedet til højre.

Man trykker på knappen  for at søge efter apps.

Hvis man trækker med fingeren, kan man bladere til venstre og se forskellige kategorier.

Hvis man bladrer til højre, vises apps i forskellige "toplister".

Når man trykker på funktionsknappen *Menu* (1) vises en menu, hvor man kan foretage forskellige valg.

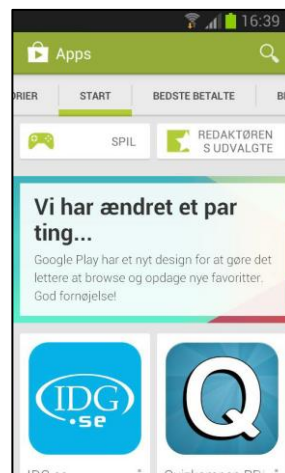

5.1.9 Gmail



Når man har tilsluttet en Google-konto til **Handi Xcover 3** (se 4.6 *Google-konto*) kan man anvende app'en *Gmail* til at sende og modtage e-mail via telefonen. Der skal ikke foretages yderligere indstillinger.

5.1.10 E-mail



Hvis man har andre e-mailkonti end Google, kan man tilslutte dem til standardmappen *E-mail*.

Kontooplysninger fås hos kontoudbyderen. Hvis man vil indlægge en konto, starter man *E-mail*, og guiden "Konfig. E-mail" vises.

5.2 Download apps

Hvis man vil have adgang til andre apps, end Handi-apps og standard-apps skal man downloade dem via *Play Butik*. Det kan være apps som Spotify, Facebook, rejseplanlægning, lydbogslæser, etc.

For at komme til Play Butik, trykker man knapkombinationen, se 4.2.2 *Knapkombinationen*, og vælger *Play Butik* i Indstillingsmenuen. (Eller via Startmenuen, hvis den er indstillet til det).

For at man kan downloade er det nødvendigt, at man har en Google-konto koblet til telefonen, se kapitel 4.6 *Google-konto*.

5.2.1 Overvejelser før man downloader en app

Der er meget, man bør overveje, før man downloader en app, bl.a.

Hvordan finder jeg den rigtige app i Play Butik?

Brug relevante søgeord. Hvis man ønsker et bedre overblik, når man søger efter en app, kan man på en PC surfe på <https://play.google.com/store>.

Udbuddet af apps er næsten uendeligt i dag. For at finde apps, der er velegnede til personer med kognitive funktionsnedsættelser, kan man finde tips på f.eks. Hjælpemiddelinstittutets hjemmeside og på forskellige diskussionsfora.

Koster app'en noget?

Selv om der står, at app'en er gratis, kan der af og til støde udgifter til, såkaldte "in app purchases", hvor man tilbydes at betale for forskellige opgraderinger inde i app'en.


Er app'en god og sikker?

Læs anmeldelserne af app'en. Apps fra store firmaer er som regel sikre.


Disse aspekter vil ikke blive taget op i denne Brugervejledning.

Sådan downloader man en app!

Nedenfor gives et eksempel på, hvordan man finder og downloader app'en "Vejret 5 dage":

1. Start Play Butik.
2. Tryk på knappen .
3. Skriv *Vejret 5 dage* i søgefeltet og tryk på  eller vælg ud af listen som vises for at starte søgningen.
4. Der vises en liste med søgeresultater. Tryk på den ønskede app.
5. Læs beskrivelse og anmeldelser om app'en, tryk herefter på *Installer*.
6. Information om hvilke bemyndigelser, app'en kræver, vises. Tryk på *Accepter*.


- Vent, mens app'en downloades. Det kan tage lidt tid, hvis man er tilsluttet via mobildata.
- Færdig. App'en *Vejret 5 dage* er nu installeret og findes sidst i Startmenuen. (Man kan ændre på app'ens placering i Startmenuen, se *Brugervejledning Handi 5*).

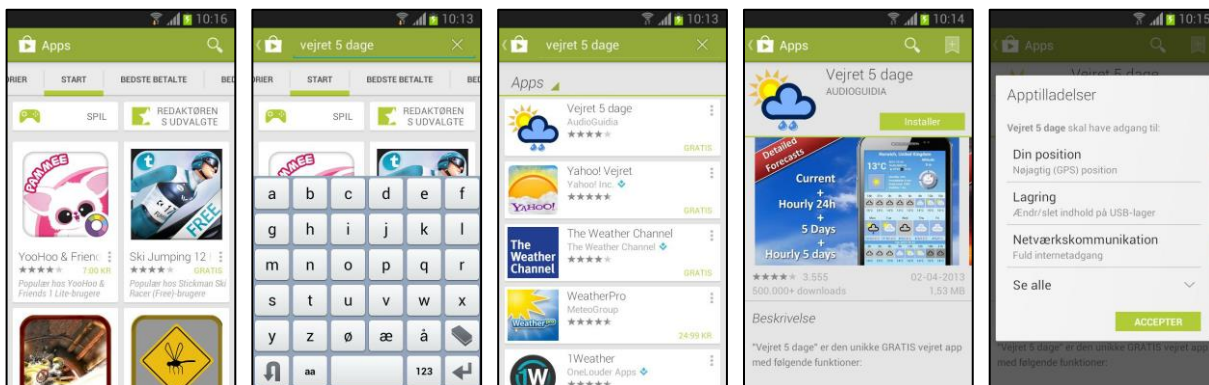

5.3 Fjern apps

Man bør tænke på ikke at have for mange apps installeret. Hvis man har downloadet flere forskellige apps for at prøve, hvilken der passer bedst, er det en god idé at fjerne de apps, som man ikke kommer til at bruge. Man har måske downloadet og prøvet forskellige vejrapps eller lydbogslæsere og fundet en, som man er tilfreds med. Så er det en god idé at fjerne de andre.

For at fjerne apps går man til **Indstillinger|Android Indstillinger|Enhed|Programmanager**. Der vises en liste med downloadede apps. Man skal trykke på den app, der skal fjernes (*Ringdroid* i eksemplet nedenfor).

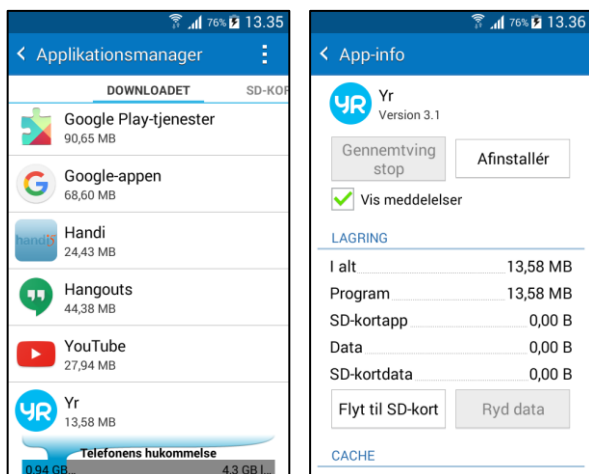

Tryk på knappen *Afinstaller* for at fjerne den valgte app.

5.3.1 Skjule apps

Man kan have apps i **Handi Xcover 3** men vælge ikke at vise dem i Startmenuen. Dette kan f.eks. være en god idé, hvis man vil introducere en app senere.

I **Indstillinger|Startmenu|Organisere apps** vælger man hvilke apps, der skal vises i Startmenuen og i hvilken rækkefølge. Se *Brugervejledning Handi 5*.


6. Håndtering af apparatet

6.1 Tænd og sluk

Handi Xcover 3 tændes og slukkes ved, at du trykker på *Power*-knappen (5). Det der egentlig sker, når du slukker med *Power*-knappen, er at skærmen slukkes og maskinen går i standby.

Hvis du ikke anvender Handi i 1 minut går den automatisk i standby. (Denne tid kan ændres, se kapitel 6.13 *Skærmens tidsgrænse*.)


Når apparatet er på standby, 'vågner' det automatisk ved alarm og indkommende samtaler/sms/mms.

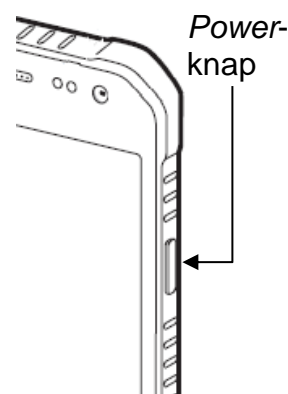

For at **slukke apparatet helt** skal du holde *Power*-knappen nede i mere end 3 sekunder. Herefter vises dialogboksen til højre.

Når du trykker på **Sluk** slukkes apparatet helt. OBS! Dermed slukkes også for alarmen, indkommende telefonsamtaler og beskeder.

For at starte **Handi Xcover 3** igen trykker du en gang på *Power*-knappen i omkring 3 sekunder, hvor efter **Handi Xcover 3** genstarter.

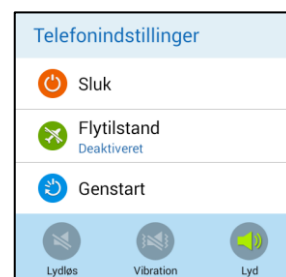

6.2 Genstart

Der kan være brug for at genstarte **Handi Xcover 3**, hvis en funktion "hænger". En Genstart tager ca. 1 minut. Sluk apparatet helt (som beskrevet ovenfor i kapitel 6.1 *Tænd og sluk* ovenfor). Alternativt kan man slukke den helt ved at fjerne batteriet.

Tænd herefter Handi igen med *Power*-knappen. Hvis det er indstillet, at du skal have PIN-kodekontrol, (se kapitel 6.15 *PIN-kode*) skal du indskrive PIN-koden, før Startmenuen vises og du kan anvende **Handi Xcover 3**.


6.3 Opladning og batterihåndtering

Handi Xcover 3 oplades ved at tilslutte strømadapteren. Kablet sluttes til **Handi Xcover 3** i opladningsporten (15) som vist og strømadapteren sluttes til et strømodtag.

Når **Handi Xcover 3** er sluttet til en computer, oplades den automatisk.

Man kan se batteriniveauet i i statusfeltet øverst på skærmen (Standard-layout) eller i Hurtigindstillinger, se 6.3.3 *Kontrollér batteriniveau*.

Hvor længe batteriet rækker, afhænger naturligvis af, hvor meget du anvender **Handi Xcover 3**. En god rutine er at **oplade Handi hver nat**, så fungerer den pålideligt hele dagen.

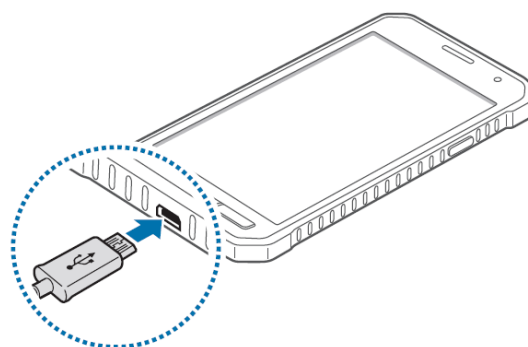

6.3.1 Handi Xcover 3 er fuldstændig afladet

Hvis Handi Xcover 3 er helt afladet (der sker ikke noget, når du trykker på *Power*-knappen), skal du begynde med at lade den op med strømadapteren som beskrevet ovenfor. Det tager ca. 3 timer at oplade en helt afladet Handi.

6.3.2 Advarselsmeddelelse "Forbind oplader"



Når batteriet er afladet til ca. 15 % af sin fulde kapacitet, vises en advarsel om, at batteriet trænger til opladning, se billedet til venstre.


Når du klikker på *OK*, forsvinder advarslen, og **Handi Xcover 3** kan fortsat anvendes. Dog bliver advarslen vist med jævne mellemrum.

Batteriet får med tiden en dårligere ydelse, dvs. det aflades hurtigere. Efter nogle år kan der være brug for at udskifte det.

6.3.3 Kontrollér batteriniveau

Det er nemt at se batteriniveauet i statusfeltet (Standard-layout).

Hvis statusfeltet ikke er tilgængeligt, eller hvis man ønsker at se batteriniveauet mere detaljeret, kan man kigge i Hurtigindstillinger, se billedet til højre.

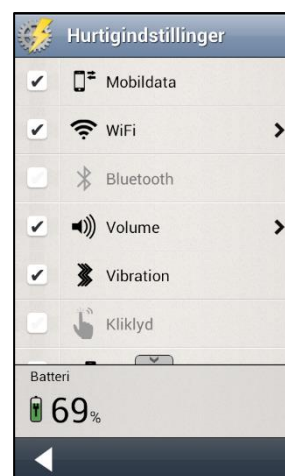

6.4 Lyd


Lydstyrken kan indstilles på flere måder.

6.4.1 Lydregulering

Mens man f.eks. lytter til musik eller en lydbog, kan man nemt ændre på lydstyrken (medievolumen) ved at trykke på *Lydstyrke*-knappen (13).

Mens man taler i telefon, kan man også ændre lydstyrken for samtalen på samme måde

Når man trykker på *Volum*-knappen vises det øverste billede på skærmen, hvis man trykker på tandhjulet vises det nederste billede og man får mulighed for at ændre volumen på andre af telefonens lyde.

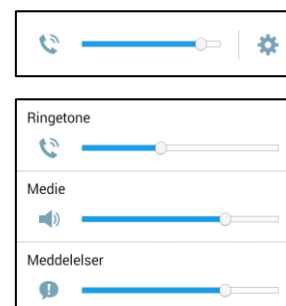

6.4.2 Lydstyrke indstillinger

Via *Hurtigindstillinger* kan man nemt ændre de forskellige styrker:

Når man trykker på pilen til højre for *Volume* vises billedet "Lydstyrke-indstillinger". Her kan man indstille alle lydstyrker individuelt:

- Lydstyrke ved indkommende samtale
- Samtale-lydstyrke
- Lydstyrke for media (fx talesyntese)
- Lydstyrke ved beskeder (fx sms)
- Lydstyrke ved alarm

Lydstyrken justeres ved at trykke på det ønskede niveau på listen.

Ved at trykke på *Play*-knappen  kan man aflytte den indstillede lydstyrke.



6.4.3 Ringetone

Via *Hurtigindstillinger* indstiller man det ringetone, man vil have.

Man kan også gå via **Indstillinger|Android Indstillinger|Enhed|Lyd|Ringetone og meddelelser|Ringetoner** og trykke på *Tilføj* og her vælge blandt alle lydfile som ligger i *Handi*.

Der findes også apps med alarmlyde og ringetoner, f.eks. *Ringdroid* (på engelsk). Med *Ringdroid* er det muligt at "klippe" en del af en melodi eller indspille en lyd.


Man kan tilføje egne alarmlyde. De kan for eksempel være i mp3-format, men mid, aac og ogg fungerer også. Tilslut *Handi* til pc og opret en mappe *media\audio\ringtones*, hvor lydfileerne lægges ind.

6.4.4 Alarmlyd

Hvis Alarmlyd er indstillet, så den vises i *Kalender*-menuen i *Kalender*, kan man indstille de alarmlyde, som de forskellige aktiviteter, timere og påmindelser skal have der. Ellers foretages indstilling af alarmlyde i **Indstillinger|Kalender|Alarmlyd**.



Man kan indstille separate lyde til *Aktiviteter uden kvittering*, *Aktiviteter med kvittering*, *Timere* og *Påmindelser*.

Man vælger alarmlyd ved at trykke på alarmlydens navn. Der vil så blive vist en liste med de tilgængelige alarmlyde. Ved at trykke på *Play*-knappen  kan man afspille den valgte alarmlyd.

For påmindelsesalarm findes også muligheden *–Ingen lyd–* i listen samt afkrydsningsfeltet *Vibration ved påmindelse*. Hvis man vælger dette, vil alle påmindelser være lydløse, men med vibration.

Alarmtiden, dvs. den tid som alarm og påmindelser skal lyde/vibrere kan indstilles under *Alarmtid*, *15 sekunder*, *30 sekunder*, *1 minut*, *2 minutter* og *5 minutter*. ("Alarmsignal" afspiller lyden et øjeblik.)

Man kan indlægge sine egne alarmlyde. Det skal være i mp3-format, (men mid, aac og ogg fungerer også). Tilslut *Handi* til PC (USB-masselagring) og opret en mappe *media\audio\alarms* hvor lydfileerne skal lægges. Man kan også anvende *Ringdroid* til alarmlyde. De kan efterfølgende vælges i billedet ovenfor.

6.4.5 Kliklyd

Via *Hurtigindstillinger* kan man indstille om man vil have en kliklyd som bekræftelse, når man trykker på knapper osv. i apps.

6.5 Vibration

Via *Hurtigindstillinger* kan man vælge vibration på/af.

Hvis du krydser vibration af, vil Handi vibrere ved indgående opkald og meddelelser (fx sms/mms). Denne indstilling påvirker ikke, Handi-kalenderens alarmer for aktiviteter, timere eller påmindelser (for disse alarmer gælder den indstilling som er lavet i Kalender for den respektive alarm).

6.6 Skærmlås og sikkerhedslås

Skærmlås indebærer, at alle knapper, selv dem på skærmen, er låst så de ikke kan aktiveres ved en fejl.

Hvis skærmlås er valgt aktiveres det så snart skærmen slukkes. Hvis en alarm går i gang, telefonen ringer eller der kommer en sms, låses skærmlåsen automatisk op, så du kan kvittere, svare eller læse som sædvanligt.

Åbning af skærmlåsen:

Tryk på *Power*-knappen (5) eller Funktionsknappen *Hjem* (2) når skærmen er slukket. Placer fingeren på skærmen, og træk i nogen retning for at låse op.

Sæt skærmlåsen til:

Sluk for skærmlåsen ved at trykke på *Power*-knappen (5).

Via **Indstillinger|Android Indstillinger|Enhed|Låseskærm|Skærmlås** indstiller man om skærmlåsen skal anvendes. Vælg "Stryg" for at indstille skærmlås eller "Ingen" for ikke at anvende skærmlås.

Man kan desuden vælge at have en **sikkerhedslås**, som man skal angive inden **Handi Xcover 3** åbnes helt, og man kan anvende telefonen. De muligheder for sikkerhedslåse, der anbefales, er Mønster eller PIN-kode:

6.6.1 Mønster

Man indstiller den grafiske adgangskode i **Indstillinger|Android Indstillinger|Enhed|Låseskærm|Skærmlås|Mønster**. Følg instruktionerne på skærmen.

Man skal angive en reserve-Pin kode for at kunne låse telefonen op, hvis man glemmer mønsteret. (Du kan også låse op med en Google-konto)


Kontrollere også indstillingerne for **Lås automatisk** og **Lås straks med tænd/sluk knappen**.

6.6.2 PIN-kode

Man indstiller PIN-kode i **Indstillinger|Android Indstillinger|Enhed|Låseskærm|Skærmlås|PIN-kode**. Følg instruktionerne på skærmen.

OBS! Google-konto kan ikke låses op, hvis du glemmer PIN-koden.

Kontrollere også indstillingerne for **Lås automatisk** og **Lås straks med tænd/sluk knappen**.

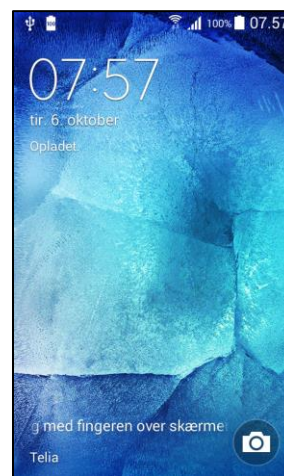

6.7 Tastatur


Man kan vælge mellem forskellige tastaturer i **Handi Xcover 3**.

Handi-tastatur er standard. Fordelen ved Handi-tastaturet er, at det har store taster og talestøtte.

Standardtastaturet har små taster, men giver ordprædiktion.

Man vælger tastatur i **Indstillinger|Android Indstillinger|System|Sprog og input|Tastaturer og indtastningsmetoder**.

OBS! Handi Tastatur skal være afkrydset, for at man kan vælge det under Standard.

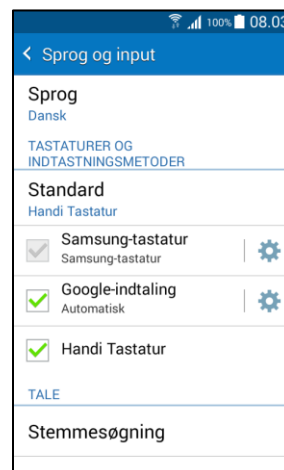

6.8 Mobildata

Via *Hurtigindstillinger* kan man tilslutte Handi til Internet via det mobile bredbånd (uden WiFi). Når man krydser af i *Mobildata* kan **Handi Xcover 3** tilsluttes Internet via det mobile bredbånd. Denne tilslutning vil da anvendes når **Handi Xcover 3** ikke har tilgang till WiFi (se herunder).


OBS! Man bør have fri surfing på sit telefonabonnement, ellers kan denne indstilling medføre betydelige udgifter.

6.9 WiFi

Via *Hurtigindstillinger* kan man tilslutte til WiFi. (Er en genvej til Androids Wifi-indstillinger).

Når man krydser af i WiFi kan **Handi Xcover 3** tilsluttes et trådløst netværk. Når man er inden for rækkevidde af det trådløse netværk, vil **Handi Xcover 3** automatisk vælge denne tilslutning til internettet, ikke det mobile bredbånd. Det er oftest både billigere og hurtigere at være sluttet til et trådløst netværk end at være opkoblet med mobilt bredbånd.

Dog kan det i visse situationer være godt at lukke af for det trådløse netværk, hvis det fungerer upålideligt.

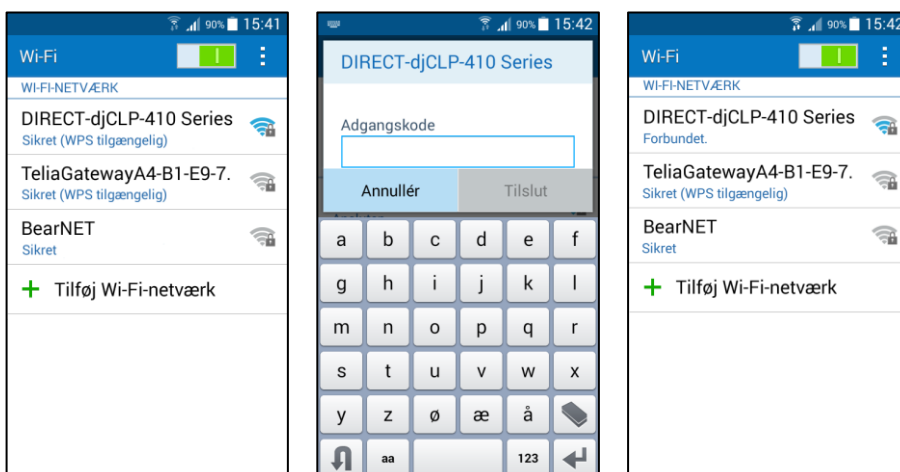

Når man trykker på *WiFi* i *Hurtigindstillinger* vises det første billede.


Her ser man hvilke trådløse netværk, der er tilgængelige. Når man peger på det netværk, man vil tilslutte sig, vises det andet billede.

Man angiver adgangskode og trykker på *Tilslut*. Herefter vises det tredje billede med information om, at man er tilsluttet til det valgte netværk.


6.10 Bluetooth

Via *Hurtigindstillinger* kan man tilslutte Bluetooth. (Er en genvej til Androids Bluetooth-indstillinger).

Hvis man vil tilslutte et Bluetooth-headset eller en højttaler, skal man krydse af i ruden *Bluetooth* og herefter trykke på pilen til højre. Følgende billede vises.

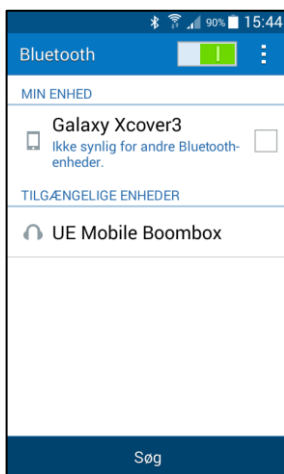

Man stiller Bluetooth-headsettet/højttaleren i "parringstilstand" (se brugsanvisningen for headset/højttalere) og trykker på *Søg*. Tilgængelige enheder vises på listen.

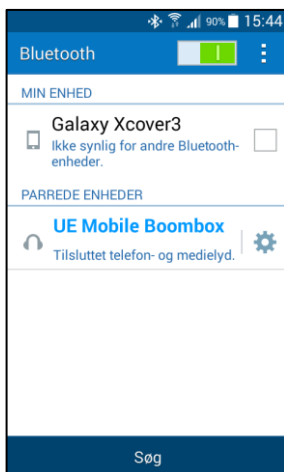

Tryk på navnet på den enhed, du vil tilslutte, og tryk derefter på *OK*, og telefonen og headsettet kobles sammen.

Nu vil headsettet fungere sammen med **Handi Xcover 3**, f.eks. når man ringer eller lytter til musik/lydbøger.

Næste gang, man tager headsettet på og krydser af i Bluetooth, vil enhederne automatisk finde hinanden.

Bluetooth bruger en del strøm. Det er derfor godt at slukke for funktionen, når man ikke bruger den.

6.11 Flytilstand


Via **Indstillinger|Android Indstillinger|Forbindelse|Flytilstand** kan man indstille **Handi Xcover 3** i *Flytilstand*.

Ved at markere *Flytilstand* lukkes af for al radiokommunikation, dvs. at hverken *telefon*, *WiFi* eller *Bluetooth* fungerer. I øvrigt fungerer telefonen som den plejer. Denne tilstand forlanges i forbindelse med flyrejser og besøg i en del bygninger, f.eks. sygehuse.

OBS! Ind imellem er det ikke tilstrækkeligt med flytilstand, men telefonen skal slukkes helt, se *6.1 Tænd og sluk*.

Man kan også holde *Power*-knapper trykket ned i mere end 3 sekunder. Meddelelsesruden til højre vil så blive vist. Man trykker på *Flytilstand*, når man vil vælge det

For at lukke for *Flytilstand* skal man trykke på *Power*-knappen i mere end 3 sekunder og vælge *Flytilstand*.

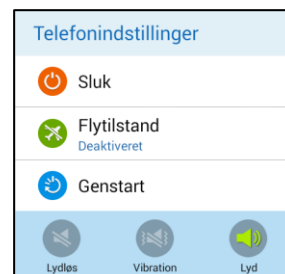


6.12 Roter skærm

Via *Hurtigindstillinger* kan man indstille, hvordan skærmen skal fungere. Hvis *Roter skærm* er valgt, og man vipper telefonen, drejer billedet og vises på den anden led. (Dette gælder ikke alle apps). F.eks. vil Handi-tastaturet så vise et liggende tastatur.

At læse tekst i "landskabsvisning" i stedet for "portrætvisning" er ofte lettere. Man kan dog ind imellem ønske at afbryde rotationsfunktionen, f.eks. når telefonen ligger på et bord, kan den rotere vilkårligt, hvilket kan være forstyrrende.

6.13 Skærmens tidsgrænse

Via *Hurtigindstillinger* kan man indstille *Skærmens tidsgrænse*, det vil sige hvor lang tid, der skal gå, inden Handi Xcover 3 automatisk går i hvileposition (skærmen slukkes), når den går på batteristrøm. Følgende billede vises.

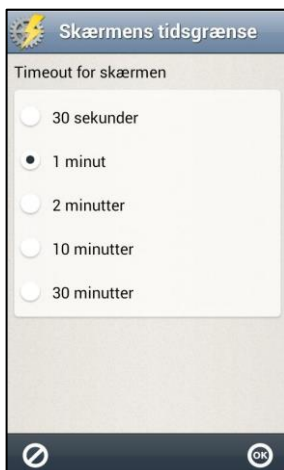

Her indstiller man, hvor længe skærmen skal være tændt, efter at man har brugt enheden.

Det kan opleves som besværligt, hvis den slukker for hurtigt, men på den anden side bruger den mere strøm, hvis den er tændt længe.

Normalt er denne tid sat til 1 minut, men den kan sættes til *30 sekunder*, *1*, *2*, *10* eller *30 minutter*.


Bemærk! Jo længere tidsgrænse desto højere strømforbrug.

Den nye indstilling bliver gemt, når man trykker på *OK*.

6.14 Dato og tid

Dato og tid indstilles normalt automatisk via information fra netværket, men hvis man ikke er opkoblet via mobilt bredbånd eller trådløst netværk, fungerer det ikke. Det er også lidt forskelligt, hvor godt det fungerer med de forskellige operatører.

Man kommer til indstillingen via **Indstillinger|Android Indstillinger|System|Dato og tid**. Følgende billede vises.

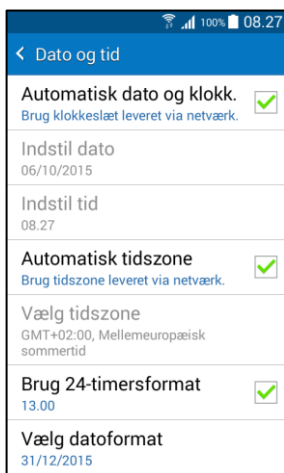

Normalt er muligheden *Automatisk dato og klokke...* krydset af, men hvis den ikke fungerer tilfredsstillende, kan man afkrydse den. Så kan dato og tid indstilles manuelt.

For at ændre tidszone fjerner man hakket i *Automatisk tidszone* og vælger herefter den ønskede tidszone.

6.15 PIN-kode

Når du køber et telefonabonnement, enten et taletidskort eller et sædvanligt abonnement, får du et SIM-kort. Til SIM-kortet hører en PIN-kode og en PUK-kode.

PIN-koden skal skrives ind for at starte Handi Xcover 3 (se kapitel 3. *Ibrugtagning af Handi Xcover 3*). Denne PIN-kode skal du også skrive ind ved genstart af Handi Xcover 3 (se kapitel 6.2 *Genstart*). Hvis du skriver forkert kode tre gange, så låser SIM-kortet, og du skal anvende PUK-koden for at åbne det. For mange brugere af **Handi Xcover 3** kan dette være uheldigt, og vi anbefaler derfor, at du lukker for PIN-kodekontrollen i **Indstillinger|Android Indstillinger|System|Sikkerhed|SIM-kortlås|Konfigurér SIM-kortlås**. Her kan man også ændre PIN-kode.

PIN-kodekontrollen er kun en tyveribeskyttelse for selve SIM-kortet (du kan ikke anvende SIM-kortet i en anden telefon, hvis du ikke kender PIN-koden).

Vil brugeren have en integritetsbeskyttelse, anbefales anvendelse af **sikkerhedslås**, se 6.6 *Skærmlås og sikkerhedslås*.

6.16 Telefonens hukommelse og hukommelseskort

Handi Xcover 3 har to hukommelser: den interne telefonhukommelse og et eksternt hukommelseskort.

På **telefonens hukommelse** gemmes alle brugerdata til Handi. Her gemmes også alle de billeder, der tages med telefonens kamera.

Hukommelseskortet er et micro-SDHC. Det anvendes ikke fra start, men det er muligt at ændre, så kamerabillederne gemmes på hukommelseskortet.

6.16.1 Kamerabilleder på hukommelseskortet

Hvis man tager mange billeder med telefonen, og ikke vil fylde hele telefonens hukommelse med billeder, kan man vælge at gemme billederne på hukommelseskortet i stedet. Dette giver dog begrænsninger i håndteringen af billederne, afhængigt af Android versionen:

Android-version	Vis billeder på hukommelseskortet i billedarkivet	Vis billeder på hukommelseskortet i <i>Album/Fotos</i>	Fjern og omdøb billeder på hukommelseskortet i <i>Album/Fotos</i>
Mindre end 4.4	X	X	X
4.4	X	X	-
5 og højere	X	X	Efter Handi har fået rettighed

Handi Xcover 3 har Android v4.4, men opgradering til v5 er lovet. Det indebærer at billederne på hukommelseskortet ikke kan slettes fra *Album/Fotos*. Overvej derfor følgende inden du vælger at gemme kameraets billeder på hukommelseskortet:

- Tager du så mange billeder eller har du så mange apps, at telefonens hukommelse måske ikke er tilstrækkelig?
- Kan du undvære at slette kamerabilleder via *Foto?* (De kan slettes fra standard-appen *Galleri*.)

Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, så anbefales det at gemme billeder på hukommelseskortet, se nedenfor hvordan denne indstilling laves.

6.16.2 Vælg lagringsplads for kamerabilleder

Gør sådan her for at vælge, om kameraets billeder skal gemmes i telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet.

1. Start Kamera-appen.
2. Tryk på tandhjulet og derefter på de tre prikker til højre.
3. Tryk på Lager.
4. Vælg Hukommelseskort eller Enhed.

6.17 Touch-skærm

Handi Xcover 3 har en *kapacitiv skærm* (ligesom alle moderne smartphones). En sådan skærm fungerer bedst om man holder apparatet i hånden når man trykker. Man behøver kun at lige røre ved skærmen, det er ligegyldigt hvor hårdt man trykker.

Kapacitive skærme har følgende begrænsninger:

- Det fungerer ikke hvis du trykker med neglen eller med en almindelig pegepind.
- Det fungerer sjældent at trykke på den med handsker.
- Det kan være svært at få skærmen til at reagere i kulde eller ekstremt tørt vejr. Det kan i sådanne situationer hjælpe at fugte fingerspidsen ved at ånde let på den.
- De fungerer ofte dårligere hvis apparatet ligger på et bord.

Hvis du er vant til en normal trykfølsom skærm, kan det i begyndelsen opleves svært, at trykke på skærmen, både at få skærmen til at reagere og at ramme rigtigt. Du vænner dig dog ganske hurtigt til det!

6.18 Backup



Ved Backup kopieres indstillinger og data for Handi-funktionerne Kalender, Kontakter og Sms til hukommelseskortet. Systemindstillinger som lydstyrke og baggrundsbillede følger ikke med.

Det anbefales, at du en gang imellem foretager en sikkerhedskopiering til en pc via HandiTools. Det vil betyde, at du kan genskabe det meste, selv om du helt skulle miste din Handifon, eller hvis hukommelseskortet går i stykker.

I forbindelse med backup laves en gennemsøgning af kalenderdatabasen for at fjerne aktiviteter, som er indstillet til "slet bagefter".

Med knappen *Se logfil* kan du se information om den sidste backup, og om den var vellykket.

Automatisk backup sker hver nat klokken 03:15.

Du kan manuelt foretage backup ved at trykke på knappen *Lav en backup nu!* i **Indstillinger|System|Backup**. Det kan være praktisk at gøre, før en sikkerhedskopiering via HandiTools så de sidste ændringer i kalenderen kommer med i sikkerhedskopien.

6.19 Tilslutningsindstillinger

For at kunne sende og modtage sms og mms skal meddelelsseserveren muligvis konfigureres. Dette sker automatisk hos de store operatører. Hvis man har brug for hjælp til at indstille tjenesten, kan man kontakte sin operatør.

6.20 Opdatering

I **Indstillinger|System|Om Handi** vises programversion, enhedens ID og information om enheden.



Via knappen *Søg opdatering* kan man finde ud af, om der findes nyere version af softwaren.

(Opringningen koster næsten ingenting, da det er så få data, der hentes).

Hvis "Søg opdatering" giver besked om, at der er en nyere version tilgængelig, startes funktionen "Opdater Handi" automatisk, se kapitel 6.20.1 *Opdater Handi*.



Hvis man vælger "Vis information om opdatering" kontrollerer Handi om der findes en nyere version, samtidig med der bliver lavet backup, hver nat.

Hvis der findes en nyere version vises det på ikonen for system  i Indstillinger. Hvis man har en genvej til "Opdater Handi" på startmenuen får den en symbol . En besked "Der er en ny version af Handi tilgængelig" bliver vist. Du kan derefter opdatere Handi som beskrevet i kapitel 6.20.1 *Opdater Handi*.

6.20.1 Opdater Handi


Softwaren i Handi udvikles løbende. Det gælder både retning af småfejl, fx bugs, og nye og forbedrede funktioner. Det er derfor en god idé, at opdatere softwaren med jævne mellemrum.

Funktionen "Opdater Handi" kan startes via **Indstillinger|System|Om Handi** eller via en genvej i Startmenuen. Hvordan man indsætter en genvej beskrives i *Brugervejledning Handi 5*.

Den datamængde, der downloades, er ca. 12 MB. Det indebærer en vis udgift hvis du ikke har et telefonabonnement med fri surfing eller er tilsluttet til WiFi.

Nedenfor beskrives, hvordan man opdaterer.

1. Starte "Opdater Handi".
2. Vent på besked om, hvorvidt der findes en nyere version af programmet.
3. Tryk på *Hent*.
4. Tryk på *Installer* når opdateringen er downloadet.
5. Meddelelsen "Udskift program" vises, tryk på *OK*. En billede med "Bekræft og installer" kan vises, se 6.20.2 *Bekræft og installer* nedenfor.
6. Tryk på *Installér* i billedet "Vil du installere dette program?"
7. Tryk på *Hjem*-knappen (2) når den sidste side vises (andre sider kan også vises).

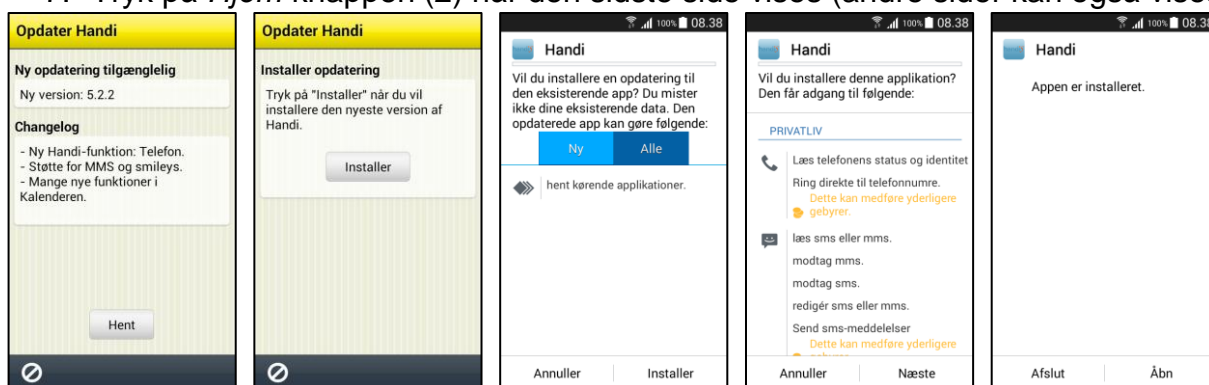

6.20.2 Bekræft og installer

Fr o m juni 2013 har Google indført en ny, mere sikker funktion for at installere downloadede apps. Den kaldes "Bekræft og installer" og aktiveres på telefonen i forbindelse med opdatering af *Play Butik*. Funktionen indeholder en slags virusscanner og når en applikation som fx Handi5 skal opdateres (eller installeres) vises følgende side:


Det er en god idé at vælge *Bekræft og installer* og derefter trykke på *Alltid*. Da slipper man for at gøre dette valg næste gang en app skal installeres.



6.21 Automatisk crash-rapportering

Handi Xcover 3 har indbygget automatisk crash-rapportering. Hvis der går noget galt i dine Handi-apps, vises en fejlmeddelelse og samtidig sendes information om fejlen automatisk til udviklingsafdelingen. Der sendes ingen personlige oplysninger. Dette er til stor hjælp i arbejdet med at udvikle et stabilt og velfungerende program.

Ved et eventuel crash vises følgende side. Tryk på *OK* for at starte Handi-programmet igen.

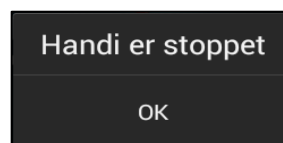


Hvis man får flere crash på én dag, så kan det være en god idé at undersøge, om der er kommet nyere versioner af programmet. Se kapitel 6.20 *Opdatering*.

6.22 Skift mellem apps

Det normale er at anvende en app ad gangen. Herefter trykker man på funktionsknappen *Hjem* for at lukke den aktive app og komme til Startmenuen og derfra vælge en anden app. Sommetider kan det være praktisk at kunne skifte mellem apps uden at være nødt til at lukke dem.

For at skifte mellem apps skal man trykke på funktionsknappen *Seneste* (1). Så vises billedet "Seneste" med de sidst besøgte apps. Der kan man vælge hvilken app man ønsker at skifte til.

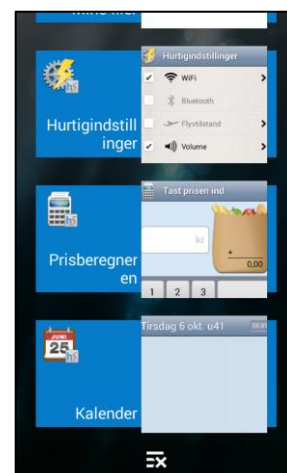

Man kan f.eks. gøre således:

1. Gå ind i Kalenderen og indsæt en aktivitet.
2. "Hvilken dato var det, at mor skulle komme?"
3. Tryk på funktionsknappen *Hjem* og vælg *sms* for at tjekke datoen.
4. Tryk på funktionsknappen *Seneste* og vælg *Kalender* i billedet "Seneste".
5. "Indsæt aktivitet" vises stadig i Kalender, og man kan skrive datoen ind.

Når man går ind i Kalender via ikonet i Startmenuen, kommer man ellers direkte til "i dag og nu". Ved at skifte mellem apps kan man opnå en mere avanceret anvendelse.


Advarsel! Ved at trykke og holde på apps i listen, kan man komme videre til Android indstillinger og foretage uønskede valg som kan medføre, at Handi-programmet ikke fungerer korrekt.

6.23 Opbevaring


Handi Xcover 3 er IP-67-klassificeret, dvs. at den tåler både støv og vand inden for visse grænser. **Handi Xcover 3** er robust med et stødresistent chassis og har ekstra stærkt og ridsefast glas. **Handi Xcover 3** leveres med et beskyttelsesetui som beskytter bagsider og kanter.

Et alternativ er at sætte en rem i **Handi Xcover 3** og bære den om halsen eller anvende en rem til håndleddet.

Fjern batteridækslet, skub remmen gennem hullet og træk den ydre rem igennem, se billede. Sæt batteridækslet på.

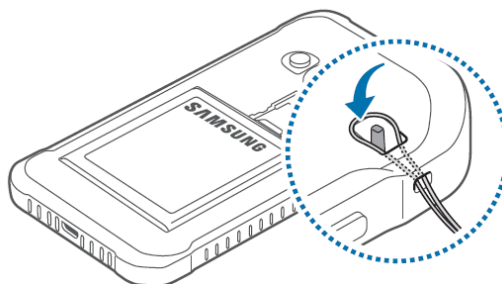

6.24 Gemme billeder/videoklip fra indkomne mms/mail

Man kan gemme billeder/video fra indkomne mms/mail til **Handi**. Når man vælger at gemme et modtaget billede/video gemmes de i mappen "Modtaget". I Album og Billedarkiv kan man se de modtagne filer i mappen "Modtaget" . Billederne kan enkelt anvendes i **Handi** til fx aktiviteter eller kontakter.

Sådan gemmes billeder fra indkommet mms:

1. Åben standard-appen for mms, Meddelelser.
2. Find den mms som indeholder billedet.
3. Tryk på billedet så der vises en menu.
4. Vælg "Gem vedhæftning".
5. Billedet er nu gemt i "Modtaget".

Du kan også gemme modtagne billeder via **Handi**-funktionen **Sms**, se *Sms Funktionsvejledning*.

6.25 Valg af startskærm

Gå til **Indstillinger|Android Indstillinger|Enhet|Hjem** og vælg hvad der skal være hjemmeskærm. Det almindelige er, at have **Handi Startmenu** som hjemmeskærm.

6.26 Tilslut til pc

For at overføre billeder, lyd og musik fra en pc til **Handi Xcover 3** anvender du programmet *HandiTools*. *HandiTools* bruges også til at oprette skemaer, sikkerhedskopiering og udtagning af logfiler.

Tilslut **Handi Xcover 3** til computeren med USB-kablet. Vent til computeren finder **Handi**. Det kan tage lidt tid at installere driverne. (På computere med Windows 10 kan det være nødvendigt at installere Windows Media Player for at få adgang til enhedens drivere.)

6.27 Xcover-knappen


Via **Indstillinger|Android-indstillinger|Personlig|Tilgængelighed|Xcover-tast** kan man indstille hvilken funktion **Xcover**-knappen skal have. To forskellige funktioner kan vælges, én til når man trykker kort på knappen og en anden når man holder knappen inde længe. Grundindstillingen er, at et kort tryk starter lommelygten og langt tryk starter kamera-appen.

Når man er i Kamera-appen, så kan **Xcover**-knappen anvendes som udløser for at tage et billede.

7. Hurtigindstillinger

Handi-appen *Hurtigindstillinger* er et udvalg af de Android-indstillinger, der findes. De indstillinger, som man kan have brug for at have til rådighed i den daglige anvendelse.


Sidst i dette kapitel beskrives, hvordan man vælger, hvilke indstillinger der skal vises i *Hurtigindstillinger*.

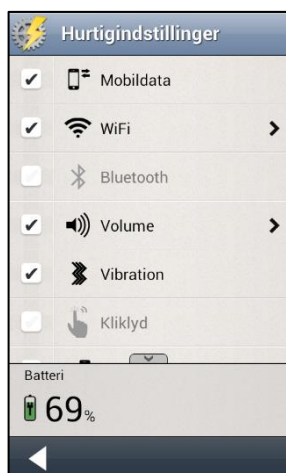

Når du starter *Hurtigindstillinger* vises de indstillinger, man har valgt at have til rådighed.

De valg, der er aktiverede (*Mobildata*, *WiFi*, *Volume* og *Vibration*), er markeret med et flueben, de, der ikke er aktiverede (*Bluetooth* og *Kliklyd*), er gråmarkerede.

Nogle af indstillingerne har en pil længst ude til højre, som viser, at man skal trykke på linjen for at komme videre til Android-indstillingerne, f.eks. for at logge ind på et WiFi-netværk.

Hvis der findes flere indstillinger end der er plads til på skærmen vises *Vis mere*-symbolerne  øverst/nederst for at vise at listen fortsætter i den retning.

7.1 Mobildata

Når man markerer *Mobildata* kan telefonen tilslutte sig Internet via det mobile bredbånd.

OBS! Man bør have fri surfing på sit telefonabonnement, ellers kan denne indstilling medføre betydelige udgifter. Hvis man ikke har et abonnement med fri surf bør denne indstilling ikke være tilgængelig i Hurtigindstillinger, se 7.12 Tilpas Hurtigindstillinger.

7.2 WiFi

Når man markerer *WiFi* kan telefonen tilsluttes et trådløst netværk. Når man er inden for rækkevidde af det trådløse netværk, vil telefonen automatisk vælge denne tilslutning til internettet, ikke det mobile bredbånd. Det er oftest både billigere og hurtigere at være sluttet til et trådløst netværk end at være opkoblet med mobilt bredbånd.

Dog kan det i visse situationer være godt at lukke af for det trådløse netværk (WiFi), hvis det fungerer upålideligt.

Når man trykker på pilen til højre, kommer man til Androids WiFi-indstillinger, se 6.9 WiFi.

7.3 Bluetooth

Hvis man vil tilslutte et Bluetooth-headset eller en højttaler, skal man markere i ruden *Bluetooth* og herefter trykke på pilen til højre. Man vil så komme til Androids Bluetooth-indstillinger, se 6.10 Bluetooth.

Når man én gang har foretaget indstillingerne til f.eks. et bestemt headset og markeret med et flueben i *Bluetooth*, vil enhederne automatisk finde hinanden. Man behøver ikke foretage indstillingerne igen.

Bluetooth bruger en del strøm. Det er derfor godt at slukke for funktionen, når man ikke bruger den.

7.4 Volume



Når man trykker på pilen til højre for *Volume* vises billedet "Lydstyrke-indstillinger". Her kan man indstille alle lydstyrker individuelt:

- Lydstyrke ved indkommende samtale
- Samtale-lydstyrke
- Lydstyrke for media (fx. talesyntese)
- Lydstyrke ved beskeder (fx. sms)
- Lydstyrke ved alarm

Ved at trykke på ønsket niveau, kan du regulere lydstyrken til hver funktion.

For at afprøve lydstyrken, trykker man på *Play*-knappen .

7.4.1 Tid til genindstilling

Hvis man markerer *Volume* i billedet *Hurtigindstillinger*, bliver lyden slået fra, hvilket også vises i statusfeltet. Knappen *Slå lyd til kl.* vises.



Når man trykker på knappen *Slå lyd til kl.* kan man angive hvilken tid lyden skal slås til igen.

Hvis man angiver et klokkeslæt, som er før den aktuelle tid, vil lyden blive slået til på dette tidspunkt næste døgn. (F.eks. klokken er nu 20:30 og man sætter tiden til 08:00, hvilket bliver i morgen). Det angivne klokkeslæt vises på knappen.



7.5 Vibration

Hvis man markerer *Vibration* vil Handi vibrere ved indkommende samtaler og notificeringer (som fx sms/mms). Denne indstilling påvirker ikke hvordan Handi-kalendern giver alarmer for aktiviteter, timers eller påmindelser (for disse alarm gælder den indstilling som lavets i Kalender for hvert alarm).

7.6 Kliklyd

Hvis man markerer *Kliklyd* vil man få en kliklyd som bekræftelse, når man trykker på knapper osv. i apps.


7.7 Roter skærm

Hvis *Roter skærm* er valgt, og man vipper telefonen, drejer billedet og vises på den anden led. (Dette gælder ikke alle apps). F.eks. vil Handi-tastaturet så vise et liggende QWERTY-tastatur.

At læse tekst i "landskabsformat" i stedet for "portrætformat" er ofte lettere. Man kan dog ind imellem ønske at afbryde rotationsfunktionen. Når telefonen f.eks. ligger på et bord, kan den rotere vilkårligt, hvilket kan være forstyrrende.

7.8 Skærmens tidsgrænse

Via *Skærmens tidsgrænse* kan man sætte tiden, inden skærmen slukkes, og telefonen går i dvale (gælder kun, når telefonen går på batteristrøm). Følgende billede vises.

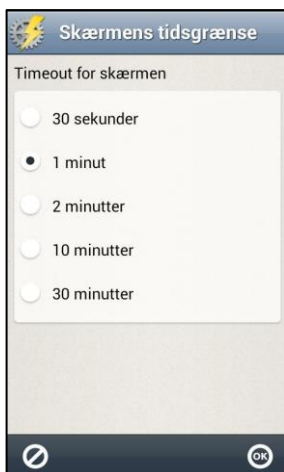

Her indstiller man, hvor længe skærmen skal være tændt, efter at man har brugt enheden.

Det kan opleves som besværligt, hvis den slukker for hurtigt, men på den anden side bruger den mere strøm, hvis den er tændt længe.


Normalt er denne tid sat til 1 minut, men den kan sættes til 30 sekunder, 1, 2, 10, 30 minutter eller *Brug aldrig tidsgrænse*.

Bemærk! Jo længere tidsgrænse desto højere strømforbrug.

Den nye indstilling bliver gemt, når man trykker på *OK*.

7.9 Ringetone

Via *Ringetone* indstiller man hvilken ringetone man vil have. Følgende billede vises.

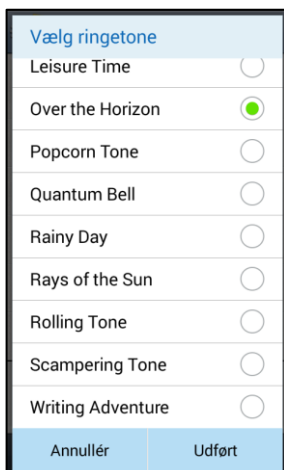

Placer fingeren på skærmen og træk op/ned for at se hele listen. Når man trykker på ringetonets navn, kan man høre, hvordan det lyder.

Den nye indstilling bliver gemt, når man trykker på *Udført*.

7.10 Baggrundsbillede

Via *Baggrundsbillede* vælger man det baggrundsbillede, der skal bruges som Standard-layout.

Man kan vælge de eksisterende billeder eller tage et nyt billede med kameraet.

Man kan ikke vælge baggrundsbillede til Handi-layout.

7.11 Batteri

Her vises hvor meget batterikapacitet, der er tilbage. Når opladeren er tilsluttet vises det med et symbol i batteriet.

7.12 Tilpas Hurtigindstillinger


For at foretage indstillinger i Hurtigindstillinger skal du gå til *Indstillinger*. (Hvor du kommer til Indstillinger beskrives i kapitel 4.2 *Gå til indstillingstilstand*.)



Vælg Hurtigindstillinger på side 2. Billedet til højre vises

Følgende indstillinger kan vises:

- Mobildata
- WiFi
- Bluetooth
- Volume
- Vibration
- Kliklyd
- Roter skærm
- Skærmens tidsgrænse
- Ringetone
- Vælg baggrundsbillede
- Batteri
- USB-tilslutning

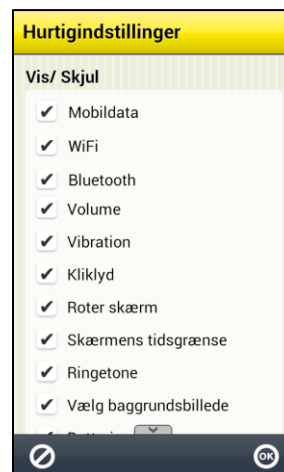

Sæt hak i de indstillinger der skal være tilgængelige for brugeren.

8. Total genstart

Total genstart indebærer, at **Handi Xcover 3** startes fra bunden på samme måde, som første gang den blev startet.

Det kan fx blive aktuelt, hvis **Handi Xcover 3** skal overtages af en ny bruger, og alle brugerdata skal slettes. Det kan eventuelt også blive aktuelt, hvis du har haft en alvorlig fejl.

I en **Total genstart** indgår **Systemgendannelse** og **Handi konfiguration**.

Systemgendannelse indebærer at alle apps afinstalleres og telefonen gendannes som den var da den kom fra fabrikken. Dog slettes intet på hukommelseskortet.

I nogle tilfælde kan det være tilstrækkeligt at man bare gør en Handi konfiguration, og ikke sletter telefonen til fabriksindstillingerne. Downloadede tredjepartsapps, Google-konto og andre Android-indstillinger findes kvar, og man har mulighed at i Handi konfigurationen vælge hvordan Handi-data skal behandles. Gå til **Indstillinger|Android Indstillinger|Enhed|Applikationsmanager**, tryk på *Handi* under fanen "Alle" og tryk på *Ryd data*. Tryk derefter på *Hjem*-knappen for at starte Handi konfiguration.

Ved **Handi konfiguration** har man to konfigurationsalternativ (trin 32 nedenfor):

- **Ny Handi-bruger.** Sletter evt Handi-data på hukommelseskortet og opretter en helt ny bruger. Evt. øvrig information i hukommelsen bevares.
- **Eksisterende brugere.** Vises hvis der findes en Handi-backup på hukommelseskortet. Geninstallerer databas, indstillinger mm. Intet ændres på hukommelseskortet.

Resultatet bliver altså at **Handi Xcover 3** efter total genstart "bliver som ny".

Nedenfor beskrives, hvordan man foretager en **Total genstart**.

Start med at **deaktiver licensen**:

Her kræves internettilslutning.

1. Sørg for at have Værdibeviset for Handi5 SW fremme. Det skal bruges senere for at aktivere licensen.
2. Gå til **Indstillinger|System|Licenshåndtering** og tryk på knappen *Deaktiver licens*. Bekræft at licensen skal deaktiveres.



Næste trin er **Systemgendannelse**:

3. Gå til **Indstillinger|Android Indstillinger|Personlig|Backup og nulstil|Personliga data** og tryk på *Nulstil til fabriksstandard*. Tryk på knappen *Nulstil enhed* og derefter på *Slet alt*.
4. Fjernelse af data foregår i løbet af nogle minutter, telefonen genstarter. Efter lidt tid vises en velkommenbillede.
5. Vælg det rigtige sprog i listen, som bliver vist, når man trykker på feltet. Fortsæt ved at trykke på *Start*.
6. (Indsæt i SIM-kort.)

7. Indstillinger for WiFi vises. Hvis man ønsker at tilslutte til Wifi, så markerer man det i listen og skriver adgangskoden ind. Hvis ikke, gå videre ved at trykke på *Næste*.
8. Et billede for Dato og tid vises. Ændre om nødvendigt. Tryk på *Næste*.
9. Et billede "Slutbrugerlicensaftale" vises. Sæt hak ved "Jeg forstår". og vælg "Nej tak". Tryk på *Næste*.
10. Et billede for Google-konto vises. Det anbefales at anvende en Google-konto af to grunde. Dels har du brug for en Google-konto for at kunne hente Apps fra Play Store. Dels kan du via din Google-konto foretage en sikkerhedskopiering af dine installerede Apps.
Hvis du har en Google-konto og ønsker at anvende den, tryk *Ja* og følg anvisningerne. Hvis ikke tryk på *Nej* og vælg "Ikke nu" i næste billede. Det er muligt senere at tilføje en Google-konto, hvis man ønsker.
11. Et billede med Googles tjenester vises. Tryk på pil nedad for at scrolle ned til bunden af teksten, tryk så på pil til højre for at gå videre.
12. Et billede vises til at udfylde navn. Skriv dit fornavn og efternavn og tryk på *Klar*.
13. Et billede for Samsung account vises. Tryk på *Spring over*.
14. Et billede hvor enhedsnavne kan angives, vises. Tryk på *Udfør*.

Her beskrives hvor man **overfører installationsfiler** til telefonen:

Installationen kan laves ved at downloade installationsfilerne eller ved manuelt at overføre filer fra Handi5 SW USB-nøglen. Vælg metode A eller B nedenfor.


Metode A, downloade direkte til enheden

Start enhedens netlæser, på Samsung Xcover 3 hedder den *Internet*.

Indtast adressen handitek.se/latest-handi5 og tryk på <Enter>. Nu hentes *Handi.apk*, som vises i statusfeltet.

Metode B, installation med USB-nøgle

15. Start computerens Stifindere.
16. Tilslut telefonen til computeren. Vent til den vises som en enhed i computeren.
17. Indsæt i Handi5 SW USB-nøgle i computeren computeren og start Stifinderen. Vent til den vises som en Flytbar disk.
18. Kopier *Handi.apk* og mappen *Handi* fra Handi5 SW USB- nøgle til "roten" på telefonens hukommelse så det ser ud som på billedet forneden:

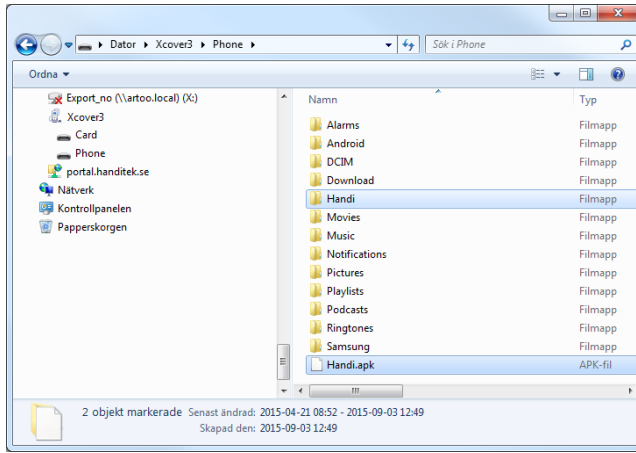

19. Frakoble derefter telefonen fra computeren.

Her beskrives **Handi konfiguration** (med Handi-specifikke Android-indstillinger):


20. Apparatet starter og nedenstående billede vises.




21. Tryk på Program-ikonet nederst til højre. Følgende billede vises.



22. Tryk på *Indstillinger* (tandhjul). Billedet til venstre nedenfor vises. Placer fingeren på skærmen og træk indtil "Sikkerhed" vises, tryk på *Sikkerhed*.

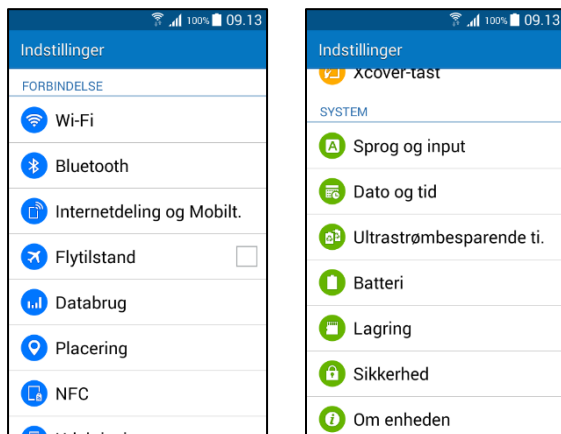


23. Placer fingeren på skærmen og træk indtil "Ukendte kilder" vises, sæt hak ved *Ukendte kilder*. Følgende billede vises.

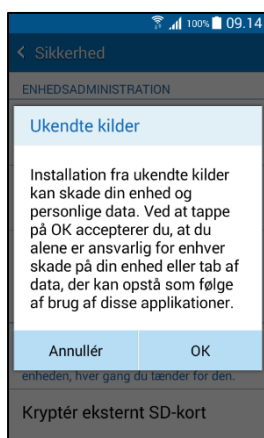

24. Tryk på *OK*. (Ruden "Ukendte kilder" er nu krydset af og grøn). Tryk 2 gange på funktionsknappen *Tilbage* (3).


25. **Metode B:** Billedet "Programmer" vises. Tryk på ikonet *Mine filer*. Placer fingeren på skærmen og træk for at finde "Enhedslager" Følgende billede vises.

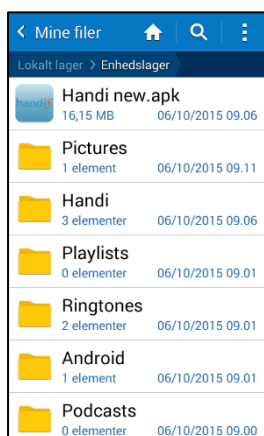

Tryk på filen *Handi.apk*

Hvis du valgte **Metode A** skal du i stedet trække ned statuslinjen ned og trykke på *Handi.apk*.

26. Følgende billede vises.

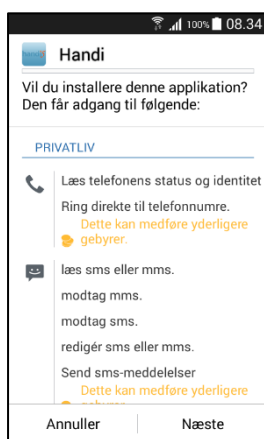

27. Tryk på *Næste* et par gange, og derefter på *Installer*. Handi-programmet installeres. Et billede med "Tillad at Google kontrollerer..." kan vises, tryk på *Accepter*. (Et billede med "Bekræft og installer" kan vises, se 6.20.2 *Bekræft og installer*) Når der står "program installeret" skal man trykke på funktionsknappen *Hjem* (2). OBS! vigtigt at trykke på *Hjem*, ikke på *Afslut/Åbn*. Følgende billede vises.




28. Vælg *Handi Startmenu* og tryk på knappen *Altid*. Tryk på *OK* i billedet "Tøm standardindstillinger". Følgende billede vises.


Her kræves internettilslutning.

29. Tryk på *Indtast licensnøgle* for at indskrive den licensnøgle som findes på værdibeviset for **Handi5 SW**.

30. Når licensen er aktiveret vises en meddelelse som på det højre skærbillede. Tryk på *OK*.

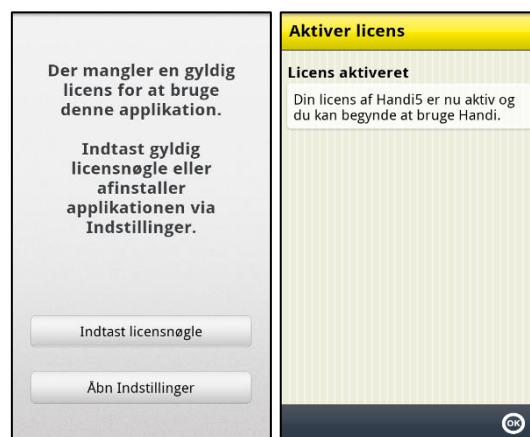

31. Tryk på funktionsknappen *Hjem*. Følgende billede vises.

32. Vælg konfigurationstype og tryk på *Næste* .
 Ved alternativ *Ny Handi-bruger*: Vælg grundindstilling, *Niveau 1*, *Niveau 2* eller *Niveau 3* og tryk på *Næste*. (Se *Brugervejledning Handi 5* for beskrivelse af de forskellige niveauer. Niveau kan nemt ændres senere.) Tryk *JA* for at bekræfte den valgte konfiguration.



(Hvis man vælger *Eksisterende brugere*, vil Handi-brugerdata fra backup-filen for den eksisterende bruger blive lagt tilbage i Handi-apps).


33. Billedet "Velkommen til Handi5!" vises. Det er starten på en guide. Tryk på *Næste*.
 34. Billedet "Indstil dato og tid" vises. Kontroller, at tidszonen, dato og tid er korrekte, tryk på *Næste*.
 35. Billedet "Godkend tastatur" vises. Tryk på *Næste*.
 36. Billedet "Vælg indtastningsmetode" vises. Vælg *Handi Tastatur*. (Denne indstilling medfører altså, at tastaturet altid er alfabetisk i portrætvisning og QWERTY i landskabsvisning).

37. Billedet "Færdig!" vises. Tryk på *OK*.
 Startmenuen vises:

38.

39. Beslut om billederne skal gemmes på telefonens hukommelse eller på hukommelseskortet, læs mere i kapitel 6.16 *Telefonens hukommelse og hukommelseskort*.

- 1) Start programmet Kamera.
- 2) Tryk på *OK* for at gemme på hukommelseskortet, tryk på *Annuller* for at spare på telefonens hukommelse.

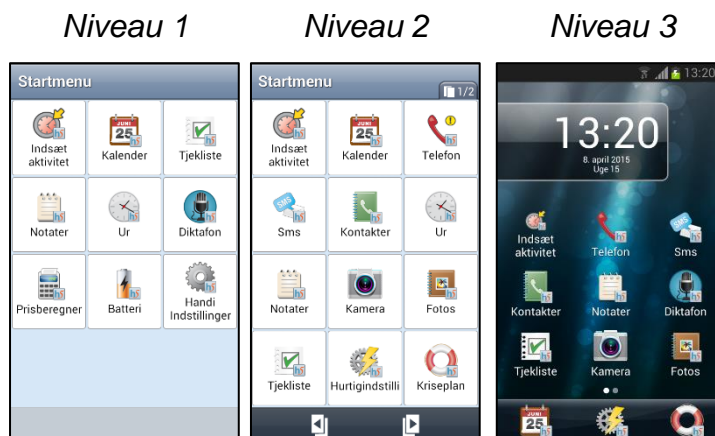

40. Kontroller indstillingerne for skærmlås, se kapitel 6.6 *Skærmlås og sikkerhedslås*.
 41. Det kan også være godt at gå til Android-indstillinger og vælge at Androids indstillinger kan kodebeskyttes. Gå til **Indstillinger|Android Indstillinger|Personlig|Tilgængelighed|Tjenester|Handi** og aktiver Handi (indstil til "Til").
 42. ...og forhindre at Handi afinstalleres ved en fejl: Gå til **Indstillinger|Android Indstillinger|System|Enhedsadministration|Enhedsadministratorer|Handi** og aktiver Handi (indstil til "Til").

9. Tekniske data

9.1 Genbrug af elektronisk affald

Produktet indeholder elektronik som skal genbruges efter produktets levetid. Afleveres til genbrugsstationens afdeling for elektronik.



9.2 Medfølgende artikler

Art.nr	Betegnelse	Beskrivelse	Antal
	Handi Xcover 3	Androidbaseret smartphone	1 stk.
706460	Batteri	Opladningsklar batteripakke	1 stk.
706357	Strømadapter	Strømadapter Handi Xcover 2/3 (m.fl.)	1 stk.
461562	USB-kabel		1 stk.
706356	Headset	Headset Handi Xcover 2/3 (m.fl.)	1 stk.
	Handi USB-nøgle	USB-nøgle med HandiTools og dokumentation	1 stk.
	Handi5 SW USB-nøgle	USB-nøgle med installationsfiler for Handi5 SW.	1 stk.
	Værdibeviset	Med licensnøgle	1 stk.
706248	Hukommelseskort 32GB	Monteret, indeholder programmet	1 stk.
706455	Beskyttelsesetui Xcover 3	Beskytter bagsiderne og kanterne	1 stk.
980362	Abilia pudseklud		1 stk.
	Brugervejledninger	Dette dokument samt "Brugervejledning Handi 5" "Funktionsvejledning Kalender"	3 stk.

9.3 Tekniske data

Høretelefoner/headset udgang	3,5 mm stereoudtag
Batteri	Opladningsklar batteripakke 2200 mAh Litium-Jon
Gennemsnitlig opladningstid	2,5 – 3,0 timer
Kamera	5,0 Megapixel
Skærm	4,5 inch
Androidversion	4.4.4
Brugstemperatur	0°C til 40°C
Mål (H x B x D)	133 x 70 x 10 mm
Vægt	Ca 154 g
Pc-tilslutning	Micro-USB

Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden
Phone +46 (0)8-594 694 00 | info@abilia.se | www.abilia.se

Abilia AS, Tevlingveien 15, 1081 Oslo, Norway
Phone +47 23 28 94 00 | info@abilia.no | www.abilia.no

Toby Churchill Ltd (Abilia), Toby Churchill House,
Norman Way Industrial Estate, Over, Cambridge CB24 5QE, United Kingdom
Phone +44 (0)1954 281210 | info@abilia.uk | www.abilia.com

