

handi5

Funktionsvejledning

Diktafon



Software version 5.2.3 eller nyere

Indhold

1. Indledning	3
2. Anvend Diktafon	3
2.1 Optag nyt diktafon-notat	3
2.1.1 Spela in i bakgrunden.....	5
2.2 Lyt til et Diktafon-notat.....	5
2.2.1 Åbn og lyt	5
2.2.2 Lyt direkte fra listen	5
2.2.3 "Spola" i en röstanteckning.....	6
2.3 Slet et Diktafon-notat	6
3. Indstillinger.....	7
3.1 Navneforslag	7

1. Indledning

Med Diktafon indtaler du information. Det er enkelt at gemme og åbne diktafon-notater.

Du skal ikke kunne skrive for at benytte Diktafon, men funktionen kan også anvendes som en meget enkel og hurtig måde at lægge informationer ind på, selv om du kan skrive.

2. Anvend Diktafon

Når du vælger Diktafon i Startmenuen vises følgende side:




Diktafon vises med navn og/eller symbol i listen.

Hvis der ikke findes diktafon indspilninger er listen tom. Hvis der er mere end 7 diktafon indspilninger vises *Bladre-knapper* (eller *Vis mere*-symboler hvis indstillingen er "Brug scroll-lister").


Når du trykker på et diktafon-notat bliver det gråmarkeret. Hvis "Lyt direkte fra listen" er valgt, kan du lytte til notatet her, se 2.2.2 *Lyt direkte fra listen*.


Ellers kan navnet på diktafon-notatet læses op ved at trykke på *Oplæsnings*-knappen. (Dette forudsætter, at indstillingen "talestøtte i menuer" er valgt.)

Du indspiller et nyt notat via knappen *Nyt notat* . Se afsnit 2.1 *Optag nyt diktafon-notat*.


Hvordan du aflytter eksisterende diktafon-notater beskrives i afsnittet 2.2 *Lyt til et Diktafon-notat*.

2.1 Optag nyt diktafon-notat

 Tryk på knappen *Ny* for at optage et nyt diktafon-notat. Optagesiden vises.

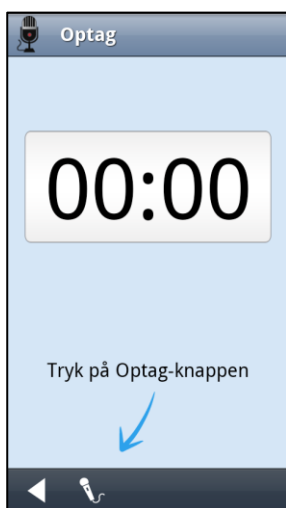

Du skal tale direkte ind i mikrofonen på ca. 10 cm afstand. Se i Håndbogen, hvor mikrofonen sidder.


Tryk på *Optag*-knappen for at starte optagelsen .




Når optagelsen er i gang, vises maks indspilningstid øverst. Den indspillede tid vises i sekunder og/eller minutter. Den indspillede tid i forhold til maximum indspilningstid vises i den vandrette bjælke.


Tryk på *Stop*-knappen  når optagelsen er færdig.



Du kan lytte til det indspillede ved at trykke på *Play*-knappen .

Hvis du ikke er tilfreds, optager du igen ved at trykke på .

Når du er tilfreds med indspilningen, trykker du på *Næste*.

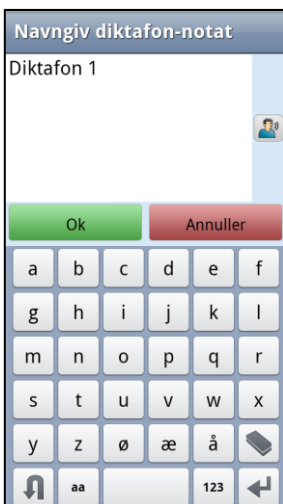


Når indspilningen er klar, skal du give diktatet et navn og et billede. Du kan indstille hvilken af siderne "Vælg billede" og "Navngiv diktafon-notat", der skal vises. Hvis du ikke har foretaget et valg, navngives notatet automatisk "Diktafon" efterfulgt af et tal.

Når du trykker *OK*, gemmes Diktafon-notatet. Diktafon-notatet lægges ind øverst i listen over diktafon-notater.

2.1.1 Optag i baggrunden



Du kan fortsætte med at optage et diktafon-notat samtidigt som du gør noget andet med Handi, f.eks kigger i Kalenderen.

Tryk på *Næste*  under optagelsen for at komme til Startmenuen. Optagelsen fortsætter i baggrunden.


Når du senere går til diktafon-notat igen, kommer du tilbage til den aktuelle optagelse. (I Standard-layout kan du også trække ned i Statusfeltet og vælge *Diktafon*.)

Optagelsen fortsætter selv om Handi er i hviletilstand (skærmen er slukket).


2.2 Lyt til et Diktafon-notat

Der er to muligheder for at lytte til et diktafon-notat.

2.2.1 Åbn og lyt

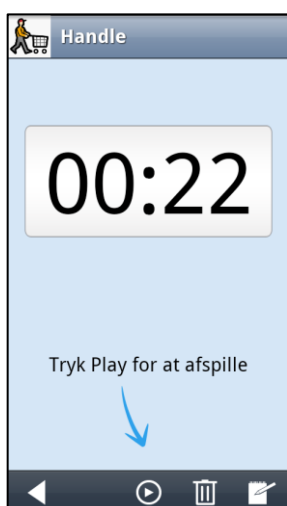

For at lytte til et diktafon-notat markerer du det på listen over diktafon-notater og trykker på *Næste*.

På afspilningssiden kan du lytte til den indspillede besked ved at trykke på *Afspil*-knappen .


Hvis "Talestøtte i menuer" er valgt (men ikke "Lyt direkte fra listen") kan diktafon-notatets navn læses i det venstre billede.

2.2.2 Lyt direkte fra listen



Du kan afspille diktafon-notaterne direkte fra listen, hvis du har valgt "Lyt direkte fra listen" under indstillinger.

Play-knappen  vises, når et diktafon-notat er markeret på listen.

Når du trykker på *Play*-knappen afspilles diktafon-notatet og knappen ændres til en *Stop*-knapp .


(Når du har valgt indstillingen "lyt direkte fra listen", vises *Oplæsnings*-knappen ikke.)



2.2.3 "Spole" i et Diktafon-notat



Det er muligt at "spole" i et diktafon-notat ved at sætte fingeret på håndtaget på "båndet" og trække til ønsket position, eller pege på ønsket position på båndet.


2.3 Slet et Diktafon-notat

For at slette et diktafon-notat markerer du det i listen under Diktafon, trykker på *Næste* og derefter på knappen . Du skal bekræfte, at du vil slette diktafon-notatet ved at trykke *JA*. Diktafon-notatet slettes herefter fra listen.

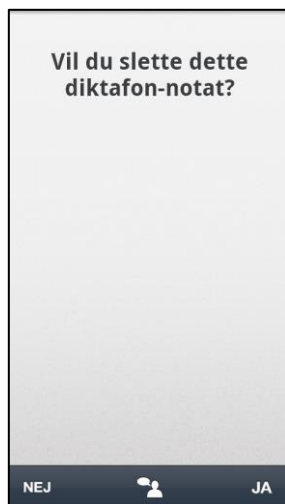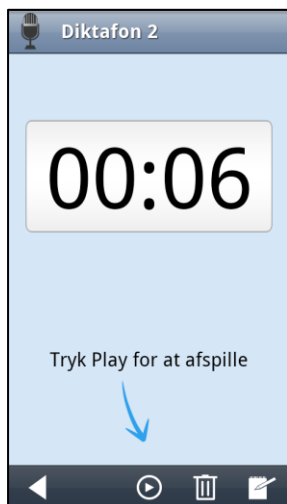

3. Indstillinger

For at sætte indstillinger for Diktafon skal du gå til Indstillinger. For at komme til indstillinger trykker du knappe kombinationen, se *Håndbogen for din model*.

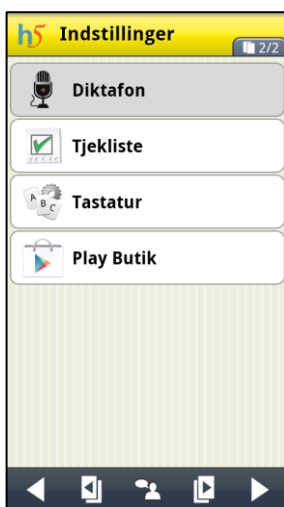

En indstillingsmenu vises.


For at komme til Diktafon indstillinger, vælger du Diktafon på side 2. Siden til højre vises.

Her kan du vælge følgende indstillinger:

- Om "Vælg billede" og "Navngiv diktafon-notat" skal vises, når diktafon-notatet skal gemmes.
- Navneforslag (beskrives nedenfor).
- Max indspilningstid (30 sek, 5 minutter, 30 minutter eller 90 minutter.)
- Om du skal kunne lytte til diktafon-notaterne direkte fra listen.



3.1 Navneforslag

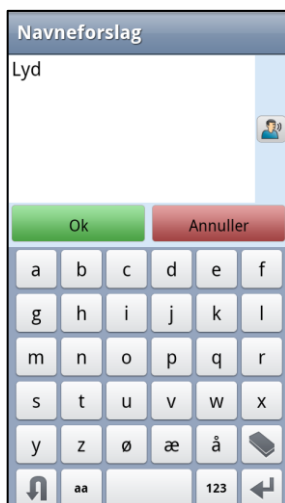

Med "Navneforslag" menes hvilket navn, der skal foreslås på siden "Navngiv diktafon-notat". Ordet Diktafon er default.

Når du trykker på knappen "Navneforslag" i **Indstillinger|Diktafon** vises tastaturet (se siden til venstre) og du kan skrive et andet ord end "Diktafon" fx "Lyd".

Når du trykker på *OK* vises det nye navneforslag i **Indstillinger|Diktafon** (se siden til højre).



For at vende tilbage til det oprindelige navneforslag "Diktafon" åbner du "Navneforslag", sletter det indtastede navn og trykker *OK*.