

Musesimulator

- Betjening af mobiltelefonen fra joysticket



Kompatibel med alle
Dynamic DX master og
secondary remotes



- Bluetooth forbindelse for trådløs styring af musemarkør på telefonen fra kørestolens joystick. Telefonens funktioner kan således betjenes ved at bruge musemarkøren og klik-funktioner, som man kender det fra en alm. computermus.
- Kompatibel med Samsung Galaxy S2. (Samt andre Touchwiz² og Android 3.1+ baserede telefoner.)
- Kompatibel med DYNAMIC DX, samt ROLTEC Vision plus¹
- Tilsluttes direkte til kørestolens bussystem og kræver ingen yderligere opsætning.
- Klikfunktioner kan styres fra tilsluttet 0/1-kontakt, men det er også muligt at udføre klikfunktionerne, samt at markere/trække et objekt, samt at benytte scroll-funktionen alene fra joysticket, uden brug af kontakt.
- En kontakt eller anden slutfunktion er dog nødvendig for at tænde og slukke for musesimulatoren.
- Ved tilslutning til en ROLTEC kørestol, kan "Menu" kontakten på styrboksen dog anvendes til betjening af klikfunktionerne.
- Proportional markørvandring / variabel markørhastighed.
- Ved flere joystick på stolen er det profilens dedikerede joystick, der styrer musesimulatoren

¹: Adapterkabel (AMSCDX2ROLTEC) nødvendig for tilslutning til stolen bussystem.

²: Touchwiz er Samsungs eget overlay til Android styresystemet.



A/S Aabentoft
Løgtenvej 93
DK-8541 Skødstrup
Tlf 86 97 53 00
Fax 86 97 53 02

email: mail@aabentoft.dk
Website: www.aabentoft.dk

Musesimulator – AMSDXBTv2

Bluetooth v2.0 class2 specifikation kompatibel

Forsyning: 24VDC
Forbrug: 250mW

Dimensioner: (H x B x D)
31 x 137 x 61mm

Elektrisk tilslutning: Dynamic DX bus
Jack 3,5mm

Med en AMSDXBTv2 musesimulator bliver en musemarkør tilgængelig på mobiltelefonen. Denne markør agerer fingerspids og gør det på den måde muligt at flytte "fingeren" hen på den funktion på skærmen der ønskes aktiveret. Det er herefter muligt at lave "fingertryk" enten fra en tilsluttet kontakt eller fra joysticket. Denne udgave tilsluttes direkte til Dynamic **DX** Bus-systemet og kræver ingen videre opsætning. Musesimulatoren forbindes til telefonen via en Bluetooth forbindelse. Denne forbindelse giver mulighed for at styre musemarkøren, klikfunktionerne, scroll-funktionen og nogle af telefonens ydre taster. Med Bluetooth forbindelsen opnås en meget stabil trådløs forbindelse med en rækkevidde på minimum 10m. Det er således ikke er nødvendigt at sender og modtager kan "se hinanden". Markørens hastighed er variabel og proportional med joystickets afstand fra centrum. Det er fra musens opsætningsmenu muligt at "vende" joysticket, således at der byttes rundt på højre/venstre eller op/ned eller rotere joysticket 90 grader, samt at ændre markørens hastighed. Der er også fra menuen at musesimulatoren opsættes, således at musens "klik"-funktioner betjenes udelukkende fra joysticket, altså uden brug af tilsluttet 0/1-kontakt.

Varenr.: AMSDXBTv2