

Lær din Micro Voice Amp at kende



Opladning

Du bør oplade Micro Voice Amp, før du anvender den første gang. Det tager 6 timer at oplade batteriet, og dette vil holde i omkring en uge med 8 timers daglig brug.

Sæt opladeren i stikket på siden af Micro Voice Amp, og tjek, at opladerlyset blinker grønt, hvilket indikerer, at alt virker, som det skal.



- Vejledning til opladerlys**
- Grøn:** Batteriet er fuldt ladet.
 - Blinker grønt:** Batteriet lader op.
 - Blinker orange:** Batteriniveauet er lavt.
 - Blinker rødt:** Du har kun kort tid tilbage, før batteriet løber tør.

Micro Voice Amp

Brugervejledning



Velkommen til din Micro Voice Amp

Micro Voice Amp er beregnet til personer med svækket eller overanstrengt stemme samt til folk, som regelmæssigt belaster stemmen intensivt.

Det indeholder kassen...

- 1 Micro Voice Amp
- 2 Oplader
- 3 Tilpasset bæltespænde og -rem
- 4 Brugervejledning
- 5 Mikrofon (enten en **AVI-headset-mikrofon**, en **lavalier-mikrofon** eller en **transdermal mikrofon**).




Lavalier-mikrofonen

AVI-headset-mikrofonen

Transdermale Mikrofon

Sådan bruger du din Micro Voice Amp

- 1 Før du anvender Micro Voice Amp første gang, bør du finde ud af, hvordan du vil bære den. Du kan sætte den fast i livet ved hjælp af bæltespændet eller -remmen.
- 2 Sæt mikrofonen i stikket. 
- 3 Hvis du har valgt **Lavalier-mikrofonen**, kan du sætte den fast til tøjet i nærheden af din mund. Hvis du har valgt **AVI-headset-mikrofonen**, kan du sætte den fast bag omkring dit hoved med bøjlerne rundt om ørerne og rykke mikrofonen op til din mund. Hvis du har valgt den **Transdermale Mikrofon**, skal du sørge for, at den sidder fladt ind til huden overst på halsen (over kraven).



Lavalier-mikrofonen



AVI-headset-mikrofonen



Transdermale Mikrofon

Kviktip

Transdermal mikrofon: Hvis din hals er meget smal, kan du putte et stykke stof under halsbøjlen, så den sidder bedre. Den bør ikke sidde så stramt, at det føles ubehageligt.

Sådan tænder du

For at tænde Micro Voice Amp **tryk én gang på kontrolknappen**, og begynd at tale ind i mikrofonen.



Lydstyrke

Du styrer lydstyrken ved hjælp af **lydstyrkehjulet**. Skru op for lyden ved at dreje hjulet med uret og op for lyden ved at dreje det mod uret.



Sådan slår du lyden fra (Standby)

Hvis du gerne vil føre en privat samtale, har du mulighed for at sætte din Micro Voice Amp på standby. For at gøre dette **tryk én gang på kontrolknappen**. Når lysindikatoren **blinker orange**, er **lyden slået fra**. For at vende tilbage til normalindstillingen **tryk én gang på kontrolknappen**.

Sådan slukker du

For at slukke Micro Voice Amp **tryk på kontrolknappen**, og **hold den nede i tre sekunder**, eller indtil lysindikatoren lyser **rødt**.

Kviktip

Hold ikke højtaleren for tæt på mikrofonen for at undgå feedback.