




Funktionsvejledning

Notater

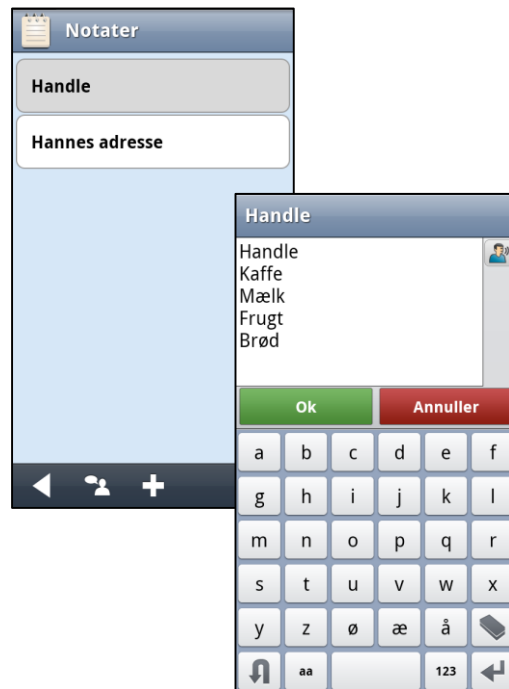

Software version 5.3.1 eller nyere

Indhold

1. Indledning	3
2. Anvend Notater	3
2.1 Tastaturet	3
2.2 Skriv nyt notat.....	5
2.3 Læs et notat	5
2.4 Ændre et notat.....	6
2.5 Slet et notat	6
3. Indstillinger.....	7
3.1 Talesyntese-indstillinger	7
3.1.1 Oplæsnings-knap (i tekstfeltet)	7
3.1.2 Oplæs ord ved mellemrum	8
3.2 Tastatur	8

1. Indledning


Med Notater kan du skrive informationer med det indbyggede tastatur (på skærmen). Det er enkelt at gemme og åbne notater.

Informationen kan læses op med talesyntese.

Med pc-programmet HandiTools kan du skrive, redigere og printe notater i pc'en.

2. Anvend Notater

Når du vælger Notater i Startmenuen vises følgende side:

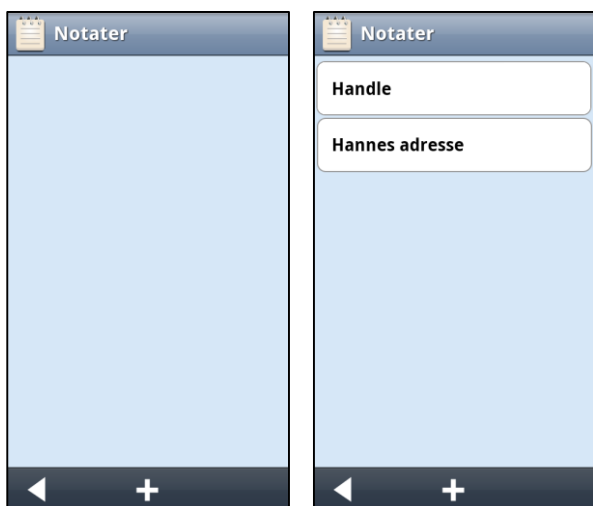

Første gang, du kommer til Notater, er det tomt, dvs. der findes ingen Notater. Se det venstre billede.




Når du har lavet notater, vises de i en liste. Se det højre billede.

2.1 Tastaturet




Handi-tastaturet har fem varianter. (Se *Håndbogen* for mere information om tastaturet.)







Det første bogstav i notatet og det første bogstav efter punktum og ny linje skrives altid med store bogstaver.

For at skifte til Numerisk tilstand trykker man på knappen . I numerisk tilstand skifter man mellem side 1, 2 og 3 ved at trykke på knappen . For at komme tilbage til Bogstavstilstand trykker man på knappen  eller på mellemrum.

Skifttilstandsknappen viser hvad der vil ske næste gang man skriver et bogstav.

-  betyder at næste bogstav bliver versal (A) og derefter små bogstaver (a).
-  betyder at næste bogstav bliver gemen (a) og fortsætter derefter med små bogstaver (a).
-  betyder at næste bogstav bliver versal (A) og fortsætter derefter med versaler (A). Dvs CapsLock.

Når automatisk skifttilstand er valgt, ændres tastaturets funktion automatisk. Man kan også trykke på knappen selv og derved bestemme hvordan man vil at tastaturet skal fungere.

-  Slet det sidst indtastede tegn.
-  Skjul tastaturet.
-  Giver ny linje.
-  Giver mellemrum.

Når man trykker på  læses tekst op med talesyntese.


Du kan flytte markøren og markere tekst ved at trykke direkte på skærmen.

Smiley-symbolerne i Handi er ordnede i et farvesystem. For mere info om Smileys, se *Brugervejledning Sms*.


Grøn	Glad, positiv følelse
Rosa	Kærlig følelse
Orange	Neutral følelse
Blå	Ked af det, negativ følelse
Rød	Vred, negativ følelse

Hvis du vælger en Smiley fra Smiley-tastaturet tilføjes den i tekstfeltet. Det er valgfrit om "Numerisk side 3 Smileys" skal være tilgængeligt.


2.2 Skriv nyt notat

 For at skrive et nyt notat skal du trykke på knappen *Ny*.

Tastaturet vises og du kan skrive det ønskede notat. Når du har skrevet færdigt og trykker på *OK* vises siden "Vil du gemme?":

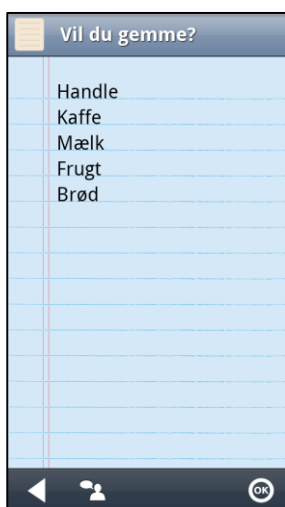

Her vises notatet på en mere overskuelig måde.

Hvis du trykker på *Oplæsnings*-knappen  læses teksten op med talesyntese.


Trykker du på *OK*, gemmes notatet og lægges ind i listen.



Den første linje i notatet bliver automatisk navnet på notatet.

Det nyeste notat vises altid øverst på listen.


2.3 Læs et notat

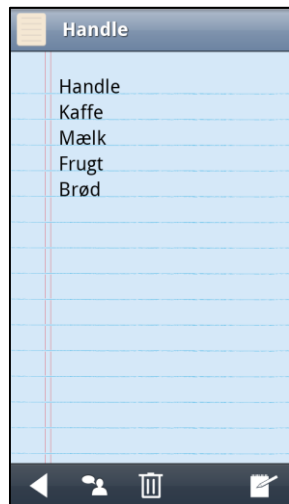


For at læse et notat markerer du det i listen under *Notater* og trykker på *Næste* (*Næste* vises, når et notat er markeret).

Når du trykker på *Oplæsnings*-knappen, læses teksten op med talesyntese.


2.4 Ændre et notat

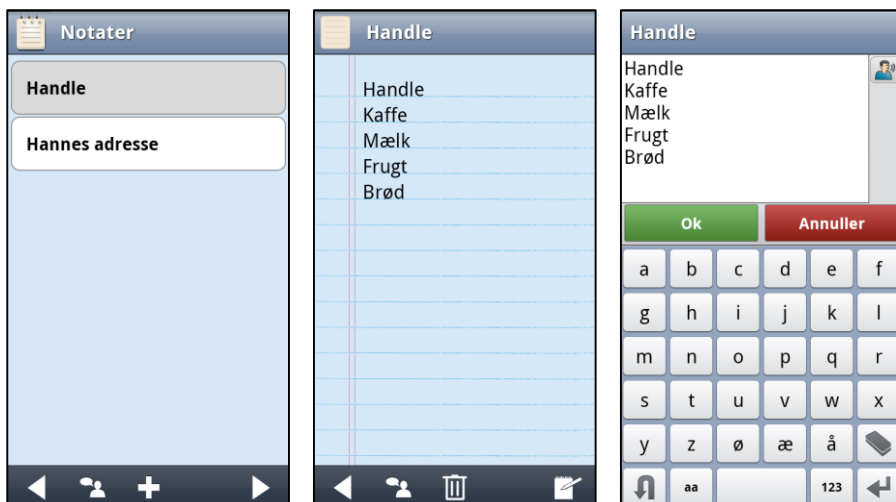


For at ændre et notat skal du markere det i listen under Notater, trykke på *Næste* og derefter på knappen . Tastaturet vises og du kan ændre i teksten.

Når du trykker på *OK* vises siden "Vil du gemme". Tryk på *OK* for at gemme notatet.

2.5 Slet et notat

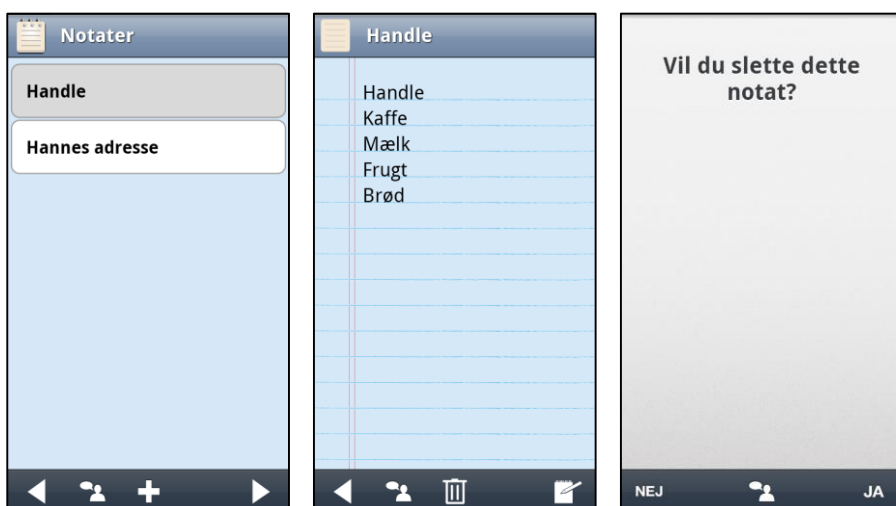

For at slette et notat skal du markere det i listen under Notater, trykke på *Næste* og derefter på knappen . Du skal bekræfte, at du vil slette notatet ved at trykke på *JA*. Notatet slettes fra listen.

3. Indstillinger

For at tilpasse Notater skal du gå til Indstillinger. For at komme til Indstillinger skal du trykke knapkombinationen, se *Håndbogen for din model*.




En indstillingsmenu vises.

Indstillingerne for Notater foretages under *System* på side 1 i *Indstillinger*.

For Notater kan du foretage følgende indstillinger:

3.1 Talesyntese-indstillinger

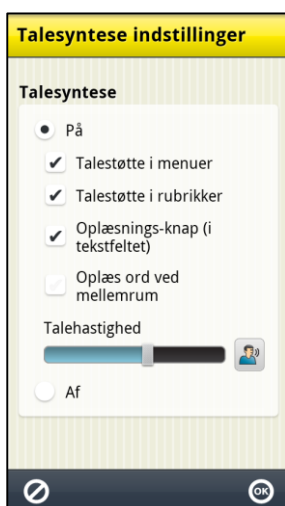

Via **Indstillinger|System|Talestøtte|Talesyntese-indstillinger** bestemmer du, om og hvordan talesyntesen skal anvendes i tastaturet:

- Oplæsnings-knap (i tekstfeltet)
- Oplæs ord ved mellemrum

3.1.1 Oplæsnings-knap (i tekstfeltet)

Når Oplæsnings-knap (i tekstfeltet) er afkrydset, vises *Oplæsnings*-knappen ved siden af tekstfeltet. Se billedet til venstre.

Når Oplæsnings-knap (i tekstfeltet) ikke er afkrydset, vises *Oplæsnings*-knappen ikke. Se billedet til højre.


Når du trykker på *Oplæsnings*-knappen, læses hele notatet op.



3.1.2 Oplæs ord ved mellemrum


Når "Oplæs ord ved mellemrum" er afkrydset, læses ordene op, mens du skriver med tastaturet. Det foregående ord læses, når der sættes et mellemrum.

3.2 Tastatur

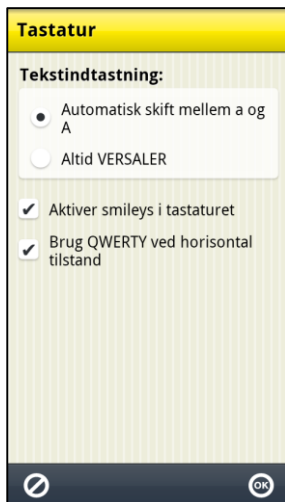

Via **Indstillinger|Tastatur** bestemmer du, om bogstaverne på tastaturet automatisk skal ændres fra store typer til små typer og omvendt.

Vælger du "Automatisk skift mellem a og A", bliver det første bogstav efter punktum eller ny linje automatisk skrevet med store typer. Det andet bogstav i et ord bliver derefter skrevet med små typer.

Vælger du "Altid VERSALER" vises store typer i tastaturet, så længe du ikke trykker på knappen .

Når "Aktiver smileys i tastaturet" er valgt, kan du bruge Smileys i Handi.

Hvis indstillingen i **Hurtigindstillinger|Roter skærm** er afkrydset vil tastaturet vises som et liggende tastatur hvis Handi bruges liggende. Hvis indstillingen i **Hurtigindstillinger|Roter skærm** er afkrydset, vil tastaturet vises som et liggende tastatur hvis Handi bruges liggende. Hvis "Brug QWERTY ved horisontal tilstand" er valgt, vises det liggende tastaturet som et QWERTY-tastatur, ellers vises et ABC-tastatur.