


PlayStation 3 Wheelchair Interface

- Trådløs betjening af PlayStation3 fra kørestolens joystick

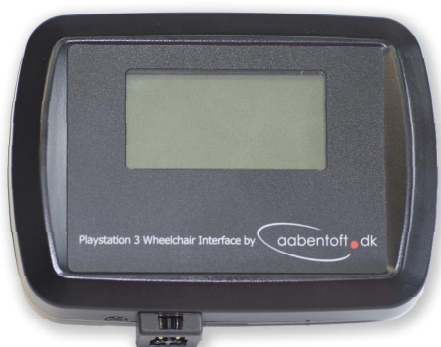

Kompatibel med alle
Dynamic DX/DX2 master og
secondary remotes

- Trådløs Bluetooth forbindelse til Playstation3.
- Kompatibel med DYNAMIC DX¹, samt ROLTEC Vision plus³
- Mulighed for simulering af tryk på alle 17 kontaktfunktioner fra den originale controller.
- Mulighed for simulering af begge analoge joystick fra den originale controller.
- Tilsluttes direkte til stolens bussystem og kræver ingen yderligere opsætning².
- Ved flere joystick på stolen er det profilens dedikerede joystick, der styrer musesimulatoren.
- Kontakt er dog nødvendigt for at aktivere/deaktivere interfacet.
- Mulighed for at bruge "MENU" kontakten på ROLTEC styreboksen som erstatning af 0/1 kontakt

¹: Kræver dog DX-CLAM Modul er til stede på stolen

²: Det er dog nødvendig at vælge stolens styresystem ved opstart af interfacet

³: Adapterkabel (AMSCDX2ROLTEC) nødvendig for tilslutning til stolen bussystem.



A/S Aabentoft
Løgtelvej 93
DK-8541 Skødstrup
Tlf 86 97 53 00
Fax 86 97 53 02

email: mail@aabentoft.dk
Website: www.aabentoft.dk

Playstation Interface – APS3WI

Forsyning:	24VDC
Forbrug:	1,5W
Dimensioner:	(H x B x D) 31 x 137 x 61mm
Elektrisk tilslutning:	Dynamic DX bus Jack 3,5mm

Et PlayStation 3 Wheelchair Interface (PS3WI) gør det muligt at simulere betjening af funktionerne fra en original PlayStation 3 controller fra kørestolens joystick. PS3WI tilsluttes kørestolens bussystem og opnår en trådløs Bluetooth forbindelse med PlayStation 3 konsollen. Ved første opstart af systemet vælges, hvilken type styresystem, der er monteret på kørestolen. Montering kræver ingen ombygning af stolens eksisterende moduler og er derfor Plug'n'Play. PS3WI er designet for let afmontering fra stolen, når det ikke bruges. Dette giver derfor også muligheden for at interfacet kan deles mellem flere kørestolsbrugere.

I et menusystem, bestående af ni sider, er der på hver af siderne fire funktioner fra PS3 controlleren til rådighed. En funktion for hver af joystickretningerne. Sidenummer og de funktioner der er til rådighed på den aktuelle side, vises på et grafisk display. Siderne vælges via en ekstern 0/1-kontakt. På ROLTEC vision plus kan denne funktion betjenes fra styreboksens "Menu"-kontakt.

Varenr.: APS3WI