


handi5

Funktionsvejledning

Sms

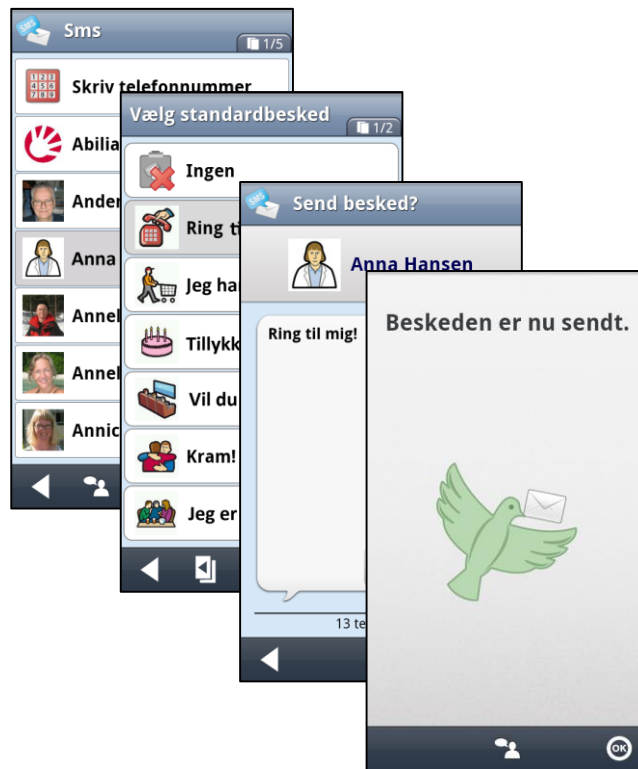

Software version 5.3.2 eller nyere

Indhold

1. Indledning	4
1.1 Standardapp for SMS	4
2. Anvend sms	5
2.1. Konversationsvisning.....	5
2.2 Mappedisning	6
2.3 Skriv ny besked	6
2.3.1 Skriv til en defineret kontakt	6
2.3.2 Skriv til nyt nummer	7
2.3.3 Skriv med smileys	8
2.3.4 Anvend standardbesked.....	8
2.3.5 Vedhæfte billede i en besked (mms)	9
2.4 Ny modtaget besked.....	10
2.5 Åbne en besked.....	10
2.5.1 Besvare en modtaget besked.....	11
2.5.2 Gem nummer som kontakt	12
2.5.3 Kopier tekst	12
2.5.4 Vise links	12
2.6 Mapper i Sms-menuen	14
2.6.1 SMS-menuen	14
2.6.2 Ulæste beskeder	14
2.6.3 Indbakke beskeder	14
2.6.4 Sendte beskeder	15
2.6.5 Kladder	16
2.7 Billed-sms	16
2.7.1 Skriv billed-sms	17
2.7.2 Send Billed-sms	17
2.7.3 Læs Billed-sms.....	18
2.8 Brug smileys i beskeder.....	19
3 Indstillinger.....	20
3.1 Meddelsesindstillinger	20
3.1.1 Visning	20
3.1.2 Standardapp for sms	21
3.1.3 Sms-advisering.....	21
3.1.4 Vis beskeden i adviseringsvinduet	21
3.2 Skriv besked	22
3.2.1 Brug standardbeskeder	22

3.2.2	Skriv med billeder (Billed-sms)	22
3.2.3	Lange sms	22
3.2.4	Ekstra bekræftelse før afsendelse	23
3.2.5	Skriv telefonnummer	23
3.3	Læs besked	23
3.3.1	Vise links	23
3.3.2	Læs med billeder (Billed-sms)	23
3.4	Standardbesked	24
3.4.1	Ny standardbesked	24
3.4.2	Redigér standardbesked	24
3.4.3	Slet standardbesked	24
3.4.4	Flyt standardbesked op/ned	24
3.5	Slet sms	25

1. Indledning

Med funktionen *Sms* kan du skrive og tage imod sms-beskeder. Den store fordel, sammenlignet med en sædvanlig mobiltelefon er, at kan du få teksten læst op, både når du skriver egen tekst og når du læser modtagne beskeder. Desuden kan du få hjælp, når du skriver ved at bruge forskrevne *standardbeskeder*, dvs. beskeder der er skrevet i forvejen.

Det er muligt at lave indstillinger for *Symbol-sms*. Du kan vælge om du vil skrive og/eller læse sms med billeder. Du kan altså skrive sms med billeder, men modtage sms med tekst og herefter få dem læst op med talesyntese.

Også mms-beskeder kan håndteres via funktionen *Sms*. Hvis telefonen har Android-version 4.4 eller højere kan man både sende og læse mms-beskeder. Hvis telefonen har en lavere Android-version end 4.4 kan man kun læse mms-beskeder, ikke sende. Man kan i stedet bruge Handi-funktionen Album til at sende (dele) billeder, se *Funktionsvejledning Album*.

For at få den bedste forståelse af funktionen sms, anbefales kendskab til Handi-funktionen *Kontakter*, se *Funktionsvejledning Kontakter*.

1.1 Standardapp for SMS




Gælder kun fra Android-version 4.4.

For at kunne sende sms fra telefoner med Android-version 4.4 og højere skal du først vælge hvilken sms-app der skal bruges som standard. Dette kan gøres på tre måder.

1. Første gang du sender en besked.

2. I Indstillinger.

3. I konfigurationen.

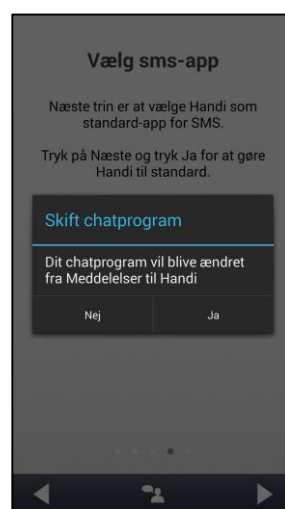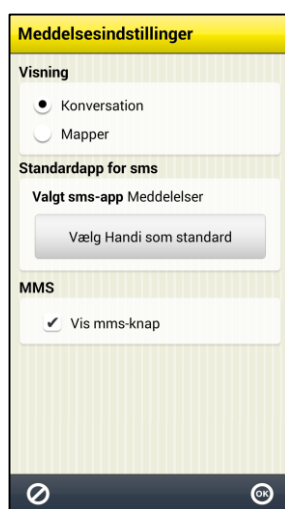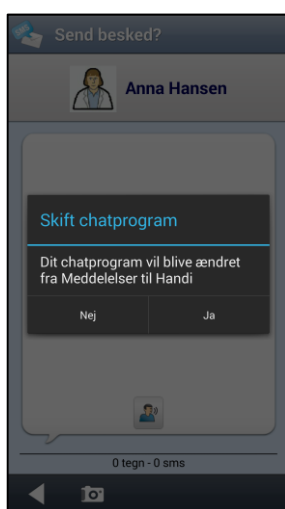


Alternativ 2 beskrives i kapitel 3.1 *Meddelesesindstillinger*. Alternativ 3 beskrives i *Håndbogen*.

2. Anvend sms


Visningen af beskeder kan indstilles på to forskellige måder: *Konversation* eller *Mapper*. *Konversationsvisning* betyder, at du kan se alle sendte og modtagne beskeder til samme modtager i den samme "tråd". Mappedisning betyder, at alle beskeder er inddelt i mapper Ulæste, Modtagne, Sendte og Kladder.

2.1. Konversationsvisning

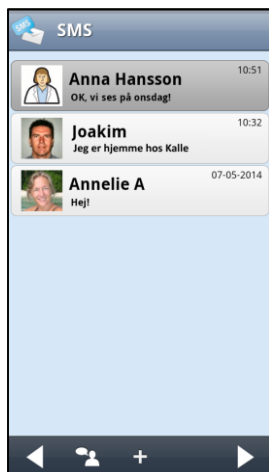


Når du starter SMS med konversationsvisning vises en liste med alle konversationer. Konversationer med den sidst sendte eller modtagne besked vises øverst.


For at åbne en konversation trykker du på den så den bliver markeret, og trykker derefter på *Næste*. Se beskrivelse af konversationssiden forned.

En markeret konversation kan læses op ved at trykke på *Oplæsnings*-knappen . (Forudsat at indstillingen "Talestøtte i menuer" er valgt.)


For at skrive en ny besked trykkes på  se 2.3 *Skriv ny besked*.


I den åbne konversation vises sendte beskeder til højre og modtagne beskeder til venstre. Den sidste besked vises nederst.

Når du trykker på en besked, bliver den gråmarkeret. Den kan nu læses op ved at trykke på *Oplæsnings*-knappen . (Forudsat at indstillingen "Talestøtte i menuer" er valgt.)


For at skrive en ny besked i samme konversation trykker du på , se 2.3 *Skriv ny besked*.




Hvis du har fået en modtaget billede (mms), kan du gemme billedet i mappen Modtaget ved at trykke på *Gem*-knappen  (vises, når en modtaget besked med et billede er markeret).

Når en besked er markeret kan du slette den ved at trykke på *Slet*-knappen .

Hvis beskeden kommer.


Hvis du har fået en besked fra et ukendt nummer (ikke gemt i Kontakter) vises en *Gem kontakt*-knap  i knaprækken. Når du trykker på den vises siden "Ny kontakt" med mobilnummeret udfyldt og du kan indtaste kontaktens navn osv, se 2.5.2 *Gem nummer som kontakt*.

2.2 Mappedisning

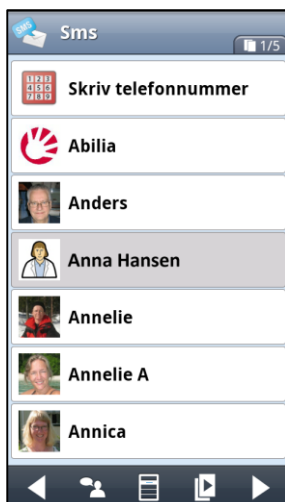


Når du starter Sms med mappedisning vises brugerens kontaktliste plus ikonet "Skriv telefonnummer".

Kontakter og grupper vises i den rækkefølge, som de er defineret i Handi-funktionen *Kontakter*.


Når du trykker på en kontakt eller mappe, bliver den gråmarkeret. Navnet på kontakten/gruppen kan nu læses op ved at trykke på *Oplæsnings*-knappen . (Forudsat at indstillingen "Talestøtte i menuer" er valgt.)

For at sende sms til en kontakt, markerer du den og trykker på *Næste*, se 2.3 *Skriv ny besked*.

Ved at trykke på *Menu*-knappen  kan du komme til ulæste, modtagne, sendte og ikke sendte beskeder (kladder). Se kapitel 2.6 *Mapper i Sms-menuen*.

2.3 Skriv ny besked

For at skrive en ny besked ved mappedisning (se 2.2 *Mappevisning*) vælger du den ønskede kontakt/Skriv telefonnummer og trykker på *Næste*.

For at skrive en ny besked ved konversationsvisning (se 2.1. *Konversationsvisning*), trykkes på  og du kan da vælge kontakt/Skriv telefonnummer.

2.3.1 Skriv til en defineret kontakt



For at skrive en besked til en defineret kontakt vælger du kontakten fra kontaktlisten og trykker på *Næste*.

På næste side skriver du teksten. Du kan få beskeden læst op via *Oplæsnings*-knappen (hvis den er indstillet). Når teksten er klar, trykker du på *OK* for at gå videre.


På siden "Send besked?" trykker du på *OK* for at sende beskeden. Beskeden sendes, og du modtager en bekræftelse, når den er gået igennem.

Hvis beskeden ikke kunne sendes, vises en fejlmeddelelse.

Ved mappevisning lægges beskeden i mappen *Kladder* som du kommer til via Sms-menuen, se kapitel 2.6.5 Kladder.


Ved konversationsvisning lægges beskeden som et udkast i konversationen.

Da beskeden ligger i *Kladder*, kan du gøre et nyt forsøg med at sende den senere.

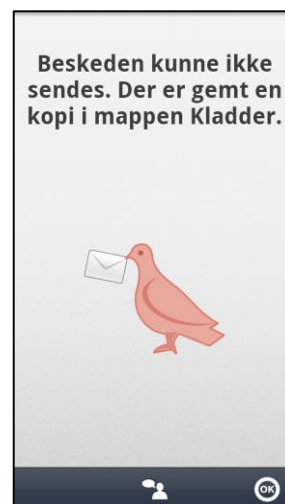

2.3.2 Skriv til nyt nummer

Man kan vælge om det skal være muligt at sende besked til andre end dem der er gemt i kontaktlisten. Hvis man kun skal kunne sende beskeder til personer i kontaktlisten kan knappen "Skriv telefonnummer" fjernes, se 3.2.5 *Skriv telefonnummer*.

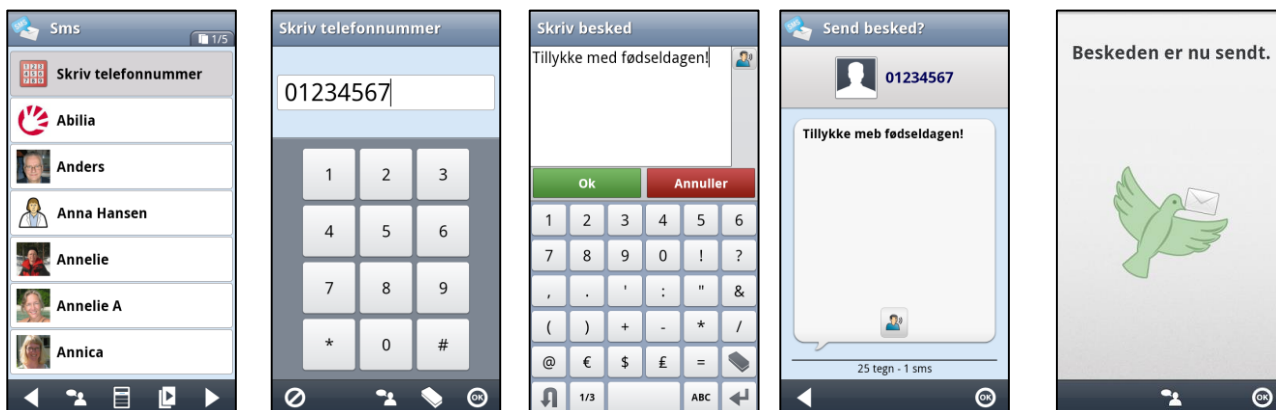

For at skrive til et nyt nummer trykker du på "Skriv telefonnummer" på Sms-siden og trykker *Næste*. Nu kan du skrive mobilnummeret og derefter trykke på *OK*.

På næste side skriver du teksten. Du kan få beskeden læst op via *Oplæsnings*-knappen (hvis den er indstillet). Når teksten er klar, trykker du på *OK* for at gå videre.

På "Send besked?" siden trykker du på *OK* for at sende beskeden. Beskeden sendes, og du modtager en bekræftelse, om den er gået igennem eller ej.

2.3.3 Skriv med smileys

Du kan skrive med smileys via Smiley-tastaturet, side 3/3 i numerisk tilstand. Se kapitel 2.8 *Brug smileys i beskeder* for beskrivelse av smileys.



For eksempel, når du vælger smiley-symbolet "blomster", vises det billede i tekstfeltet. Når du trykker på *Oplæsnings*-knappen læses ordet "blomster" op.

I sms:et sendes tegnkombinationen **(f)**.

For at skifte til Smiley-tastatur skal du først trykke på 123 for at komme til numerisk tastatur, og derefter trykke på knappen 1/3, indtil du kommer til side 3/3 med Smileys.

Tryk på knappen ABC for at komme til bogstavtastaturet.


OBS! For at kunne skrive sms med Smileys skal "Aktiver smileys i tastaturet" være valgt under **Indstillinger|Tastatur**.

2.3.4 Anvend standardbesked

For at gøre det nemmere og hurtigere at skrive beskeder kan du bruge *standardbeskeder*, dvs. beskeder der er færdigskrevne i forvejen.



Du vælger den ønskede standardbesked og trykker herefter *Næste*. Hvis du ønsker at skrive en ny besked uden at bruge standardbesked vælger du "Ingen". Hvordan du opretter standardbeskeder beskrives i kapitel 3.4 *Standardbesked*.

Teksten kan redigeres fra siden "Send besked?" ved at trykke på *Redigér*-knappen . Du kommer derefter til tastaturet. Du kan derved have "halvfærdige" standardbeskeder, fx "Jeg er hjemme hos", og først skrive den helt færdig, når beskeden skal sendes. Se eksemplet herunder.


Vælg standardbesked

Tryk på Ændre

Standardbesked vises



Skriv beskeden færdig


Beskeden vises, tryk på OK for at sende

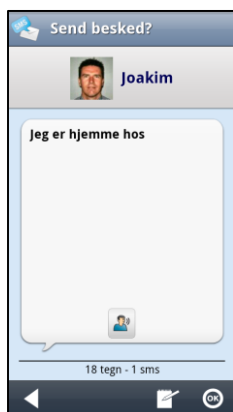

2.3.5 Vedhæfte billede i en besked (mms)

Gælder kun fra Android-version 4.4.

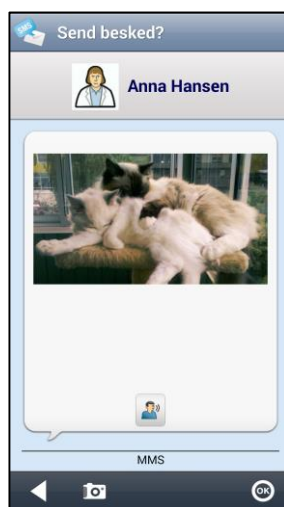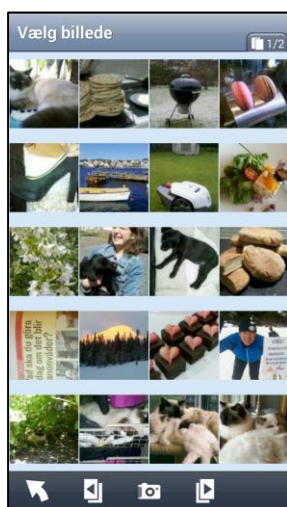

Tryk på  og vælg et eksisterende billede eller tag et nyt billede med kameraet. Derefter sendes beskeden som sædvanlig.

2.4 Ny modtaget besked




Når Handi modtager en besked (sms eller mms) vises en advisering om nye modtagne beskeder. Hvis du har én ny besked, vises kontakten eller nummeret i adviseringen. Hvis du har flere nye beskeder vises antallet af beskeder. Man kan lave indstillinger for hvordan adviseringen skal vises og om beskedens indhold skal vises i adviseringen, se 3.1 *Meddelsesindstillinger*.

*En ny besked fra
kendt kontakt*

*En ny besked fra
ikke-kendt kontakt*

Flere nye beskeder

*Beskedens
textindhold vises i
adviseringen*

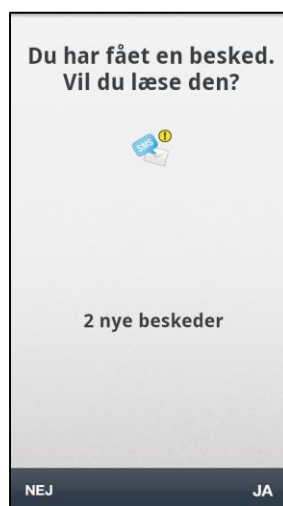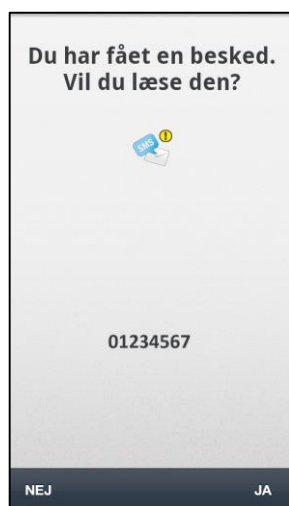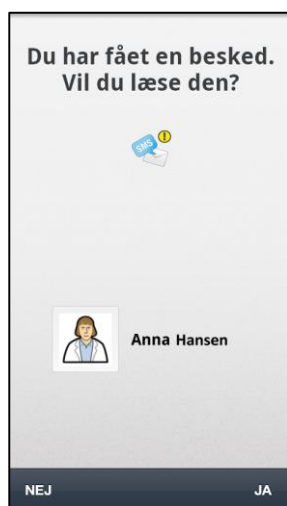

Hvis du trykker *JA*, når du har modtaget en ny besked vises beskeden og du kan få den oplæst. Hvis du trykker *JA* når du har modtaget flere nye beskeder kommer du enten til 2.6.2 *Ulæste beskeder* (ved mappevisning) eller konversationslisten.

Hvis du trykker på *NEJ*, kommer du tilbage til den funktion, hvor du var før. Du kan så vælge at se på den modtagne besked senere.

2.5 Åbne en besked

Funktionerne i dette kapitel gælder kun for mappevisning.

På besked-siden vises beskeden og modtagelsestidspunktet.

Når du trykker på *Oplæsnings*-knappen, læses beskeden op af talesyntesen.

Når du trykker på *Næste* kan du vælge at besvare beskeden, se nedenfor.

For at slette beskeden, trykker du på *Slet*-knappen .



For at se det vedhæftede billede i fuldskærm trykker du på den.

Med knappen  kan du gemme det vedhæftede billede.



2.5.1 Besvare en modtaget besked


Ved at trykke på *Næste* på besked-siden kan man besvare en besked:

Tryk på Næste for at besvare beskeden

Tryk på JA for at besvare beskeden


Skriv ønsket tekst og tryk på Ok.


Modtagere og besked vises, tryk OK for at sende.

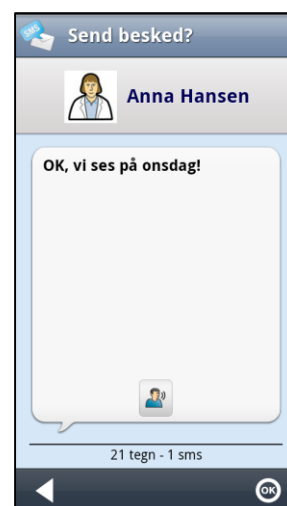


Hvis du svarer *NEJ* til spørgsmålet "Vil du besvare beskeden?" kommer du tilbage til besked-siden.

2.5.2 Gem nummer som kontakt

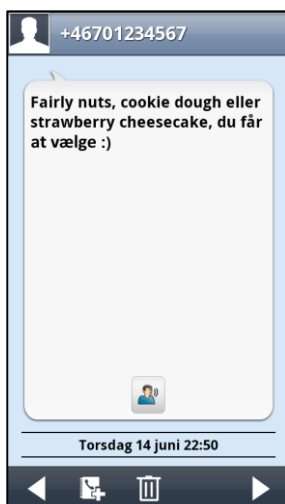

Hvis beskeden kommer fra et ukendt nummer (ikke gemt i Kontakter) vises en *Gem kontakt-* knap  i knaprækken. Når du trykker på den vises siden "Ny kontakt" med mobilnummeret udfyldt og du kan indtaste kontaktens navn osv.

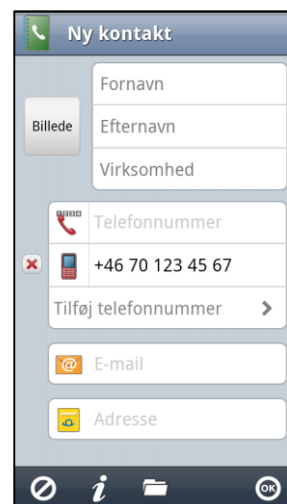

2.5.3 Kopier tekst

Du kan kopiere tekst fra en modtaget besked til et andet tekstfelt i Handi. For eksempel, hvis du har fået en vejbeskrivelse i en sms kan du kopiere det til et notat i Kalenderen (se *Kalender Funktionsvejledning*).



Kopier teksten i beskeden ved at trykke og holde på teksten, indtil der vises en menu. Vælg *Kopier al tekst*. Derefter kan teksten indsættes i fx et notat. Gå til tastaturet, hvor teksten skal indsættes, tryk og hold i tekstfelt på tastaturet (nær markøren), indtil en menu vises, og vælg *Indsæt*.

2.5.4 Vise links

Hvis en modtaget besked indeholder et telefonnummer, en webadresse, e-mailadresse eller et kortlink så vises det som et "link" med understreget blå tekst i beskeden. Hvis du trykker på linket kommer du videre til en anden funktion, se fornedent.

Man kan indstille om links skal vises i beskeden, se *3.3.1 Vise links*.

Hvis du trykker på et link til et telefonnummer kommer du til Androids *telefon*, og du kan ringe til nummeret i det modtagne link.

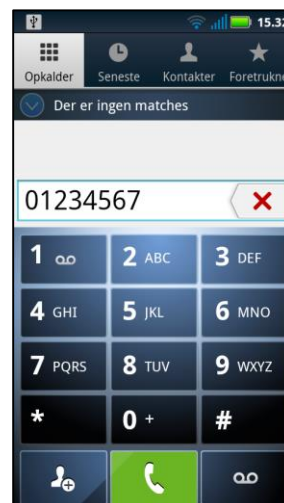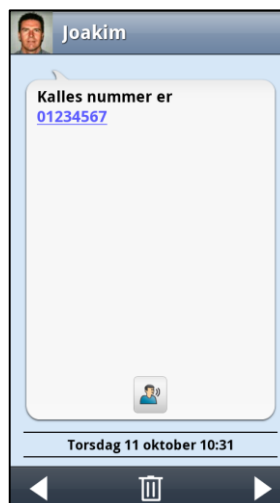

Hvis du trykker på et link til en webadresse åbnes web læseren med den aktuelle side.





Hvis du trykker på et link til en e-mailadresse kommer du til den e-mail funktion der er valgt som standard.

Hvis der ikke tidligere er valgt standard e-mail, får du et spørgsmål om at gøre det først. For at kunne sende e-mail skal der være installeret en e-mail konto, se *Håndbogen*.



Hvis du trykker på et link til en kortposition kommer du til den kortapplikation der er valgt som standard.

Hvis der ikke tidligere er valgt standard-applikation for at vise kort får du et spørgsmål om at gøre det først.

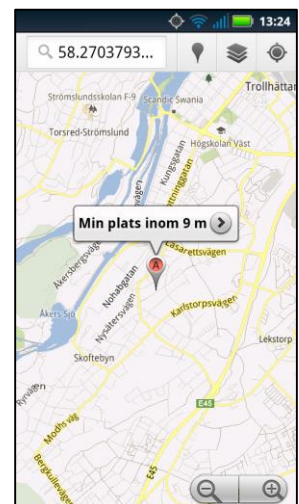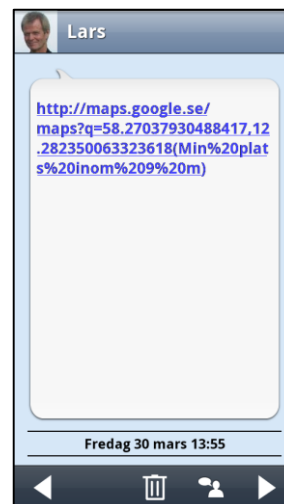

2.6 Mapper i Sms-menuen

Funktionerne i dette kapitel gælder kun for mappevisning.


2.6.1 SMS-menuen

Ved at trykke på *Menu*-knappen  kommer du til Sms-menuen.

Via Sms-menuen kan du se ulæste, modtagne, sendte og ikke sendte beskeder (kladder).

På rækken af *Ulæste* vises antallet af ulæste beskeder i parentes.

Funktionerne beskrives nedenfor.

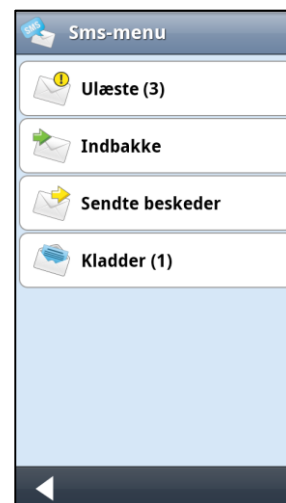

2.6.2 Ulæste beskeder




På *Ulæste*-siden vises ulæste beskeder i kronologisk rækkefølge med den nyeste besked øverst. (De vises også i *Indbakke*.)

I meddelelsesfeltet oplyses antallet af ulæste beskeder i parentes.

Hvis beskeden kommer fra en kendt kontakt, vises navnet og evt. billede. Hvis kontakten er ukendt vises nummeret.

De beskeder, der er ulæste, markeres med .

Når der modtages en besked med et vedhæftet billede (mms), vises et symbol  i beskedfeltet.

2.6.3 Indbakke beskeder



På *Indbakke*-siden vises modtagne beskeder i kronologisk rækkefølge med den nyeste besked øverst.


De beskeder, der er ulæste, markeres med . Ulæste beskeder ligger også under *Ulæste*, se **Fel! Hittar inte referenskälla..**

Hvis beskeden kommer fra en kendt kontakt, vises navnet og evt. billede. Hvis afsenderen er ukendt vises nummeret.

Når en besked er markeret kan du få det der vises i listen oplæst ved at trykke på *Oplæsnings*-knappen. (Forudsat at indstillingen "Talestøtte i menuer" er valgt.)

Når en besked er markeret kan du slette den ved at trykke på *Slet*-knappen.

2.6.4 Sendte beskeder

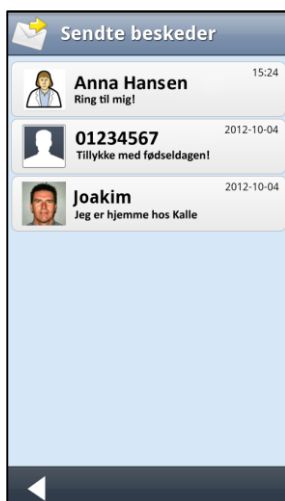

På Sendte beskeder-siden vises sendte beskeder i kronologisk rækkefølge med den senest sendte besked øverst.

Hvis beskeden er sendt til en defineret kontakt vises navn og evt. billede. Hvis modtageren ikke findes i Kontakter vises nummeret.

For at åbne den sendte besked skal du markere den og trykke på *Næste*.

Når en besked er markeret kan du få det der vises i listen læst op ved at trykke på *Oplæsnings*-knappen. (Forudsat at indstillingen "Talestøtte i menuer" er valgt.)

Når en besked er markeret kan du slette den ved at trykke på *Slet*-knappen.

For at sende en besked igen til en anden person, klikker du på *Næste*, se nedenfor.

2.6.4.1 Videresend besked

Hvis du ønsker at videresende en allerede sendt besked, starter du med at åbne den fra mappen *Sendte beskeder*, se kapitel 2.6.4 *Sendte beskeder* foroven. Når du trykker på *Næste* vises spørgsmålet "Vil du sende beskeden igen?".



Hvis du svarer *JA* kommer du videre til siden "Vælg kontakt". Her kan du vælge hvem beskeden skal sendes til. Når du har valgt modtager trykker du på *Næste*, og derefter på *OK* på siden "Send besked?". Beskeden sendes.

2.6.5 Kladder

Under *Kladder* ligger de beskeder, som ikke er blevet sendt af forskellige årsager. For at se disse beskeder, går du til Sms-menuen og vælger *Kladder*.



Beskederne vises i kronologisk rækkefølge, med den nyeste besked først. Du åbner den besked, du vil sende, ved at markere den og trykke på *Næste*. Beskeden vises på samme side som i 2.3 *Skriv ny besked*. Når du trykker på *OK*, sendes beskeden. Du får en bekræftelse på, om beskeden kunne sendes eller ikke.



2.7 Billed-sms

Billed-sms er en indstilling, som gør det muligt at skrive og læse sms med billeder, se 3.2.2 *Skriv med billeder (Billed-sms)*.

Billed-sms bygger på, at den som vil sende eller modtage billedbeskeder har aktuelle symboler i sin Handi. Det som sendes og modtages er altid almindelige tekstbeskeder.

Det betyder, at en billed-sms kan sendes til en hvilken som helst mobiltelefon og dér vises som en almindelig tekstbesked. Det indebærer også, at Handi kan håndtere forskellige symbolsystemer. Et symbol kan sendes som et PCS-billede, men vises som Pictogram i modtagerens Handi.

Eksempel:

Når du skriver billedbeskeden   er det altså tekstbeskeden "lave mad hjemme" som sendes, da det første billede hedder "lave mad" og det andet billede hedder "hjemme".

Når beskeden sendes til en *almindelig mobiltelefon* vises "lave mad hjemme" i modtagerens telefon.

Når beskeden sendes til en *Handi med Pictogrambilleder* da vises  .

Når beskeden sendes til en *Handi med PCS-billeder* vises  .

Du kan vælge om du vil skrive og/eller læse sms med billeder. Ved at *skrive* sms med billeder, men *læse* sms med tekst – som tolkes ved hjælp af talesyntese – gives en god støtte til mennesker med kommunikationsvanskeligheder.

Når du skriver, kan du benytte samme billedtavler som i Billedsamtale, eller anvende billeder fra Billedarkivet.


2.7.1 Skriv billed-sms

Hvis indstillingen er "Skriv med billeder (Billed-sms)", vises et billedtastatur når du skriver sms. Tastaturet har et *billedfelt* og et *tekstfelt*.


Billedfelt

Her vises billederne fra Billedarkiv.


Når du trykker på et billede vises det i den øverste rude.

Du bladrer mellem billederne ved at trykke på *Bladre*-knapperne 

Du fjerner et billede ved at trykke på *Viskelæder*-knappen 

For at skrive med bogstaver trykker du på *Tekst*-knappen  og kan dermed skrive med tekstfeltet, se neden for. (Du kan vælge om *Tekst*-knappen skal vises, se 3.2.2 *Skriv med billeder (Billed-sms)*).

Tryk på *Næste* for at gå videre til 2.7.2 *Send Billed-sms*.

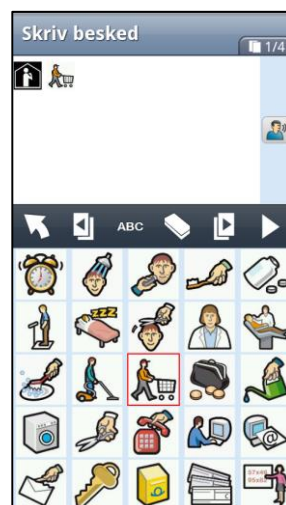


Tekstfelt


Her skriver du med bogstaver og tal på sædvanlig måde.

Du trykker på *Billed*-knappen  for at komme tilbage til billedfeltet.

Du trykker på *Næste* for at gå videre til 2.7.2 *Send Billed-sms*.

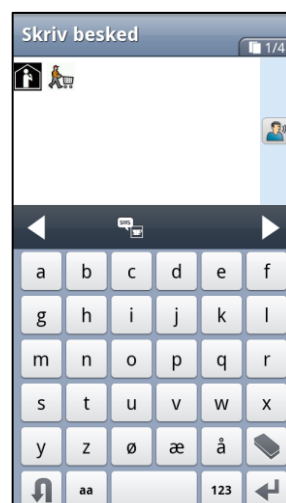

2.7.2 Send Billed-sms

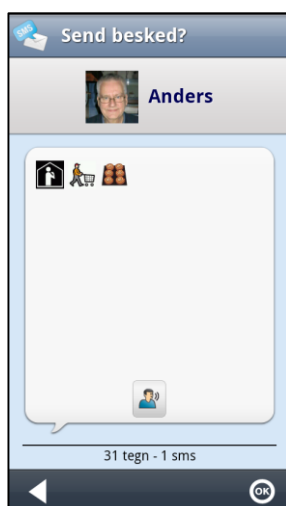

Beskedens vises med billeder og evt. tekst på denne side. Den sendes af sted på samme måde som en almindelig tekstbesked, når du trykker på *OK*.

For at læse mere om denne funktion, se 2.3 *Skriv ny besked*.

2.7.3 Læs Billed-sms

Hvis Handi er indstillet til "Læs med billeder (Billed-sms)" kan billeder vises i beskeden.



Hvis der findes et billede i billedarkivet, som præcis matcher et ord i tekstbeskeden, erstatter Handi ordet med billedet.

For yderligere funktionalitet, [2.6.2 Ulæste beskeder](#).

2.8 Brug smileys i beskeder

Du kan bruge smileys i sms.

Smileys er symboler som bruges i sms, mail, chat etc. for at udtrykke forskellige følelser. Du "tegner" smileys ved hjælp af tegn på tastaturet, fx :-) betyder "glad". For at se, hvad symbolet forestiller, skal du tilte hovedet 90 grader til venstre.

I Handi kan du "tegne" de mest almindelige smileys via tastaturets *123-side*. Nemmest er dog at vælge dem via Smiley-tastaturet (side 3/3 i numerisk tilstand), se 2.3.3 Skriv med smileys.

Smiley-symbolerne i Handi er ordnede i et farvesystem:

Grøn	Glad, positiv følelse
Rosa	Kærlig følelse
Orange	Neutral følelse
Blå	Ked af det, negativ følelse
Rød	Vred, negativ følelse

De forskellige Smiley-symboler vises nedenfor.

Symbol	Kode	Ord
	:-)	glad
	:-D	griner
	:-P	rækker tunge
	(giggle)	fniser
	;-)	blinker
	(clap)	klappe hænder
	<:o)	party
	B-)	cool
	(y)	ja
	(n)	nej

Symbol	Kode	Ord
	<3	hjerte
	:-*	kys
	O:-)	engel
	(f)	blomster
	:-(ked af det
	:'(græder
	:-[genert
	o_O	forvirret
	+ (syg
	(u)	knust hjerte

Symbol	Kode	Ord
	:-?	tænker
	:-\	skeptisk
	=-O	overrasket
	:-X	Jeg siger intet
	(:	sveder
	>:-)	djævel
	X-(vred
	(envy)	jaloux
	=(kedeligt

3 Indstillinger


For at ændre indstillingerne for sms skal du gå til *Indstillinger*. For at komme til *Indstillinger* trykker du knapkombinationen, se *Håndbogen for din model*.



For at komme til Indstillingerne for sms, vælger du *Sms* på side 1.

En indstillingsmenu vises, se billedet til højre.

De forskellige indstillingsfunktioner beskrives nedenfor.

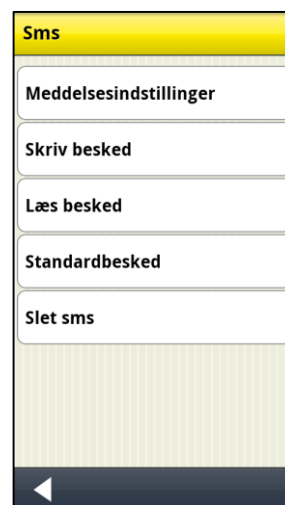

3.1 Meddelsesindstillinger

I **Indstillinger|Sms|Meddelsesindstillinger** vælger du om det skal være konversations- eller mappevisning og hvordan beskeden skal adviseres. Afhængig af hvilken Android-version enheden har vises forskellige indstillingsvalg på denne side.

*Android-version
lavere end 4.4*



Her kan du lave følgende indstillinger:

- Visning (Konversation eller Mapper)
- Standardapp for SMS (op til Android-version 4.4)
- Sms-advisering (av/på, lydsignal, vibration, Vis beskeden i adviseringsvinduet)
- Vis mms-knap (fra Android-version 4.4)

De forskellige indstillinger beskrives foruden.

*Android-version
4.4 eller højere*



3.1.1 Visning


Visning af beskeder kan indstilles til to forskellige måder: *Konversation* eller *Mapper*. Konversationsvisning betyder at du kan se alle sendte og modtagne beskeder for en bestemt modtager i den samme "tråd". Mappevisning betyder at samtlige beskeder er opdelt i mapperne Ulæste, Indbakke, Sendte og Kladder. Se 2.1. *Konversationsvisning* resp. 2.2 *Mappevisning*.

3.1.2 Standardapp for sms

Gælder kun fra Android-version 4.4.

Når Handi ikke er valgt som standardapp for sms, kan man indstille det her ved at trykke på knappen "Vælg Handi som standard".

Via **Android-indstillinger|Standardprogrammer|Meddelelse** skifter du til en anden standardapp end Handi. (Kan være forskellige afhængig af enheden.)

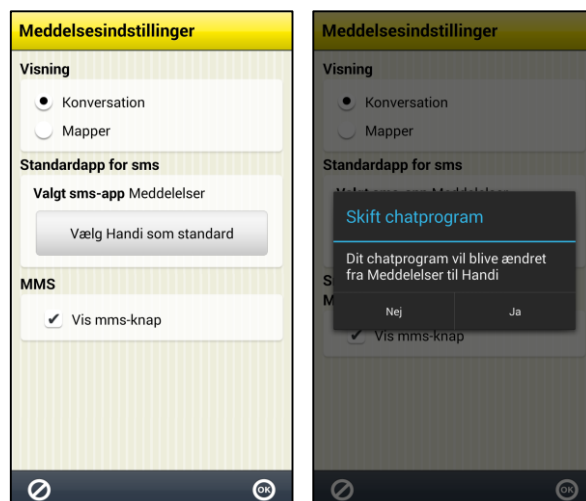

3.1.3 Sms-advisering

Advisering Fra/Til gælder kun Android-version lavere end 4.4. Vælges Advisering fra, så vises beskeden "Du har fået en besked" ikke. Så håndteres adviseringen af Androids sms-app i stedet. Man kan dog stadig læse og skrive beskeder i Handi-sms.

Når Handi er standardapp for sms kan man lave indstillinger for adviseringens lydsignal og vibration.

3.1.4 Vis beskeden i adviseringsvinduet

Når "Vis beskeden i adviseringsvinduet" er valgt vises teksten fra den i modtagne besked som på det venstre billede. Ellers vises adviseringssiden som på billedet til højre.



3.2 Skriv besked



I **Indstillinger|Sms|Skriv besked** kan du lave følgende indstillinger:

- Brug standardbeskeder
- Skriv med billeder (Billed-sms)
- Lange sms
- Ekstra bekræftelse før afsendelse
- Skriv telefonnummer

De forskellige indstillinger beskrives nedenfor.

3.2.1 Brug standardbeskeder

Når "Brug standardbeskeder" er valgt vises siden "Vælg standardbesked" når du skriver en ny besked eller besvarer en besked, se [2.3.4 Anvend standardbesked](#).

3.2.2 Skriv med billeder (Billed-sms)

Når "Skriv med billeder (Billed-sms)" er valgt, vises billedtastaturet når du skriver beskeden, se [2.7.1 Skriv billed-sms](#).

3.2.3 Lange sms


Når "Lange sms" er valgt, kan du skrive beskeder der er længere end 160 tegn. Når beskeden sendes, bliver den delt op på to eller flere sms afhængig af hvor mange tegn du har skrevet. På siden "Send besked" vises antallet af sms'er, der bliver sendt (hvis der er flere end en).



3.2.4 Ekstra bekræftelse før afsendelse

Når "Ekstra bekræftelse før afsendelse" er valgt, vises siden til højre som et sidste trin før beskeden sendes.


Denne indstilling er for personer, der er lidt for hurtige til at trykke på OK og derved kommer til at sende beskeden ved et uheld.

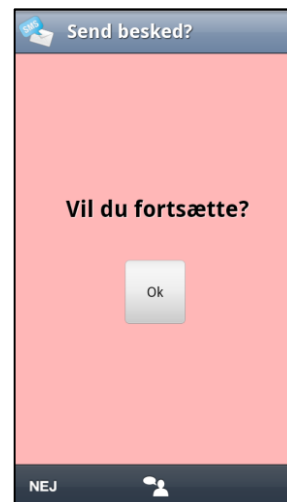

3.2.5 Skriv telefonnummer

Når "Skriv telefonnummer" er valgt vises knappen "Skriv telefonnummer" og du kan sende beskeder til andre end de personer der er gemt som Kontakter, se 2.3.2 *Skriv til nyt nummer*.

3.3 Læs besked

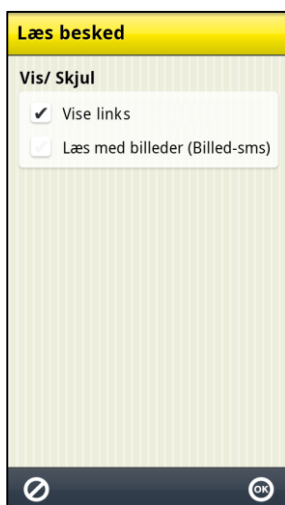

I **Indstillinger|Sms|Læs besked** kan du gøre følgende indstillinger:

- Vise links
- Læs med billeder (Billed-sms)

De forskellige indstillinger beskrives forned.

3.3.1 Vise links

Når "Vis links" er valgt vises telefonnummer, webadresser, e-mailadresser eller kortlinks i modtagne sms som et link. Du kan da trykke på linket og komme videre til den rigtige app. Se 2.5.4 *Vise links*.

3.3.2 Læs med billeder (Billed-sms)

Når "Læs med billeder (Billed-sms)" er valgt kan modtagne beskeder vises med billeder, se 2.7.3 *Læs Billed-sms*.

3.4 Standardbesked




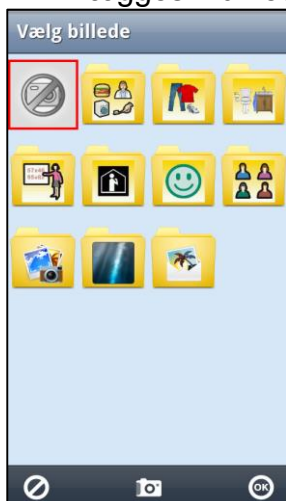
I **Indstillinger|Sms|Standardbesked** definerer du standardbeskeden.

Her vises alle standardbeskeder og en knaprække øverst med redigeringsfunktionerne *Ny*, *Redigér*, *Slet*, *Flyt op* og *Flyt ned*. (Hvis ingen standardbesked er markeret, vises blot knappen *Ny*).

Hvordan du definerer en standardbesked beskrives nedenfor.

3.4.1 Ny standardbesked


 For at oprette en ny standardbesked trykker du på *Ny*. Standardbeskeden lægges ind ved hjælp af følgende sekvens:




Vælg først et symbol og tryk på *Næste*. Skriv derefter teksten for beskeden.

Symbolet er ikke en del af beskeden, men bruges til at gøre det nemmere for brugeren at finde den rigtige standardbesked.


3.4.2 Redigér standardbesked

 For at ændre en standardbesked markerer du den på listen og trykker på *Redigér*. Standardbeskeden redigeres på samme måde som ved *Ny standardbesked* beskrevet ovenfor.

3.4.3 Slet standardbesked

 For at slette en standardbesked markerer du den på listen og trykker på *Slet*. Du skal derefter bekræfte, at du ønsker at slette standardbeskeden.

3.4.4 Flyt standardbesked op/ned

 For at flytte en standardbesked markerer du den i listen og trykker på knapperne *Flyt op* eller *Flyt ned*. Standardbeskeden flyttes i den ønskede retning.




3.5 Slet sms

I **Indstillinger|Sms|Slet sms** kan du slette beskeder i mapperne *Indbakke*, *Sendte beskeder* og *Kladder*.


1. Vælg ønsket mappe.

2. Kryds af ved de beskeder der skal slettes.

3. Bekræft at valgte beskeder skal slettes.

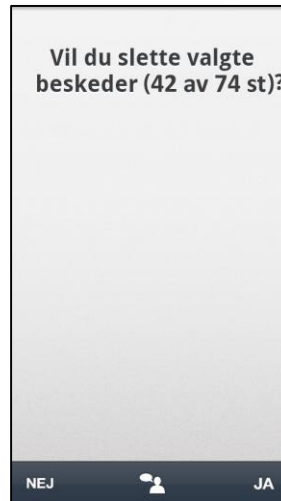

Hvis en mappe er tom, vises teksten som grå og den kan ikke vælges.

I trin 2 kan du afkrydse samtlige beskeder med knappen .

Når du trykker på *OK* skal du bekræfte at de valgte beskeder skal slettes.

